


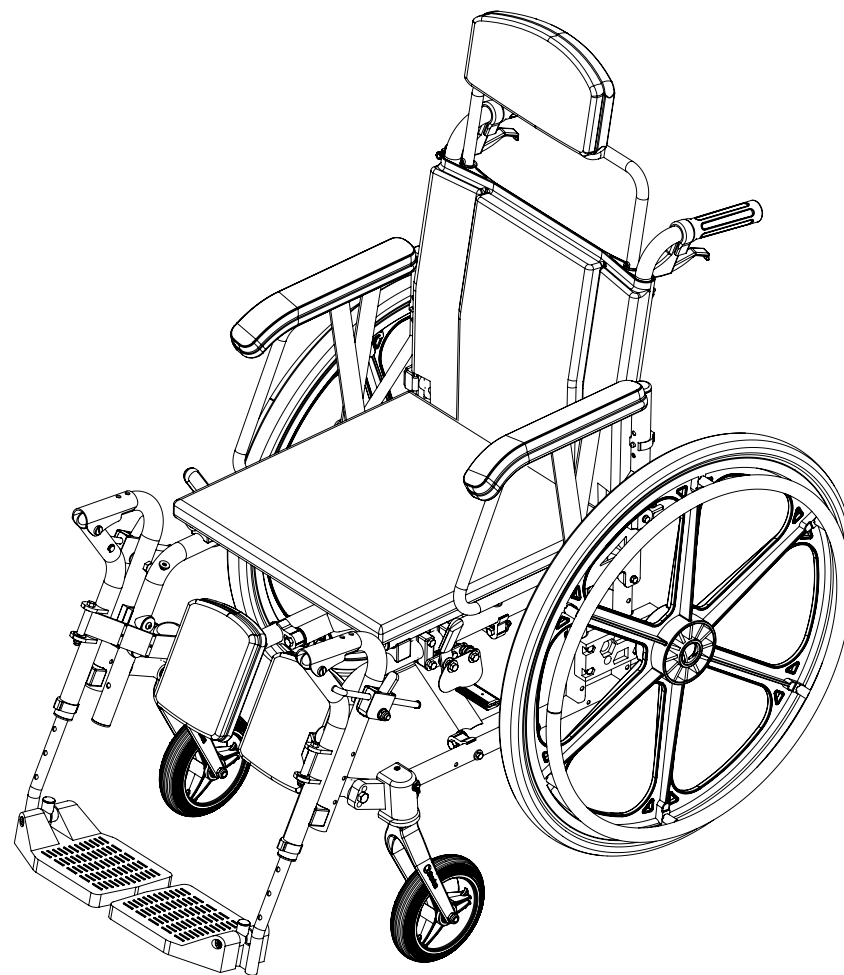

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 1 DE 19

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

CLEAN RECLIN

REV.:

D

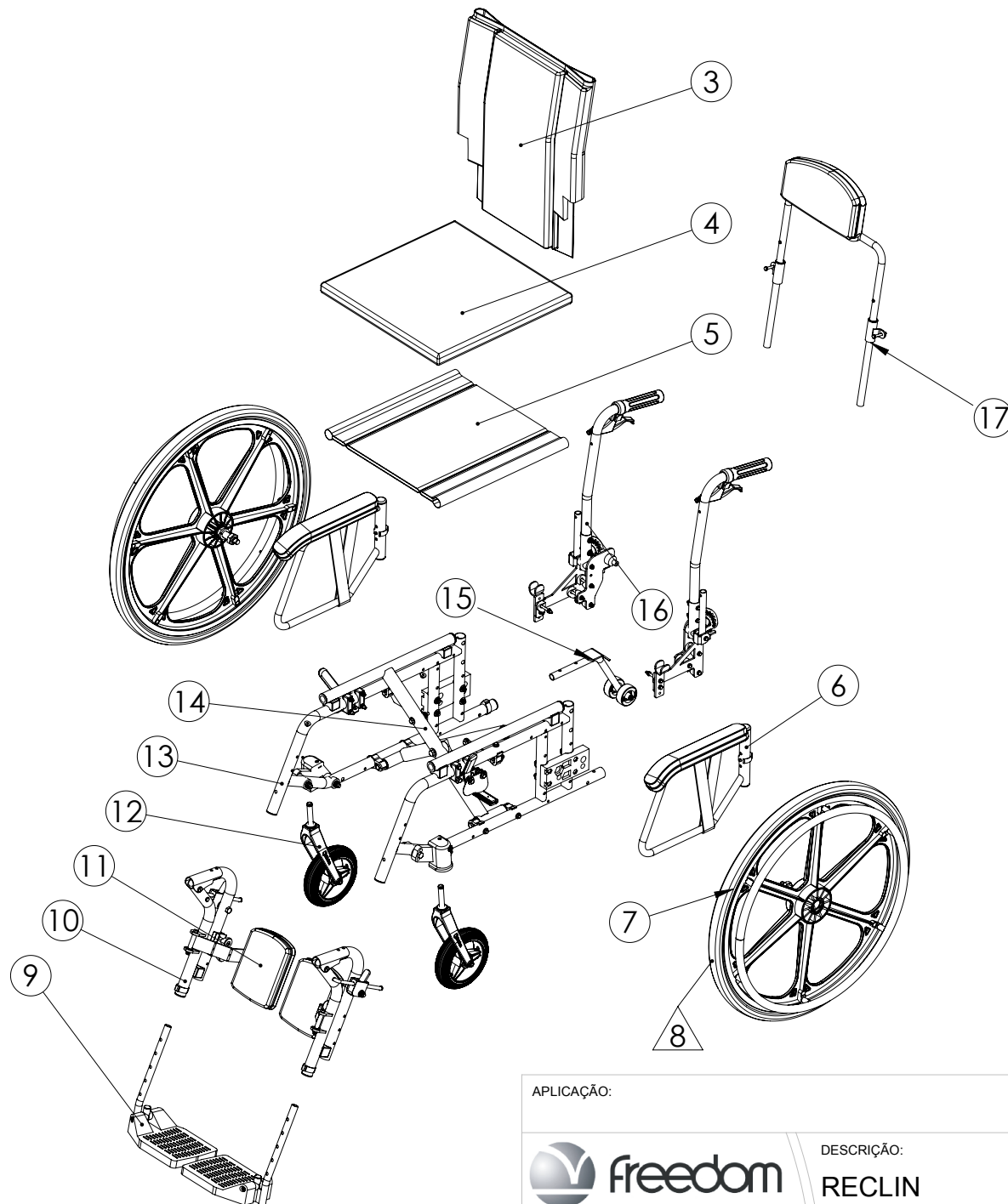

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

RECLIN

DES.:JONATHAN M.

FOLHA 2 DE 19


DATA:

ESCALA: 1:15



REV.:

D

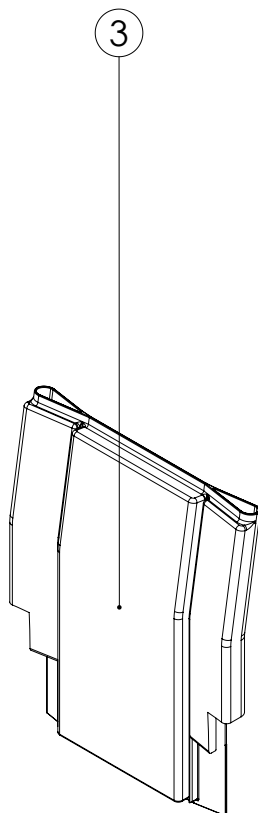

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23566	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/30
	23573	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/35
	22541	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/40
	22542	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/45
	22543	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/50
	23567	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/30
	23574	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/35
	22544	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/40
	22545	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/45
	22546	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/50
	23575	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/35
	22547	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/40
	22548	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/45
	22549	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/50
	23576	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/35
	22550	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/40
	22551	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/45
	22552	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/50
	23577	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/35
	22553	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/40
	22554	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/45
	22555	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 3 DE 19

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO


REV.:

F

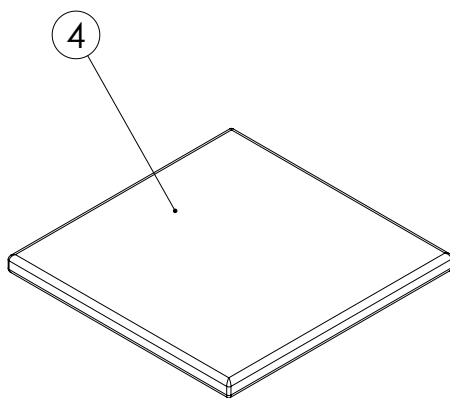

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.33 /P.37 5CM
	23303	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.33 /P.42 5CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.37/P.37 5CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.37/P.42 5CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.37/P.47 5CM
	20292	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41/P.37 5CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41 /P.42 5CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41 /P.47 5CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41/P.52 5CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.45 /P.42 5CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.45 /P.47 5CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.45 /P.52 5CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.50 /P.42 5CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.50 /P.47 5CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.50 /P.52 5CM

APLICAÇÃO:	DES.: JONATHAN M.	DATA:	 
	FOLHA 4 DE 19	ESCALA: 1:10	
	DESCRIÇÃO: ALMOFADA ASSENTO		REV.: A

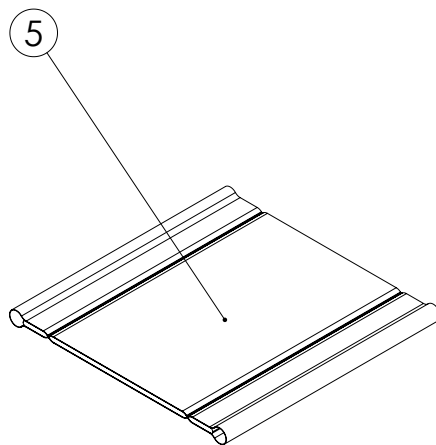

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 5 DE 19

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:


BASE ASSENTO

REV.:

C

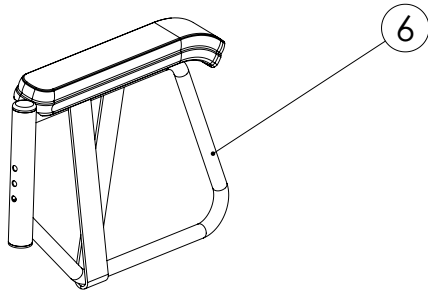

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	165923	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT ART. P LE STANDARD
	165925	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT ART. P LD STANDARD
	165922	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT ART. M LE STANDARD
	165926	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT ART. M LD STANDARD
	165924	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT ART. G LE STANDARD
	165927	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT ART. G LD STANDARD

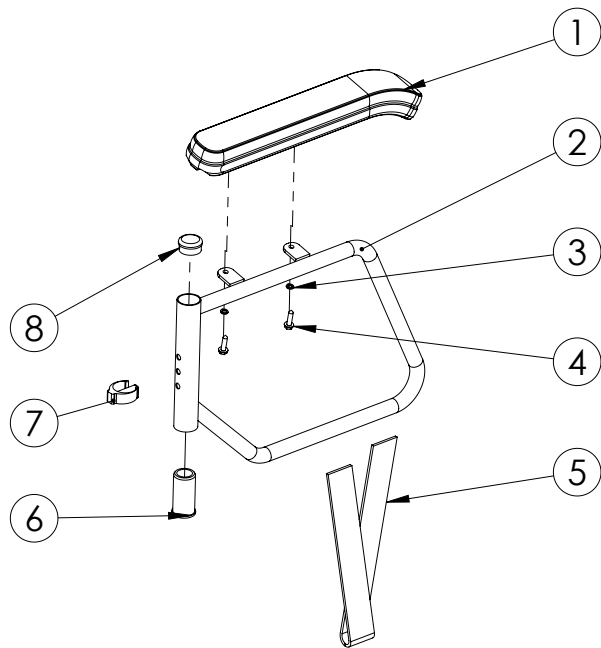

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
2	164855	1	BRACO ARTICULADO ACO P LE
	164854	1	BRACO ARTICULADO ACO P LD
	164857	1	BRACO ARTICULADO ACO M LE
	164856	1	BRACO ARTICULADO ACO M LD
	164853	1	BRACO ARTICULADO ACO G LE
	164858	1	BRACO ARTICULADO ACO G LD
3	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
4	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
5	166066	1	TIRA LATERAL BRAÇO P
	166070	1	TIRA LATERAL BRAÇO M
	166071	1	TIRA LATERAL BRAÇO G
6	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
7	6889.6	1	CLIP E 1"
8	149290	1	TAMPAO 1"

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 6 DE 19

ESCALA: 1:8



DESCRIÇÃO:

BRACO CLEAN/COMPACT ARTICULADO

REV.:

G

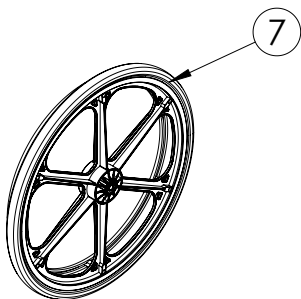


TABELA 1 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
7	169144	1	CONJUNTO RODA 24" NY INF. ARG. NYLON P/ EIXO FIXO/EIXO QUICK
	182327	1	CONJUNTO RODA 24" NY INF. ARG. ALUMINIO P/ EIXO FIXO/EIXO QUICK
	169147	1	CONJUNTO RODA 24" NY MAC. ARG. ALUMINIO EIXO FIXO/QUICK
	169146	1	CONJUNTO RODA 24" NY MAC. ARG. NYLON EIXO FIXO/QUICK

TABELA 2 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
11	241.0	1	PNEU BIC 24X 1 3/8 CINZA (S)
	121.0	1	CAMARA DE AR 26 A (S)
	23267	1	RODA TRAS.PU 24X1,3/8 PARA CADEIRA DE RODAS

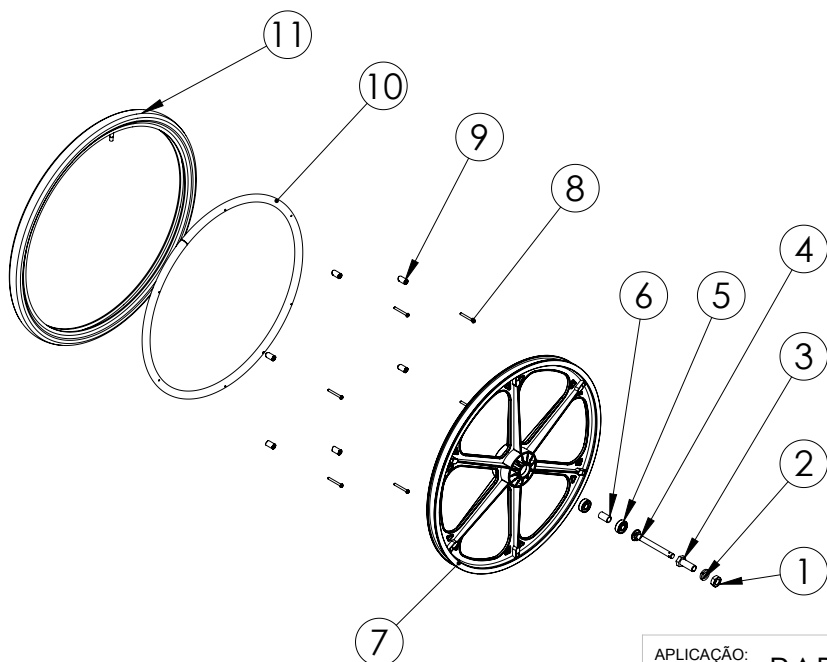


TABELA 3 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009EIXO QUICK
	11035.3	1	PA SEXT MA 8.8 12X90 RP ZB (S/L)
5	351	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
6	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
7	181729	1	ARO NYLON P/CAD.RODA 6 RAIOS 24 S/ARGOLA
8	10195.8	6	PA AAT CP PH 4,8X45MM ZB (S/L)
9	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
10	168371	1	ARGOLA DE PROPULSAO ALUMINIO ARO 24" 6 RAIOS

APLICAÇÃO: PADRÃO M/G

DES.: Lucas
FOLHA 7 DE 19

DATA:
ESCALA: 1:18



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO RODA NY 24"

REV.:
A.01

TABELA 1 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
9	181892	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. EIXO FIXO/EIXO QUICK
	181895	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. C/ PINOS EIXO FIXO/EIXO QUICK

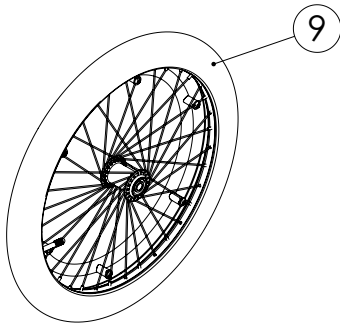


TABELA 2 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
12	119.8	1	PNEU BIC 20X1.75 PETIZ II CINZA
	911.3	1	CAMARA DE AR MSE 20"

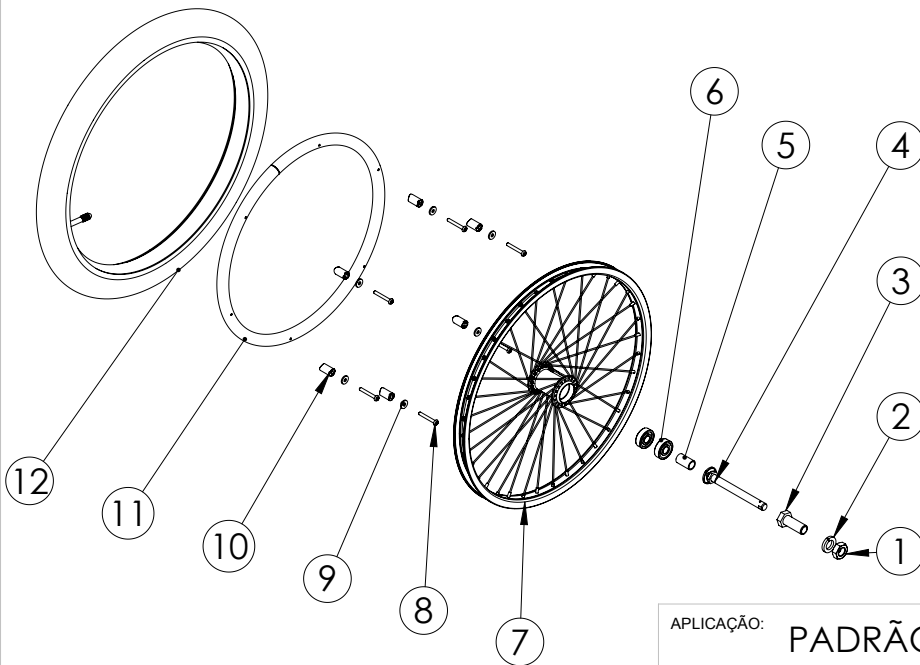


TABELA 3 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
	11035.3	1	PA SEXT MA 8.8 12X90 RP ZB (S/L)
5	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
6	351.4	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
7	181898	1	CONJUNTO 20" C/ RAIOS
8	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
9	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
10	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
11	3021.0	1	ARGOLA PROPULSAO 20"
	172449	1	ARGOLA PROPULSAO 20" COM PINOS

APLICAÇÃO: PADRÃO P





DESCRIÇÃO:
CONJUNTO RODA RAIADA 20"

DES.: garcia
FOLHA 8 DE 19

DATA:
ESCALA: 1:12



REV.:
C

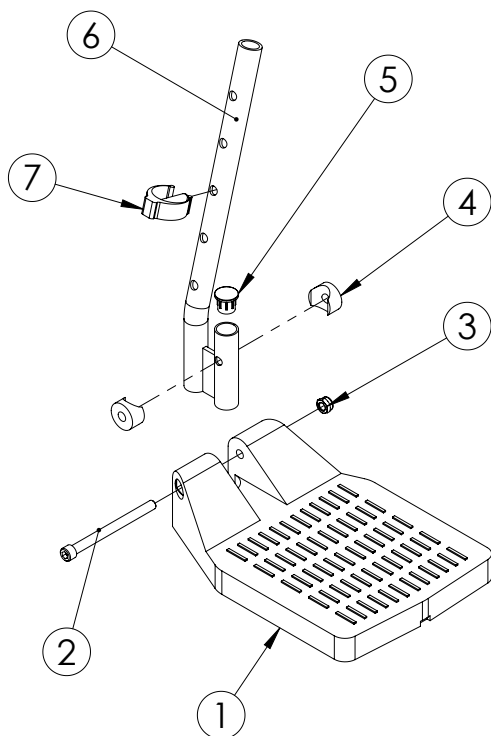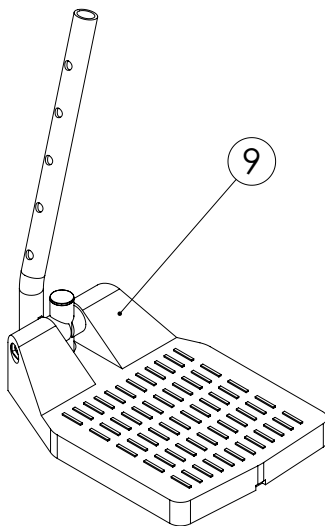

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	170219	CONJUNTO PEDALEIRA ARTICULADA ACO LE 34/37
	170220	CONJUNTO PEDALEIRA ARTICULADA ACO LD 34/37
	157781	CONJUNTO PEDALEIRA ARTICULADA ACO LE 41/45/50
	157779	CONJUNTO PEDALEIRA ARTICULADA ACO LD 41/45/50

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	106147	1	PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
2	111336	1	PARAF. SEXT. INT. 1/4" X 3" F.P.P. 20 ROSCA PARCIAL
3	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA CAD.ALUM 2011 (S)
5	352.2	1	PONTEIRA CAD.INTERNA RED.PTO 5/8" (52102) (S)
6	157780	1	TUBO PE ARTICULADO STYLES LE
	157778	1	TUBO PE ARTICULADO STYLES LD
7	6889.6	1	CLIP E 1"

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 9 DE 19

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:


PEDALEIRA

REV.:

D

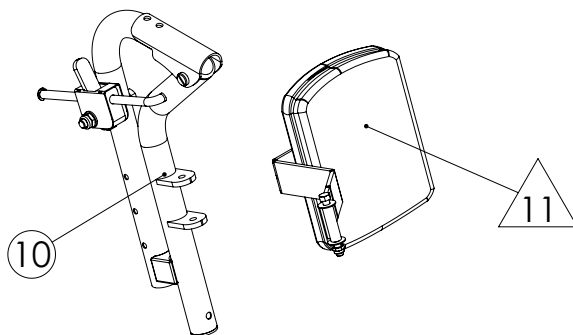

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	183275	CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA P LE
	183276	CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA P LD
	183264	CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA M LE
	183263	CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA M LD
	183274	CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA G LE
	183273	CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA G LD

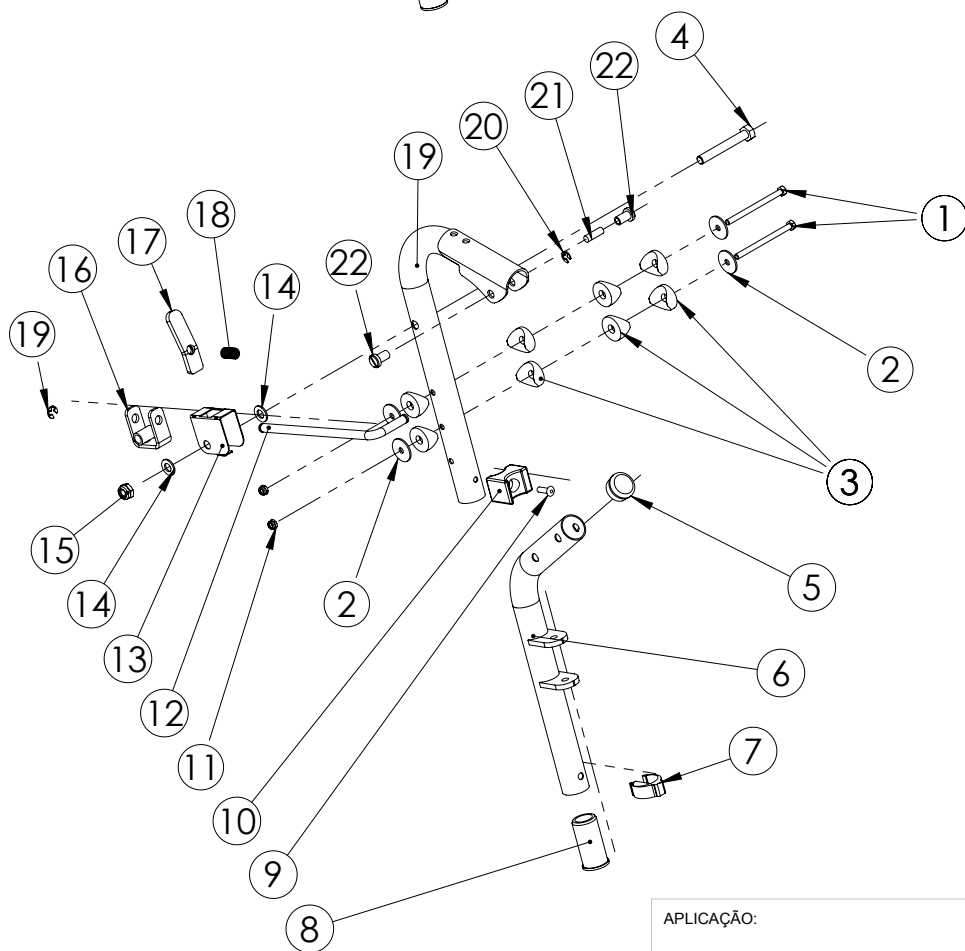

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	165017	2	PA SEXT M 5X70MM
2	23512	8	ARRUELA CHAPEADORA 3/16 ZB(5,6X23X1,5)
3	10017.0	2	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
4	11832.0	1	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
5	2844.4	1	TAMPAO SUPORTE BANCO BRACO 2001/2002
6	182567	1	SUPORTE PE ARTICULADO CHAPA P [1811]
	182522	1	SUPORTE PE ARTICULADO CHAPA M [1811]
	182568	1	SUPORTE PE ARTICULADO CHAPA G [1811]
7	6889.6	1	CLIP E 1"
8	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
9	11418.9	1	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
10	1704.3	1	CADEIRINHA 1" CAD.ALUM. (S)
11	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
12	155758	1	HASTE INOX DO PE ARTICULADO
13	113687	1	CHAPA PROTEÇÃO TRAVA PÉ-ARTICULADO
14	10507.4	3	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
15	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
16	105082	1	GRAMPO FIXO CADEIRA LUMINA
17	110293	1	GRAMPO MOVEL CAD. 2011
18	11387.5	1	MOLA AR 1,0X10X30(PE-ARTICULADO) (S)
19	182884	1	SUPORTE PÉ ARTICULADO CHAPA LD [1811]
	182885	1	SUPORTE PÉ ARTICULADO CHAPA LE [1811]
20	15669.8	2	ANEL DE RETENCAO RS-6MM
21	183050	1	BARRA ROSCADA 1/4"X20mm (0914020411) [1903]
22	26407	2	PORCA DE PARAFUSO FENDA UNIAO [1903]

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 10 DE 19

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:


CONJUNTO PE ARTICULADO EM CHAPA

REV.:

C

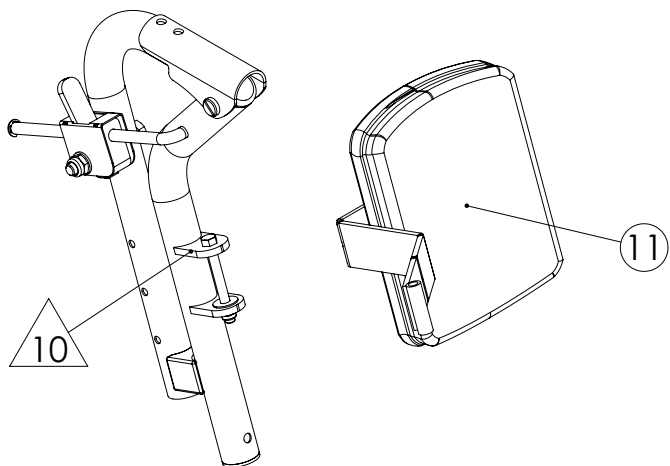

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	183639	CONJUNTO SUPORTE DE PANTURRILHA P LE
	183638	CONJUNTO SUPORTE DE PANTURRILHA P LD
	183441	CONJUNTO SUPORTE DE PANTURRILHA M/G LE
	183438	CONJUNTO SUPORTE DE PANTURRILHA M/G LD

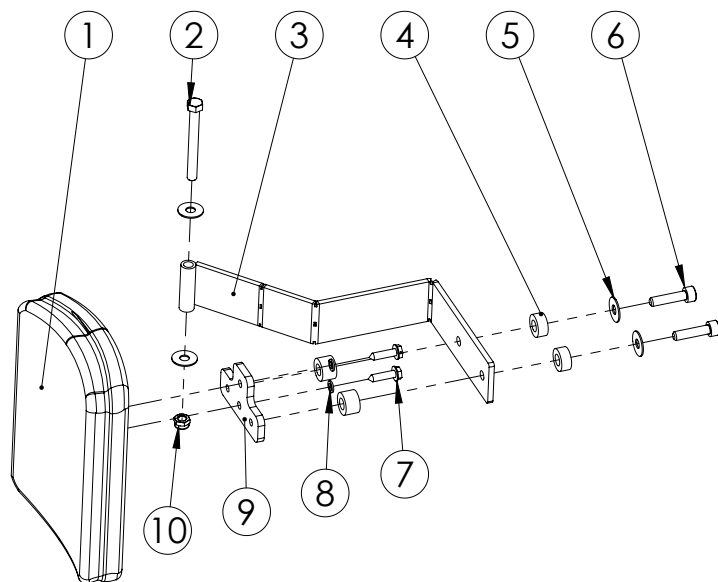

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	110552	1	ALMOFADA INJETADA PANTURRILHA
2	3081.3	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/4 RT ZB
3	166648	1	SUPORTE PANTURRILHA SOLDADO P
	176749	1	SUPORTE PANTURRILHA FIXA SOLDADO
	176750	1	SUPORTE PANTURRILHA FIXA SOLDADO P
	154960	1	SUPORTE PANTURRILHA SOLDADO
4	160067	4	AMORTECIMENTO PANTURRILHA
5	6087.9	4	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
6	18158	2	PA ALLEM 6X25MM MA INOX A2 C/CILINDRICA(S)
7	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
8	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
9	178096	1	SUPORTE ALMOFADA PANTURRILHA [1802]
10	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 11 DE 19

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:


CONJUNTO SUPORTE DE PANTURRILHA

REV.:

C

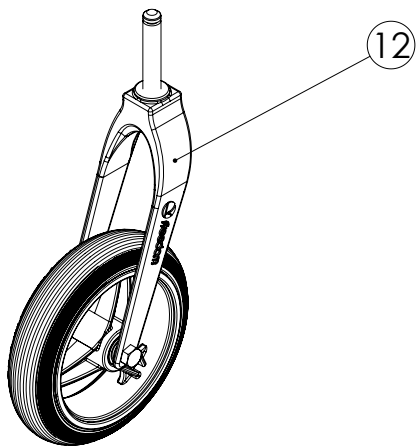

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
12	181950	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/PRETO)
	141904	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/CINZA)
	178812	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	178812	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	178811	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/PRETO)

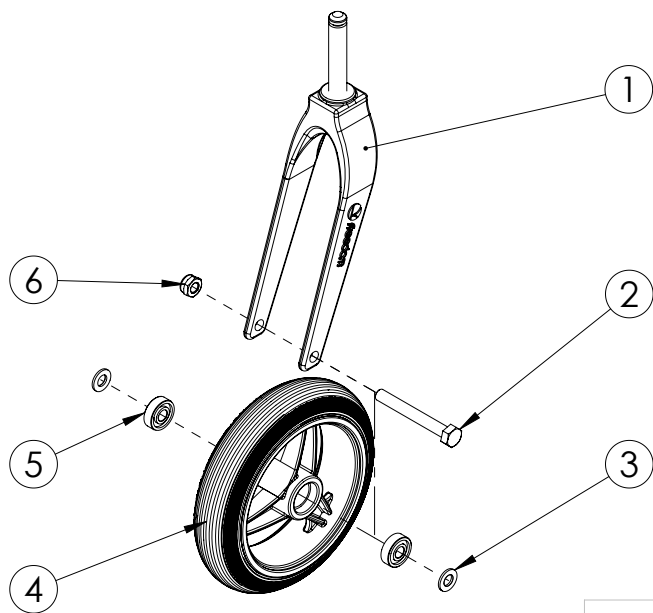

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	17494.7	1	GARFO ALUMINIO FUNDIDO 46(S) M/G
	138445	1	GARFO MANUAL ALUMINIO P
2	20131	1	PA SEXT MA 8.8 8X65MM RP ZB (S/L)
3	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
4	174747	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/CINZA
	17494.7	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/PRETO
5	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
6	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 01/10/2009

FOLHA 12 DE 19

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"

REV.:

K

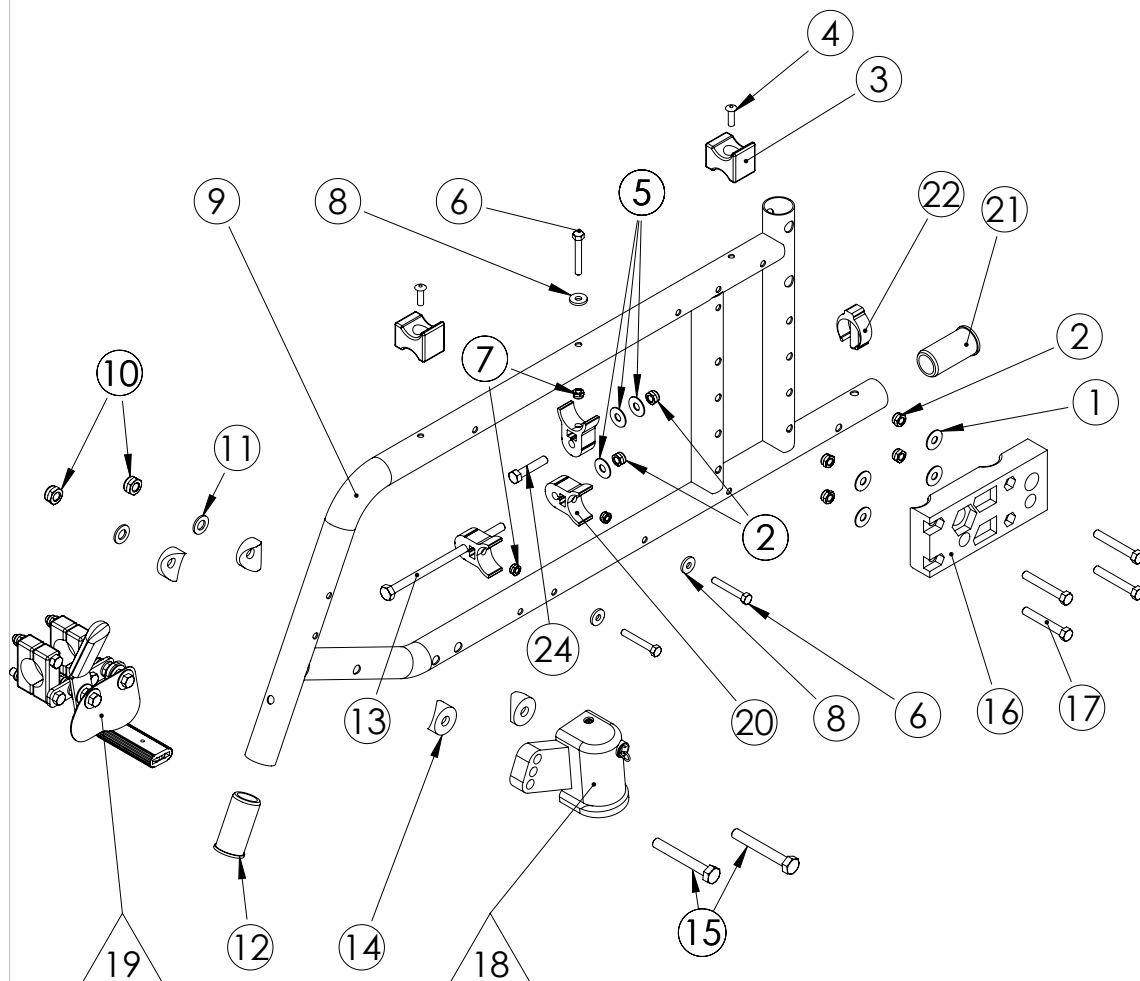

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	6087.9	4	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
2	491.0	5	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	1704.3	2	CADEIRINHA 1" CAD.
4	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
5	6087.9	3	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
6	133037	5	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
7	691.2	7	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	393.0	10	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
9	22751	1	CHASSIS ACO P AMARELO
	22754	1	CHASSIS ACO P AZUL VERNIZ
	22749	1	CHASSIS ACO P GRAFITE
	22756	1	CHASSIS ACO P PRATA VERNIZ
	22748	1	CHASSIS ACO P PRETO BRILHANTE
	22752	1	CHASSIS ACO P VERDE VERNIZ
	22753	1	CHASSIS ACO P VERMELHO VERNIZ
	22750	1	CHASSIS ACO P VINHO
	22755	1	CHASSIS ACO P VIOLETA VERNIZ
	22760	1	CHASSIS ACO M AMARELO
	22763	1	CHASSIS ACO M AZUL VERNIZ
	22758	1	CHASSIS ACO M GRAFITE
	22765	1	CHASSIS ACO M PRATA VERNIZ
	22757	1	CHASSIS ACO M PRETO BRILHANTE
	22761	1	CHASSIS ACO M VERDE VERNIZ
	22762	1	CHASSIS ACO M VERMELHO VERNIZ
	22759	1	CHASSIS ACO M VINHO
	22764	1	CHASSIS ACO M VIOLETA VERNIZ
	22769	1	CHASSIS ACO G AMARELO
	22772	1	CHASSIS ACO G AZUL VERNIZ
	22767	1	CHASSIS ACO G GRAFITE
	22774	1	CHASSIS ACO G PRATA VERNIZ
	22766	1	CHASSIS ACO G PRETO BRILHANTE
	22770	1	CHASSIS ACO G VERDE VERNIZ
	22771	1	CHASSIS ACO G VERMELHO VERNIZ
	22768	1	CHASSIS ACO G VINHO
	22773	1	CHASSIS ACO G VIOLETA VERNIZ
10	791.9	2	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
11	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
12	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD. STYLE
13	16641	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X5 RP ZB (S/L)
14	10017.0	4	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
15	11832.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
16	19445.0	1	PLACA TRASEIRA INJETADA DIR CAD.1". (S)
	19444.1	1	PLACA TRASEIRA INJETADA ESQ CAD.1". (S)
17	12405.2	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
18	PG.18	1	VER PAGINA 18
19	PG.19	1	VER PAGINA 19
20	124518	3	PERFIL U FURO PORCA
OBS: PARA CHASSIS DE ALUMÍNIO, ENVIAR CÔD. 19449			
21	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
	19449	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ALUM. (S)
22	6889	1	CLIP E 1"

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CHASSIS

DES.: jonathan

FOLHA 13 DE 19


DATA:

ESCALA: 1:6



REV.:

A

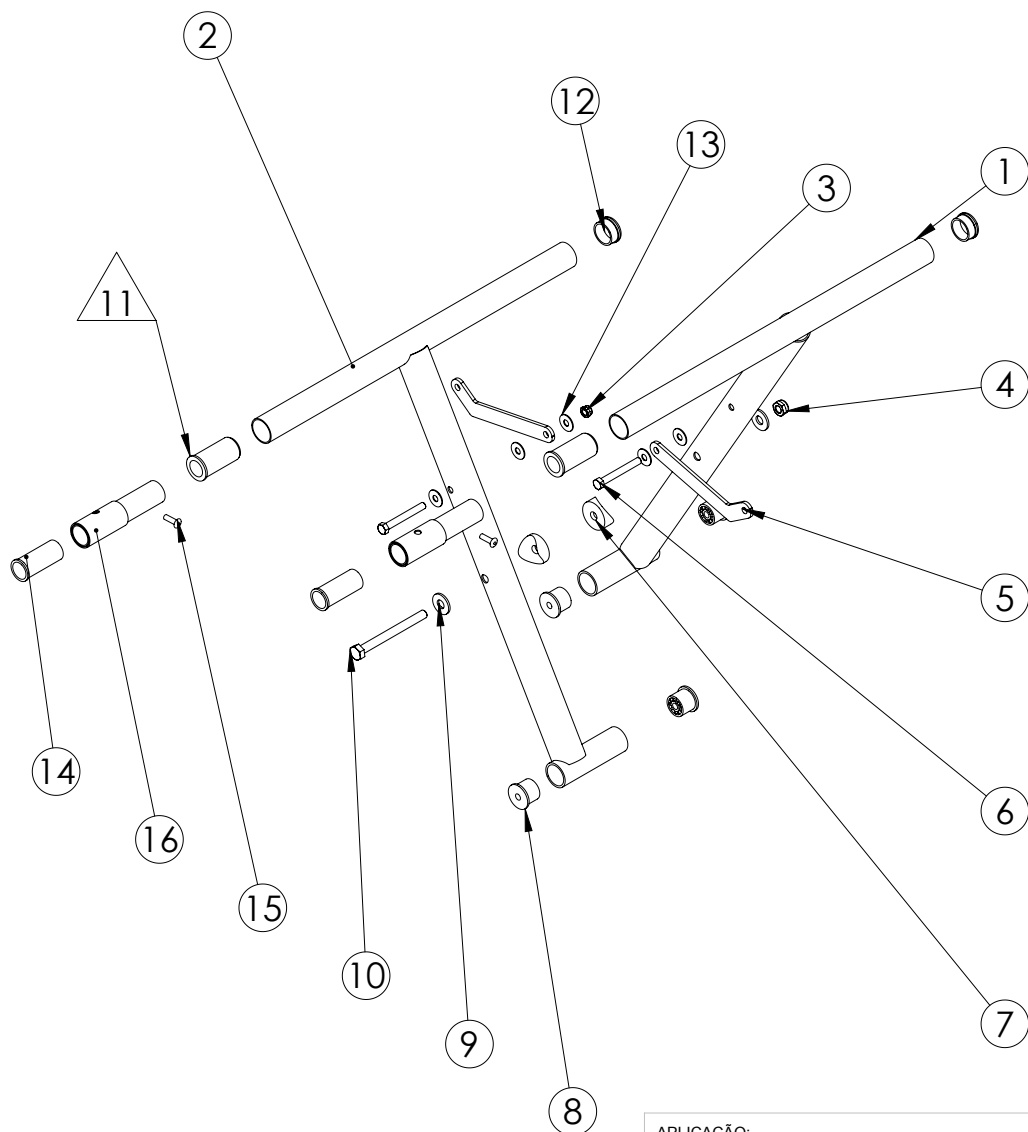

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	150151	1	TUBO X 34/37 LD P ACO
	146674	1	TUBO X 37/37 LD P ACO
	150082	1	TUBO X 37/42 LD M ACO
	146299	1	TUBO X 41/42 LD M ACO
	149524	1	TUBO X 45/42 LD M ACO
	149525	1	TUBO X 50/42 LD M ACO
	146508	1	TUBO X 41/47 LD G ACO
	146509	1	TUBO X 45/47 LD G ACO
	146506	1	TUBO X 50/47 LD G ACO
2	150150	1	TUBO X 34/37 LE P ACO
	146672	1	TUBO X 37/37 LE P ACO
	150083	1	TUBO X 37/42 LE M ACO
	146298	1	TUBO X 41/42 LE M ACO
	149522	1	TUBO X 45/42 LE M ACO
	149523	1	TUBO X 50/42 LE M ACO
	146507	1	TUBO X 41/47 LE G ACO
	146510	1	TUBO X 45/47 LE G ACO
	146503	1	TUBO X 50/47 LE G ACO
3	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L)
5	154383	2	SUP. FIXACAO DO X 34 SP CORTE LASER
	146313	2	SUP. FIXACAO DO X 37 SM/SP CORTE LASER
	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
	146312	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SM CORTE LASER
	146314	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SM CORTE LASER
	146523	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SG CORTE LASER
	146522	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SG CORTE LASER
6	146521	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SG CORTE LASER
	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" CAD.ALUM.
8	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO
9	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
10	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
11	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
12	149290	2	TAMPAO 1"
13	10083.8	6	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
14	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
15	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
16	159463	2	PROLONGADOR PUNHO/X STYLES

APLICAÇÃO:

ITEM 11 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 14 DE 19

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:


CONJUNTO X AÇO

REV.:

F

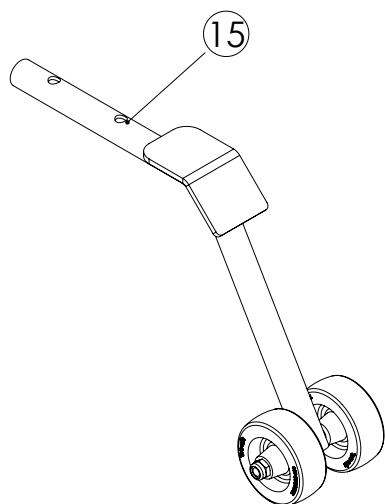

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	179697	CONJUNTO RODA DE APOIO ACOMPANHANTE [1805]
	181054	CONJUNTO RODA DE APOIO ACOMPANHANTE P

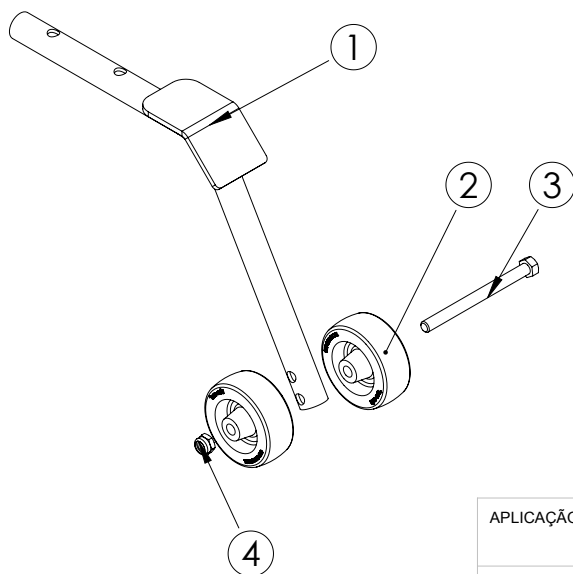

ITEM	QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1	179319	SUORTE RODA DE APOIO ACOMPANHANTE M/G [1804]
	1	180153	RODA DE APOIO ACOMPANHANTE P [1808]
2	2	133920	RODA ROD CAR - TECNI ROD 210 (2")
3	1	8053	PA SEXT UNC G.5 1/4X3 RP ZB
4	1	491	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 15 DE 19

ESCALA: 1:4




DESCRIÇÃO:

RODA DE APOIO ACOMPANHANTE

REV.:

C

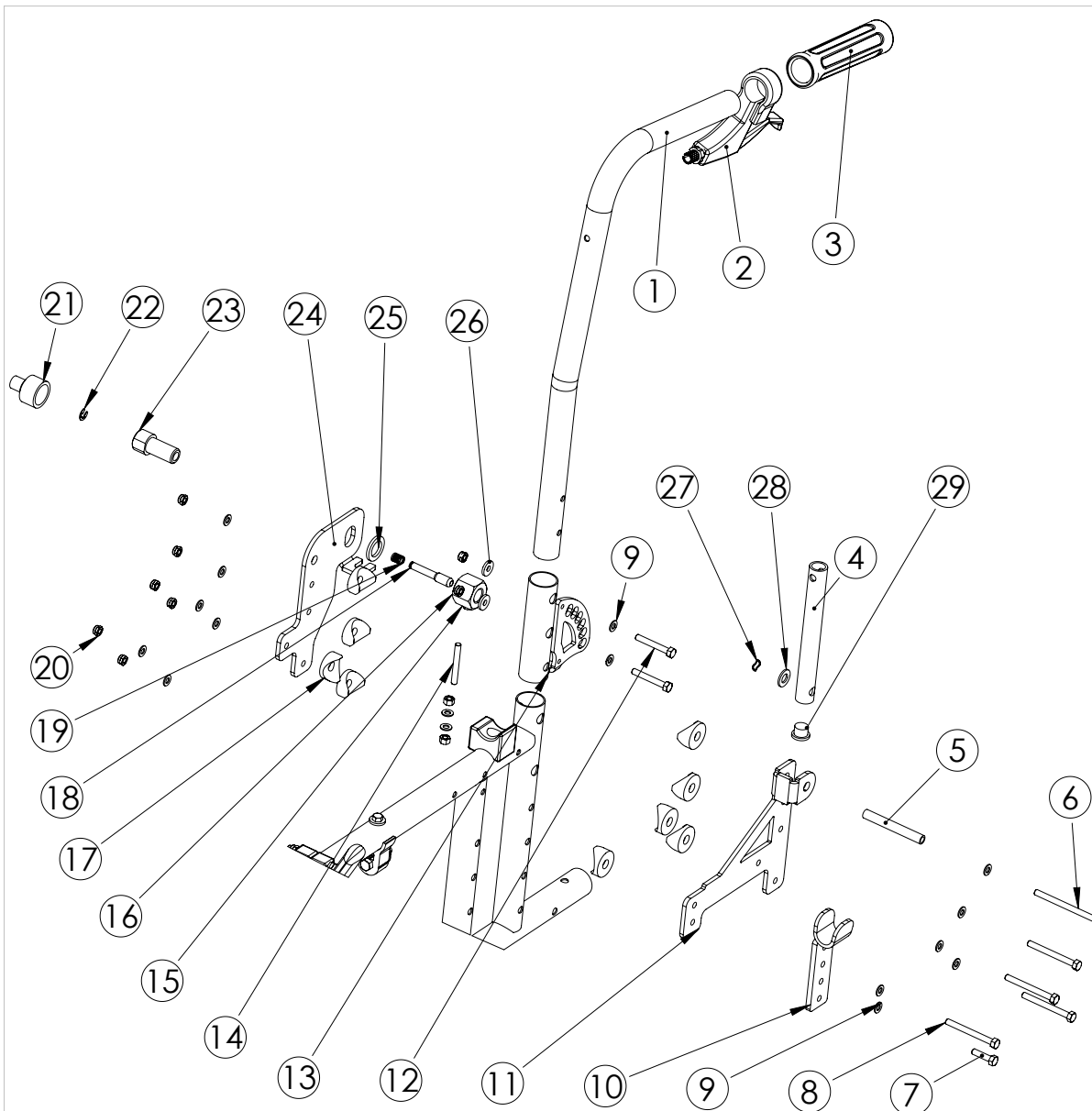

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	164882	1	TUBO ENCOSTO RECLINAVEL ACO 30
	176953	1	TUBO ENCOSTO RECLINAVEL ACO 35
	162991	1	TUBO ENCOSTO RECLINAVEL ACO 40
	166730	1	TUBO ENCOSTO RECLINAVEL ACO 45
	161197	1	TUBO ENCOSTO RECLINAVEL ACO 50
	171045	1	TUBO ENCOSTO RECLINAVEL ACO 55
2	131	1	MANETE FREIO JKS (ADVENCE-VB) (S)RECLIN E BIGGA
3	231	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
4	12405.2	1	TUBO FIXACAO BRACO ART [1902]
5	180502	1	BUCHA ENCOSTO RECLINAVEL CLEAN/COMPACT [1807]
6	165017	1	PA SEXT M 5X70MM
7	10388.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X20MM RT ZB (S)
8	7821.2	4	PA SEXT MA 8.8 5X50MM RT ZB (S)
9	261.5	15	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
10	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
11	165543	1	PLACA BRACO RECLINAVEL LE
12	133037	1	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
13	177847	1	REGULAGEM DO ENCOSTO RECLINAVEL LE [1801]
	177844	1	REGULAGEM DO ENCOSTO RECLINAVEL LD [1801]
14	133037	1	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
15	291.7	3	PO SEXT MA 5 MM CH 8 ZB - 0,8 MM (S/L)
16	165462	1	PO SEXT M 14 DUPLA
18	176805	1	PINO TRAVA ENCOSTO RECLINAVEL [1801]
19	163596	1	MOLA 6.93 x 0.60 x 25
20	691.2	9	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
21	182808	1	TERMINAL DO CONDUITE NYLON [1811]
22	110649	1	ANEL ELASTICO TIPO RS 5 MM PARA EIXO 6 A 8 (RHENO) (S)
23	182809	1	SUPORTE PINO RECLINAVEL TERMINAL LISO [1811]
24	15442.3	1	ARRUELA LISA 6MM ZB (S/L)
	178334	1	PLACA SUP. ENCOSTO RE LADO DIR. [1801]
25	9430.7	1	ARRUELA LISA 14MM ZB (L) (15X23X2,5)
26	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
27	15651	1	ARRUELA ONDULADA 8MM FOSFATIZADA
28	10507.4	1	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
29	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 16 DE 19

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:


ENCOSTO RECLINAVEL

REV.:

A

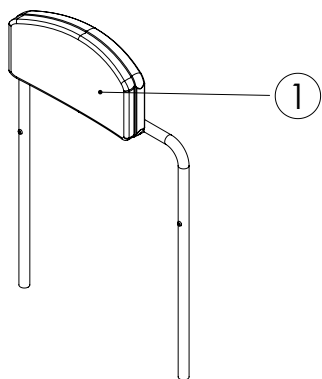

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	112088	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L41
	112105	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L45
	112106	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L50
	112107	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L37
	112109	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L34
	164329	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L55
	164330	1	CONJUNTO ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL COM ALMOFADA PADRAO L60

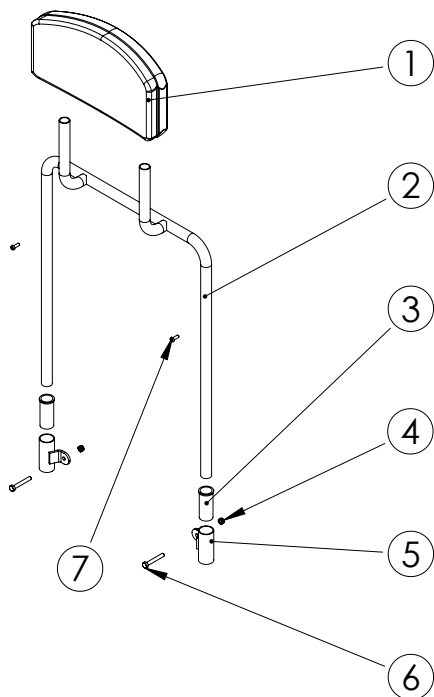

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	110454	1	ALMOFADA ENCOSTO DE CABEÇA CAD. MOD 2011
	961	1	ALMOFADA ENCOSTO DE CABECA CONCAVO
2	173713	1	TUBO ENCOSTO CABECA 33
	896	1	TUBO ENCOSTO CABECA 37
	11200	1	TUBO ENCOSTO CABECA 41
	52955	1	TUBO ENCOSTO CABECA 45
	5012	1	TUBO ENCOSTO CABECA 50
	164331	1	TUBO ENCOSTO CABECA 55
	164332	1	TUBO ENCOSTO CABECA 60
3	1042	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
4	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
5	5511	2	TUBO SUPORTE ENCOSTO CABECA
6	133037	2	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
7	617	2	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO DE CABEÇA

DES.: garcia

FOLHA 17 DE 19

DATA: 01/10/2009



ESCALA: 1:11



REV.:

A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	7965.0	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)
	7960.0	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)

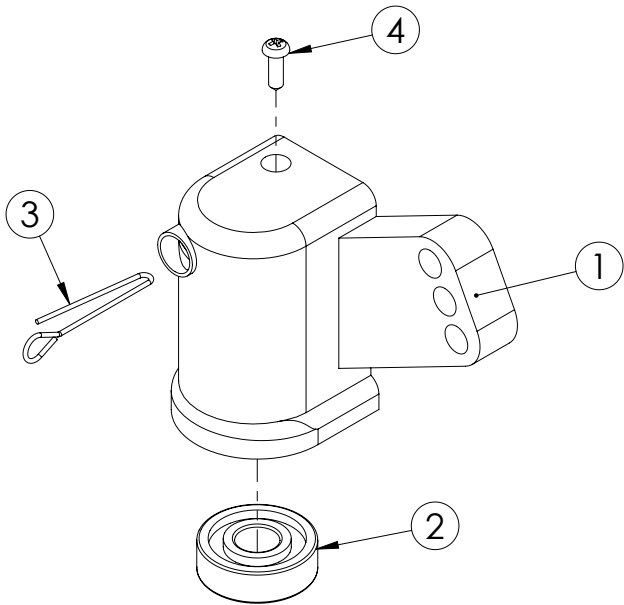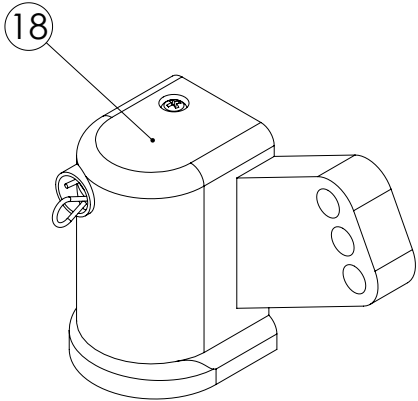

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	809.5	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
	709.9	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
2	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
3	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)
4	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 18 DE 19

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

G

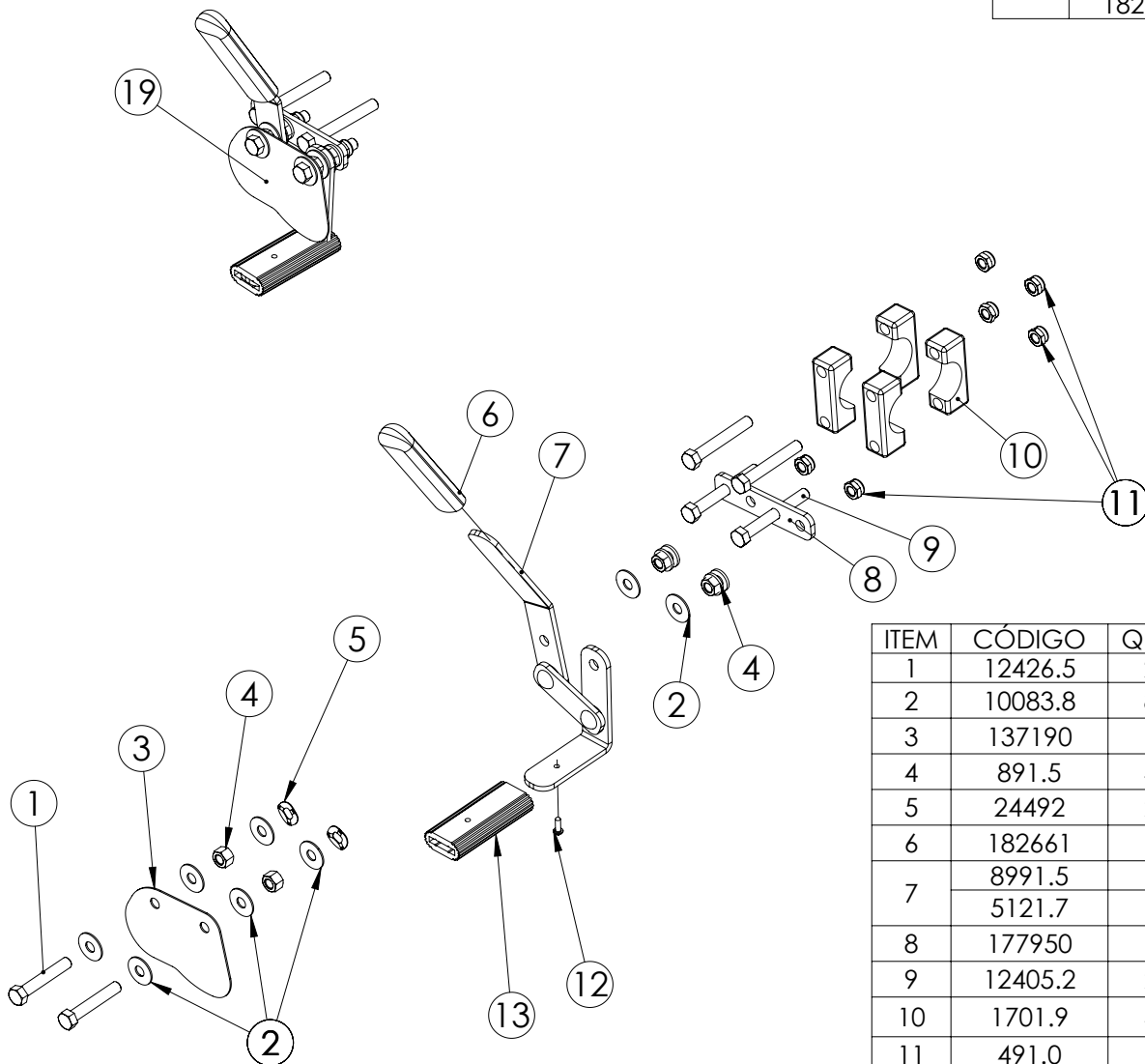

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
19	182942	CONJUNTO FREIO 4 FUROS RECLIN LD [1801]
	182937	CONJUNTO FREIO 4 FUROS RECLIN LE [1801]

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	12426.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT
2	10083.8	8	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
3	137190	1	PLACA FREIO MANUAL (MOD. 2011) CORTE LASER
4	891.5	4	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
5	24492	2	ARRUELA ONDULADA AOC 6,3X14X0,46
6	182661	1	LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS PRETO (17,2GR) (S)
7	8991.5	1	FREIO LADO DIREITO
	5121.7	1	FREIO LADO ESQUERDO
8	177950	1	PRANCHETA FREIO 4 FUROS [1801]
9	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
10	1701.9	4	ABRACADEIRA 1" CAD.
11	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
12	417.0	1	PA AAT CP PH 2.9X9.5MM ZP
13	157986	1	perfil freio manual cad. reclinável

APLICAÇÃO:

DES.: jonathan

DATA:

FOLHA 19 DE 19

ESCALA: 1:4



DESCRIÇÃO:

FREIO 4 FUROS RECLIN

REV.:

D