


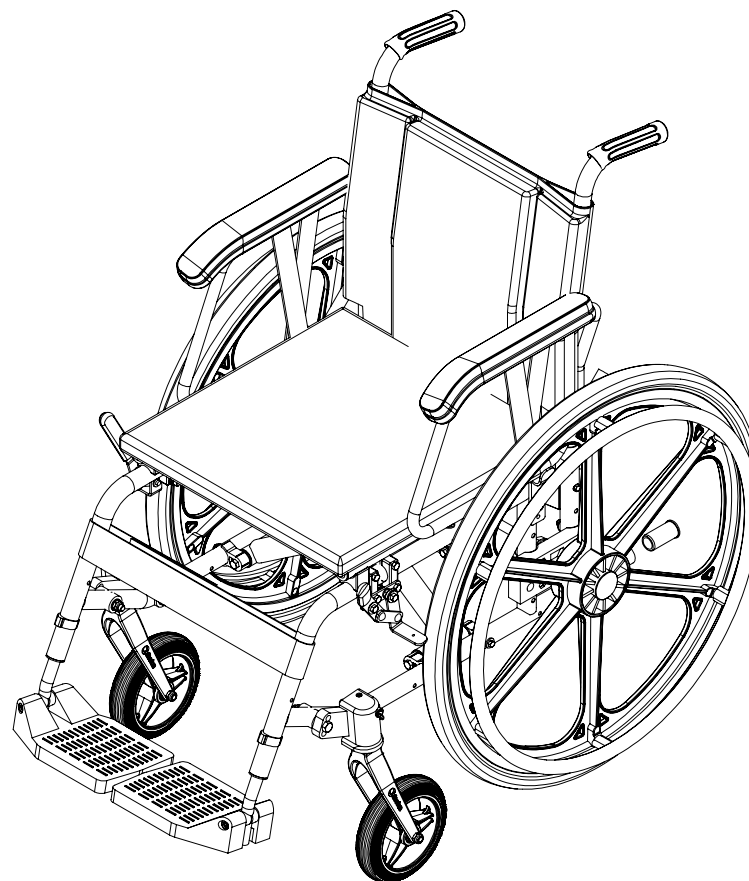

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/10/2019

FOLHA 1 DE 18

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

CLEAN

REV.:

E

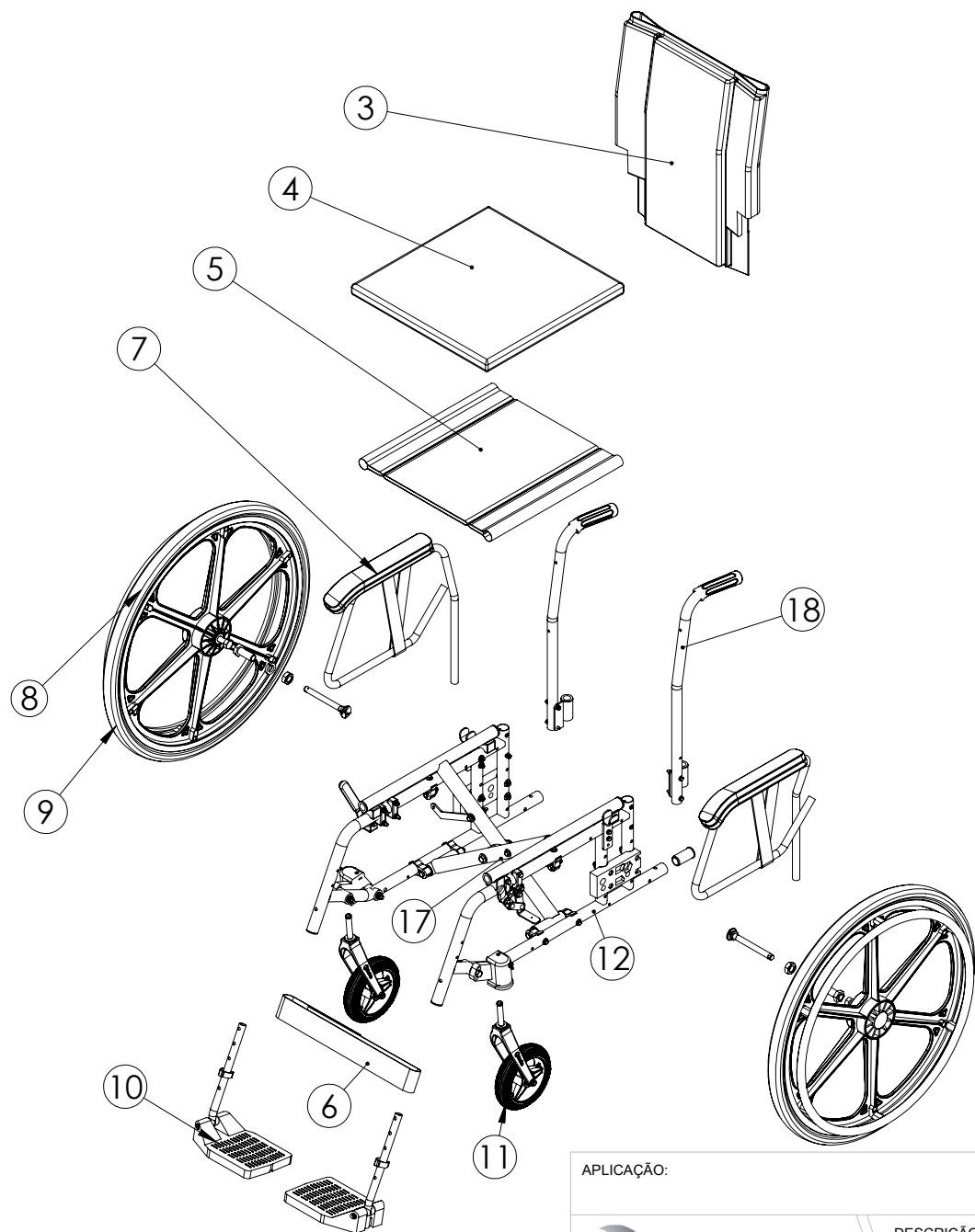

PÁGINA	CONJUNTO / ITEM
3	ENCOSTO
4	ALMOFADA ASSENTO
5	BASE ASSENTO
6	TIRA DE PANTURRILHA
7	BRAÇO CLEAN/COMPACT FIXO
8	CONJUNTO RODA NY 24"
9	CONJUNTO RODA RAIADA 20"
10	PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES
11	CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"
12	CHASSIS
13	CONJUNTO FREIO
14	PLACA TRASEIRA INJETADA
15	PERFIL SUPORTE BRAÇO
16	CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO
17	CONJUNTO X AÇO
18	ENCOSTO FIXO

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
○	INDICA ITENS E COMPONENTES DE FIXAÇÃO DO CONJUNTO
⬡	INDICA COMPONENTES DE FIXAÇÃO DO CONJUNTO NA CADEIRA
△	INDICA QUE O ITEM ENCONTRA-SE EM OUTRA PÁGINA
▢	INDICA QUE O ITEM É PARA DETERMINADA APLICAÇÃO

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CLEAN

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/10/2019


FOLHA 2 DE 18

ESCALA: 1:15



REV.:

E

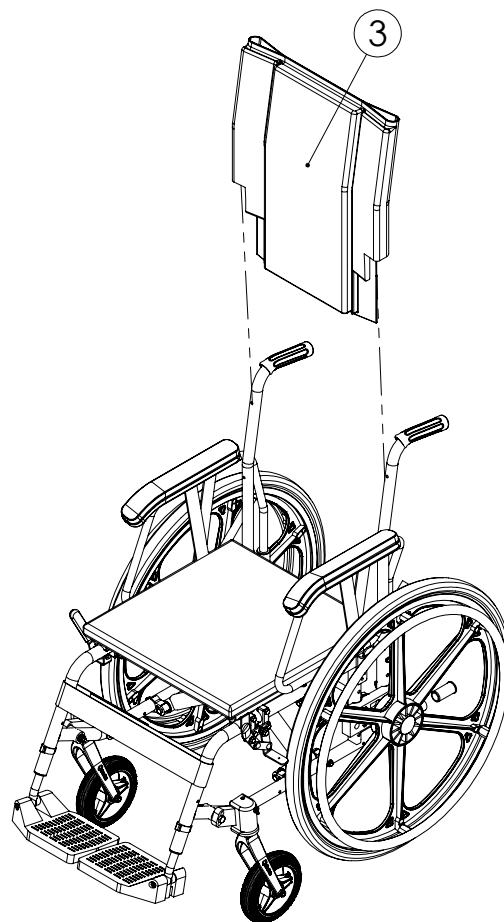

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23556	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/30
	23659	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/35
	20444	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/40
	20445	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/45
	20446	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/50
	23562	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/30
	23660	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/35
	20191	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/40
	20199	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/45
	20207	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/50
	24187	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/30
	23661	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/35
	20194	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/40
	20202	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/45
	20210	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/50
	25426	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/30
	23662	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/35
	20195	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/40
	20203	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/45
	20211	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/50
	23663	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/30
	20198	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/40
	20206	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/45
	20214	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/10/2019

FOLHA 3 DE 18

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

REV.:

E

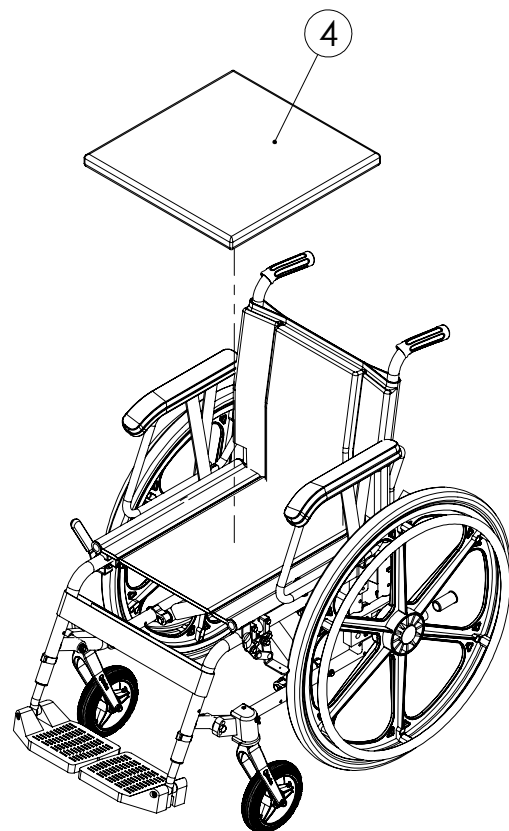

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO L.33/P.37 5CM
	23303	ALMOFADA ASSENTO L.33/P.42 5CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.37 5CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.42 5CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.47 5CM
	20292	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.37 5CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.42 5CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.47 5CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.52 5CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.42 5CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.47 5CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.52 5CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.42 5CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.47 5CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.52 5CM
	21297	ALMOFADA ASSENTO L.55/P.42 5CM
	21299	ALMOFADA ASSENTO L.55/P.47 5CM
	23319	ALMOFADA ASSENTO L.55/P.52 5CM
	21298	ALMOFADA ASSENTO L.60/P.42 5CM
	21300	ALMOFADA ASSENTO L.60/P.47 5CM
	23321	ALMOFADA ASSENTO L.60/P.52 5CM

APLICAÇÃO:

DES.: otavio

DATA:

FOLHA 4 DE 18

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

E

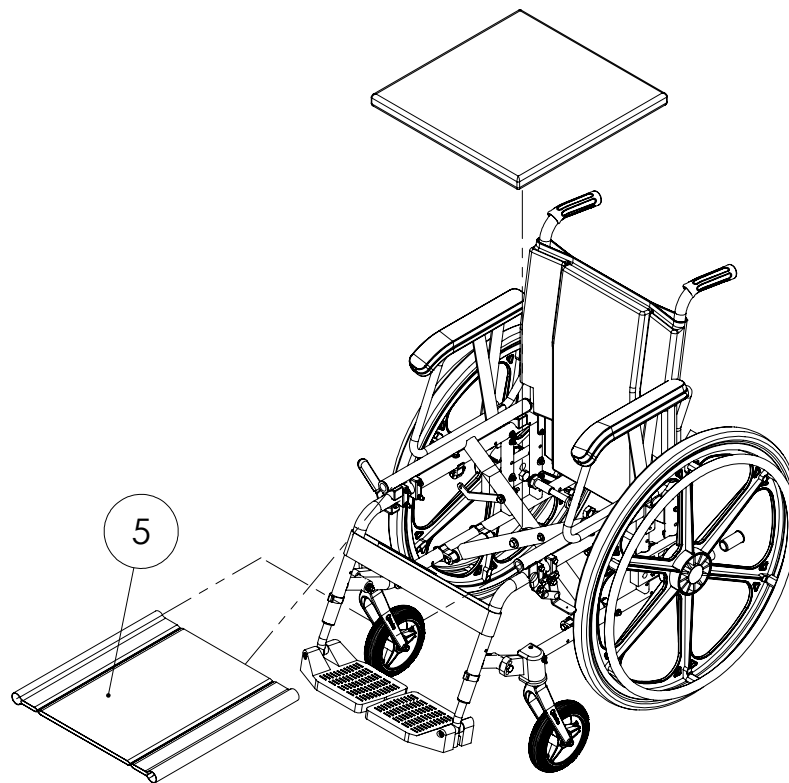

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: otavio

DATA:

FOLHA 5 DE 18

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

E

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	2568	TIRA PANTURRILHA 34
	2389	TIRA PANTURRILHA 37
	514	TIRA PANTURRILHA 41
	1514	TIRA PANTURRILHA 45
	2523	TIRA PANTURRILHA 50

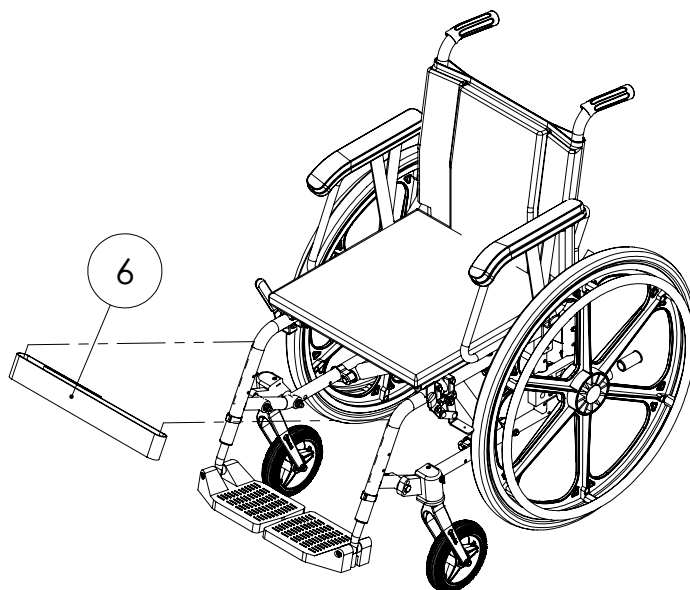

APLICAÇÃO:

DES.: otavio

DATA:

FOLHA 6 DE 18

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:


TIRA PANTURRILHA

REV.:

E

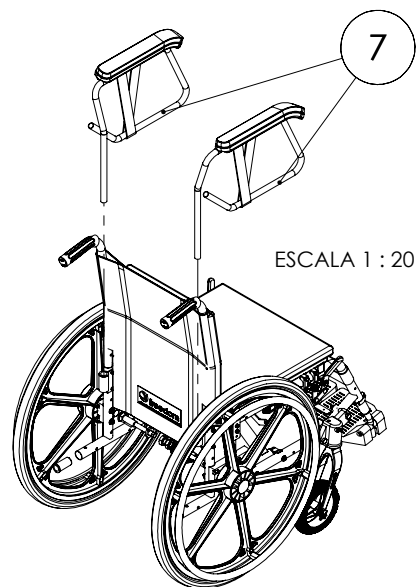

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	165910	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO P LD STANDARD
	165906	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO P LE STANDARD
	165911	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO M LD STANDARD
	165908	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO M LE STANDARD
	165912	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO G LD STANDARD
	165909	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO G LE STANDARD

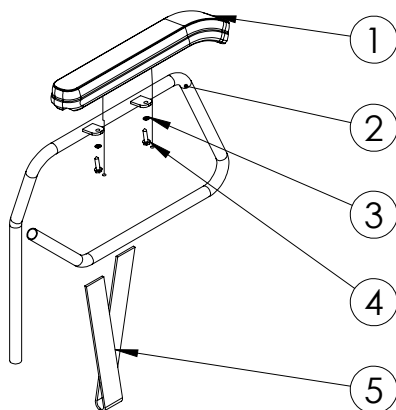

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
2	165497	1	BRACO FIXO ACO P LD
	165496	1	BRACO FIXO ACO P LE
	165499	1	BRACO FIXO ACO M LD
	165498	1	BRACO FIXO ACO M LE
	165501	1	BRACO FIXO ACO G LD
	165500	1	BRACO FIXO ACO G LE
3	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
4	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
5	166066	1	TIRA LATERAL BRAÇO P
	166070	1	TIRA LATERAL BRAÇO M
	166071	1	TIRA LATERAL BRAÇO G

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 7 DE 18

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:


BRAÇO CLEAN/COMPACT FIXO

REV.:

H.01

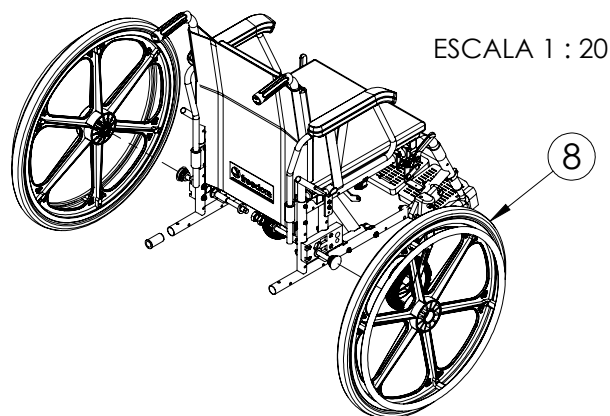

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
8	169144	CONJUNTO RODA 24" NY INF. ARG. NYLON PARA EIXO FIXO
	169146	CONJUNTO RODA 24" NY MAC. ARG. NYLON PARA EIXO FIXO
	180699	CONJUNTO RODA 24" NY INF. ARG. NYLON PARA EIXO QUICK
	180700	CONJUNTO RODA 24" NY MAC. ARG. NYLON PARA EIXO QUICK

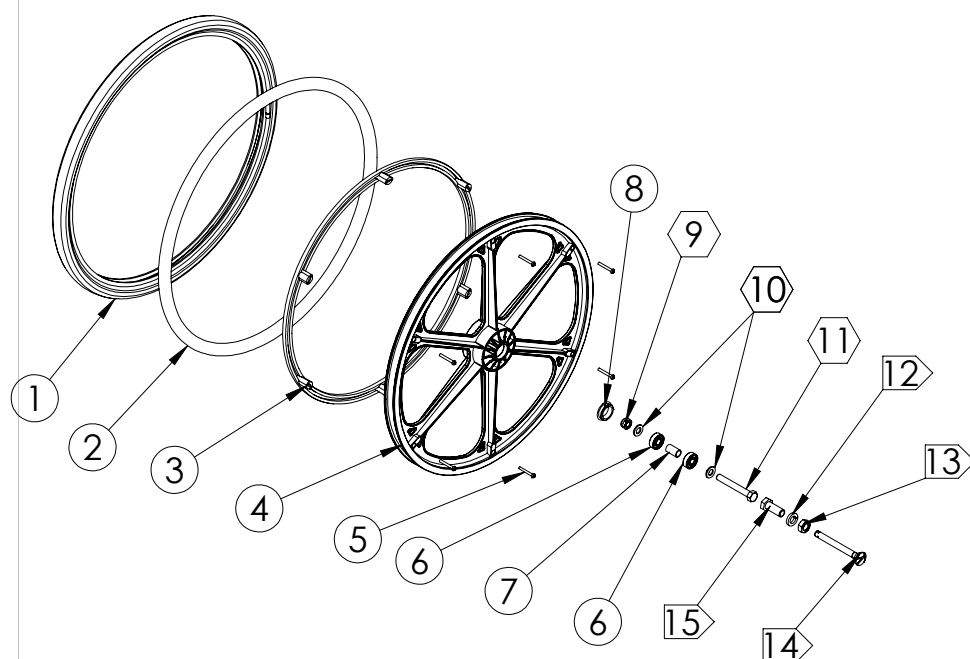

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	241.0	1	PNEU BIC 24X 1 3/8 CINZA (S)
	23267	1	RODA TRAS.PU 24X1.3/8 PARA CADEIRA DE RODAS
2	121.0	1	CAMARA DE AR 26 A (S)
3	181713	1	ARGOLA RODA NY 24"
4	181729	1	ARO NYLON P/CAD.RODA 6 RAIOS 24 S/ARGOLA
5	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
6	351.4	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
7	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
8	6831.4	1	TAMPA P/CUBO DE RODA TR CINZA (S)
CONJUNTO DE FIXAÇÃO EIXO FIXO			
9	191	1	PO SEXT NY BX CL8 12 CH 19 ZB - 1.25 MM (S) 1.03.0
10	2751.0	2	ARRUELA LISA 12MM ZB (S) (13X24X2,5)
11	11035	1	PA SEXT MA 8.8 12X90MM RP ZB (S/L)
CONJUNTO DE FIXAÇÃO EIXO QUICK			
12	198	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB
13	15289	1	PO SEXT UNF 5/8" BX CH15/16 ZB (S/L)
14	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
15	12442	1	BUCHA QUICK 5/8" X1 3/4"

APLICAÇÃO:
ITENS 12,13,14, E 15 SÃO USADOS PARA FIXAÇÃO DO EIXO QUICK



DES.: JONATHAN M.
FOLHA 8 DE 18

DATA:
ESCALA: 1:15



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO RODA NY 24"

REV.:
C.02

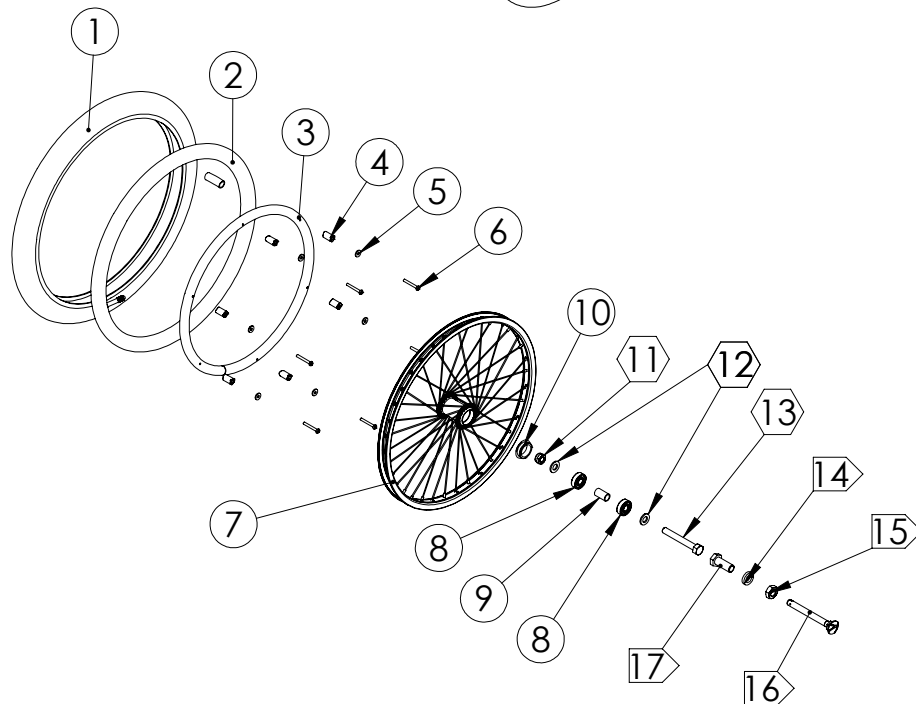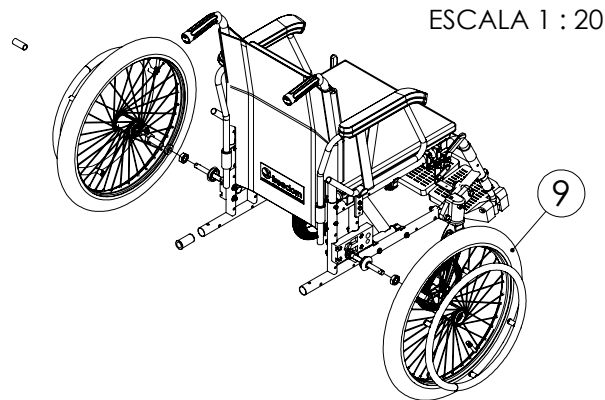

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
9	181450	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. PNEU INF. EIXO FIXO
	171759	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. C/ PINOS PNEU INF. EIXO FIXO
	181449		CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. PNEU INF. EIXO QUICK
	171765		CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. C/ PINOS PNEU INF. EIXO QUICK

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	119.8	1	PNEU BIC 20X1.75 PETIZ II CINZA(Z201972)(S)
2	911.3	1	CAMARA DE AR MSE 20"
3	15953	1	TUBO ARGOLA PROPULSAO 20
4	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2.83GR) (S)
5	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
6	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
7	181898	1	CONJUNTO 20" C/ RAIOS
8	6044.5	2	ROLAMENTO 6201 DDU 2RS NSK 1 LINHA (S)
9	11828.1	1	SEPARADOR 32,5MM RODA RAIADA
10	182607	1	TAMPA P/CUBO DE RODA TR PRETA (S)
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO EIXO FIXO
11	191		PO SEXT NY BX CL8 12 CH 19 ZB - 1.25 MM (S) 1.03.0
12	2751.0	2	ARRUELA LISA 12MM ZB (S) (13X24X2,5)
13	11035	1	PA SEXT MA 8.8 12X90MM RP ZB (S/L)
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO EIXO QUICK
14	198	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB
15	15289	1	PO SEXT UNF 5/8" BX CH15/16 ZB (S/L)
16	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
15	12442	1	BUCHA QUICK 5/8" X1 3/4"

APLICAÇÃO:

ITENS 14, 15, 16, e 17 SÃO USADOS PARA FIXAÇÃO DO EIXO QUICK

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 9 DE 18

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:


CONJUNTO RODA RAIADA 20"

REV.:

D.01

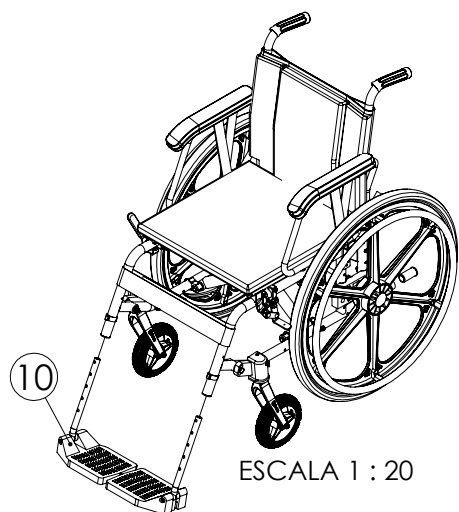

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	146916	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 34/37
	146915	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 34/37
	146200	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 41/45/50
	146287	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 41/45/50

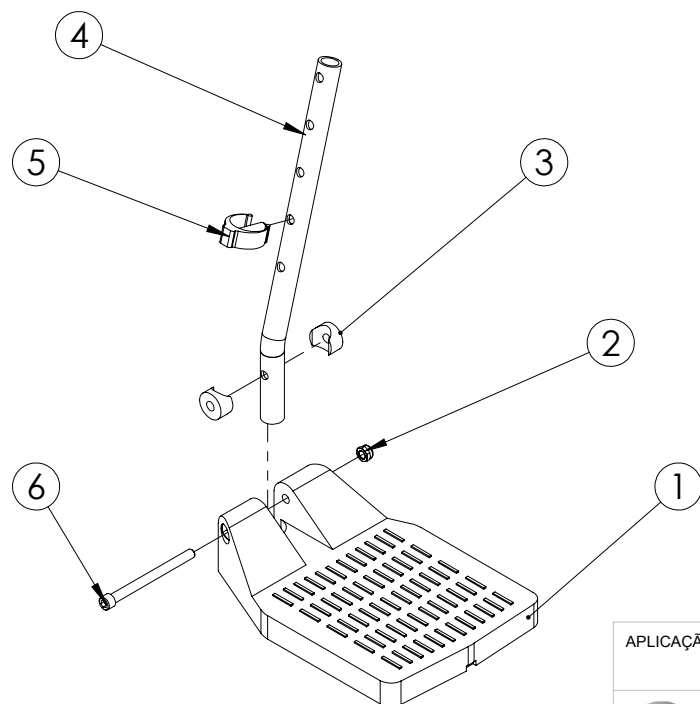

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
	106147	1	PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
2	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA LUMINA
4	146201	1	TUBO PEDALEIRA
5	6889.6	1	CLIP E 1"
6	18159.5	1	PA ALLEM 1/4X3 MA INOX C/CILINDRICA(S)

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 10 DE 18



ESCALA: 1:5



REV:

A.02

ESCALA 1 : 20

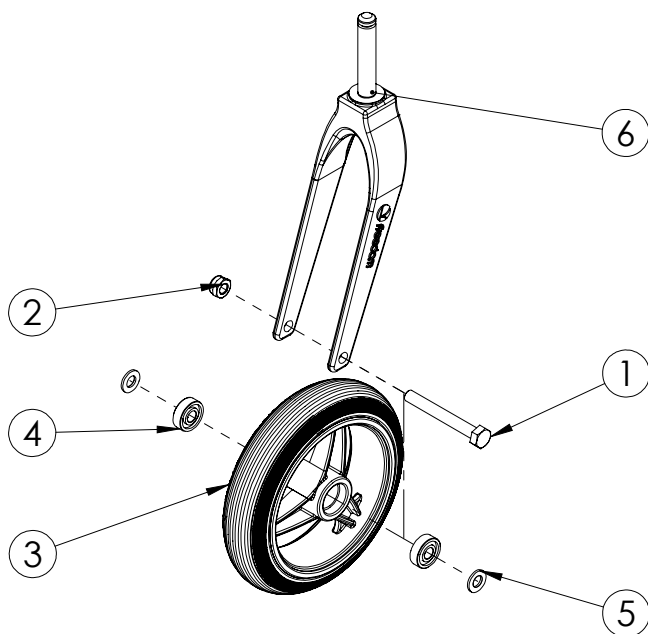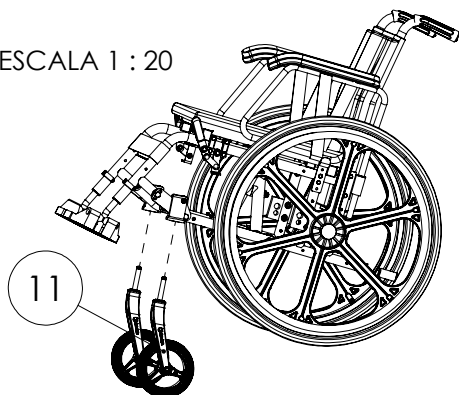

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	181950	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/PRETO)
	141904	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/CINZA)
	178812	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	178811	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/PRETO)

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	20131	1	PA SEXT MA 8.8 8X65MM RP ZB (S/L)
2	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	174747	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/CINZA
	174718	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/PRETO
4	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
5	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
6	182662	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 M/G
	182663	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 P

APLICAÇÃO:

DES.: tiago

DATA: 01/10/2009

FOLHA 11 DE 18

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"

REV.:

K.01

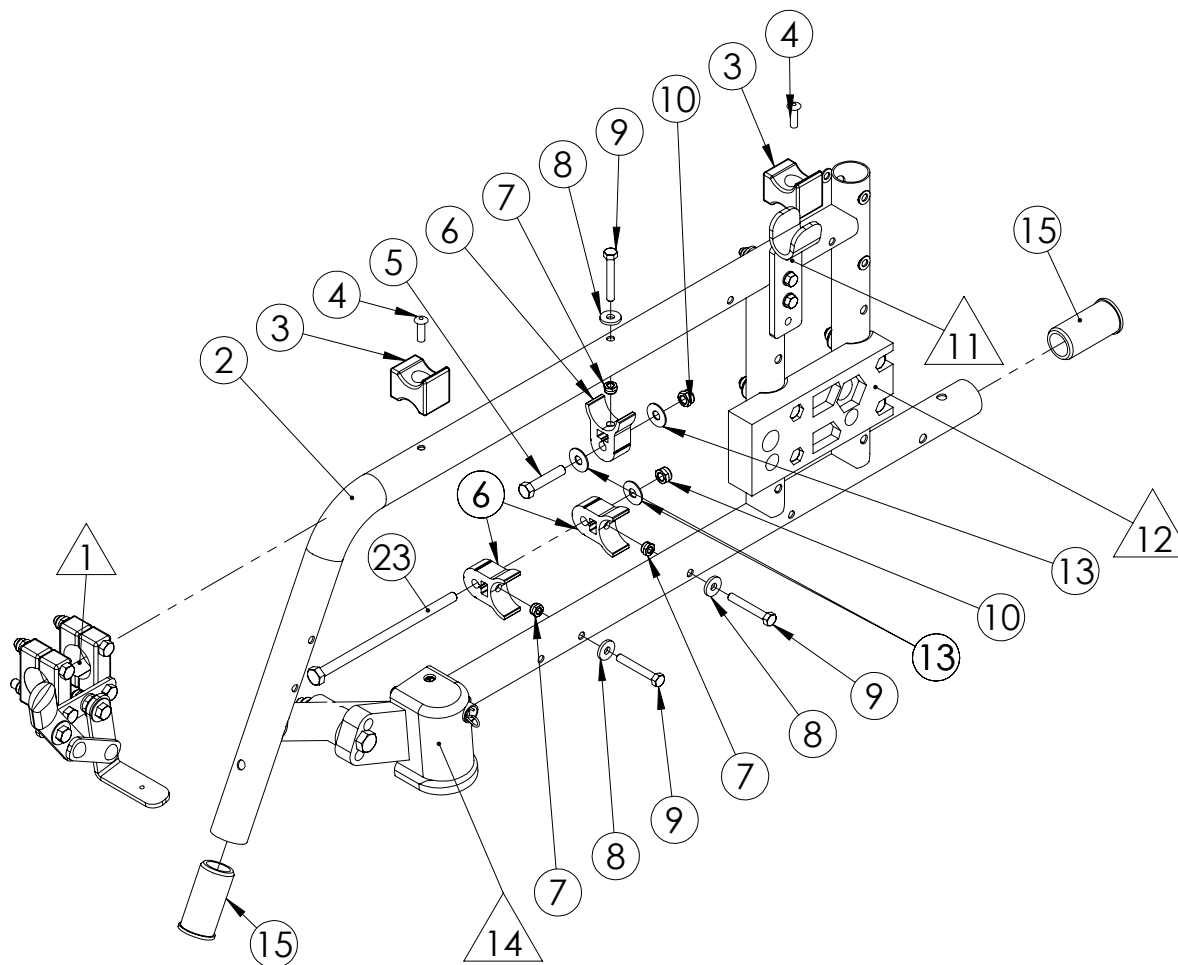

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	PG.13	1	VER PÁGINA 13
2	22751	1	CHASSIS ACO P AMARELO
	22754	1	CHASSIS ACO P AZUL VERNIZ
	22749	1	CHASSIS ACO P GRAFITE
	22756	1	CHASSIS ACO P PRATA VERNIZ
	22748	1	CHASSIS ACO P PRETO BRILHANTE
	22752	1	CHASSIS ACO P VERDE VERNIZ
	22753	1	CHASSIS ACO P VERMELHO VERNIZ
	22750	1	CHASSIS ACO P VINHO
	22755	1	CHASSIS ACO P VIOLETA VERNIZ
	22760	1	CHASSIS ACO M AMARELO
	22763	1	CHASSIS ACO M AZUL VERNIZ
	22758	1	CHASSIS ACO M GRAFITE
	22765	1	CHASSIS ACO M PRATA VERNIZ
	22757	1	CHASSIS ACO M PRETO BRILHANTE
	22761	1	CHASSIS ACO M VERDE VERNIZ
	22762	1	CHASSIS ACO M VERMELHO VERNIZ
	22759	1	CHASSIS ACO M VINHO
	22764	1	CHASSIS ACO M VIOLETA VERNIZ
	22769	1	CHASSIS ACO G AMARELO
	22772	1	CHASSIS ACO G AZUL VERNIZ
	22767	1	CHASSIS ACO G GRAFITE
	22774	1	CHASSIS ACO G PRATA VERNIZ
	22766	1	CHASSIS ACO G PRETO BRILHANTE
	22770	1	CHASSIS ACO G VERDE VERNIZ
	22771	1	CHASSIS ACO G VERMELHO VERNIZ
	22768	1	CHASSIS ACO G VINHO
	22773	1	CHASSIS ACO G VIOLETA VERNIZ
3	1704.3	2	CADEIRINHA 1" CAD
4	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
5	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
6	124518	3	PERFIL U FURO PORCA
7	691.2	3	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
9	133037	3	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
10	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
11	PG.14	1	VER PÁGINA 14
12	PG.15	1	VER PÁGINA 15
13	6087.9	3	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
14	PG. 16	1	VER PÁGINA 16
15	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CHASSIS

DES.: garcia


FOLHA 12 DE 18

DATA:

ESCALA: 1:5



REV.:

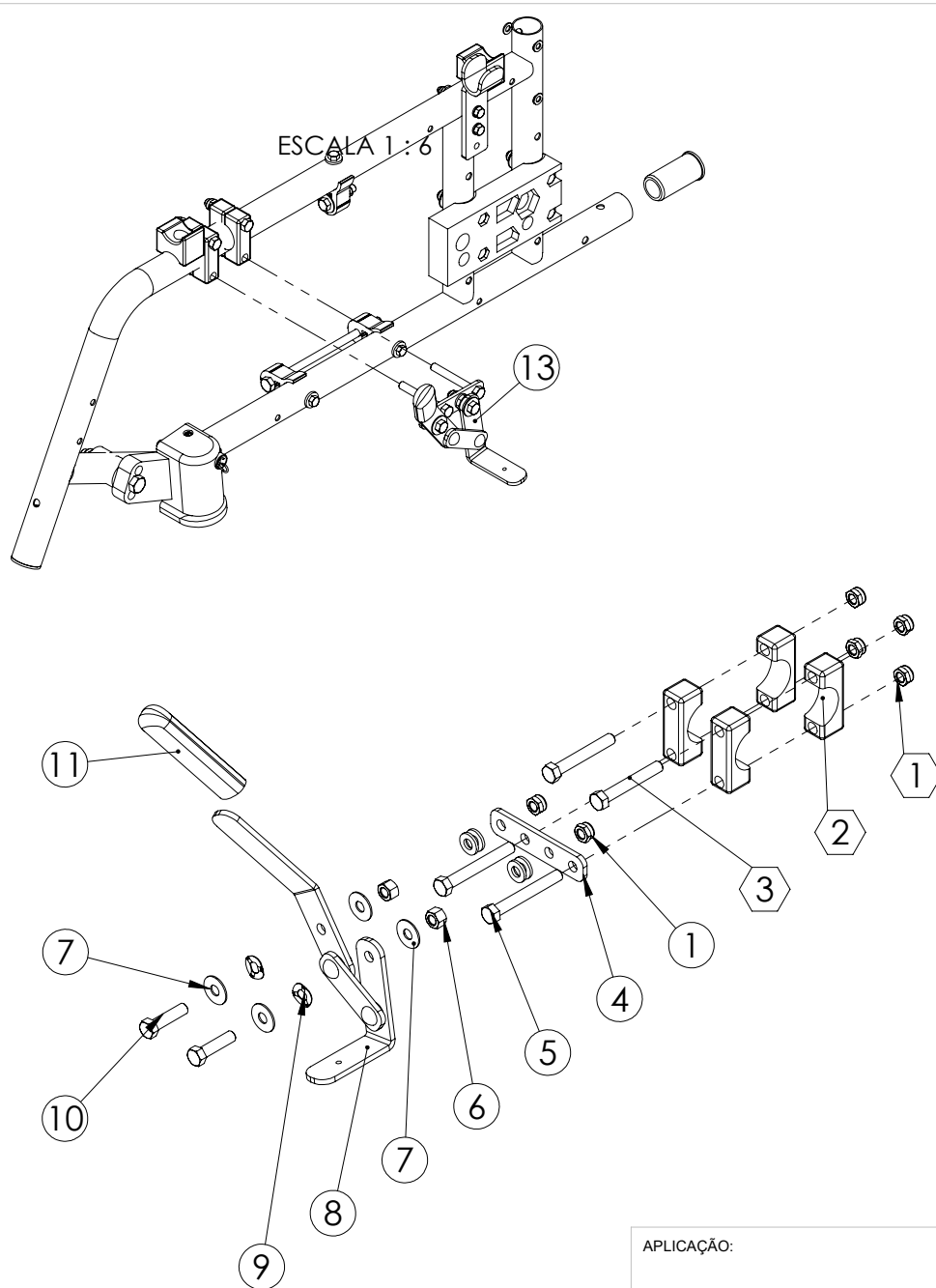

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	182890	CONJUNTO FREIO 4 FUROS CLEAN LD [1801]
	182896	CONJUNTO FREIO 4 FUROS CLEAN LE [1801]

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	1701.9	4	ABRACADEIRA 1" CAD.
3	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO FREIO MANUAL
4	177950	1	PRANCHETA FREIO 4 FUROS [1801]
5	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
6	891.5	2	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
7	10083.8	4	ARRUELA LISA 1/4A" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
8	8991.5	1	FREIO LADO DIREITO
	5121.7	1	FREIO LADO ESQUERDO
9	24492	2	ARRUELA ONDULADA AOC 6,3X14X0,46
10	12523.7	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1 RT ZB
11	9821.3	1	LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS (17,2GR) (S)

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO FREIO

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 13 DE 18


ESCALA: 1:3



REV.:


F.01

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO PERFIL SUPORTE BRAÇO
1	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
2	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
3	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
4	261.5	2	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
5	142915	2	PA SEXT MA 8.8 5X45MM RT ZB (S)

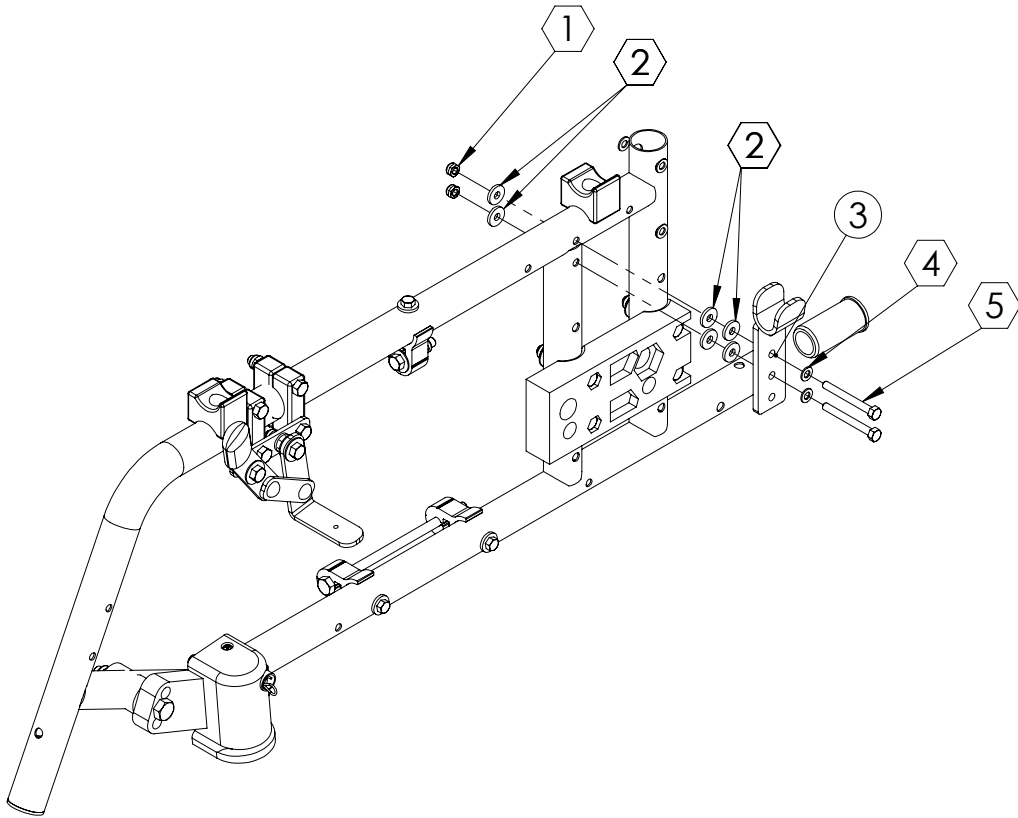

APLICAÇÃO:	DES.: JONATHAN M.	DATA:	
	FOLHA 14 DE 18	ESCALA: 1:5	
DESCRIÇÃO: PERFIL SUPORTE BRAÇO			REV.:

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO PLACA TRASEIRA INJETADA
1	491.0	4	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	6087.9	4	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
3	12405.2	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	19445.0	1	PLACA TRASEIRA INJETADA DIR CAD.1". (S)
	19444.1	1	PLACA TRASEIRA INJETADA ESQ CAD.1". (S)

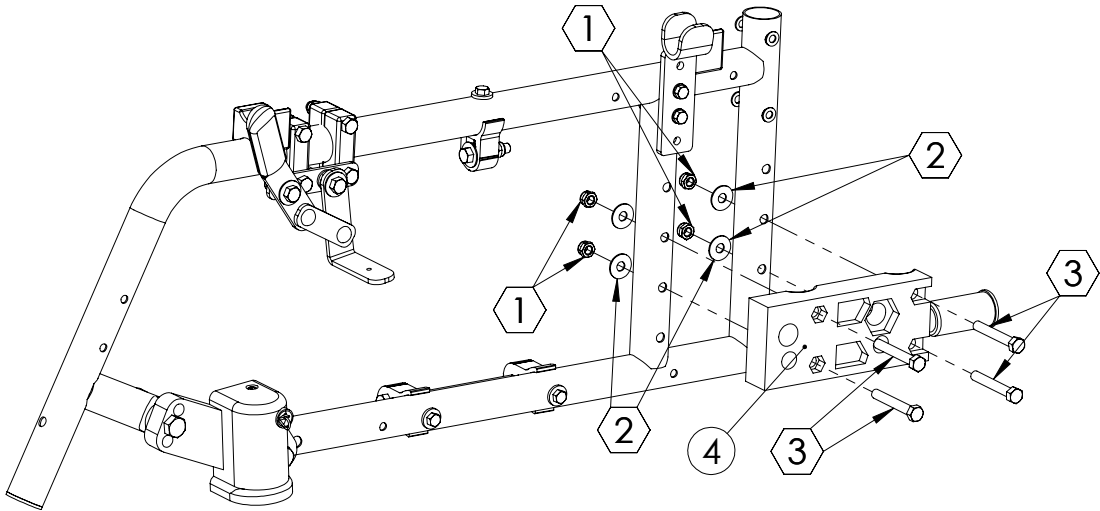

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 15 DE 18

ESCALA: 1:5





REV.:



DESCRIÇÃO:

PLACA TRASEIRA INJETADA

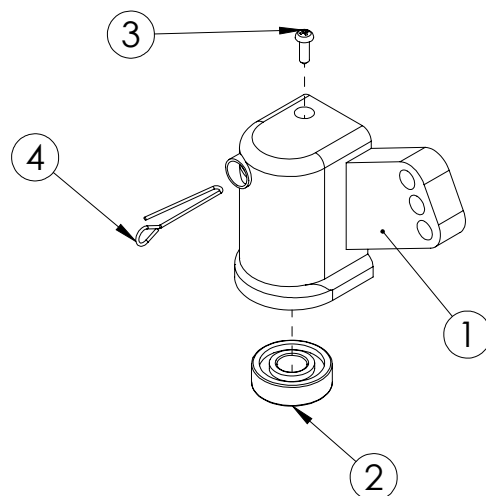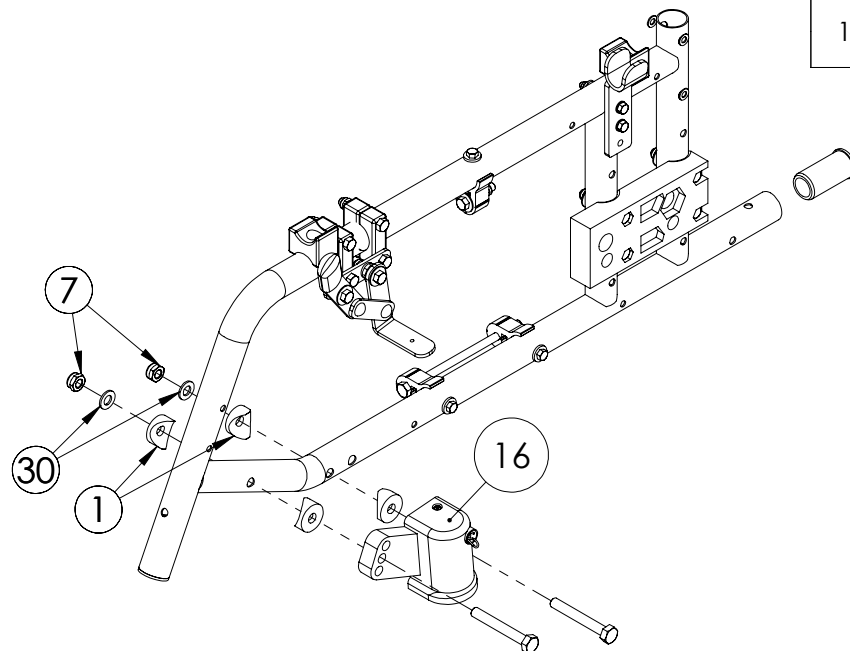

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CONJUNTO DE FIXAÇÃO DO MANCAL DIAN		
16	7965.0	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)
	7960.0	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	709.9	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
	809.5	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
2	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
3	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
4	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: yuri

DATA:

FOLHA 16 DE 18

ESCALA: 1:3




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

G.01

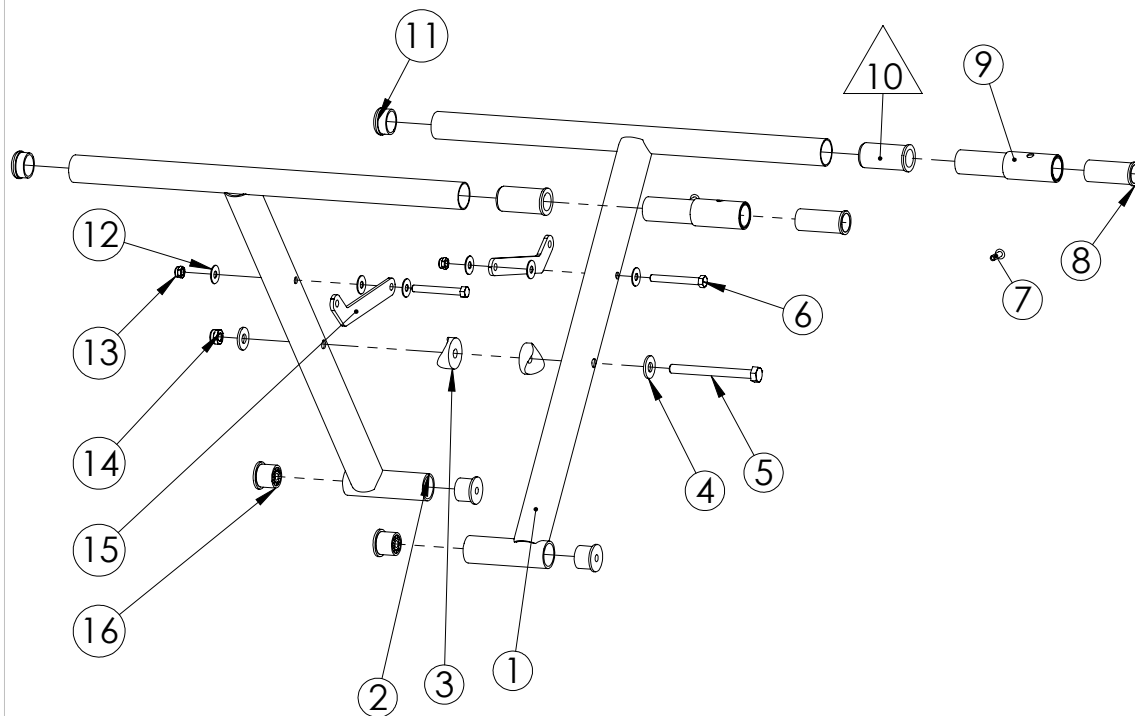

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	150150	1	TUBO X 34/37 LD P ACO
	146672	1	TUBO X 37/37 LD P ACO
	150083	1	TUBO X 37/42 LD M ACO
	146298	1	TUBO X 41/42 LD M ACO
	149522	1	TUBO X 45/42 LD M ACO
	149523	1	TUBO X 50/42 LD M ACO
	146507	1	TUBO X 41/47 LD G ACO
	146510	1	TUBO X 45/47 LD G ACO
	146503	1	TUBO X 50/47 LD G ACO
	146674	1	TUBO X 37/37 LE P ACO
2	150082	1	TUBO X 37/42 LE M ACO
	146299	1	TUBO X 41/42 LE M ACO
	149524	1	TUBO X 45/42 LE M ACO
	149525	1	TUBO X 50/42 LE M ACO
	146508	1	TUBO X 41/47 LE G ACO
	146509	1	TUBO X 45/47 LE G ACO
	146506	1	TUBO X 50/47 LE G ACO
	150151	1	TUBO X 34/37 LE P ACO
3	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" CAD.ALUM.
4	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
5	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
8	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
9	159463	2	PROLONGADOR PUNHO/X STYLES
10	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
11	149290	2	TAMPAO 1"
12	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
13	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
14	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L)
15	154383	2	SUP. FIXACAO DO X 34 SP CORTE LASER
	146313	2	SUP. FIXACAO DO X 37 SM/SP CORTE LASER
	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
	146312	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SM CORTE LASER
	146314	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SM CORTE LASER
	146523	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SG CORTE LASER
	146522	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SG CORTE LASER
	146521	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SG CORTE LASER
16	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO

APLICAÇÃO:
ITEM 10 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR

DES.: garcia
FOLHA 17 DE 18

DATA:
ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO X AÇO

REV.:

F.03

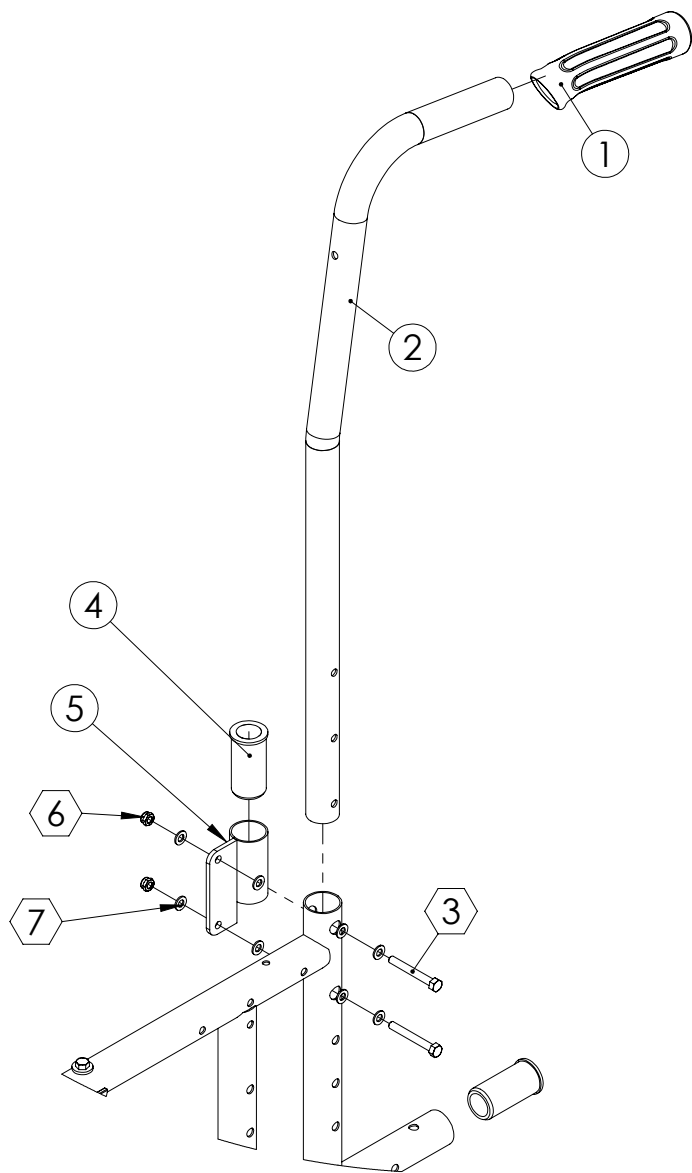

ITEM	CÓDIGO	QNT	DESCRIÇÃO
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO ENCOSTO FIXO
1	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	179468	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 40/30 [1804]
	163890	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 40
	163892	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 45
	163886	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 50
3	133037	2	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S/L)
4	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"x1,2MM
5	164875	1	SUPORTE BRACO FIXO ENCOSTO AÇO
6	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L)
7	261.5	8	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 18 DE 18

ESCALA: 1:5



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO FIXO

REV.: