


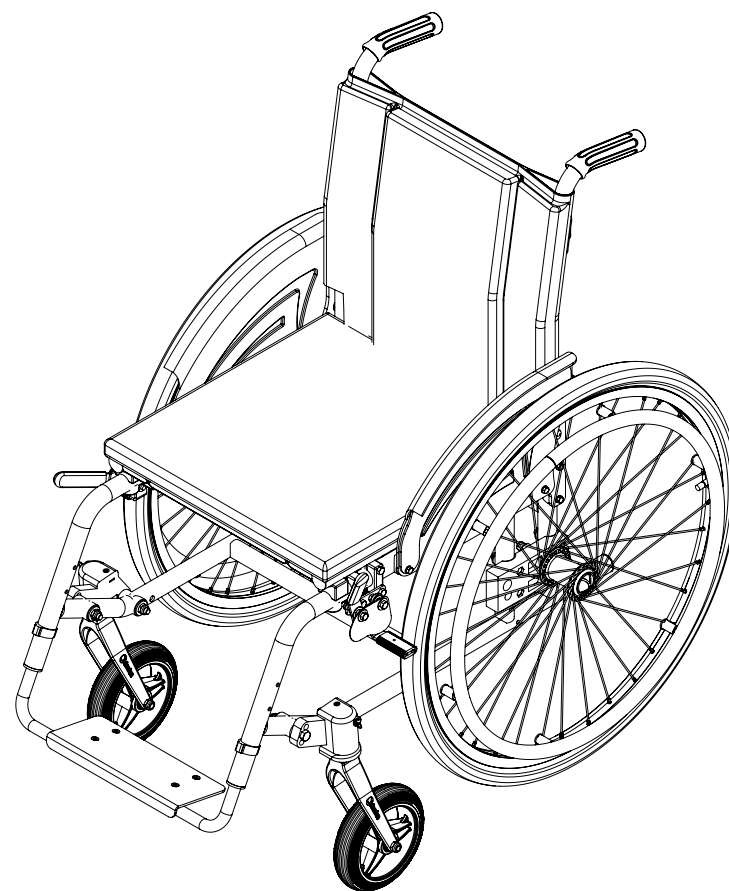

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 1 DE 15

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

LIFE 41 40 ARO 24

REV.:

B.01

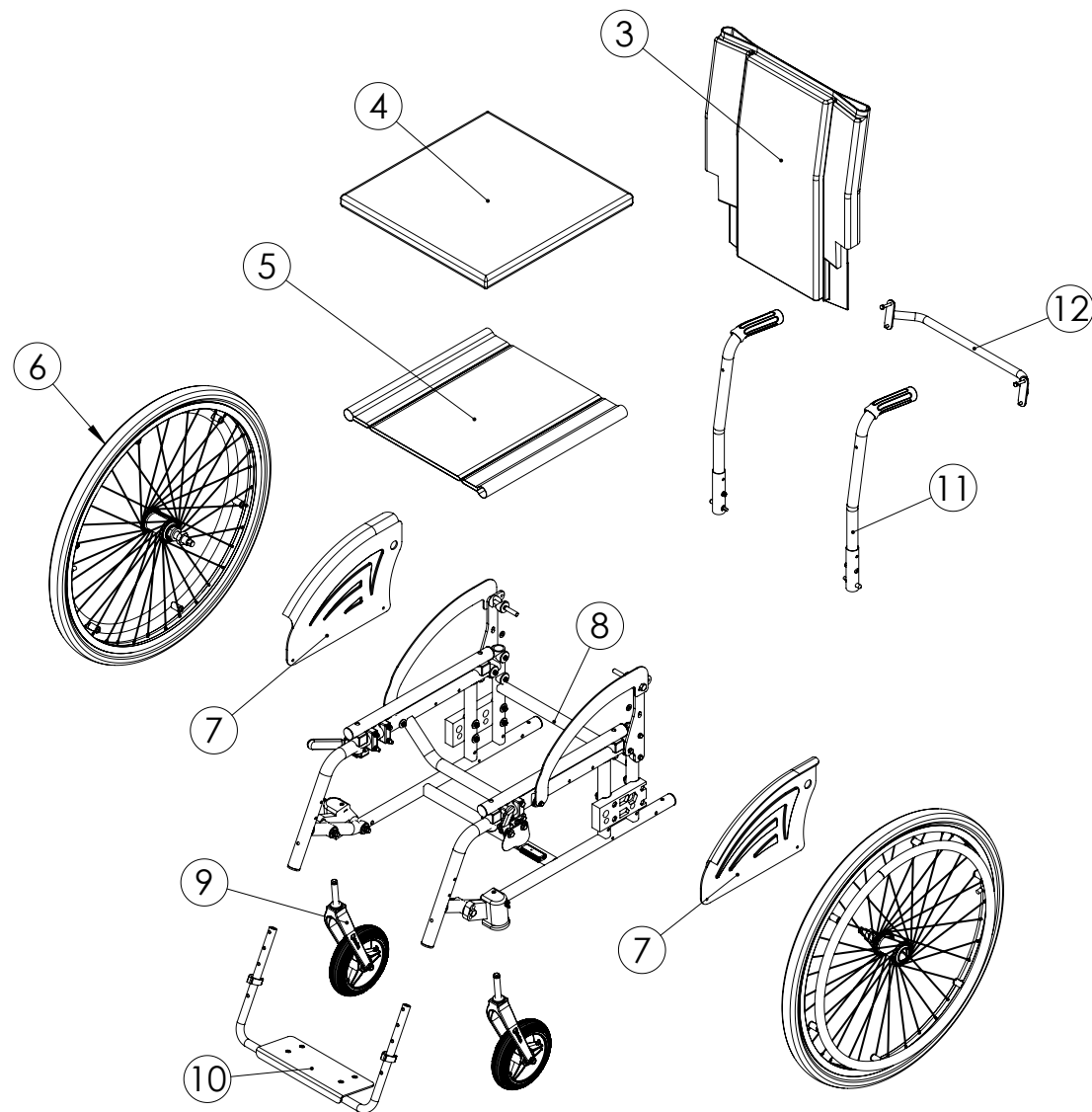

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 2 DE 15

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:

LIFE 41 40 ARO 24

REV.:

B.01

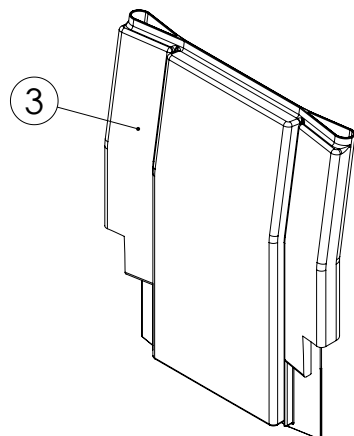

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23566	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/30
	23573	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/35
	22541	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/40
	22542	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/45
	22543	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/50
	23567	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/30
	23574	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/35
	22544	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/40
	22545	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/45
	22546	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/50
	23568	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/30
	23575	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/35
	22547	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/40
	22548	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/45
	22549	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/50
	23569	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/30
	23576	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/35
	22550	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/40
	22551	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/45
	22552	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/50
	23570	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/30
	23577	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/35
	22553	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/40
	22554	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/45
	22555	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/50
	27899	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 33/30 RIGIDO
	27900	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 33/35 RIGIDO
	27901	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 33/40 RIGIDO
	27902	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 33/45 RIGIDO
	27903	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 33/50 RIGIDO
	27904	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 37/30 RIGIDO
	27905	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 37/35 RIGIDO
	27906	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 37/40 RIGIDO
	27907	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 37/45 RIGIDO
	27908	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 37/50 RIGIDO
	27909	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 41/30 RIGIDO
	27910	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 41/35 RIGIDO
	27911	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 41/40 RIGIDO
	27912	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 41/45 RIGIDO
	27913	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 41/50 RIGIDO
	27914	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 45/30 RIGIDO
	27915	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 45/35 RIGIDO
	27916	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 45/40 RIGIDO
	27917	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 45/45 RIGIDO
	27918	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 45/50 RIGIDO
	27919	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 50/30 RIGIDO
	27920	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 50/35 RIGIDO
	27921	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 50/40 RIGIDO
	27922	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 50/45 RIGIDO
	27923	ENCOSTO LU/RE/LF 2CM 50/50 RIGIDO

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 3 DE 15

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO LF

REV.:

F

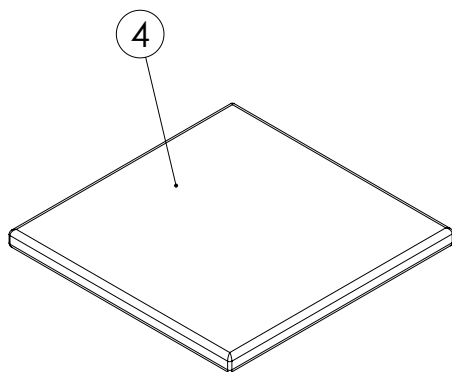

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO L.33 /P.37 5CM
	23303	ALMOFADA ASSENTO L.33 /P.42 5CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.37 5CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.42 5CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.47 5CM
	20292	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.37 5CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO L.41 /P.42 5CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO L.41 /P.47 5CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.52 5CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO L.45 /P.42 5CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO L.45 /P.47 5CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO L.45 /P.52 5CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO L.50 /P.42 5CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO L.50 /P.47 5CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO L.50 /P.52 5CM

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 4 DE 15

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

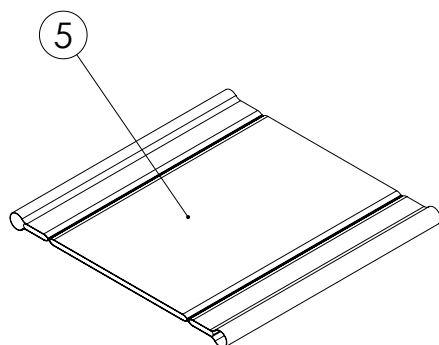

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	26617	BASE ASSENTO LIFE L.33/P.37
	26614	BASE ASSENTO LIFE L.33/P.42
	24950	BASE ASSENTO LIFE L.37/P.37
	24946	BASE ASSENTO LIFE L.37/P.42
	24938	BASE ASSENTO LIFE L.37/P.47
	24951	BASE ASSENTO LIFE L.41/P.37
	24947	BASE ASSENTO LIFE L.41/P.42
	24939	BASE ASSENTO LIFE L.41/P.47
	24943	BASE ASSENTO LIFE L.41/P.52
	24948	BASE ASSENTO LIFE L.45/P.42
	24940	BASE ASSENTO LIFE L.45/P.47
	24944	BASE ASSENTO LIFE L.45/P.52
	24949	BASE ASSENTO LIFE L.50/P.42
	24941	BASE ASSENTO LIFE L.50/P.47
	24945	BASE ASSENTO LIFE L.50/P.52
	27609	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.33/P.37
	27611	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.33/P.42
	27612	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.37/P.37
	27605	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.37/P.42
	27613	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.37/P.47
	27615	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.41/P.37
	27616	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.41/P.42
	27617	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.41/P.47
	27619	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.41/P.52
	27620	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.45/P.42
	27621	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.45/P.47
	27622	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.45/P.52
	27623	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.50/P.42
	27624	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.50/P.47
	27625	BASE ASSENTO LIFE RIGIDA L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 5 DE 15

ESCALA: 1:10



DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

C

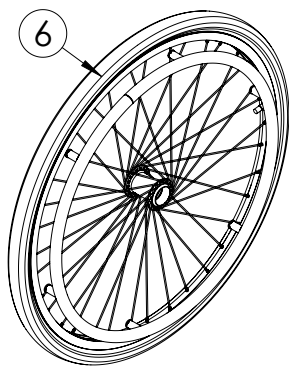


TABELA 1 PG.6			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
6	181451	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO INF. ARG. ALUMINIO EIXO FIXO/QUICK
	58094	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO INF. ARG. ALUMINIO C/ CALOTA EIXO FIXO/QUICK
	181978	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO INF. ARG. PINOS EIXO FIXO/QUICK
	184632	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO MAC. ARG. ALUMINIO CALOTA EIXO FIXO/QUICK
	181985	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO MAC. ARG. ALUMINIO EIXO FIXO/QUICK
	181986	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO MAC. ARG. PINOS EIXO FIXO/QUICK

TABELA 2 PG.6			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
12	241.0	1	PNEU BIC 24X 1 3/8 CINZA (S)
	121.0	1	CAMARA DE AR 26 A (S)
	23267	1	RODA TRAS.PU 24X1,3/8 PARA CADEIRA DE RODAS
13	15289	1	PO SEXT UNF 5/8" BX CH15/16 ZB (S/L)

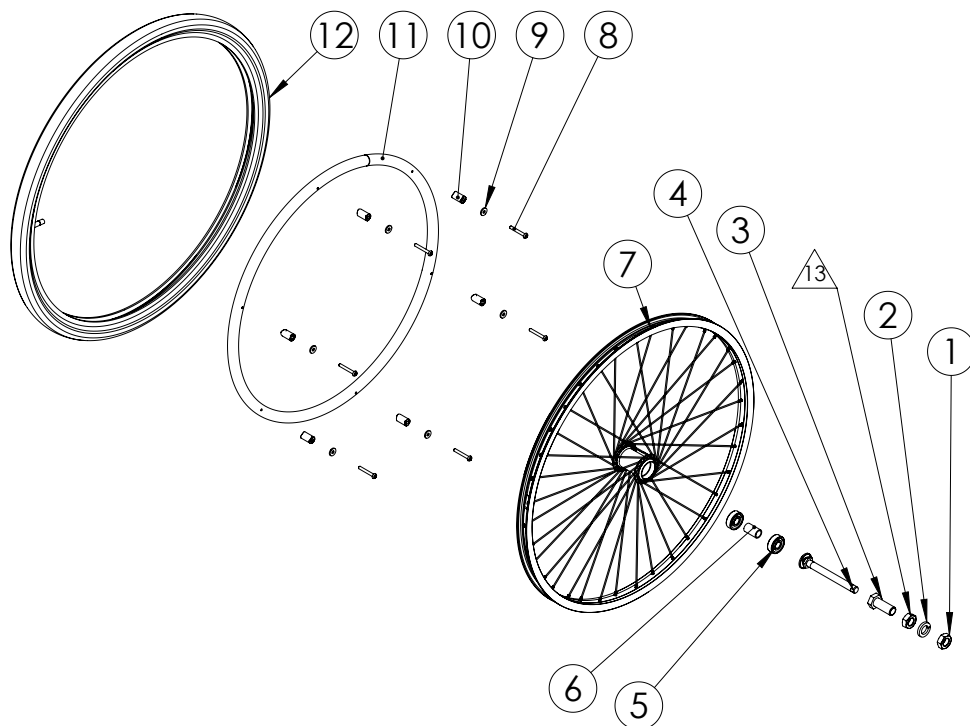


TABELA 3 PG.6			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16.5X27X4.3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
5	351	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
6	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
7	185083	1	CONJUNTO 24" C/ RAIOS
8	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
9	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
10	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
11	4021.5	1	ARGOLA PROPULSAO 24"
	181890	1	CONJUNTO ARGOLA PROPULSAO ARO 24" C/ PINOS

APLICAÇÃO: PADRÃO M/G

13 SÓ É UTILIZADO NAS CADEIRAS COM BRAÇO

DES.: JONATHAN M.

DATA: 12/05/2010

FOLHA 6 DE 15

ESCALA: 1:12




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO RODA RAIADA 24"


REV.:

U


PADRÃO DE
FÁBRICA

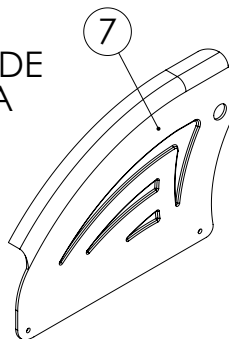

CONJUNTO OPCIONAL

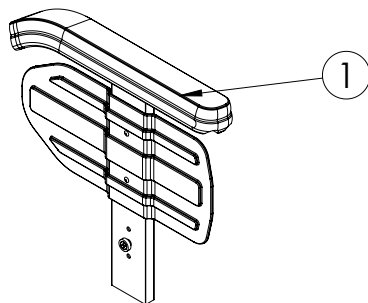

OPCIONAL

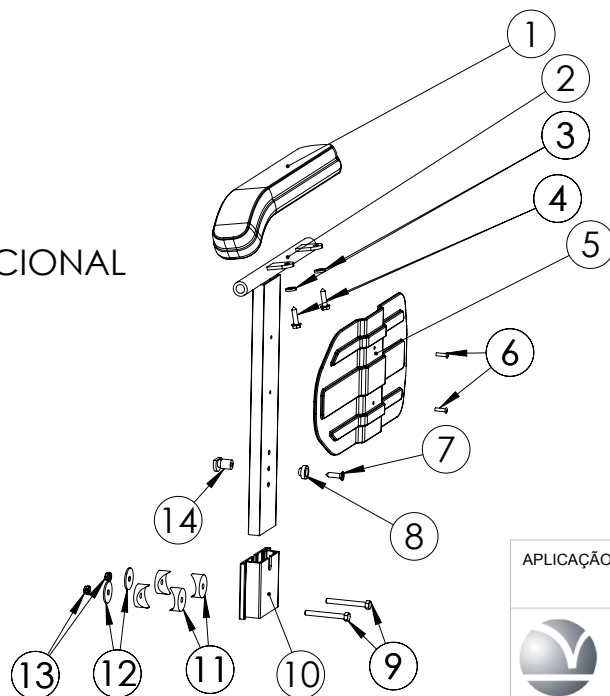

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	174689	PROTECTOR ROUPA LIFE LE
	174687	PROTECTOR ROUPA LIFE LD

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	171069	CONJUNTO BRACO LIFE P LD STANDARD
	171066	CONJUNTO BRACO LIFE P LE STANDARD
	171037	CONJUNTO BRACO LIFE M LD STANDARD
	171036	CONJUNTO BRACO LIFE M LE STANDARD
	171070	CONJUNTO BRACO LIFE G LD STANDARD
	171068	CONJUNTO BRACO LIFE G LE STANDARD

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
2	171000	1	BRAÇO LIFE P LD
	171001		BRAÇO LIFE P LE
	190999		BRAÇO LIFE M LD
	170997		BRAÇO LIFE M LE
	171003		BRAÇO LIFE G LD
	171002		BRAÇO LIFE G LE
3	561.4	2	ARRUELA PRESSAO 1/4" ZB (S/L) (6,5X11,5X2)
4	22935		PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
5	173963	1	CARENAGEM BRACO LIFE M
6	427	2	REBITE RX AL 3,2X12 (S/L)
7	23460	1	PA AAT CH PH 4,8X19MM ZB (S/L)
8	171035	1	BUCHA FIXAÇÃO BRAÇO
9	142915	2	PA SEXT MA 8.8 5X45MM RT ZB (S)
10	173720	1	SUPORTE FIXAÇÃO TUBO BRAÇO
11	187751	4	BOCA DE LOBO 1" FURO 5,5 MM (2,34GR) (S)
12	23512	2	ARRUELA CHAPEADORA 3/16 ZB(5,6X23X1,5)
13	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
14	173777	1	PINO REGULAGEM ALT. BRAÇO

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

PROTECTOR ROUPA / BRAÇO

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019


FOLHA 7 DE 15

ESCALA: 1:8



REV.:

A

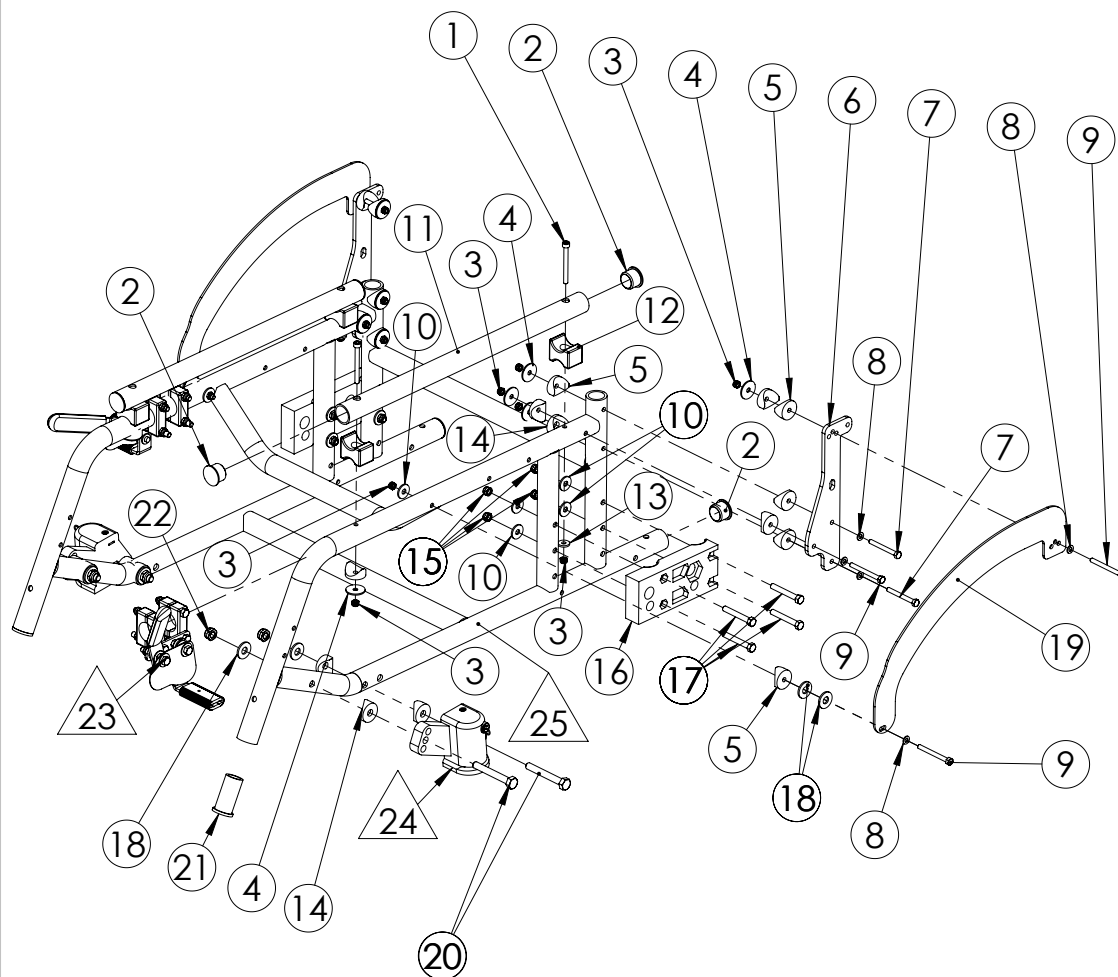

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	18363.6	4	PA ALLEM 5X50MM MA INOX A2 C/C(S)
2	107756	6	TAMPAO P/TUBO 1"X2MM CAD.ALUM 2011 (S)
3	691.2	14	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
4	23512	10	ARRUELA CHAPEADORA 3/16 ZB(5,6X23X1,5)
5	187751	18	BOCA DE LOBO 1" FURO 5,5 MM (2,34GR) (S)
6	171947	2	PLACA FIXAÇÃO ENCOSTO LIFE CORTE LASER
7	142915	4	PA SEXT MA 8.8 5X45MM RT ZB (S)
8	261.5	10	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
9	7821.2	6	PA SEXT MA 8.8 5X50MM RT ZB (S)
10	393.0	10	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
11	171795	2	TUBO LATERAL SUP. CAD. MONOBLOCO P
	183738	2	TUBO LATERAL SUP. CAD. MONOBLOCO P ESTENDIDO
	171787	2	TUBO LATERAL SUP. CAD. MONOBLOCO M
	180176	2	TUBO LATERAL SUP. CAD. MONOBLOCO M ESTENDIDO
	171797	2	TUBO LATERAL SUP. CAD. MONOBLOCO G
	183736	2	TUBO LATERAL SUP. CAD. MONOBLOCO G ESTENDIDO
12	1704.3	4	CADEIRINHA 1" CAD.ALUM. (S)
13	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
14	10017.0	10	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
15	491.0	8	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
16	19445.0	1	PLACA TRASEIRA INJETADA DIR CAD.1". (S)
	19444.1	1	PLACA TRASEIRA INJETADA ESQ CAD.1". (S)
17	12405.2	8	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
18	461.8	8	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
19	183629	2	REFORÇO PROTETOR DE ROUPA LIFE [1902]
20	11832.0	4	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
21	107427	2	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM
22	791.9	4	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
23	PG. 15		VER PÁGINA 15
24	PG. 13		VER PÁGINA 13
25	PG. 14		VER PÁGINA 14

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 8 DE 15

ESCALA: 1:9




DESCRIÇÃO:


CHASSIS LIFE

REV.:

A.01

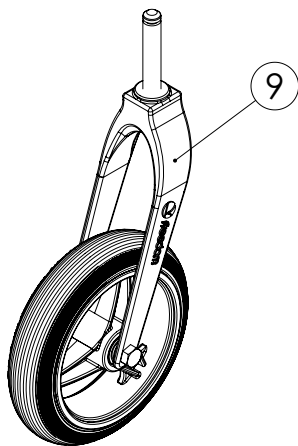

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	183176	CONJUNTO GARFO PRETO RODA MACICA 6" P (PRETO/PRETO)
	183175	CONJUNTO GARFO PRETO RODA MACICA 6" P (PRETO/CINZA)
	183179	CONJUNTO GARFO PRETO RODA MACICA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	183180	CONJUNTO GARFO PRETO RODA MACICA 6" M/G (PRETO/PRETO)

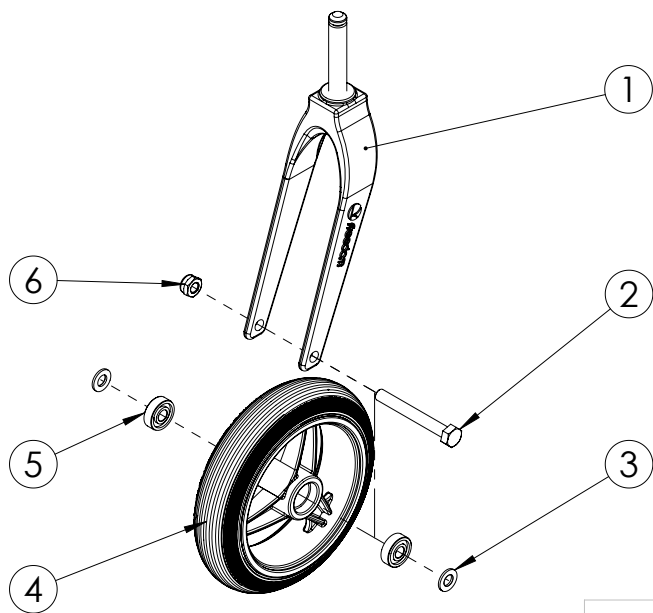

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	182663	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 P
	182662	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 M/G
2	20131	1	PA SEXT MA 8.8 8X65MM RP ZB (S/L)
3	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
4	174747	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/CINZA
	174718	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/PRETO
5	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
6	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 9 DE 15

ESCALA: 1:5





DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"

REV.:

K

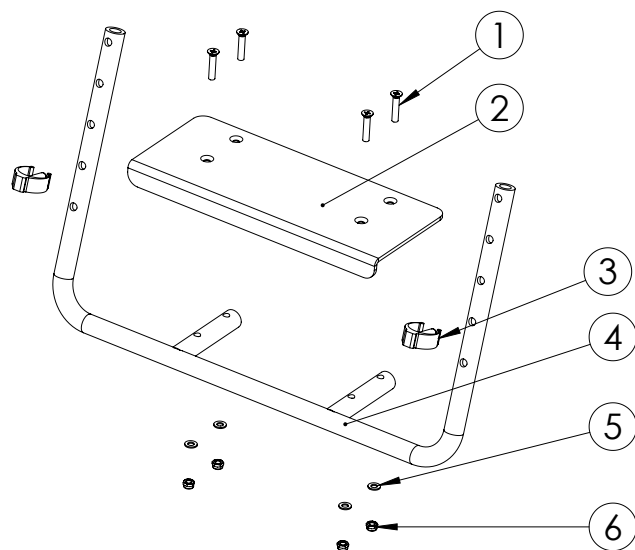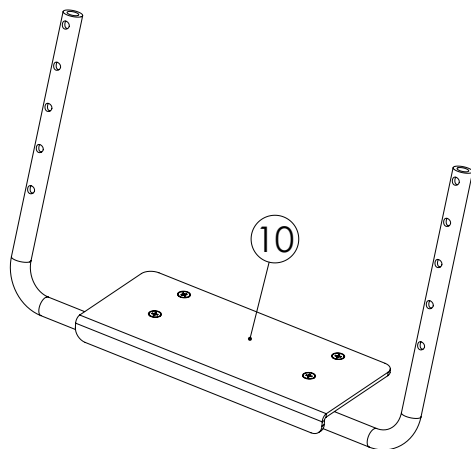

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	178778	CONJUNTO PEDALEIRA LIFE 34
	178780	CONJUNTO PEDALEIRA LIFE 37
	178777	CONJUNTO PEDALEIRA LIFE 41
	178779	CONJUNTO PEDALEIRA LIFE 45
	178781	CONJUNTO PEDALEIRA LIFE 50

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	1893.7	4	PA MAQ CH PH 5X25 MM ZB
2	173676	1	CHAPA PEDALEIRA LIFE L.34/37/41
	189247	1	CHAPA PEDALEIRA LIFE L.45/50
3	6889.6	2	CLIP E 1"
4	173893	1	PEDALEIRA LIFE 34
	173891		PEDALEIRA LIFE 37
	173886		PEDALEIRA LIFE 41
	173889		PEDALEIRA LIFE 45
	173890		PEDALEIRA LIFE 50
5	261.5	4	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5.3X10X1)
6	691.2	4	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 10 DE 15

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO PEDALEIRA LIFE

REV.:

D

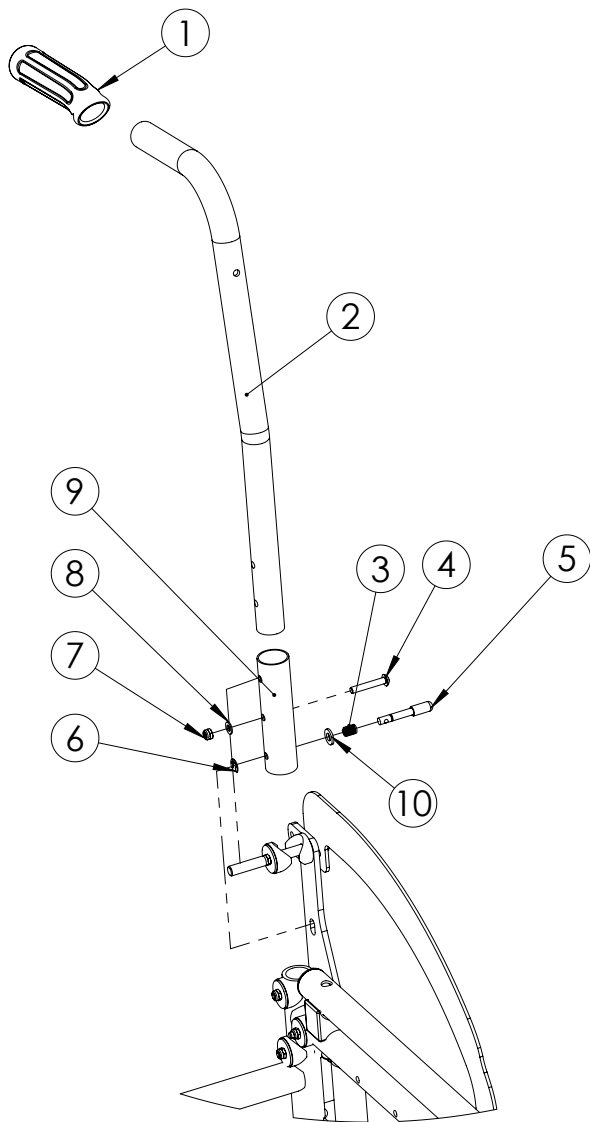

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	231	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	171953	1	TUBO ENCOSTO LIFE 30
	177916		TUBO ENCOSTO LIFE 35
	171949		TUBO ENCOSTO LIFE 40
	171951		TUBO ENCOSTO LIFE 45
	171948		TUBO ENCOSTO LIFE 50
	171955		TUBO ENCOSTO LIFE 55
3	163596	1	MOLA 6.93 x 0.60 x 25
4	5633	1	PA ALLEM 5X30MM MA INOX A2 C/AB(S/L)
5	171877	1	PINO TRAVA ENCOSTO RECLINAVEL LIFE
6	110649	1	ANEL ELASTICO TIPO RS 5 MM PARA EIXO 6 A 8 (RHENO) (S)
7	691	1	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	261	1	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
9	172785	1	TUBO ENTUBAR ENCOSTO LIFE
10	15442	1	ARRUELA LISA 6MM ZB(13,0X6,5X1,5)(S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 11 DE 15

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO LIFE

REV.:

A.01

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	481	2	PA SEXT MA 8.8 5X30MM RT ZB(S)
2	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	22524	2	PA AAT CP PH 4,8X13MM ZB
4	173658	1	ESTICADOR ENCOSTO 34 LIFE
	172839		ESTICADOR ENCOSTO 37 LIFE
	171959		ESTICADOR ENCOSTO 41 LIFE
	173599		ESTICADOR ENCOSTO 45 LIFE
	173659		ESTICADOR ENCOSTO 50 LIFE

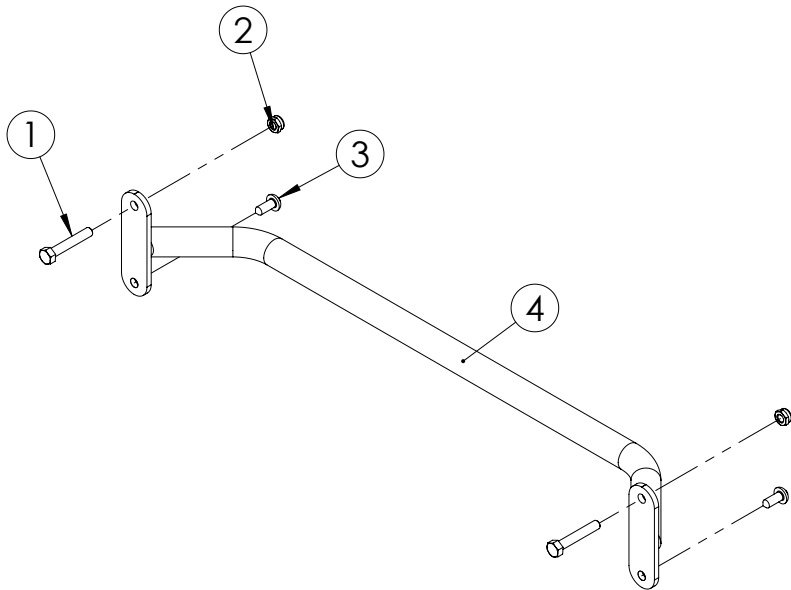

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 12 DE 15

ESCALA: 1:4




DESCRIÇÃO:


ESTICADOR DE ENCOSTO

REV.:

-.01

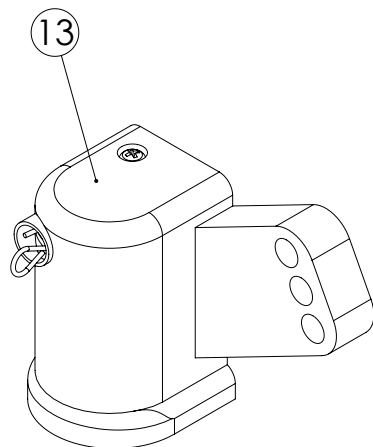

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	7965.0	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)
	7960.0	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)

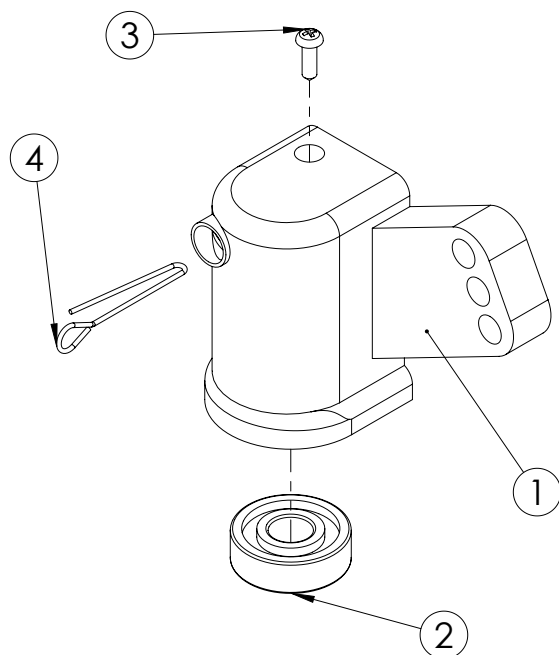

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	709.9	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
	809.5	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
2	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
3	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
4	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: yuri

DATA:

FOLHA 13 DE 15

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

G

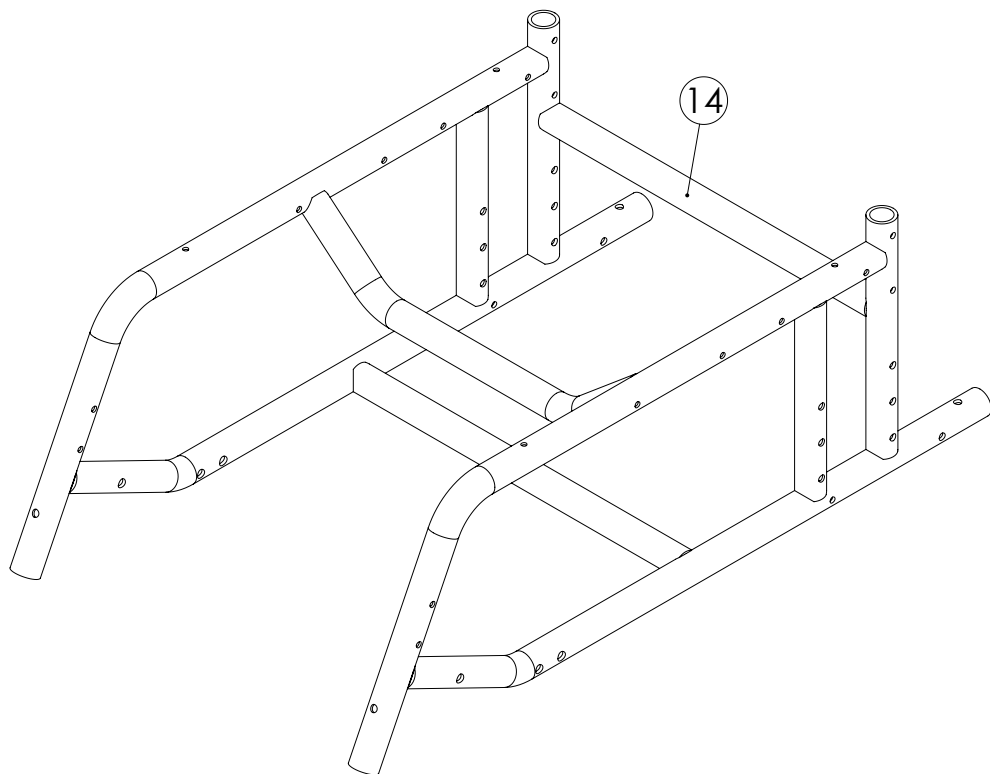

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14	28308	CHASSIS LIFE M 34 AMARELO
	28309	CHASSIS LIFE M 34 AZUL
	28310	CHASSIS LIFE M 34 GRAFITE
	28311	CHASSIS LIFE M 34 PRATA
	28312	CHASSIS LIFE M 34 PRETO BRILHANTE
	28313	CHASSIS LIFE M 34 VERDE
	28314	CHASSIS LIFE M 34 VERMELHO
	28315	CHASSIS LIFE M 34 VINHO
	28316	CHASSIS LIFE M 34 VIOLETA
	24392	CHASSIS LIFE M 37 AMARELO
	24393	CHASSIS LIFE M 37 AZUL
	24394	CHASSIS LIFE M 37 GRAFITE
	24395	CHASSIS LIFE M 37 PRATA
	24396	CHASSIS LIFE M 37 PRETO BRILHANTE
	24397	CHASSIS LIFE M 37 VERDE
	24398	CHASSIS LIFE M 37 VERMELHO
	24399	CHASSIS LIFE M 37 VINHO
	24400	CHASSIS LIFE M 37 VIOLETA
	24401	CHASSIS LIFE M 41 AMARELO
	24402	CHASSIS LIFE M 41 AZUL
	24403	CHASSIS LIFE M 41 GRAFITE
	24404	CHASSIS LIFE M 41 PRATA
	24405	CHASSIS LIFE M 41 PRETO BRILHANTE
	24406	CHASSIS LIFE M 41 VERDE
	24407	CHASSIS LIFE M 41 VERMELHO
	24408	CHASSIS LIFE M 41 VINHO
	24409	CHASSIS LIFE M 41 VIOLETA
	24410	CHASSIS LIFE M 45 AMARELO
	24411	CHASSIS LIFE M 45 AZUL
	24412	CHASSIS LIFE M 45 GRAFITE
	24413	CHASSIS LIFE M 45 PRATA
	24414	CHASSIS LIFE M 45 PRETO BRILHANTE
	24415	CHASSIS LIFE M 45 VERDE
	24416	CHASSIS LIFE M 45 VERMELHO
	24417	CHASSIS LIFE M 45 VINHO
	24418	CHASSIS LIFE M 45 VIOLETA
	24419	CHASSIS LIFE M 50 AMARELO
	24420	CHASSIS LIFE M 50 AZUL
	24421	CHASSIS LIFE M 50 GRAFITE
	24422	CHASSIS LIFE M 50 PRATA
	24423	CHASSIS LIFE M 50 PRETO BRILHANTE
	24424	CHASSIS LIFE M 50 VERDE
	24425	CHASSIS LIFE M 50 VERMELHO
	24426	CHASSIS LIFE M 50 VINHO
	24427	CHASSIS LIFE M 50 VIOLETA

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 14 DE 15

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:


CHASSIS LIFE

REV.:

D

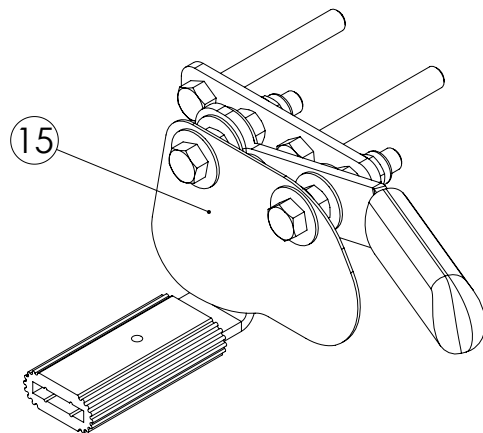

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	182920	CONJUNTO FREIO 4 FUROS LUMINA/PLUS/LIFE LD [1801]
	182921	CONJUNTO FREIO 4 FUROS LUMINA/PLUS/LIFE LE [1801]

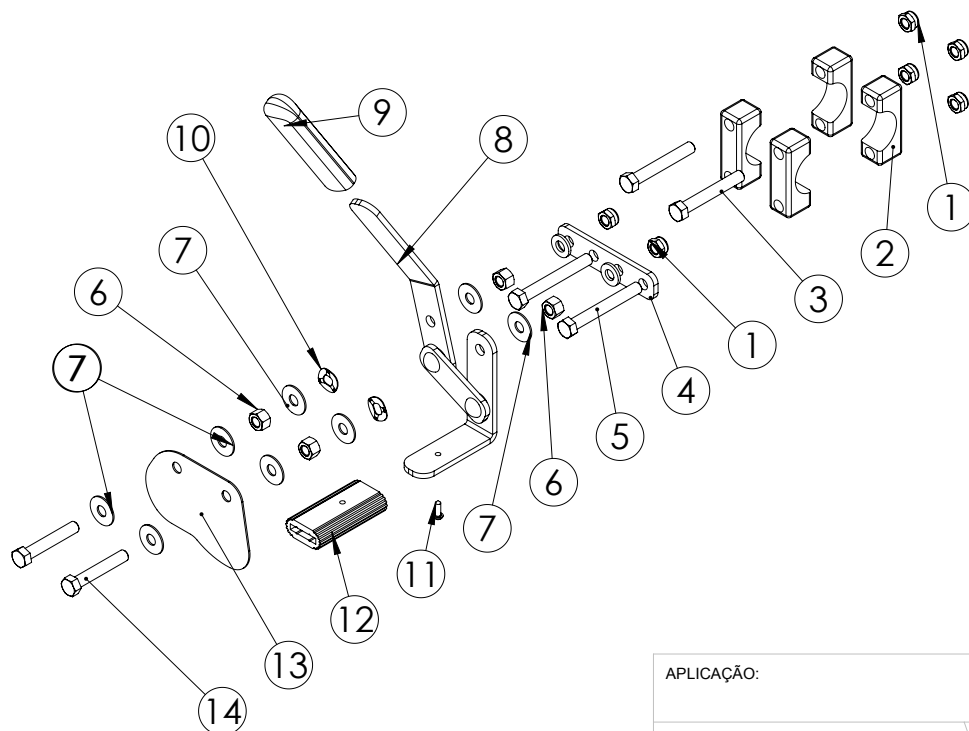

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	1701.9	4	ABRACADEIRA 1" CAD.
3	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	177950	1	PRANCHETA FREIO 4 FUROS [1801]
5	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
6	891.5	4	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
7	10083.8	8	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
8	8991.5	1	FREIO LADO DIREITO
	5121.7	1	FREIO LADO ESQUERDO
9	182661	1	LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS PRETO (17,2GR) (S)
10	24492	2	ARRUELA ONDULADA AOC 6,3X14X0,46
11	417.0	1	PA AAT CP PH 2.9X9.5MM ZP
12	125450	1	perfil freio manual
13	137190	1	PLACA FREIO MANUAL (MOD. 2011) CORTE LASER
14	12426.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 09/09/2019

FOLHA 15 DE 15

ESCALA: 1:2



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO FREIO

REV.:

G