


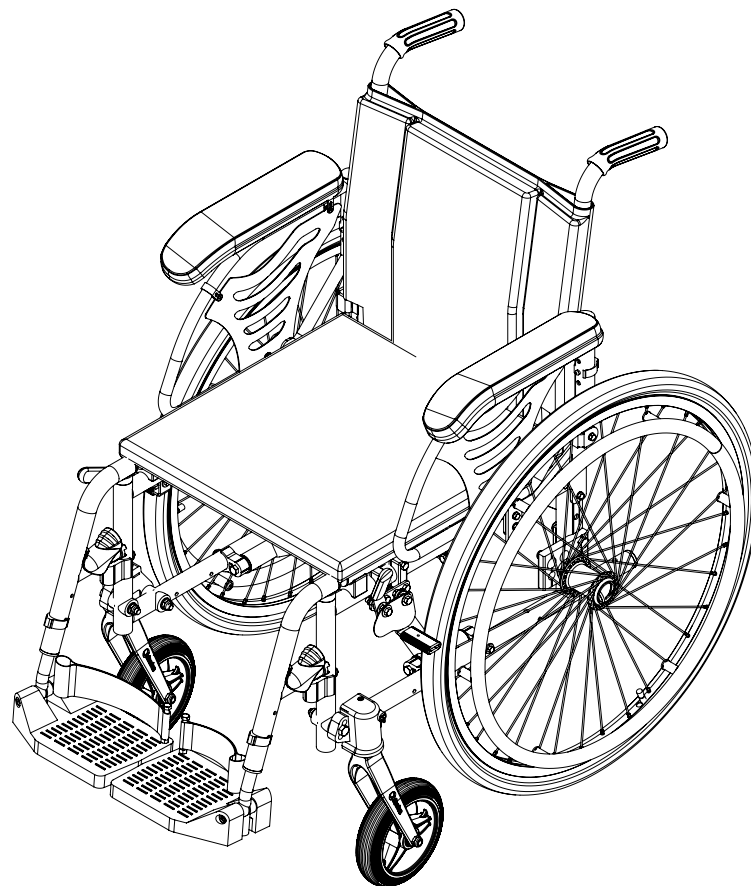

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 1 DE 16


ESCALA: 1:10



DESCRIÇÃO:
LUMINA

REV.:

D

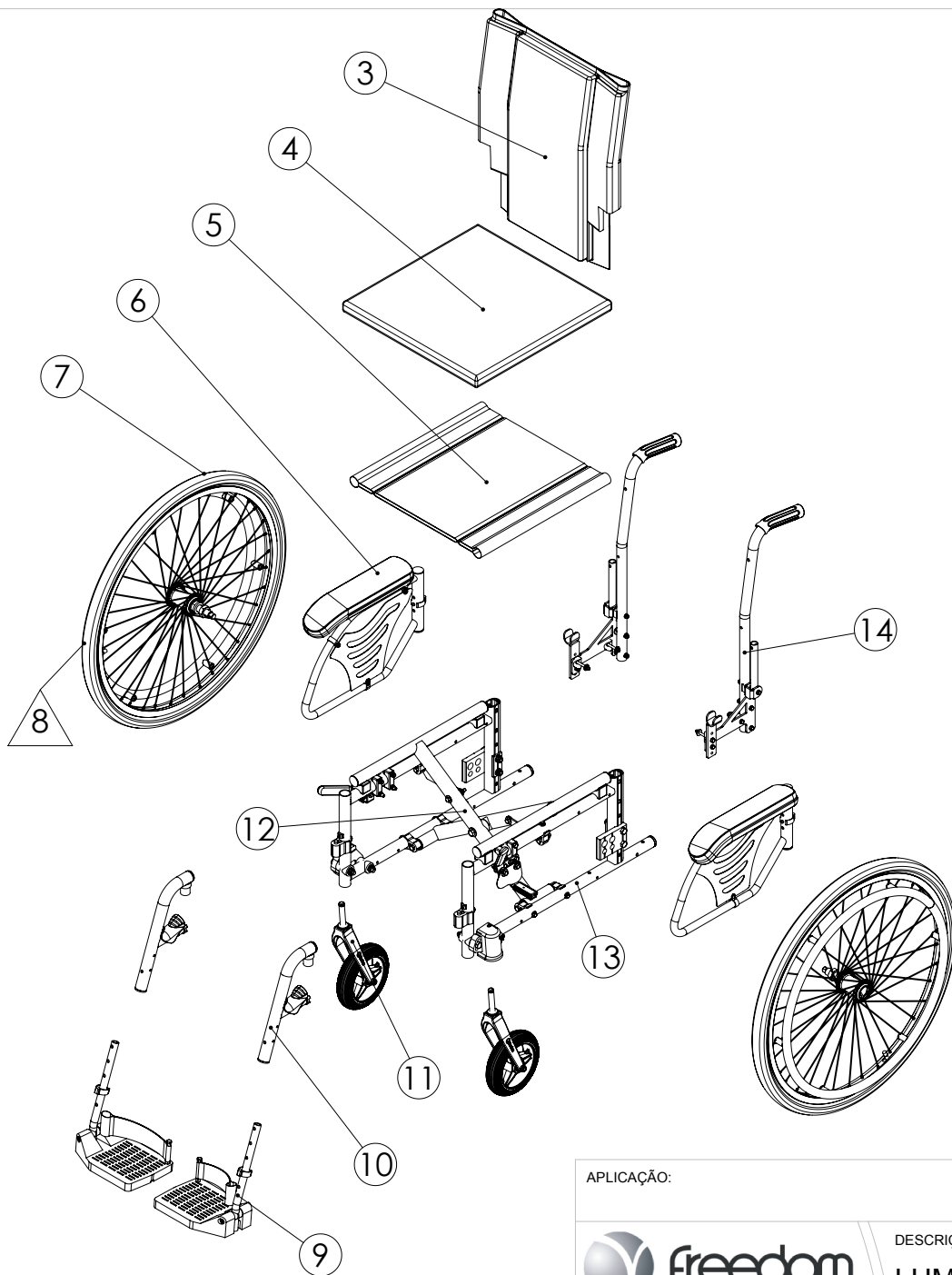

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:
LUMINA

DES.: JONATHAN M.

FOLHA 2 DE 16


DATA:

ESCALA: 1:15



REV.:

D

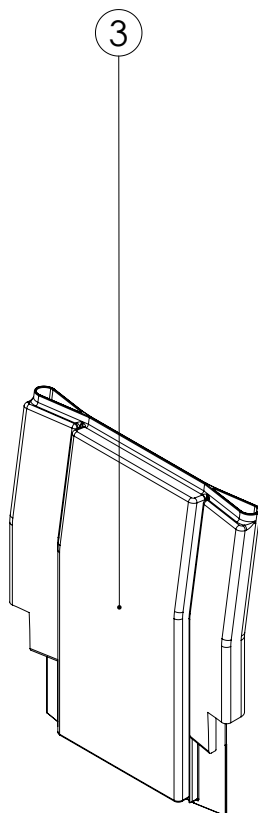

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23566	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/30
	23573	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/35
	22541	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/40
	22542	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/45
	22543	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/50
	23567	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/30
	23574	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/35
	22544	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/40
	22545	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/45
	22546	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/50
	23575	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/35
	22547	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/40
	22548	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/45
	22549	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/50
	23576	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/35
	22550	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/40
	22551	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/45
	22552	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/50
	23577	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/35
	22533	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/40
	22554	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/45
	22555	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 3 DE 16

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

REV.:

F

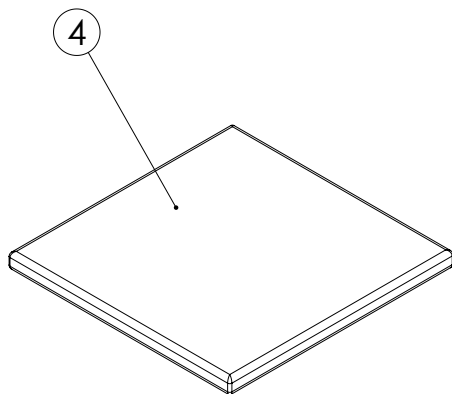

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.33 /P.37 5CM
	23303	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.33 /P.42 5CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.37/P.37 5CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.37/P.42 5CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.37/P.47 5CM
	20292	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41/P.37 5CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41 /P.42 5CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41 /P.47 5CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.41/P.52 5CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.45 /P.42 5CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.45 /P.47 5CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.45 /P.52 5CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.50 /P.42 5CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.50 /P.47 5CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO STYLES/COMPACT/LUMINA/LIFE L.50 /P.52 5CM

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 4 DE 16

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

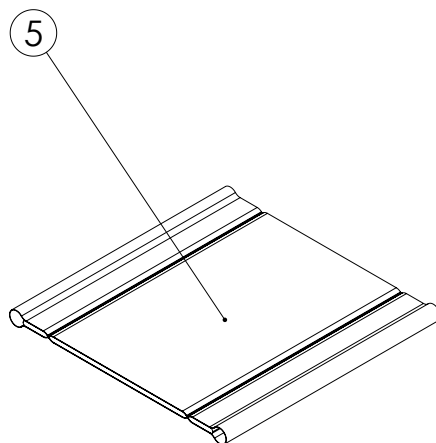

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 5 DE 16

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

C

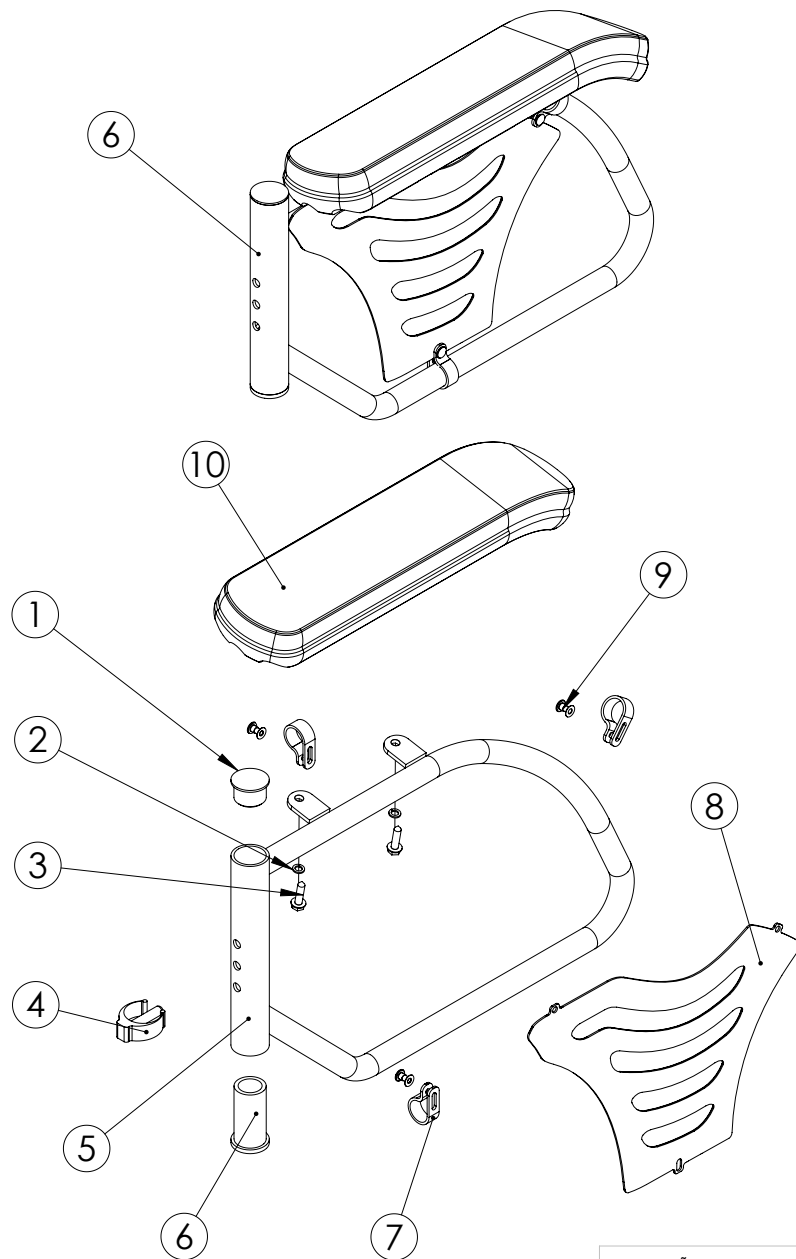

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	165881	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LE COMFORT
	165884	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LD COMFORT
	165880	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LE COMFORT
	165883	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LD COMFORT
	165882	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LE COMFORT
	165885	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LD COMFORT
	186225	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LD STANDARD
	186222	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LE STANDARD
	186213	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LE STANDARD
	186224	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LD STANDARD
	186226	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LD STANDARD
	186223	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LE STANDARD

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	107756	1	TAMPAO P/TUBO 1"X2MM CAD.ALUM 2011 (S)
2	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
3	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
4	6889.6	1	CLIP E 1"
5	164315	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO P LE
	164317	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO P LD
	164398	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO M LE
	164397	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO M LD
	164400	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO G LE
	164399	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO G LD
6	107427	1	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM
7	110152.8	3	ABRACADEIRA NXR-8 PRETA P-CABO (12,7 A 15,9) (S)
8	165613	1	CARENAGEM BRACO LP CORTE LASER
	165612	1	CARENAGEM BRAÇO LM CORTE LASER
	165611	1	CARENAGEM BRACO LG CORTE LASER
9	2821.5	3	REBITE DE REMANCHO NR 3 FPTO (S)
10	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

BRAÇO LUMINA

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 6 DE 16

ESCALA: 1:5



REV.:

G

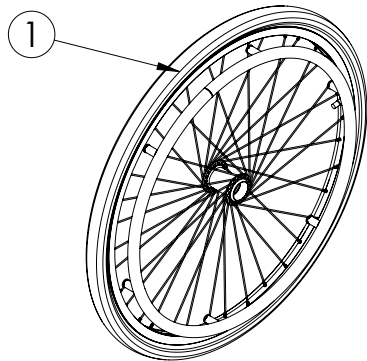


TABELA 1 PG.7			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	181451	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO INF. ARG. ALUMINIO EIXO FIXO/QUICK
	58094	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO INF. ARG. ALUMINIO C/ CALOTA EIXO FIXO/QUICK
	181978	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO INF. ARG. PINOS EIXO FIXO/QUICK
	184632	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO MAC. ARG. ALUMINIO CALOTA EIXO FIXO/QUICK
	181985	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO MAC. ARG. ALUMINIO EIXO FIXO/QUICK
	181986	1	CONJUNTO RODA 24" ALUMINIO MAC. ARG. PINOS EIXO FIXO/QUICK

TABELA 2 PG.7			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
12	241.0	1	PNEU BIC 24X 1 3/8 CINZA (S)
	121.0	1	CAMARA DE AR 26 A (S)
	23267	1	RODA TRAS.PU 24X1,3/8 PARA CADEIRA DE RODAS

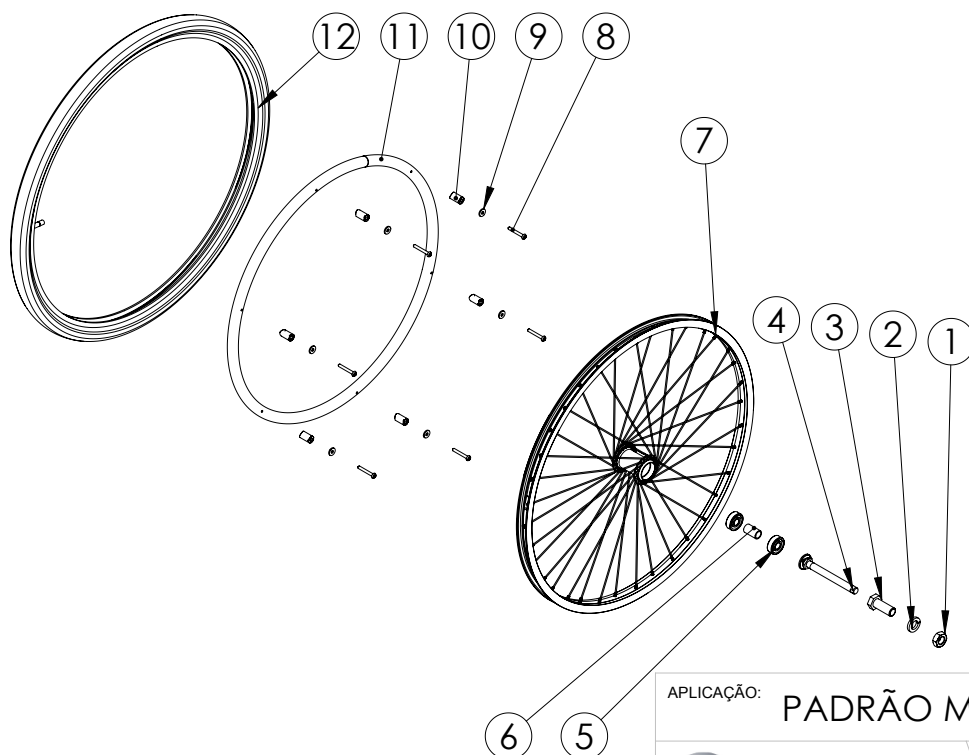


TABELA 3 PG.7			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
	11035	1	PA SEXT MA 8.8 12X90MM RP ZB (S/L)
5	351	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
6	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
7	185083	1	CONJUNTO 24" C/ RAIOS
8	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
9	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
10	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
11	4021.5	1	ARGOLA PROPULSAO 24"
	181890	1	CONJUNTO ARGOLA PROPULSAO ARO 24" C/ PINOS

APLICAÇÃO: PADRÃO M/G



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO RODA RAIADA 24"

DES.: JONATHAN M.

FOLHA 7 DE 16

DATA: 12/05/2010

ESCALA: 1:12



REV.:

T.03

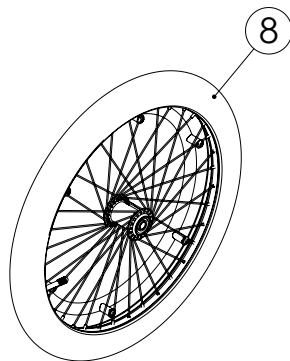


TABELA 1 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
8	181895	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. C/ PINOS EIXO FIXO/QUICK
	181892	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. EIXO FIXO/QUICK

TABELA 2 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
12	119.8	1	PNEU BIC 20X1.75 PETIZ II CINZA
	911.3	1	CAMARA DE AR MSE 20"

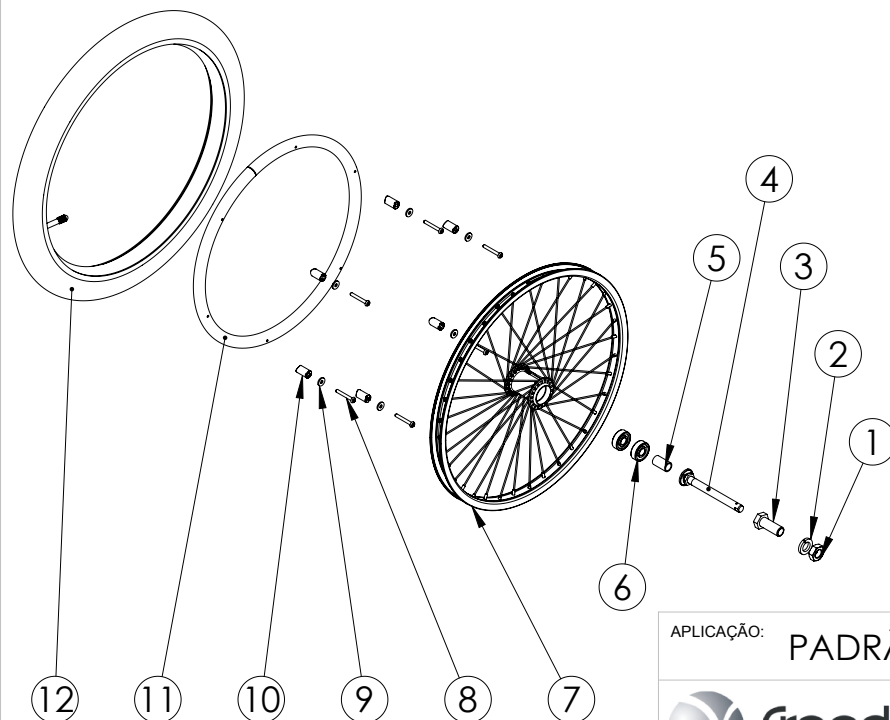


TABELA 3 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
	11035	1	PA SEXT MA 8.8 12X90MM RP ZB (S/L)
5	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
6	351	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
7	181898	1	CONJUNTO 20" C/ RAIOS
8	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
9	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
10	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
11	3021.0	1	ARGOLA PROPULSAO 20"
	181891	1	CONJUNTO ARGOLA PROPULSAO ARO 20" C/ PINOS

APLICAÇÃO: PADRÃO P



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO RODA RAIADA 20"


DES.: JONATHAN M.
FOLHA 8 DE 16

DATA:
ESCALA: 1:12



REV.:
C

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	143059	CONJUNTO PEDALEIRA LUMINA LD 41/45/50/55/60
	143062	CONJUNTO PEDALEIRA LUMINA LE 41/45/50/55/60
	109542	CONJUNTO PEDALEIRA LD CADEIRA LP 34
	143650	CONJUNTO PEDALEIRA LE CADEIRA LP 34

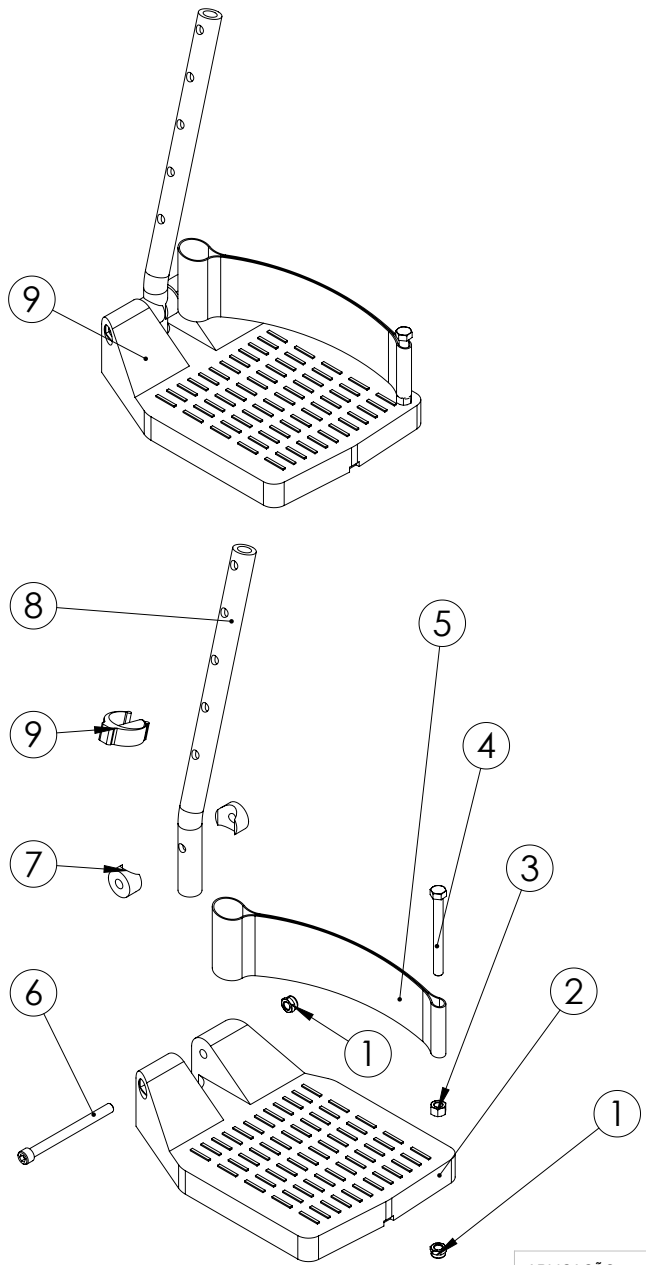

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
	106147	1	PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
3	891.5	1	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	12531.8	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/2 RT ZB
5	2459.7	1	TIRA APOIO CALCANHAR
6	18159.5	1	PA ALLEM 1/4X3 MA INOX C/CILINDRICA(S)
7	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA CAD.ALUM 2011 (S)
8	106150	1	TUBO PEDALEIRA LUMINA
9	6889.6	1	CLIP E 1"

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 9 DE 16

ESCALA: 1:5



REV.:


E



freedom

DESCRIÇÃO:

PEDALEIRA

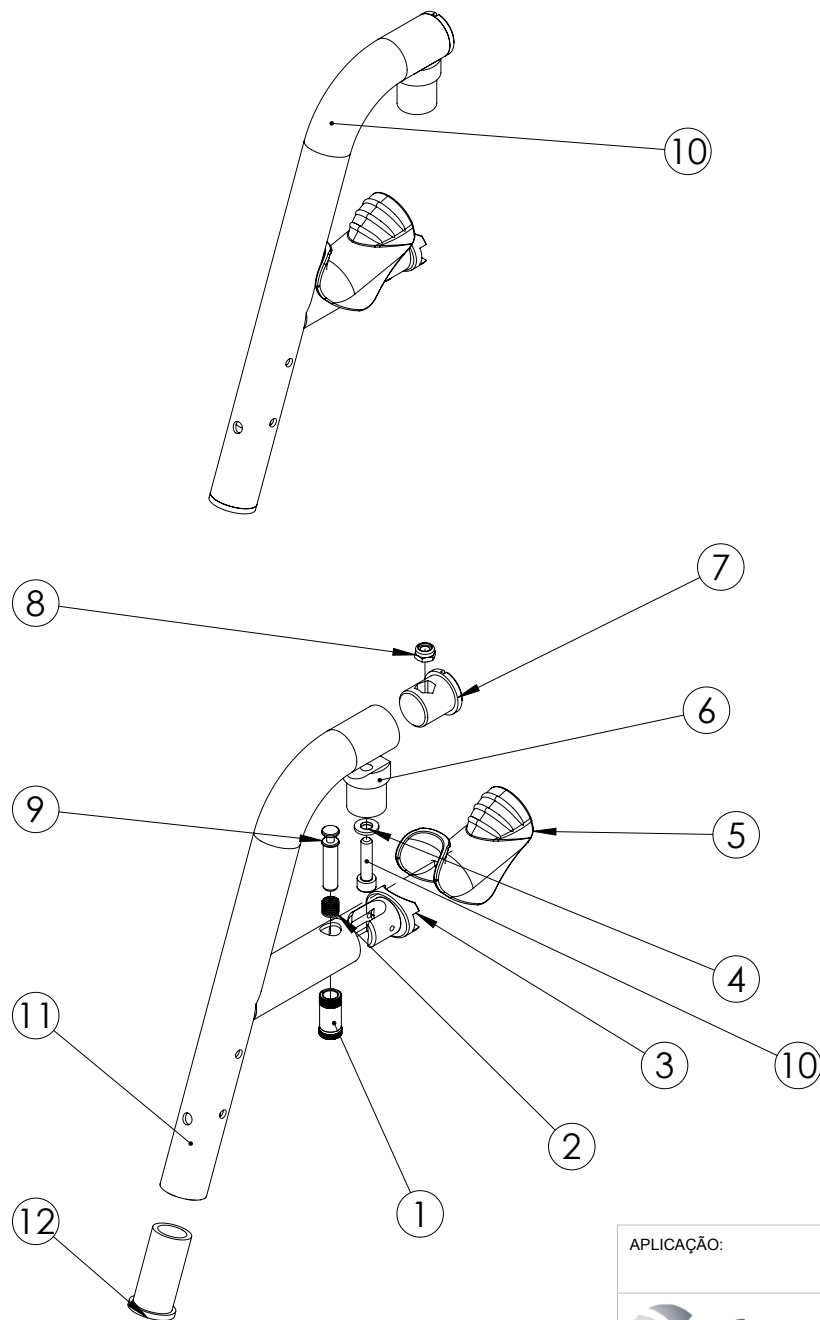

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	109586	SUPORE PEDALEIRA CADEIRA LP
	106634	SUPORE PEDALEIRA CADEIRA LM
	109588	SUPORE PEDALEIRA CADEIRA LG

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	161762	1	BUCHA DESARME
2	163609	1	MOLA 8.53 x 0.60 x 20
3	107426	1	BUCHA TRAVA PEDALEIRA
4	15442.3	1	ARRUELA LISA 6MM ZB (S/L)
5	106957	1	ACIONADOR DESENGATE
6	107425	1	BUCHA ARTICULACAO PEDALEIRA
7	107424	1	FIX. ARTICULACAO PEDALEIRA
8	11852.4	1	PO SECT NY BX CL8 6H10 ZB (S) 1.03.03.03
9	109806.3	1	PINO GATILHO PE-ARTICULADO
10	18158	1	PA ALLEM 6X25MM MA INOX A2 C/CILINDRICA(S)
11	126764	1	SUPORE TUBO PEDALEIRA LP
	114076	1	SUPORE TUBO PEDALEIRA LM
	114075	1	SUPORE TUBO PEDALEIRA LG
12	107427	1	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

SUPORE PEDALEIRA CADEIRA

DES.: JONATHAN M.

DATA:


FOLHA 10 DE 16

ESCALA: 1:4




REV.:

R

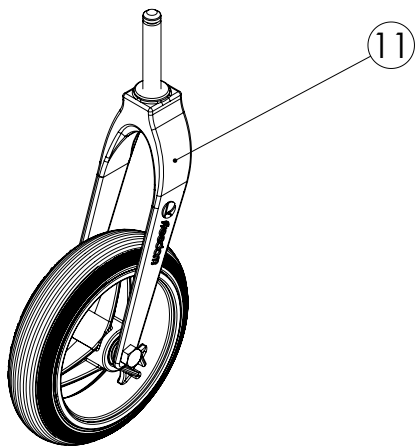

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	181950	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/PRETO)
	141904	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/CINZA)
	178812	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	178811	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/PRETO)

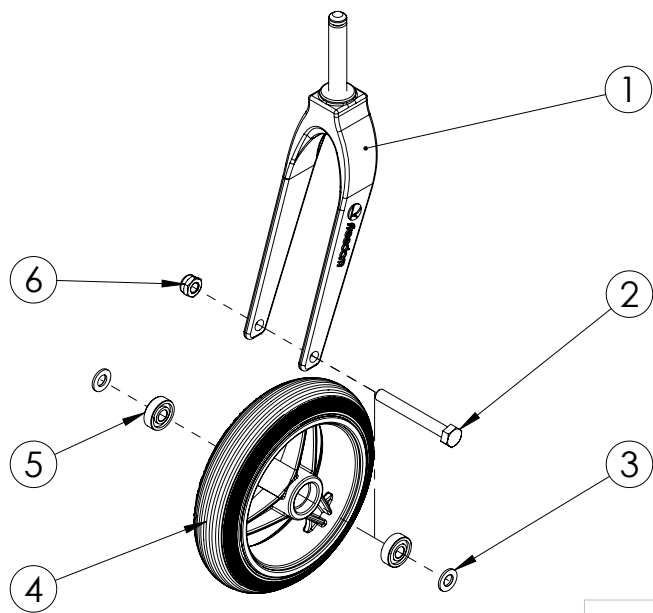

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	182663	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 P
	182662	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 M/G
2	20131	1	PA SEXT MA 8.8 8X65MM RP ZB (S/L)
3	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
4	174747	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/CINZA
	174718	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/PRETO
5	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
6	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 01/10/2009

FOLHA 11 DE 16

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"

REV.:

K

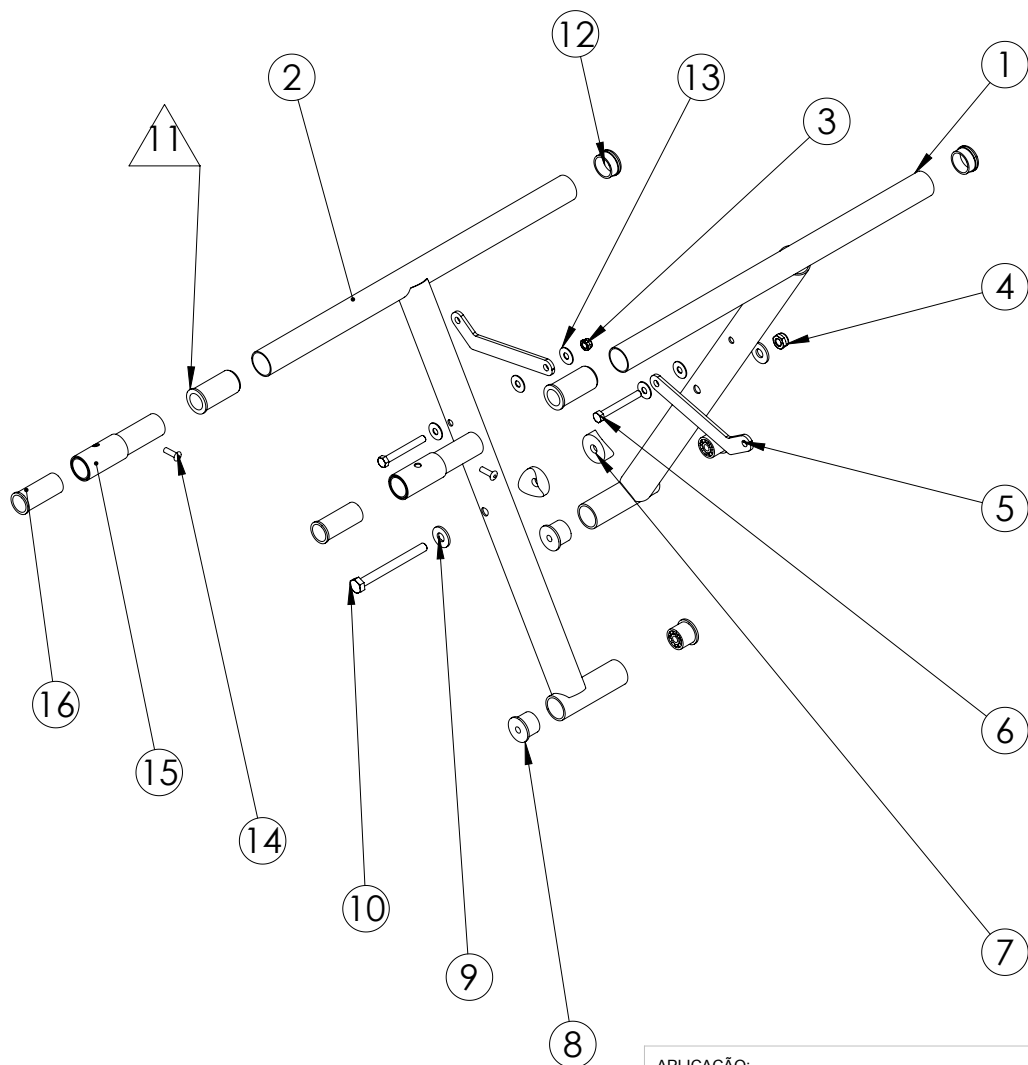

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	113646		TUBO X 34/37 LD P ALUMINIO
	113662		TUBO X 37/37 LD P ALUMINIO
	113665		TUBO X 37/42 LD M ALUMINIO
	113636		TUBO X 41/42 LD M ALUMINIO
	113685		TUBO X 45/42 LD M ALUMINIO
	113698		TUBO X 50/42 LD M ALUMINIO
	113748		TUBO X 41/47 LD G ALUMINIO
	113749		TUBO X 45/47 LD G ALUMINIO
2	113692		TUBO X 50/47 LD G ALUMINIO
	113645		TUBO X 34/37 LE P ALUMINIO
	113658		TUBO X 37/37 LE P ALUMINIO
	113637		TUBO X 41/42 LE M ALUMINIO
	113686		TUBO X 45/42 LE M ALUMINIO
	113699		TUBO X 50/42 LE M ALUMINIO
	113664		TUBO X 37/42 LE M ALUMINIO
	113747		TUBO X 41/47 LE G ALUMINIO
5	113750		TUBO X 45/47 LE G ALUMINIO
	113691		TUBO X 50/47 LE G ALUMINIO
3	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
5	154383	2	SUP. FIXACAO DO X 34 SP CORTE LASER
	146313	2	SUP. FIXACAO DO X 37 SM/SP CORTE LASER
	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
	146312	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SM CORTE LASER
	146314	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SM CORTE LASER
	146523	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SG CORTE LASER
	146522	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SG CORTE LASER
	146521	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SG CORTE LASER
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" (S)
8	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO
9	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
10	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
11	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
12	149290	2	TAMPAO 1"
13	10083.8	6	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
14	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
15	159463	2	PROLONGADOR PUNHO/X STYLES
16	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)

APLICAÇÃO:
ITEM 11 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 12 DE 16

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO X ALUMINIO

REV.:

F

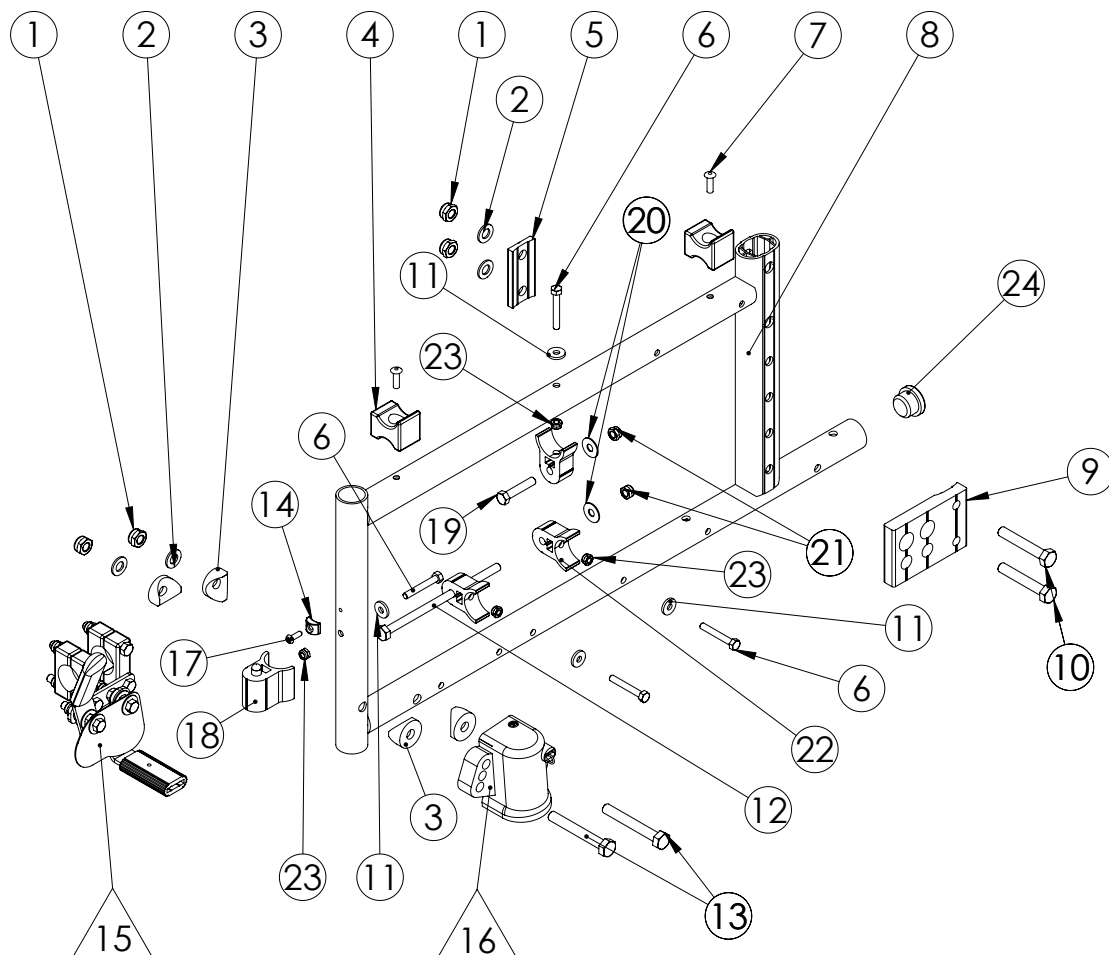

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	791.9	4	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
2	10507.4	4	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
3	10017.0	4	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
4	1704.3	2	CADEIRINHA 1" CAD.
5	173726	1	MEIA CANA TUBO OBLONGO
6	133037	4	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
7	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
8	22724	1	CHASSIS ALUMINIO P AMARELO
	22727	1	CHASSIS ALUMINIO P AZUL VERNIZ
	22722	1	CHASSIS ALUMINIO P GRAFITE
	22729	1	CHASSIS ALUMINIO P PRATA VERNIZ
	22721	1	CHASSIS ALUMINIO P PRETO BRILHANTE
	22725	1	CHASSIS ALUMINIO P VERDE VERNIZ
	22726	1	CHASSIS ALUMINIO P VERMELHO VERNIZ
	22723	1	CHASSIS ALUMINIO P VINHO
	22728	1	CHASSIS ALUMINIO P VIOLETA VERNIZ
	22733	1	CHASSIS ALUMINIO M AMARELO
	22736	1	CHASSIS ALUMINIO M AZUL VERNIZ
	22731	1	CHASSIS ALUMINIO M GRAFITE
	22738	1	CHASSIS ALUMINIO M PRATA VERNIZ
	22730	1	CHASSIS ALUMINIO M PRETO BRILHANTE
	22734	1	CHASSIS ALUMINIO M VERDE VERNIZ
	22735	1	CHASSIS ALUMINIO M VERMELHO VERNIZ
	22732	1	CHASSIS ALUMINIO M VINHO
	22737	1	CHASSIS ALUMINIO M VIOLETA VERNIZ
	22742	1	CHASSIS ALUMINIO G AMARELO
	22745	1	CHASSIS ALUMINIO G AZUL VERNIZ
	22740	1	CHASSIS ALUMINIO G GRAFITE
	22747	1	CHASSIS ALUMINIO G PRATA VERNIZ
	22739	1	CHASSIS ALUMINIO G PRETO BRILHANTE
	22743	1	CHASSIS ALUMINIO G VERDE VERNIZ
	22744	1	CHASSIS ALUMINIO G VERMELHO VERNIZ
	22741	1	CHASSIS ALUMINIO G VINHO
	22746	1	CHASSIS ALUMINIO G VIOLETA VERNIZ
9	173724	1	PLACA CAD. MANUAL LD [1804]
	178143	1	PLACA CAD. MANUAL LE [1804]
10	11310.7	2	PA SEXT MA 8.8 8X50MM RT ZB (S/L)
11	393.0	4	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
12	16641	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X5 RP ZB (S/L)
13	11832.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
14	107747	1	TRAVAMENTO PEDALEIRA
15	PG.15	1	VER PÁGINA 15
16	PG.16	1	VER PÁGINA 16
17	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
18	161770	1	MONTAGEM PERFIL SUPORTE PEDALEIRA 2016
19	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
20	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
21	491	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
22	124518	3	PERFIL U FURO PORCA
23	691.2	4	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
24	1703.5	1	TAMPAO 1" P/ 1/8" CAD.ALUM. (S)

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CHASSIS

DES.: JONATHAN M.

FOLHA 13 DE 16


DATA:

ESCALA: 1:6



REV.:

-.04

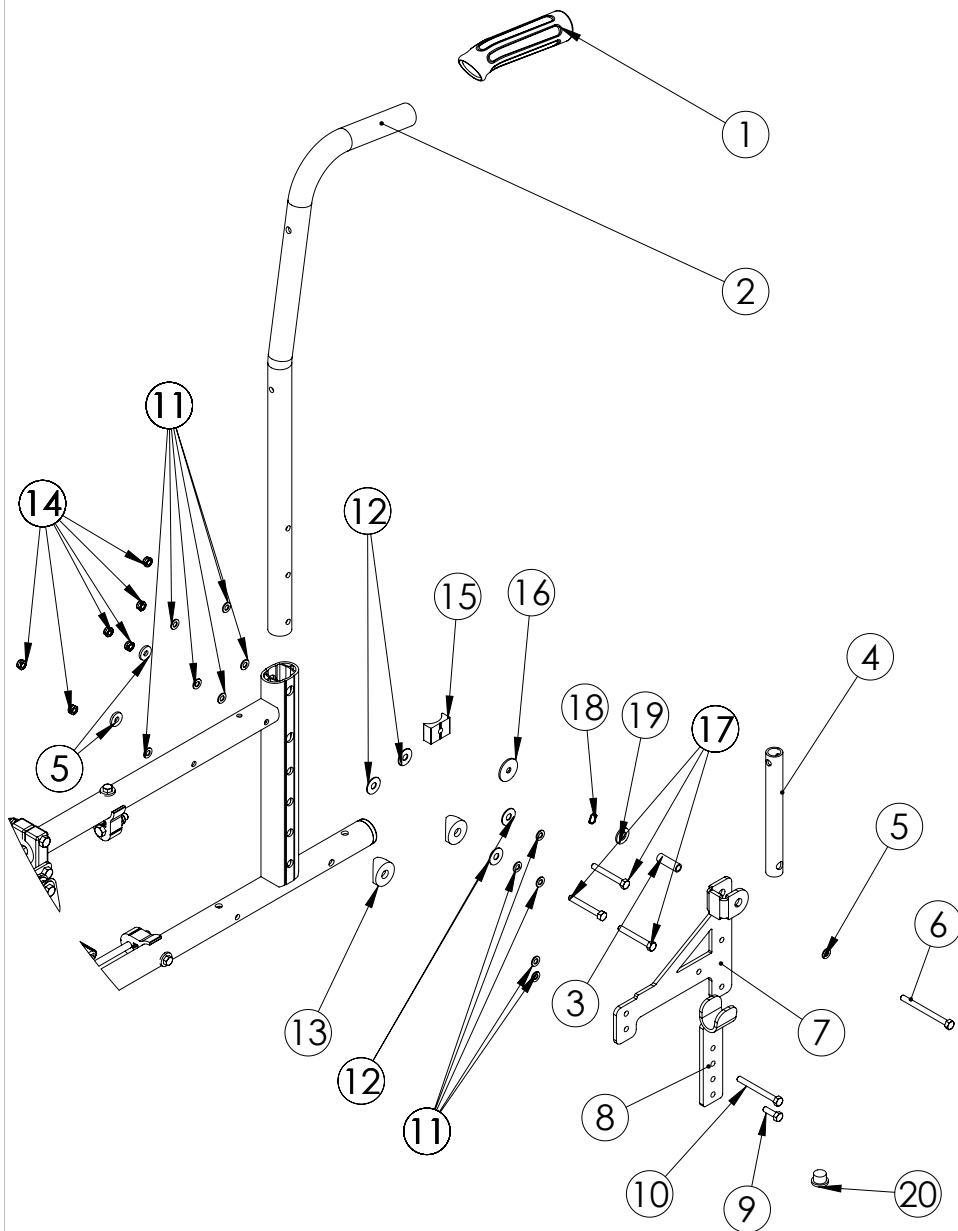

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	180440	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40/30 [1806]
	179334	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40 [1804]
	179336	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 45 [1804]
	179333	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 50 [1804]
3	180507	1	BUCHA BRAÇO ARTICULADO [1807]
4	182557	1	TUBO FIXACAO BRACO ART [1902]
5	393.0	7	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
6	19589.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X60MM RT ZB (S)
7	165543	1	PLACA BRACO RECLINAVEL LE
	163056	1	PLACA BRACO RECLINAVEL LD
8	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
9	881.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
10	7821.2	1	PA SEXT MA 8.8 5X50MM RT ZB (S)
11	261.5	11	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
12	10083.8	6	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
13	10017.0	6	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
14	691.2	10	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
15	104383	1	PERFIL MEIA CANA 1" 18MM
16	23512	1	ARRUELA CHAPEADORA 3/16 ZB(5,6X23X1,5)
17	581.9	3	PA SEXT MA 8.8 5X40MM RT ZB (S)
18	15651	1	ARRUELA ONDULADA 8MM FOSFATIZADA
19	10507.4	1	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
20	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 14 DE 16

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:


ENCOSTO FIXO

REV.:

-.04

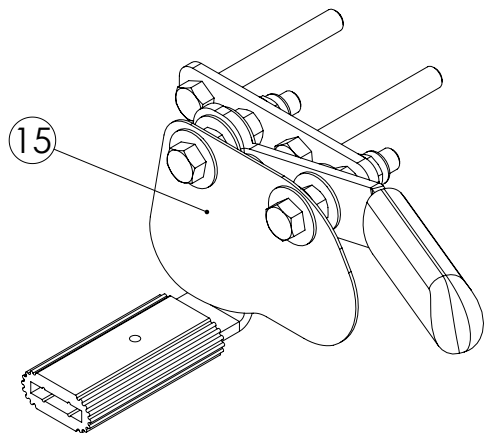

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	182920	CONJUNTO FREIO 4 FUROS LUMINA/PLUS/LIFE LD [1801]
	182921	CONJUNTO FREIO 4 FUROS LUMINA/PLUS/LIFE LE [1801]

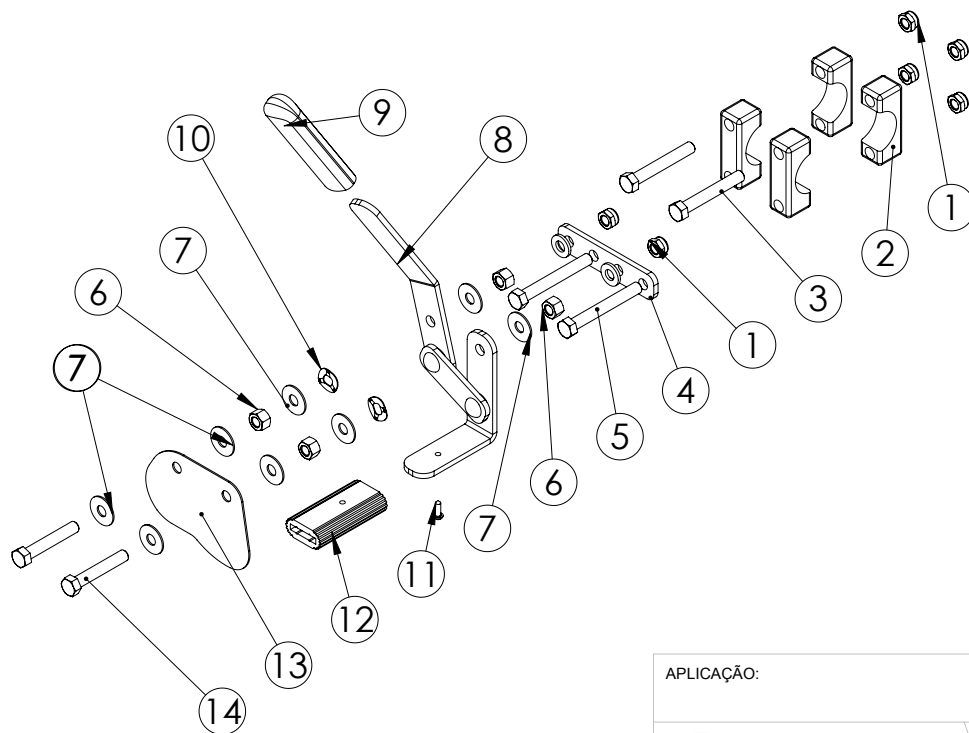

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	1701.9	4	ABRACADEIRA 1" CAD.
3	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	177950	1	PRANCHETA FREIO 4 FUROS [1801]
5	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
6	891.5	4	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
7	10083.8	8	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
8	8991.5	1	FREIO LADO DIREITO
	5121.7	1	FREIO LADO ESQUERDO
9	182661	1	LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS PRETO (17,2GR) (S)
10	24492	2	ARRUELA ONDULADA AOC 6,3X14X0,46
11	417.0	1	PA AAT CP PH 2.9X9.5MM ZP
12	125450	1	perfil freio manual
13	137190	1	PLACA FREIO MANUAL (MOD. 2011) CORTE LASER
14	12426.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 15 DE 16

ESCALA: 1:2





DESCRIÇÃO:

CONJUNTO FREIO

REV.:

G

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	61674.5	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ALUM
	61673.7	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ALUM

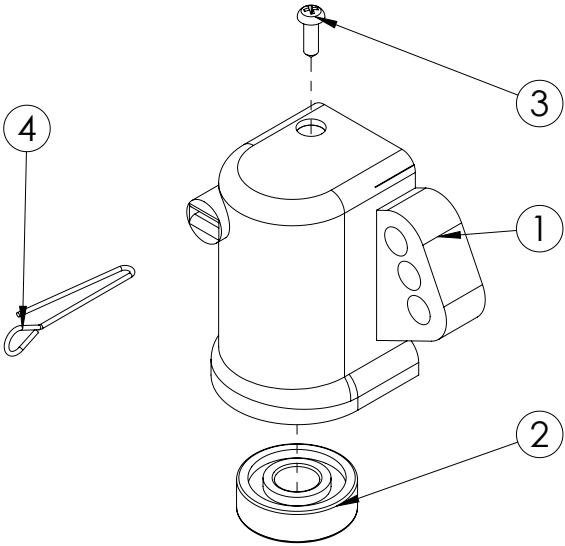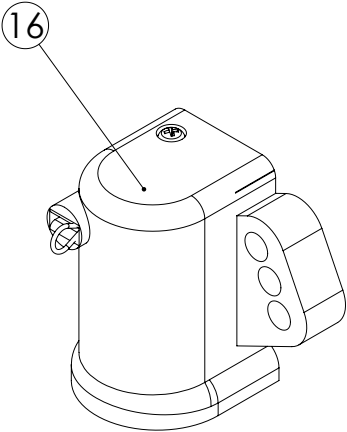

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	19446.8	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ALUM. (S)
	19447.6	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ALUM.(S)
2	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
3	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
4	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 01/10/2009

FOLHA 16 DE 16

ESCALA: 1:2



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

D