


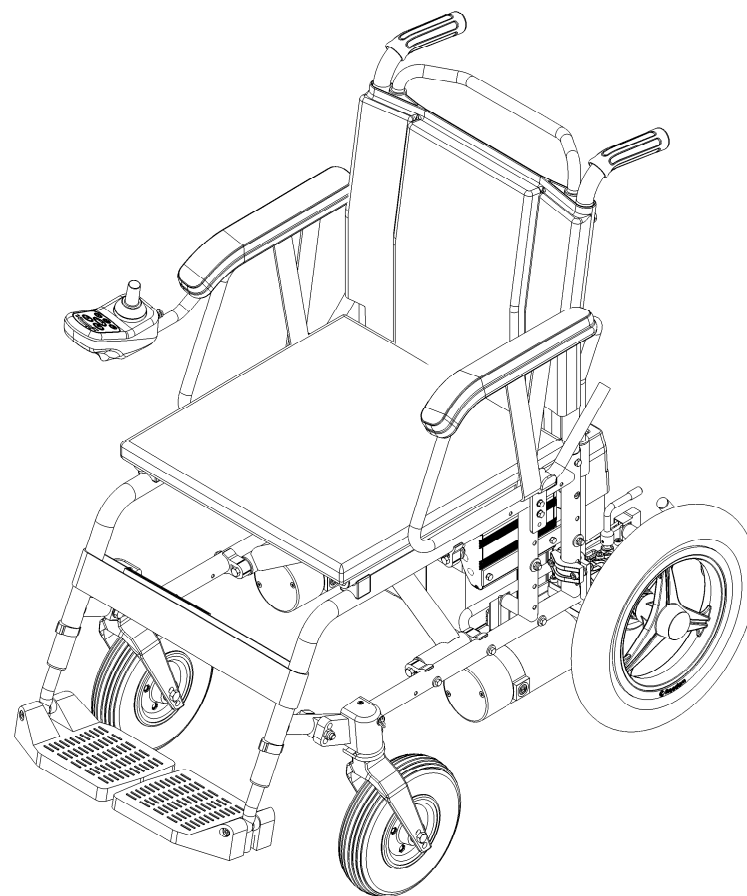

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 1 DE 25

ESCALA: 1:10




REV.:



DESCRIÇÃO:
COMPACT

C.02

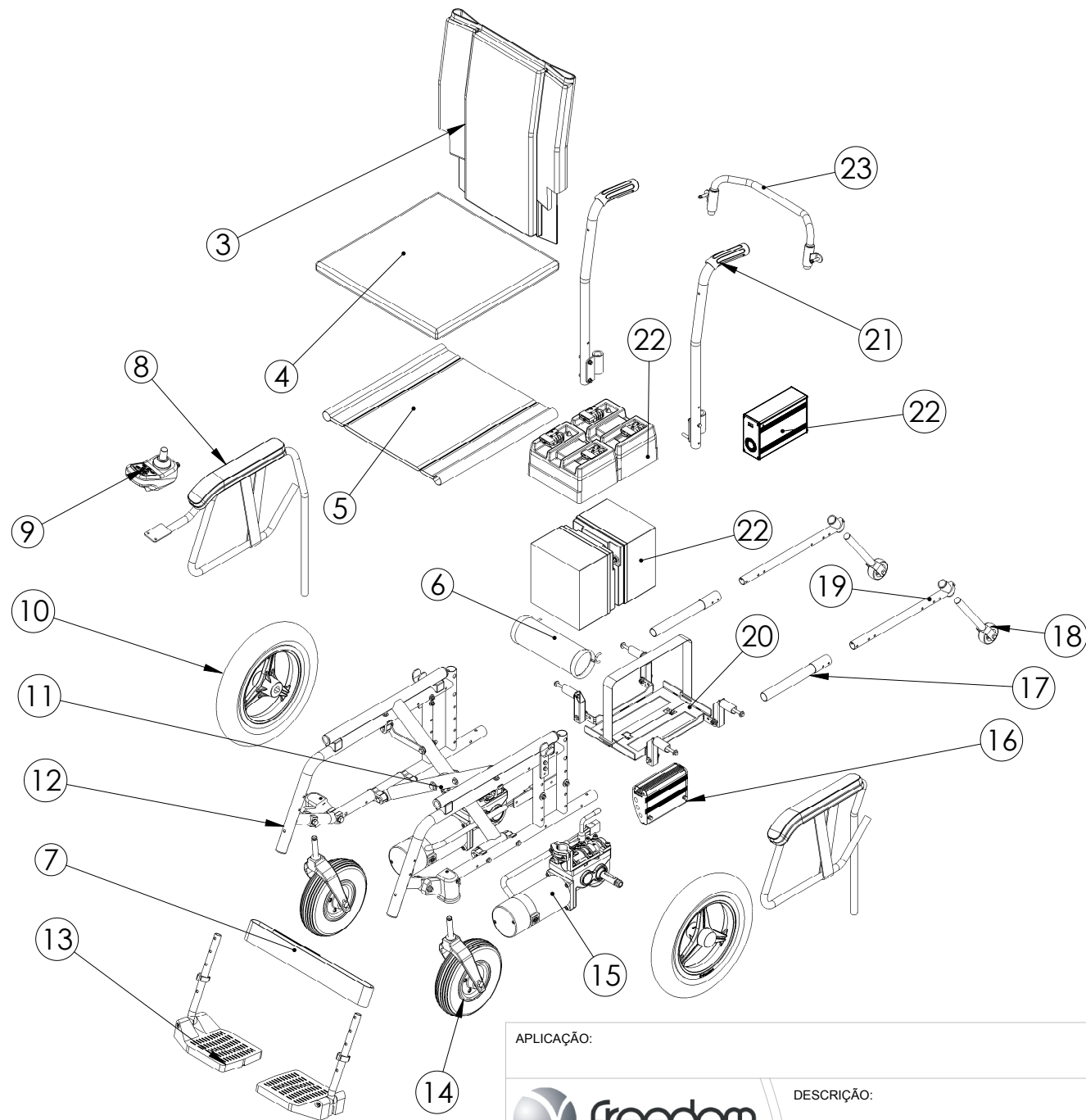

APLICAÇÃO:




DESCRIÇÃO:
COMPACT

DES.: Lucas
FOLHA 2 DE 25

DATA:
ESCALA: 1:15



REV.:
C.02

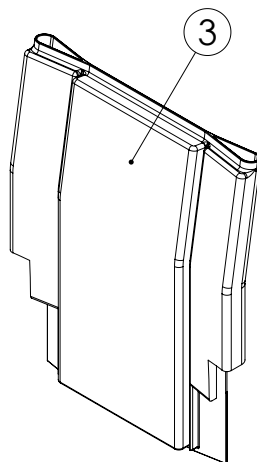

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23556	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/30
	23659	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/35
	20444	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/40
	20445	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/45
	20446	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/50
	23562	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/30
	23660	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/35
	20191	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/40
	20199	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/45
	20207	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/50
	23661	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/35
	20194	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/40
	20202	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/45
	20210	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/50
	23662	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/35
	20195	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/40
	20203	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/45
	20211	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/50
	23663	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/35
	20198	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/40
	20206	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/45
	20214	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: gabriel

DATA:

FOLHA 3 DE 25

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

REV.:

F

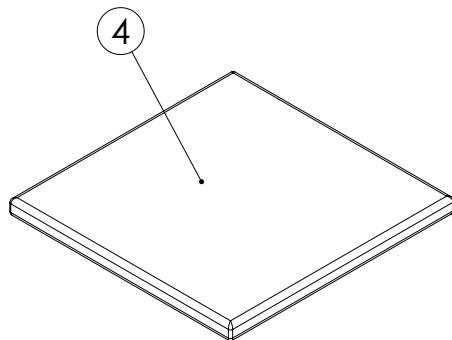

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO L.33/P.37 3CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.37 3CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.42 3CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.47 3CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.42 3CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.47 3CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.52 3CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.42 3CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.47 3CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.52 3CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.42 3CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.47 3CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.52 3CM

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 4 DE 25

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

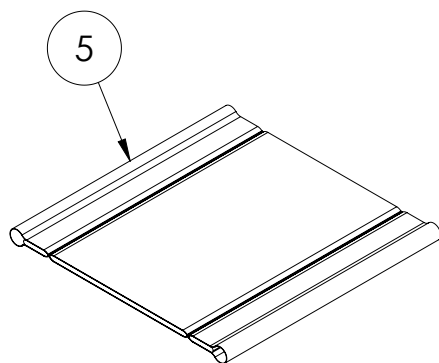

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: ---

DATA:

FOLHA 5 DE 25

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

C

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	3823	CAPA CHICOTE STAND-UP/CAD. MOT

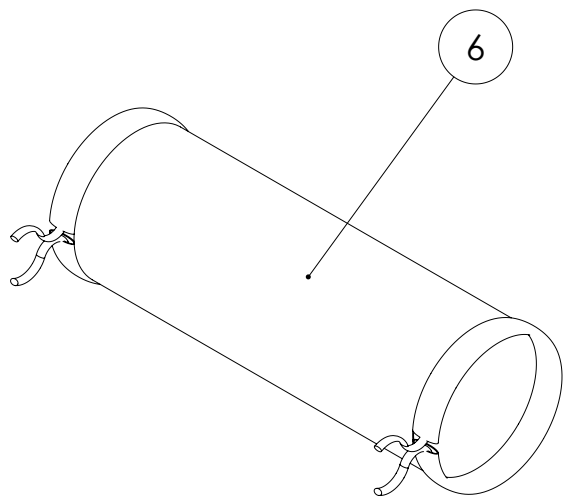

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 6 DE 25


ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:


CAPA CHICOTE

REV.:

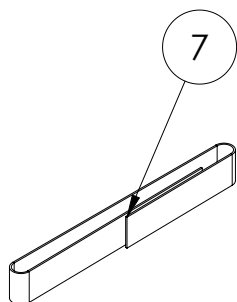


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	2568	TIRA PANTURRILHA 34
	2389	TIRA PANTURRILHA 37
	514	TIRA PANTURRILHA 41
	1514	TIRA PANTURRILHA 45
	2523	TIRA PANTURRILHA 50

APLICAÇÃO:	DES.: osvaldo	DATA:	 
	FOLHA 7 DE 25	ESCALA: 1:10	
 DESCRIÇÃO: TIRA PANTURRILHA			REV.: C

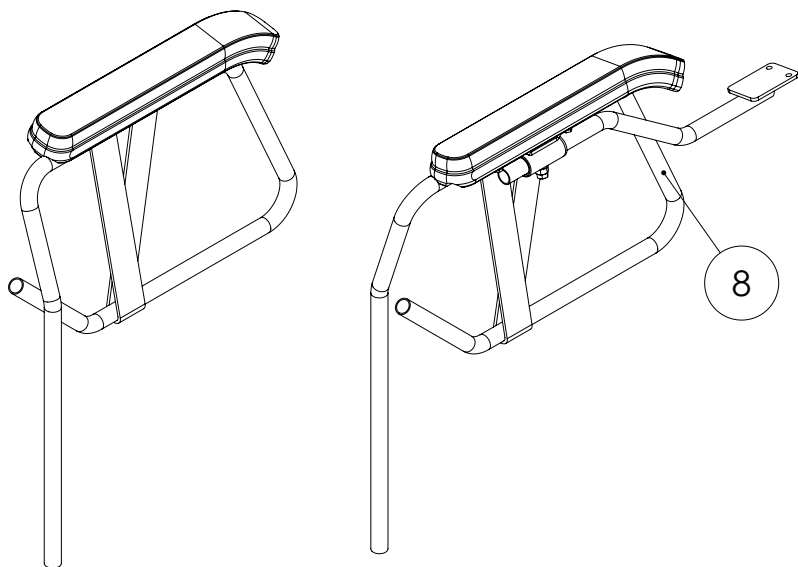

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
8	165934	CONJUNTO BRACO COMPACT FIXO P LD C/SUP. JOY STANDARD
	165931	CONJUNTO BRACO COMPACT FIXO P LE C/SUP. JOY STANDARD
	165935	CONJUNTO BRACO COMPACT FIXO M LD C/SUP. JOY STANDARD
	165932	CONJUNTO BRACO COMPACT FIXO M LE C/SUP. JOY STANDARD
	165936	CONJUNTO BRACO COMPACT FIXO G LD C/SUP. JOY STANDARD
	165933	CONJUNTO BRACO COMPACT FIXO G LE C/SUP. JOY STANDARD
	165910	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO P LD STANDARD
	165906	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO P LE STANDARD
	165911	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO M LD STANDARD
	165908	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO M LE STANDARD
	165912	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO G LD STANDARD
	165909	CONJUNTO BRACO CLEAN/COMPACT FIXO G LE STANDARD

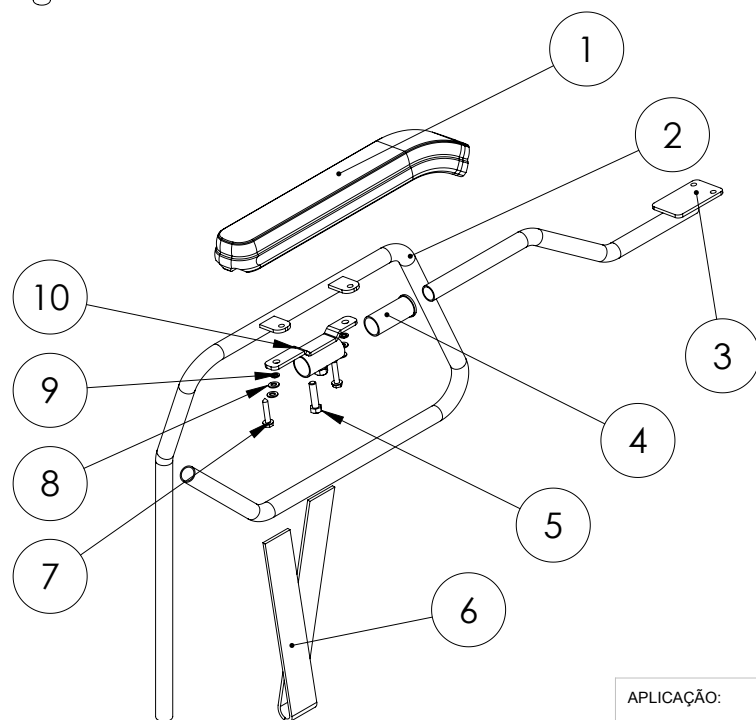

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
2	165497	1	BRACO FIXO ACO P LD
	165496	1	BRACO FIXO ACO P LE
	165499	1	BRACO FIXO ACO M LD
	165498	1	BRACO FIXO ACO M LE
	165501	1	BRACO FIXO ACO G LD
	165500	1	BRACO FIXO ACO G LE
3	156789	1	SUPORE HASTE FIX. JOYSTICK
4	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
5	12523	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1 RT ZB (S/L)
6	166066	1	TIRA LATERAL BRAÇO P
	166070	1	TIRA LATERAL BRAÇO M
	166071	1	TIRA LATERAL BRAÇO G
7	22936	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X25MM ZB (S/L)
	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
8	261.5	4	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
9	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
10	156787	1	REGULADOR DO JOYSTICK

APLICAÇÃO:
PARAFUSO 22935 USADO NO BRAÇO SEM JOYSTICK

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 8 DE 25

ESCALA: 1:7





DESCRIÇÃO:

BRAÇO CLEAN/COMPACT FIXO

REV:

H.01

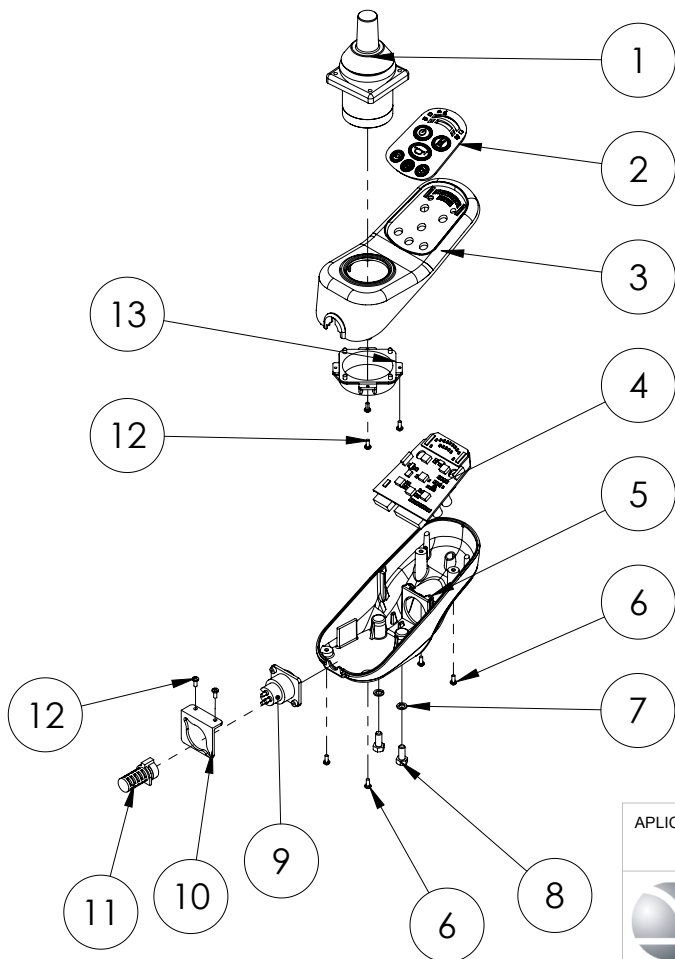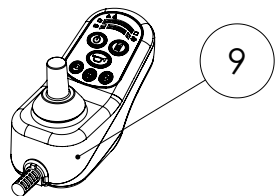

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	9965.1	PAINEL CONNECT
	22694	PAINEL CONNECT ACOMPANHANTE/L50/L55/L60

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	2098.2	1	JOYSTICK NACIONAL MICROPROCESSADO
2	16755.0	1	TECLADO TERMO-PLASTICO JOYSTICK CAD.RODA MOD.2011
3	122593	1	TAMPA SUPERIOR JOYSTICK ICHAR
4	144187	1	PLACA PAINEL JOYSTICK KIT
5	122592	1	TAMPA INFERIOR JOYSTICK ICHAR
6	122695	4	PA CABEÇA PANELA PLÁSTICO M2,5X6MM
7	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
8	6981.7	2	PA SEXT MA 8.8 5X12MM RT ZB (S)
9	7711	1	CONECTOR CANON FEMEA MET 35(PAINEL)P/SOLDA (S/L)
10	108087	1	SUPORE FIXACAO CANON JOYSTICK ICHAR(S)
11	16558.1	1	CHICOTE PAINEL CONNECT
12	16552.2	6	PA P/ PLASTICO PN 2,5X6 RI ZB
13	122190	1	SUPORE FIXAÇÃO JOYSTICK ICHAR

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 9 DE 25

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:


PAINEL CONNECT

REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	183172	CONJUNTO RODA ARO 3 RAIOS INFLAVEL PRETO (FUNDIDA)
	183171	CONJUNTO RODA ARO 3 RAIOS MACICA PRETO (FUNDIDA)
	28718	CONJUNTO RODA ARO 3 RAIOS MACICA PRETO (NYLON)

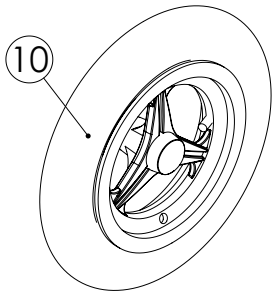

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
4	23866	1	INSERTO PARA RODA 12 1/2X2.1/4 WATER DROP (IS6220305) PARA CADEIRA DE RODAS
	11188.0	1	CAMARA DE AR 13" 250/8 (STAND-UP) (S)
5	182683	1	ARO 13 ALUMINIO PNEU MACICO PRETO USINADO
	182679	1	ARO TRAS.13 S/POLIA PRETO (MOD.2011)(S)

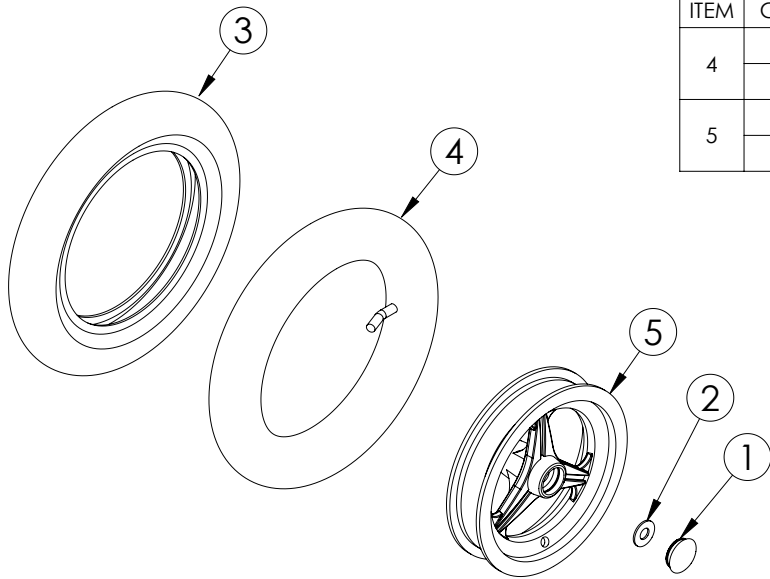

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	182607	1	TAMPA P/CUBO DE RODA TR PRETA (S)
2	23968	1	ARRUELA LISA 13.3 ZB(13,3X30X2,00)(S)
3	23867	1	RODA 12 1/2X2.1/4 INFL. C628G GY POWER EXPRESS CINZA(Z122063) PARA CADEIRA DE RODAS

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 10/03/2010

FOLHA 10 DE 25

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

ARO 3 RAIOS

REV.:

G

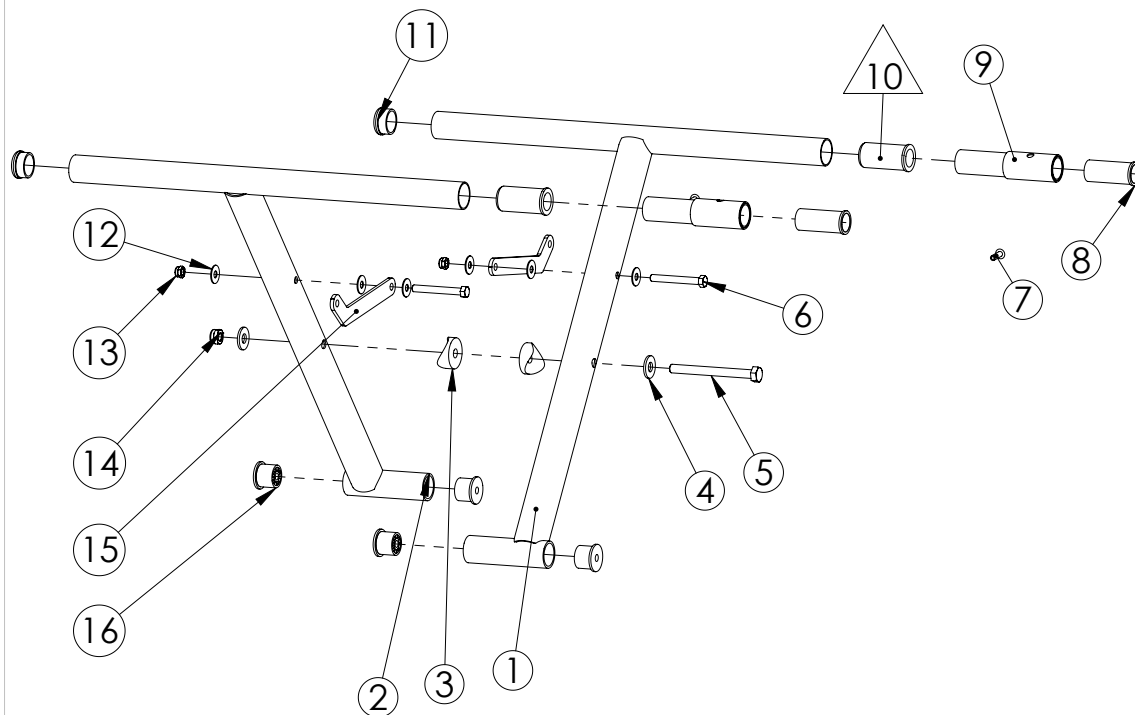

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	150150	1	TUBO X 34/37 LD P ACO
	146672	1	TUBO X 37/37 LD P ACO
	150083	1	TUBO X 37/42 LD M ACO
	146298	1	TUBO X 41/42 LD M ACO
	149522	1	TUBO X 45/42 LD M ACO
	149523	1	TUBO X 50/42 LD M ACO
	146507	1	TUBO X 41/47 LD G ACO
	146510	1	TUBO X 45/47 LD G ACO
	146503	1	TUBO X 50/47 LD G ACO
	146674	1	TUBO X 37/37 LE P ACO
2	150082	1	TUBO X 37/42 LE M ACO
	146299	1	TUBO X 41/42 LE M ACO
	149524	1	TUBO X 45/42 LE M ACO
	149525	1	TUBO X 50/42 LE M ACO
	146508	1	TUBO X 41/47 LE G ACO
	146509	1	TUBO X 45/47 LE G ACO
	146506	1	TUBO X 50/47 LE G ACO
	150151	1	TUBO X 34/37 LE P ACO
3	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" CAD.ALUM.
4	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
5	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
8	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
9	159463	2	PROLONGADOR PUNHO/X STYLES
10	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
11	149290	2	TAMPAO 1"
12	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
13	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
14	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L)
15	154383	2	SUP. FIXACAO DO X 34 SP CORTE LASER
	146313	2	SUP. FIXACAO DO X 37 SM/SP CORTE LASER
	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
	146312	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SM CORTE LASER
	146314	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SM CORTE LASER
	146523	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SG CORTE LASER
	146522	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SG CORTE LASER
	146521	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SG CORTE LASER
16	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO

APLICAÇÃO:
ITEM 10 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR


DES.: garcia
FOLHA 11 DE 25

DATA:
ESCALA: 1:7



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO X AÇO

REV.:
F.03

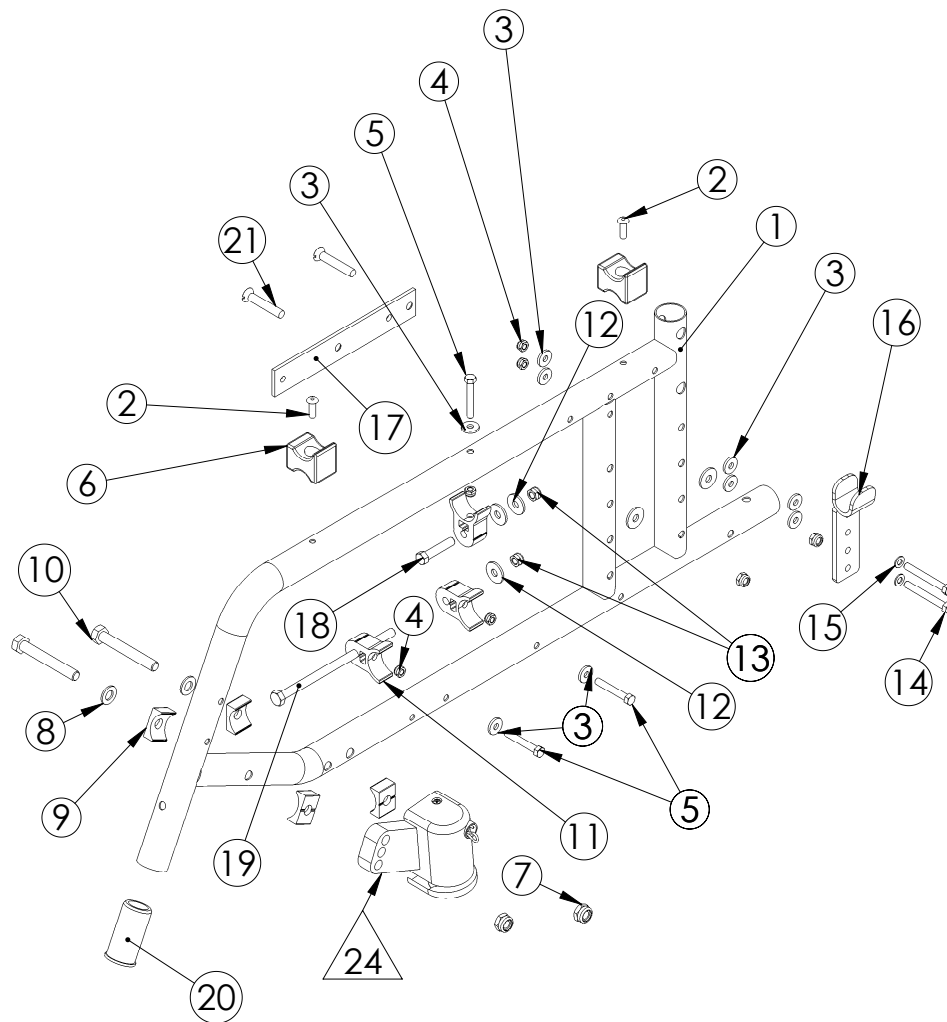

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	22751	1	CHASSIS ACO P AMARELO
	22754	1	CHASSIS ACO P AZUL VERNIZ
	22749	1	CHASSIS ACO P GRAFITE
	22756	1	CHASSIS ACO P PRATA VERNIZ
	22748	1	CHASSIS ACO P PRETO BRILHANTE
	22752	1	CHASSIS ACO P VERDE VERNIZ
	22753	1	CHASSIS ACO P VERMELHO VERNIZ
	22750	1	CHASSIS ACO P VINHO
	22755	1	CHASSIS ACO P VIOLETA VERNIZ
	22760	1	CHASSIS ACO M AMARELO
	22763	1	CHASSIS ACO M AZUL VERNIZ
	22758	1	CHASSIS ACO M GRAFITE
	22765	1	CHASSIS ACO M PRATA VERNIZ
	22757	1	CHASSIS ACO M PRETO BRILHANTE
	22761	1	CHASSIS ACO M VERDE VERNIZ
	22762	1	CHASSIS ACO M VERMELHO VERNIZ
	22759	1	CHASSIS ACO M VINHO
	22764	1	CHASSIS ACO M VIOLETA VERNIZ
	22769	1	CHASSIS ACO G AMARELO
	22772	1	CHASSIS ACO G AZUL VERNIZ
	22767	1	CHASSIS ACO G GRAFITE
	22774	1	CHASSIS ACO G PRATA VERNIZ
	22766	1	CHASSIS ACO G PRETO BRILHANTE
	22770	1	CHASSIS ACO G VERDE VERNIZ
	22771	1	CHASSIS ACO G VERMELHO VERNIZ
	22768	1	CHASSIS ACO G VINHO
	22773	1	CHASSIS ACO G VIOLETA VERNIZ
2	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
3	393.0	9	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG) (S) (5,3X14X2)
4	691.2	5	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
5	133037	3	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
6	1704.3	2	CADERINHA 1" CAD.
7	791.9	2	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
9	151197	4	PERFIL MEIA CANA 1" 18mm FURO 8,5mm
10	11832.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
11	124518	3	PERFIL U FURO PORCA
12	6087	3	ARRUELA LISA 1/4 ZB LUMINA(S) (6,4x17x1,2)
13	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
14	142915	2	PA SEXT MA 8.8 5X45MM RT ZB (S)
15	261.5	2	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
16	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
17	149032	1	SUPORTE COMANDO COMPACT P
	148920		SUPORTE COMANDO COMPACT
18	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
19	16641	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X5 RP ZB (S/L)
20	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
21	7966.9	2	PA MAQ CH FS 1/4X1.1/2 RT ZB (S)
24	PG. 24		VER PÁGINA 24

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 12 DE 25

ESCALA: 1:6




REV.:




DESCRIÇÃO:

CHASSIS COMPACT

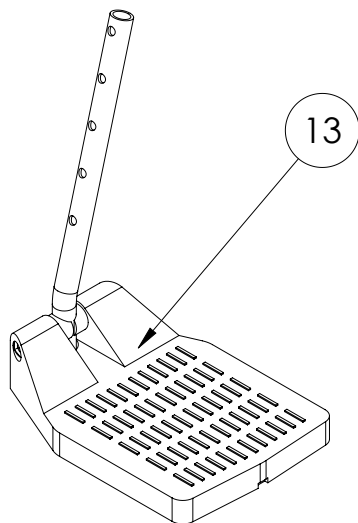

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	146916	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 34/37
	146915	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 34/37
	146200	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 41/45/50
	146287	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 41/45/50

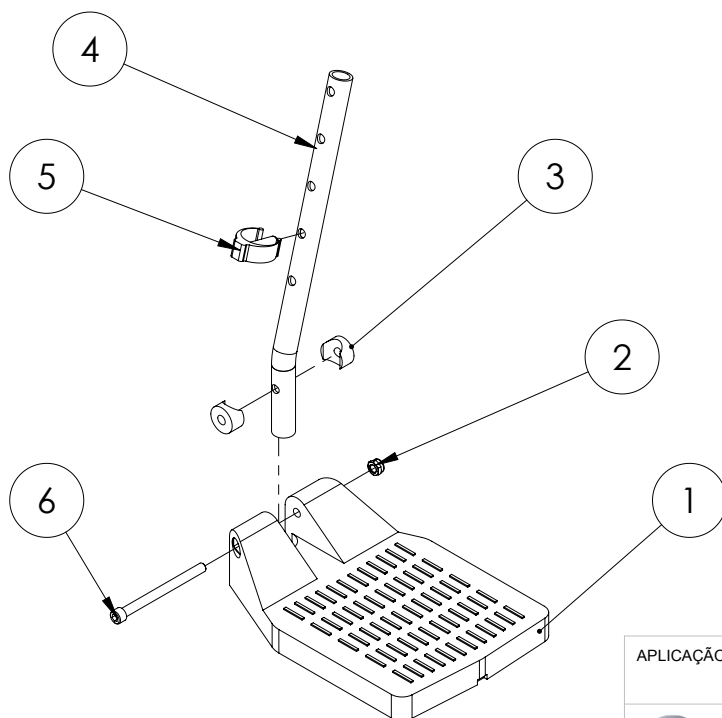

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
	106147	1	PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
2	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA LUMINA
4	146201	1	TUBO PEDALEIRA
5	6889.6	1	CLIP E 1"
6	18159.5	1	PA ALLEM 1/4X3 MA INOX C/CILINDRICA(S)

APLICAÇÃO:

DES.: yuri

DATA:

FOLHA 13 DE 25

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:


PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES

REV.:

A.02

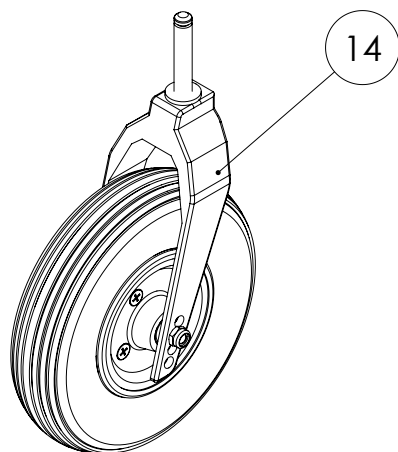

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14	179875	CONJUNTO GARFO CINZA RODA MAC. 8"
	183185	CONJUNTO GARFO PRETO RODA MAC. 8"
	183182	CONJUNTO GARFO PRETO RODA INF. 8"
	115078	CONJUNTO GARFO CINZA RODA INF. 8"

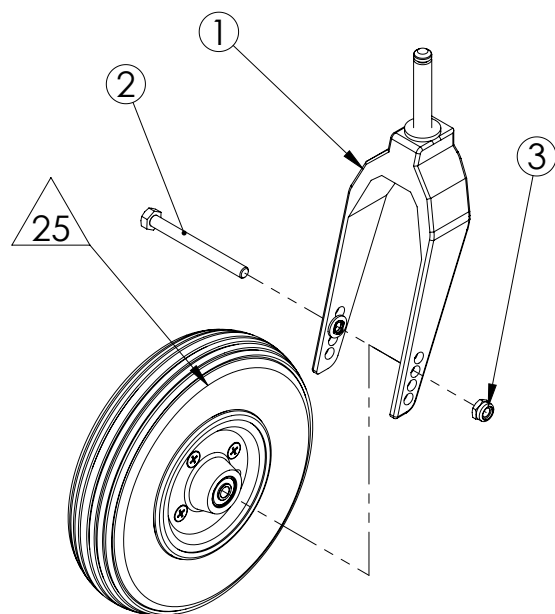

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	955.5	1	GARFO ALUMINIO CINZA 67 M/G
	182664	1	GARFO ALUMINIO PRETO 67 M/G
2	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
3	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
25	21508	1	RODA 8" BI PARTIDO CONJ/ROLAMENTO
	403	1	P/CAD.RODA(F70136)PARA CADEIRA DE RODAS
			RODA DIANTEIRA INFLAVEL 8"CINZA

APLICAÇÃO:

DES.: otavio

DATA:

FOLHA 14 DE 25

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA 8"

REV.:

C.01

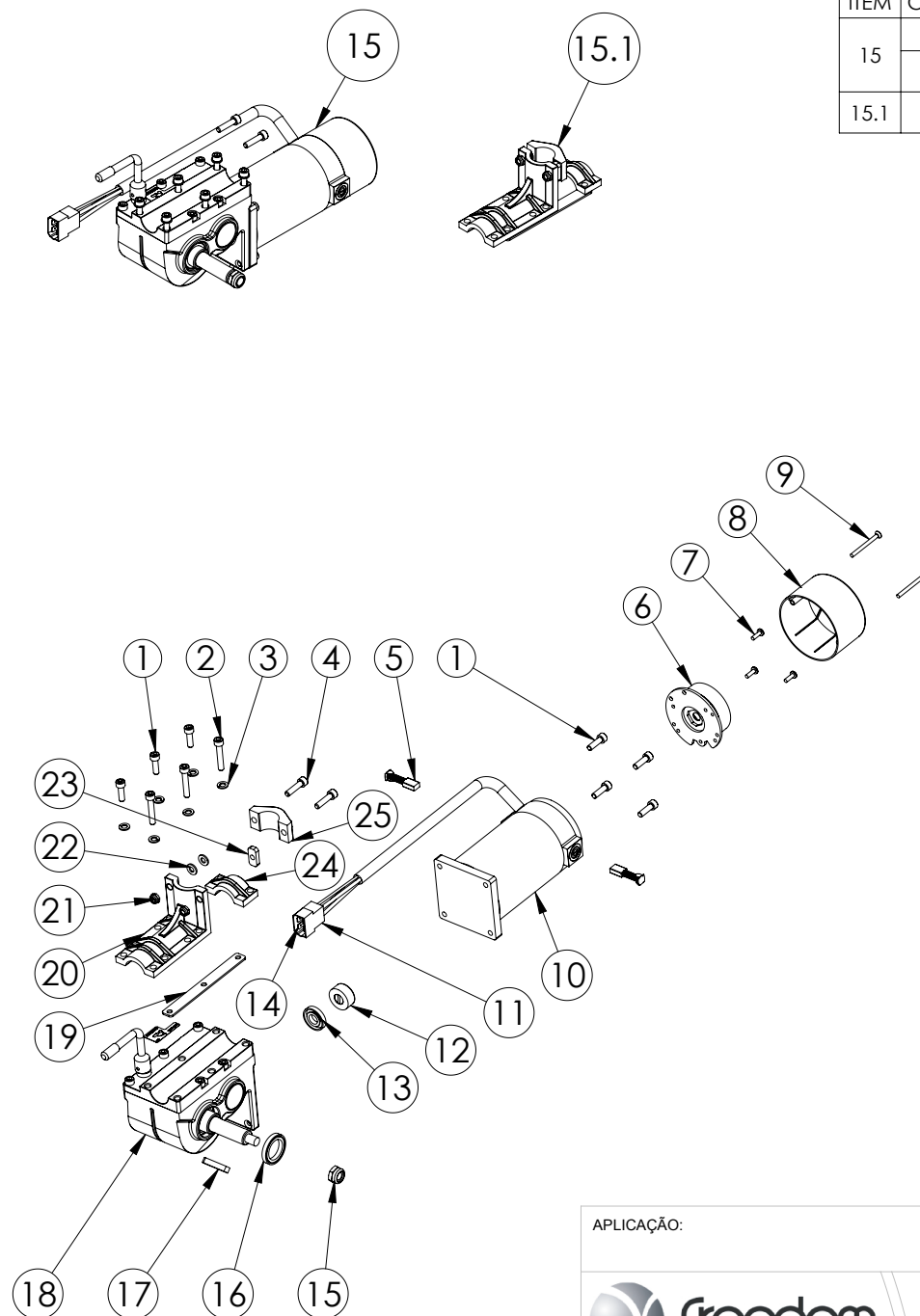

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	18054	CONJUNTO UNID. POT. ENGR. CMT/STY/STD/LUM 200W/24V 1:32 LD
	18055	CONJUNTO UNID. POT. ENGR. CMT/STY/STD/LUM 200W/24V 1:32 LE
15.1	28900	CONJUNTO DE FIXAÇÃO UNID. DE POT. ENG. 200W/24V 1:32

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	27218	7	PA ALLEN 6X20MM(51709104)
2	1303	3	PA ALLEN MA 6X35MM C/C(S)
3	145247	6	ARRUELA PRESSAO 6MM ZB(S/L)
4	11583	2	PA ALLEN MA 6X25MM C/C (L)
5	20217	2	ESCOVA UNIDADE DE POTENCIA ENGRENADA 200W PARA CADEIRA DE RODAS(77077007R)
6	186054	1	FREIO ELETROMAGNETICO UNID. DE POT. ENGR. 200W/24V
7	186298	3	PARAFUSO FIXAÇÃO FREIO ELET. MAGNETICO
8	186037	1	TAMPA FREIO ELET. UNID. POT. ENGR. 200W/24V
9	186293	2	PARAFUSO FIXAÇÃO TAMPA FREIO ELET. MAGNETICO
10	162363	1	UNIDADE POTENCIA ENGR. 200W/24V LD
	102242		UNIDADE POTENCIA ENGR. 200W/24V LE
11	16367	1	ISOLADOR 626541-1 4V-P/FASTON MC-6.3-AMP/TYC S/
12	102409	1	ACOPLAMENTO BUCHA FLEXIVEL CAIXA DE REDUTOR CAD. IMP.
13	23560	1	RETENTOR 28X12X5 NBR70 BRG (EIXO MOTOR)(54071007R)
14	428	4	TERMINAL 880636 FAST 6.3MC(64182)FASTON MACHO(6434.02)
15	27209	1	PO SEXT MB 10X1.25 CH 17 NY ZB (CAIXA DE REDUÇÃO)
16	23559	1	RETENTOR 35X24X7 NBR70 BRG (EIXO RODA)(54071008R)
17	28087	1	CHAVETA MOTOR ENGRENADO 200/600 WATTS
18	132109	1	CAIXA REDUÇÃO 1:32 LD
	146255		CAIXA REDUÇÃO 1:32 LE
19	141090	1	BORRACHA 3 FUROS MOTORIZACAO MECANICA
20	143674	1	MEIA CANA MOT.MECANICA CORTADA
21	11852	2	PO SEXT BX M6X1.00 CL 8 NY ZB(S)
22	15442	5	ARRUELA LISA 6MM ZB(13,0X6,5X1,5)(S/L)
23	141091	1	BORRACHA FIXACAO UNIDADE DE POTENCIA
24	181067	1	MEIA CANA MT MEC.CORTADA MENOR
25	141089	1	MEIA CANA FIXAÇÃO MOTOREDUTOR

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 15 DE 25

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE POTENCIA ENGRENADA

REV:

H.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	18196	DRIVE CONNECT

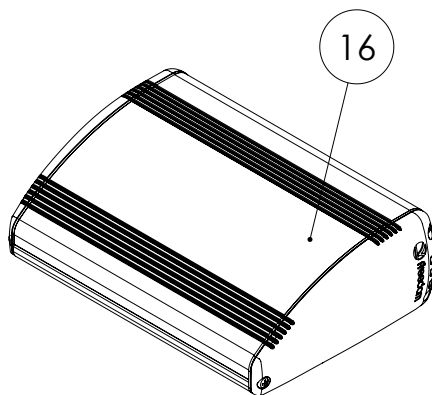

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 16 DE 25

ESCALA: 1:3




DESCRIÇÃO:

DRIVE CONNECT

REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
17	149892	PROLONGADOR TUBO CHASSIS BAIXO SOLDADO

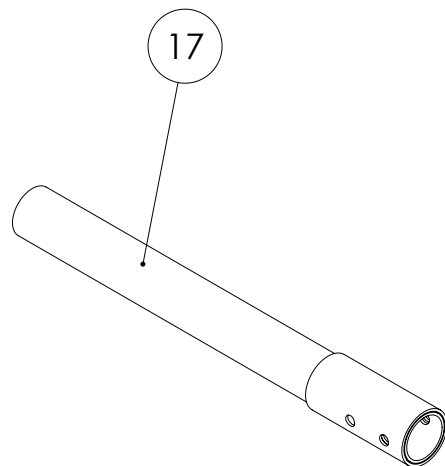

APLICAÇÃO:

DES.: Jacondino

DATA:

FOLHA 17 DE 25

ESCALA: 1:3





DESCRIÇÃO:

PROLONGADOR TUBO CHASSIS BAIXO SOLDADO

REV.:

D

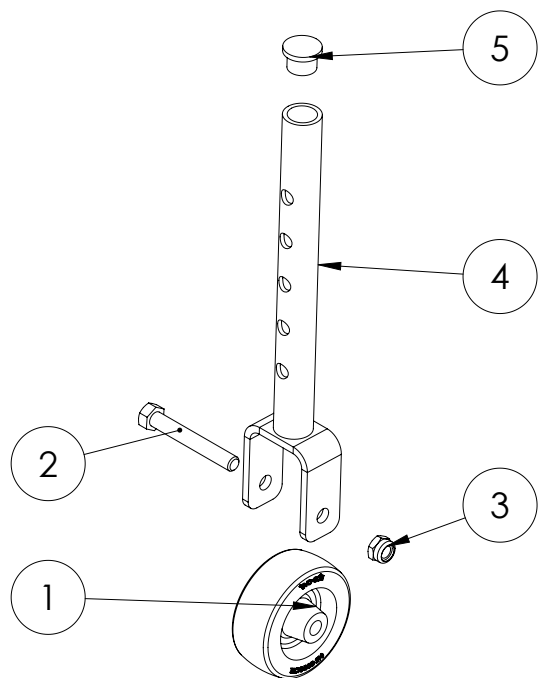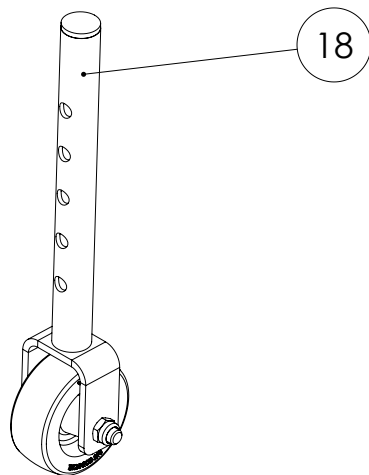

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	19915	RODA APOIO CAD. MT

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	133920	1	RODA ROD CAR - TECNI ROD 210 (2")
2	12405.2	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
3	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	150094	1	TUBO RODA APOIO CHASSIS EXTENDIDO
5	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 18 DE 25

ESCALA: 1:3





DESCRIÇÃO:

RODA DE APOIO CAD MT

REV.:

D

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
19	183965	CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO ARO 20/24
	183964	CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO ARO 13

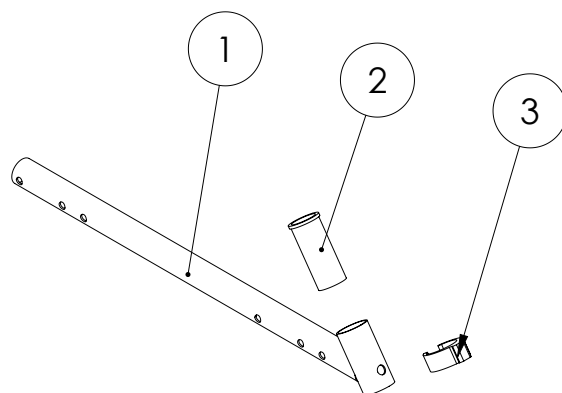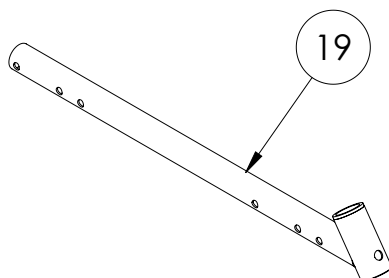

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	148864	1	FIXAÇÃO SUPORTE RODA APOIO ARO 13
	148877	1	FIXAÇÃO SUPORTE RODA APOIO ARO 20/24
2	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
3	174699	1	CLIP E 7/8` (S) NÃO PASSANTE

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 19 DE 25

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO

REV.:

A

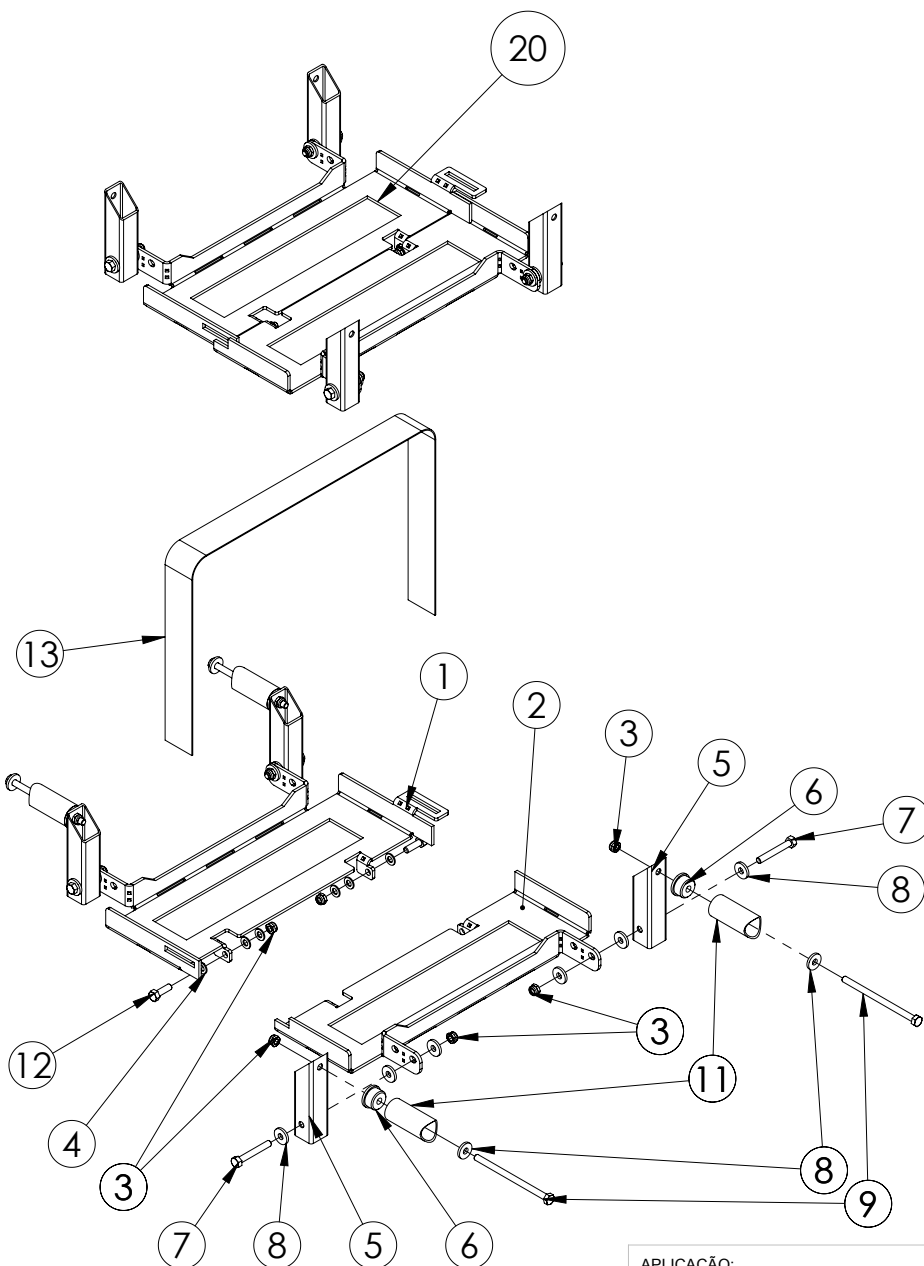

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20	146252	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 34
	169193	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 37
	146096	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 37
	147064	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 41
	163485	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 45
	145949	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 41
	146835	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 41
	147063	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 45
	147065	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 45
	146318	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 50
	148744	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 50
	149465	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 50

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	147272	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG 34 LD
	169395	1	SUPORTE BATERIA 18AH LD LARG. 37
	153560	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 37
	147270	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 41
	149449	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 45
	169402	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 50
	168321	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 41
	168319	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 45
	168241	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 50
	153559	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 41
	147268	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 45
	149373	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 50
	153565	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 41
	147274	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 45
	149462	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 50
	147271	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 34 LE
	169397	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 37 LE
2	153561	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 37
	147269	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 41
	149454	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 45
	169393	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 50
	168324	1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 41
	168325	1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 45
	168238	1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 50
	153558	1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 41
	147267	1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 45
	149371	1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 50
	153564	1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 41
	147273	1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 45
	149461	1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 50
3	691.2	10	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
4	261.5	10	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5.3X10X1)
5	146654	4	Fixação do Sup. de Bateria
6	146291	4	BUCHA DE TÉCNIL DO SUPORTE DE BATERIA
7	133037	4	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
8	393.0	16	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5.3X14X2)
9	20105	4	PA SEXT MA 8.8 5X80MM
10	10383	2	PERFIL MEIA CANA 1 18MM FURO Ø5,5 MM
11	146115	4	TUBO FIXAÇÃO DO APOIO DO SUPORTE
12	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
13	19692	1	Cinto Bateria 18A
	19625	1	Cinto Bateria 26A
	19693	1	Cinto Bateria 38A / 55A

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

SUPORTE DE BATERIA

DES.: Jaccondino

DATA:


FOLHA 20 DE 25

ESCALA: 1:6



REV:

D.01

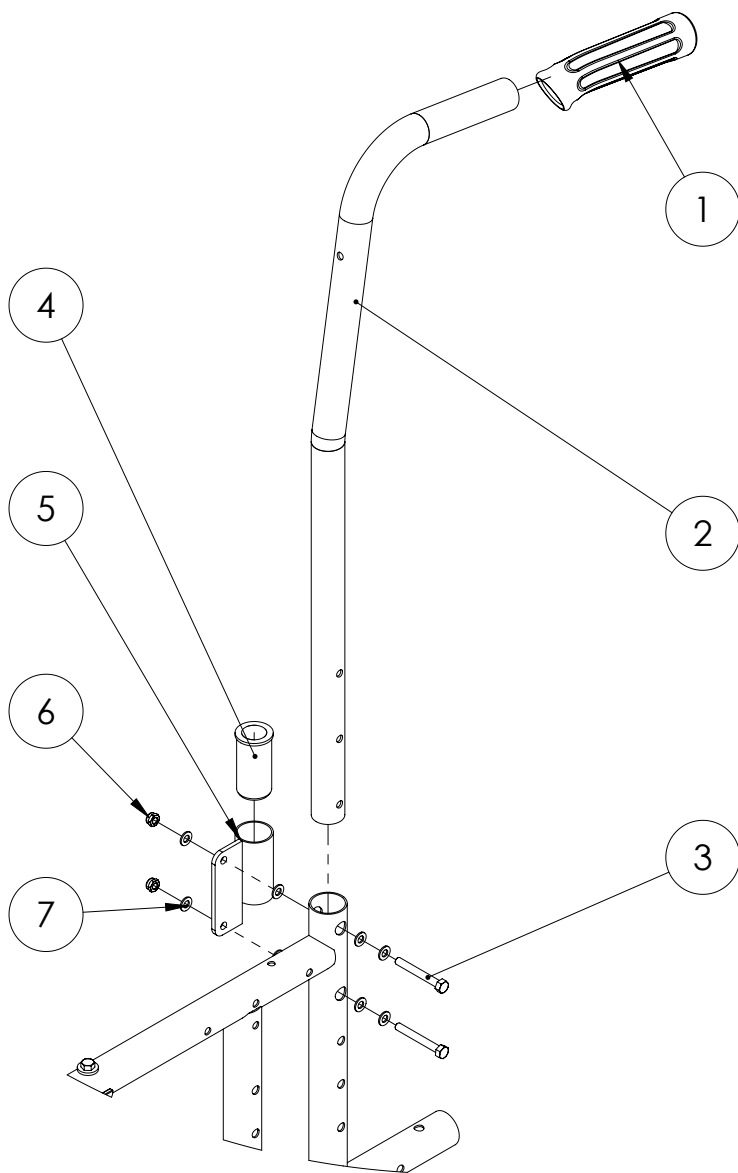

ITEM	CÓDIGO	QNT	DESCRIÇÃO
1	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	179468	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 40/30 [1804]
	163890	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 40
	163892	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 45
	163886	1	TUBO ENCOSTO FIXO ACO 50
3	133037	2	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S/L)
4	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"x1,2MM
5	164875	1	SUORTE BRACO FIXO ENCOSTO AÇO
6	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L)
7	261.5	8	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 21 DE 25

ESCALA: 1:5




REV.:




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO FIXO


OBS. TAMPA BATERIA EM SERIE E TAMPA BATERIA FREE DEVEM SER VENDIDAS JUNTAS.

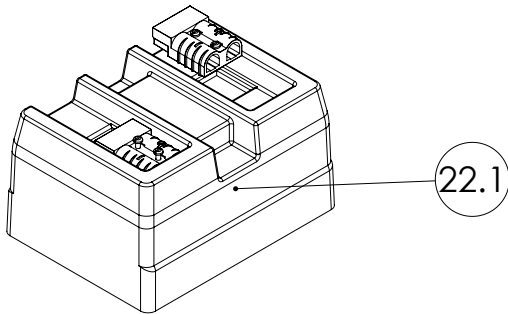

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22.1	19626	TAMPA BATERIA FREE 26A SERIE(MONTADA)
	19195	TAMPA BATERIA FREE 26A(MONTADA)
	22270	TAMPA BATERIA FREE 33/34A SERIE(MONTADA)
	22271	TAMPA BATERIA FREE 33/34A (MONTADA)
	19627	TAMPA BATERIA FREE 38A SERIE(MONTADA)
	19196	TAMPA BATERIA FREE 38A(MONTADA)
	19628	TAMPA BATERIA FREE 55A SERIE(MONTADA)
	19197	TAMPA BATERIA FREE 55A(MONTADA)

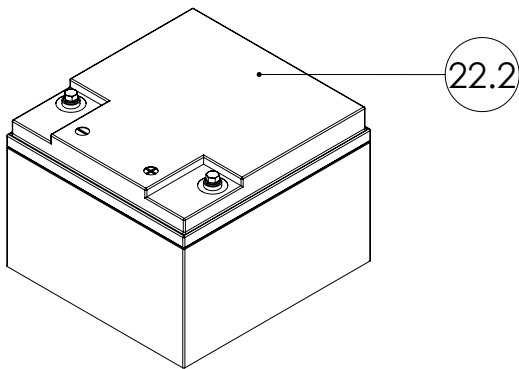

ITEM	QTD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22	2	18846	KIT FORCA 12-18 12V 18AH P/CAD.RODA
	2	18847	KIT FORCA 12-26 12V 26AH P/CAD.RODA
	2	18848	KIT FORCA 12-33 12V 33AH P/CAD.RODA
	2	23165	KIT FORCA 12-34 12V 34AH P/CAD.RODA
	2	18849	KIT FORCA 12-38 12V 38AH P/CAD.RODA
	2	18851	KIT FORCA 12-55 12V 55AH P/CAD.RODA

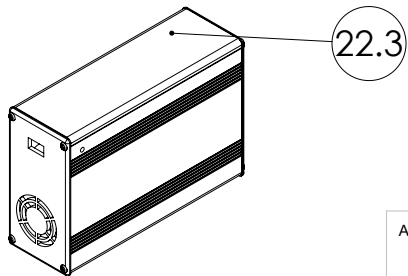

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22.3	26265	CARREGADOR CADEIRA 24V/2.5A
22.3	19972	CARREGADOR CADEIRA 24V/5.0A

APLICAÇÃO:

DES.: Jacondino

DATA:

FOLHA 22 DE 25

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

BATERIA SELADA VRLA FREE

REV.:

A

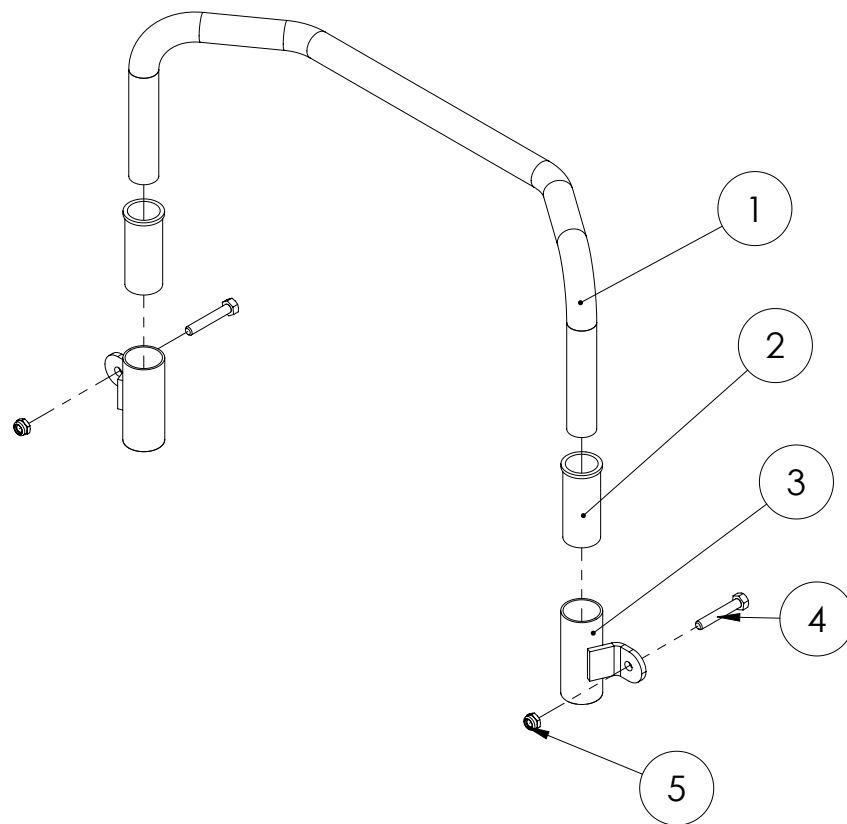

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	150176	1	ESTICADOR ENCOSTO 33
	150177	1	ESTICADOR ENCOSTO 37
	150178	1	ESTICADOR ENCOSTO 41
	150179	1	ESTICADOR ENCOSTO 45
	150180	1	ESTICADOR ENCOSTO 50
2	10142	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
3	5511	2	TUBO SUPORTE ENCOSTO CABECA
4	481	2	PA SEXT MA 8.8 5X30MM RT ZB(S)
5	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: tiago

DATA:

FOLHA 23 DE 25

ESCALA: 1:4




DESCRIÇÃO:


SUPORTE ESTICADOR DE ENCOSTO

REV.:

A.01

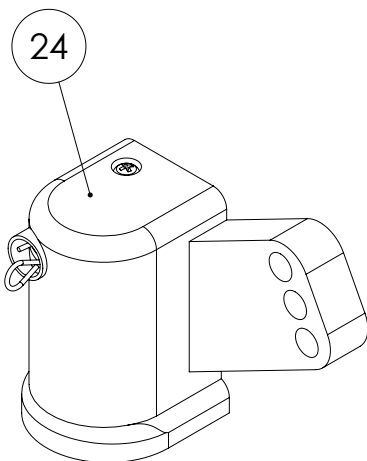

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
24	178350	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. ANTI SHIMMING (QUICK RELEASE)
	178351	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. ANTI SHIMMING (QUICK RELEASE)

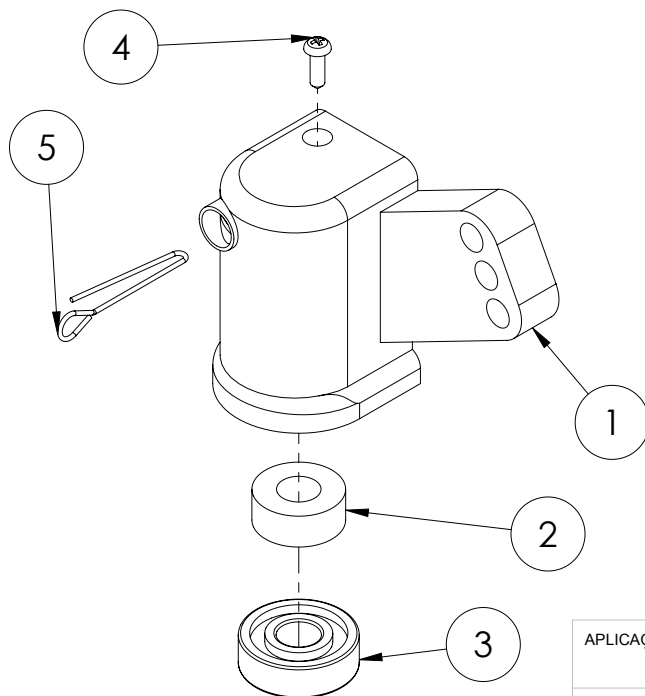

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	709.9	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
	809.5	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
2	178326	1	BUCHA GARFO CADEIRA MT [1801]
3	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
4	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
5	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 24 DE 25

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

G

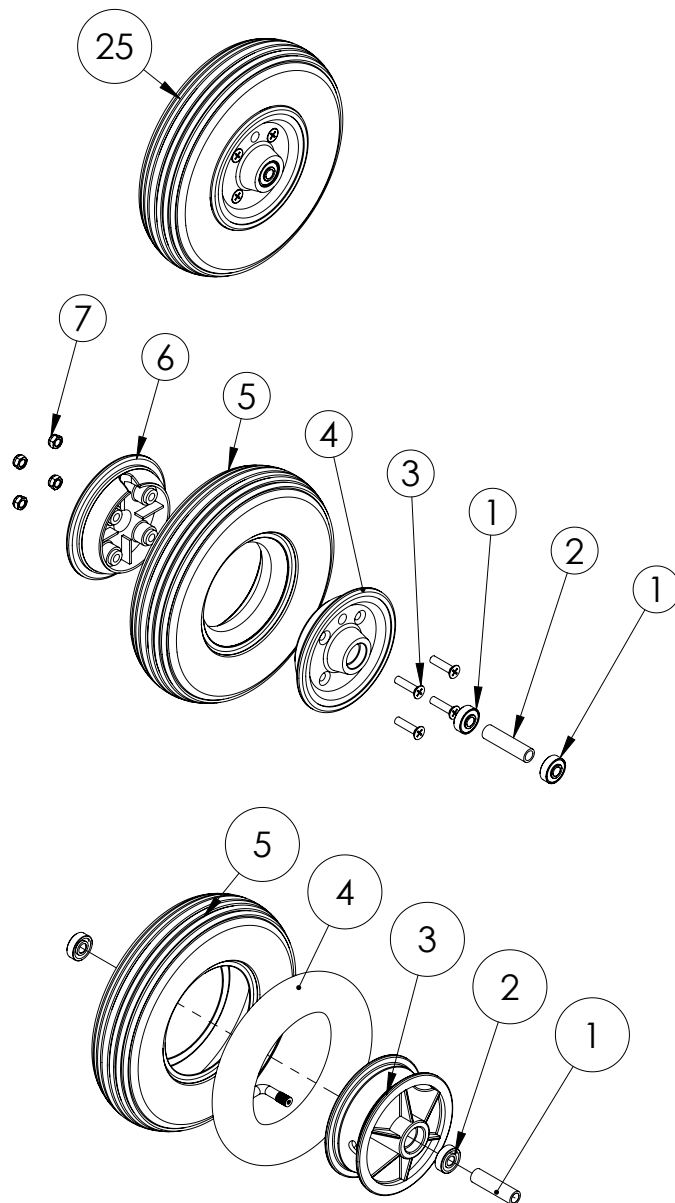

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
25	21508	RODA 8" BI PARTIDO CONJ/ROLAMENTO P/CAD.RODA(F70136)PARA CADEIRA DE RODAS
	184463	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 8" PRETO

ÍTEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	188290	2	ROLAMENTO 608 - C2005 PR1MO
2	175013	1	SEPARADOR RODA 8" MACICA
3	175012	4	PA MAQ CH PH 6X30MM ZB (S)
4	175002	1	ARO BI-PARTIDO LADO C/ VALVULA
5	22404	1	PNEU 8" MACICO
6	175003	1	ARO BI-PARTIDO LADO S/ VALVULA
7	136543	4	PO SEXT NY 6MM MA INOX A2(6X6X10MM)(S)

ÍTEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	169553	1	SEPARADOR 44 RODA 8" INF
2	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
3	184460	1	ARO NYLON 8"141GR PRETO BICO TORTO(S)
4	13925.4	1	CAMARA DE AR 8 - 200X4 TR 87(BICO TORTO) (S)
5	23269	1	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 200X50 (Z255793)PARA CADEIRA DE RODAS

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

RODA DIANTEIRA 8"

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 25 DE 25

ESCALA: 1:6



REV.:

B