


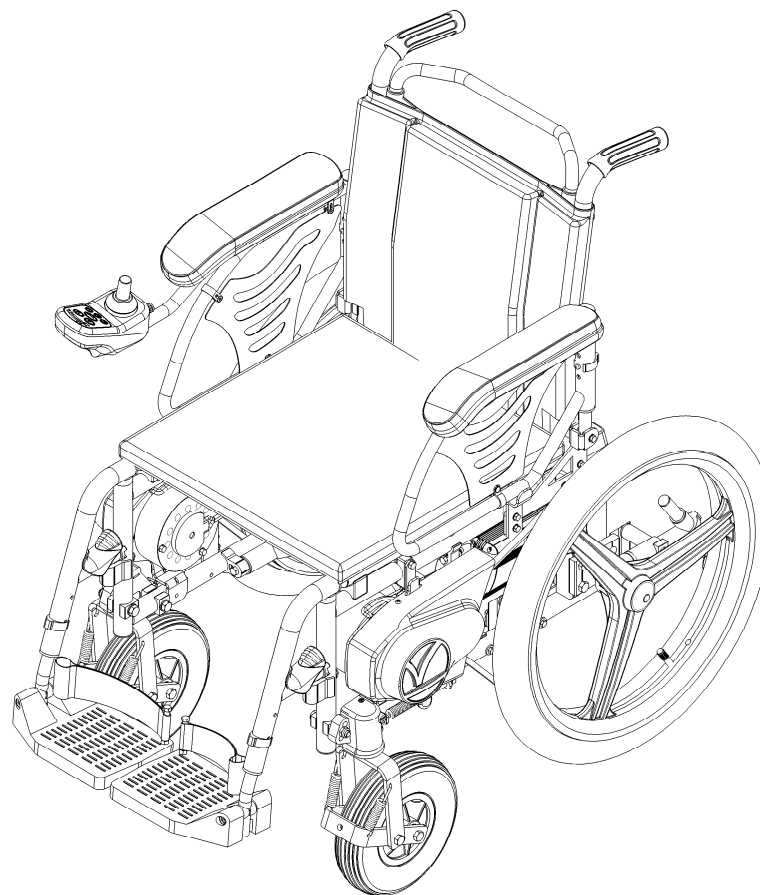

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 1 DE 28

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

LUMINA MT 20

REV.:

B

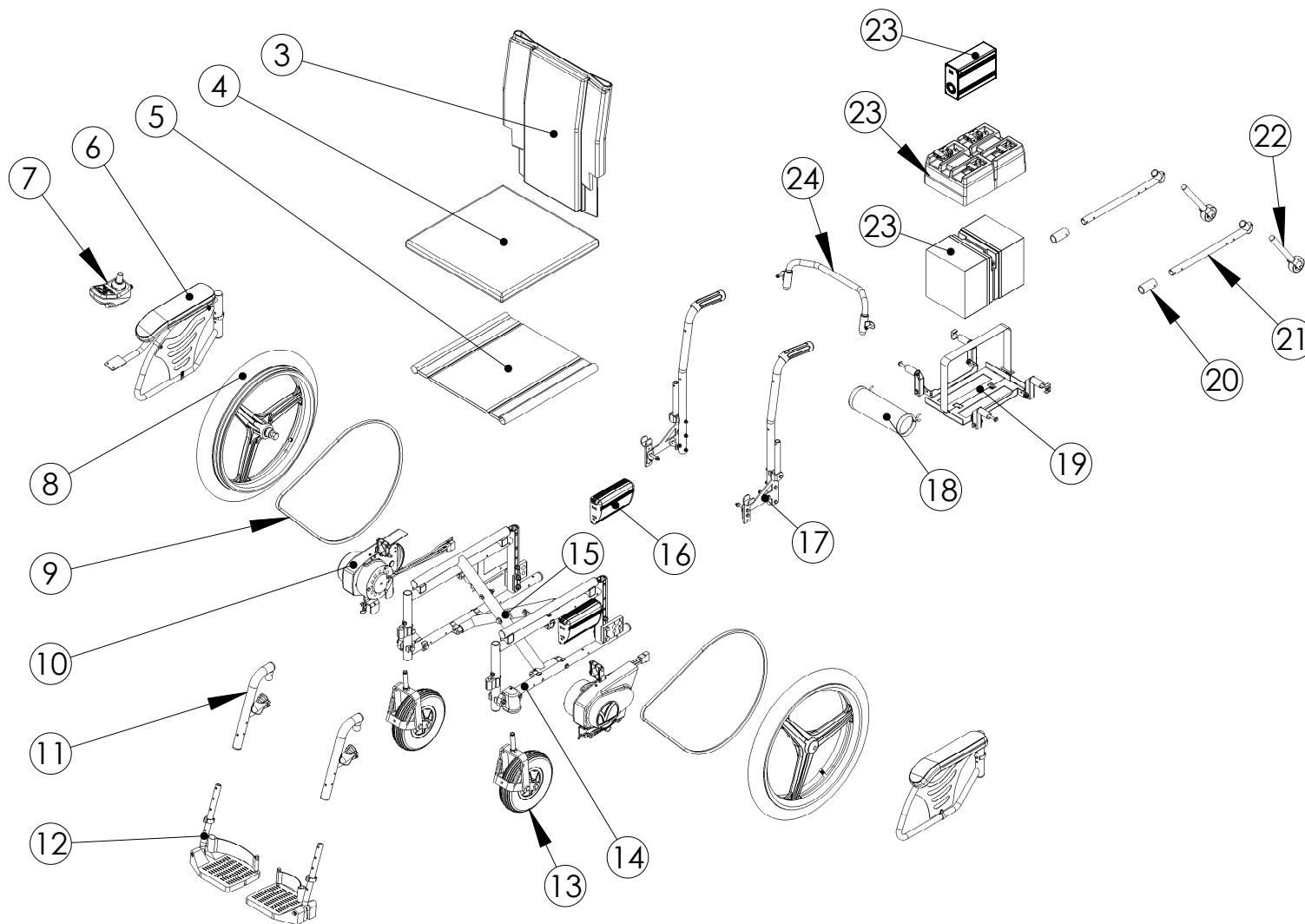

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

LUMINA MT 20

DES.: JONATHAN M.

FOLHA 2 DE 28


DATA:

ESCALA: 1:20



REV.:

B

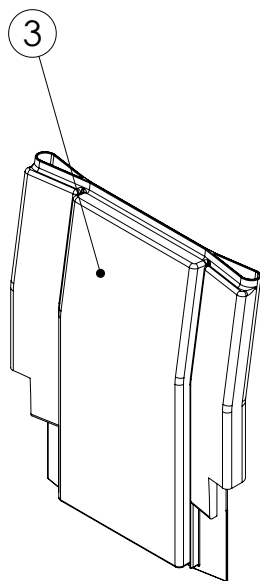

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23566	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/30
	23573	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/35
	22541	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/40
	22542	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/45
	22543	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 33/50
	23567	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/30
	23574	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/35
	22544	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/40
	22545	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/45
	22546	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 37/50
	23568	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/30
	23575	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/35
	22547	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/40
	22548	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/45
	22549	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 41/50
	23569	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/30
	23576	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/35
	23550	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/40
	23551	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/45
	22552	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 45/50
	23577	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/35
	22553	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/40
	22554	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/45
	22555	ENCOSTO REC/LIF/LUM/STD 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 3 DE 28

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

REV.:

F

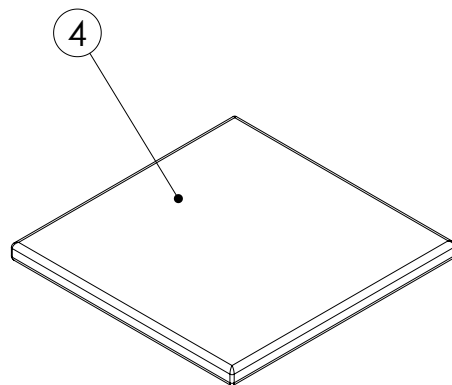

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO L.33/P.37 5CM
	23303	ALMOFADA ASSENTO L.33/P.42 5CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.37 5CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.42 5CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.47 5CM
	20292	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.37 5CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.42 5CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.47 5CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.52 5CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.42 5CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.47 5CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.52 5CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.42 5CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.47 5CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.52 5CM

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 4 DE 28

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

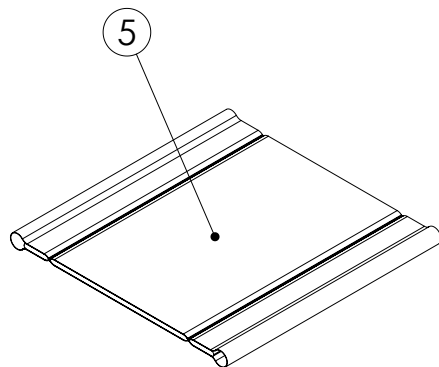

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52
	25362	BASE ASSENTO L.33/P.37 X DUPLO
	25363	BASE ASSENTO L.33/P.42 X DUPLO
	25368	BASE ASSENTO L.37/P.37 X DUPLO
	25374	BASE ASSENTO L.37/P.42 X DUPLO
	25366	BASE ASSENTO L.37/P.47 X DUPLO
	25377	BASE ASSENTO L.41/P.37 X DUPLO
	25378	BASE ASSENTO L.41/P.42 X DUPLO
	25375	BASE ASSENTO L.41/P.47 X DUPLO
	25367	BASE ASSENTO L.41/P.52 X DUPLO
	25381	BASE ASSENTO L.45/P.42 X DUPLO
	25379	BASE ASSENTO L.45/P.47 X DUPLO
	25376	BASE ASSENTO L.45/P.52 X DUPLO
	25384	BASE ASSENTO L.50/P.42 X DUPLO
	25382	BASE ASSENTO L.50/P.47 X DUPLO
	25380	BASE ASSENTO L.50/P.52 X DUPLO

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 5 DE 28

ESCALA: 1:10





DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

C

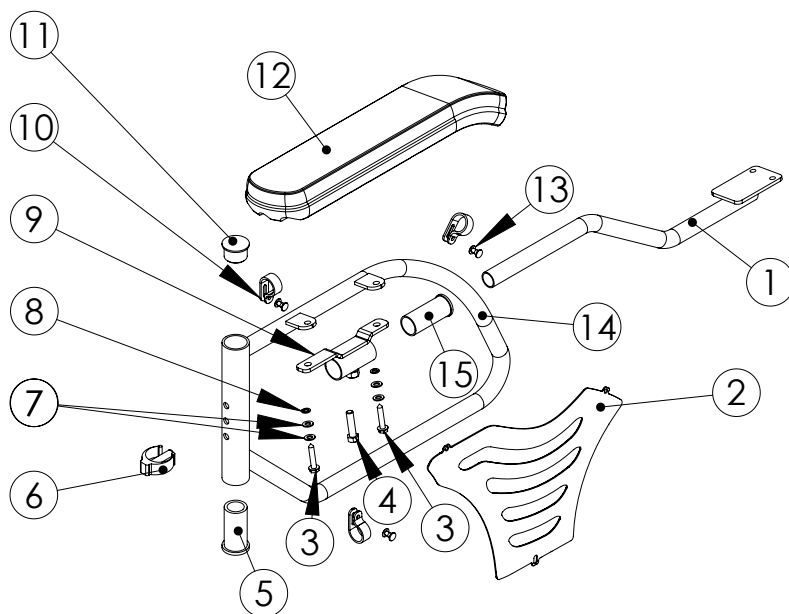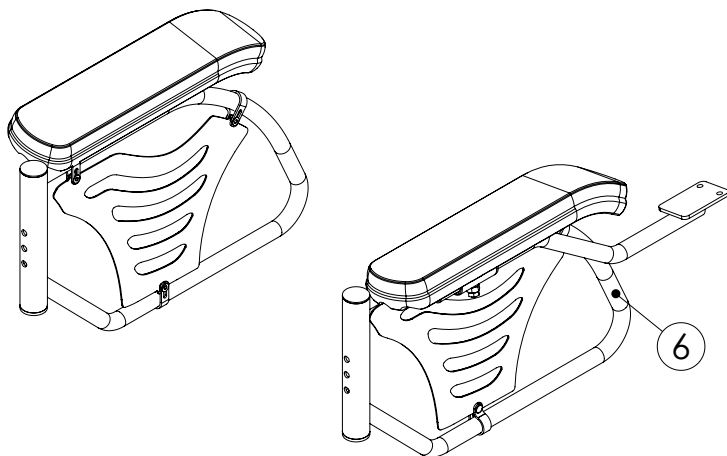

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	165980	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LD C/SUP. JOY COMFORT
	165977	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LE C/SUP. JOY COMFORT
	165979	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LD C/SUP. JOY COMFORT
	165976	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LE C/SUP. JOY COMFORT
	165981	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LD C/SUP. JOY COMFORT
	165978	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LE C/SUP. JOY COMFORT
	165884	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LD COMFORT
	165881	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LE COMFORT
	165883	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LD COMFORT
	165880	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LE COMFORT
	165885	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LD COMFORT
	165882	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LE COMFORT
	186231	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LD C/SUP. JOY STANDARD
	186228	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LE C/SUP. JOY STANDARD
	186230	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LD C/SUP. JOY STANDARD
	186227	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LE C/SUP. JOY STANDARD
	186232	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LD C/SUP. JOY STANDARD
	186229	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LE C/SUP. JOY STANDARD
	186225	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LD STANDARD
	186222	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. P LE STANDARD
	186213	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LE STANDARD
	186224	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. M LD STANDARD
	186226	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LD STANDARD
	186223	CONJUNTO BRACO LUMINA ART. G LE STANDARD

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	156789	1	SUORTE HASTE FIX. JOYSTICK
2	165613	1	CARENAGEM BRACO LP CORTE LASER
	165612	1	CARENAGEM BRACO LM CORTE LASER
	165611	1	CARENAGEM BRACO LG CORTE LASER
3	22936	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X25MM ZB (S/L)
4	12523	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1 RT ZB (S/L)
5	107427	1	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM
6	6889.6	1	CLIP E 1"
7	261.5	4	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
8	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
9	156787	1	Regulador do Joystick
10	110152.8	3	ABRACADEIRA NXR-8 PRETA P-CABO (12,7 A 15,9) (S)
11	107756	1	TAMPAO P/TUBO 1"X2MM CAD.ALUM 2011 (S)
12	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
13	2821.5	3	REBITE DE REMANCHO NR 3 FPTO (S)
14	164317	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO P LD
	164315	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO P LE
	164397	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO M LD
	164398	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO M LE
	164399	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO G LD
15	164400	1	BRACO ARTICULADO ALUMINIO G LE
	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 6 DE 28


ESCALA: 1:7

DESCRIÇÃO:

BRACO LUMINA ART.

REV.:

8

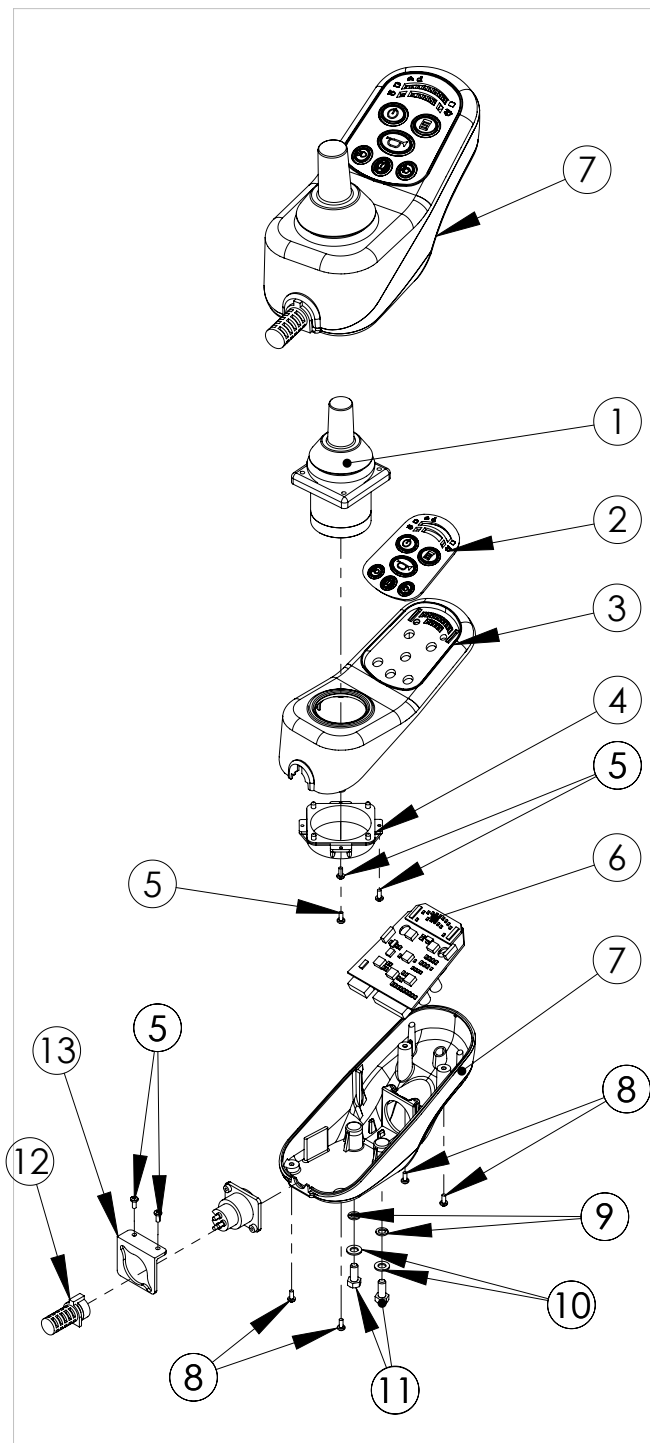

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	9965.1	PAINEL CONNECT
	22694	PAINEL CONNECT ACOMPANHANTE/L50/L55/L60/MILLENIUM C (S/ JOY EXTRA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	22694	PAINEL CONNECT ACOMPANHANTE/L50/L55/L60/MILLENIUM C (S/ JOY EXTRA)

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	10522	1	JOYSTICK COMANDO CONNECT
2	16755.0	1	TECLADO TERMO-PLASTICO JOYSTICK CAD.RODA MOD.2011
3	122593	1	TAMPA SUPERIOR JOYSTICK ICHAR
4	122190	1	SUPORTE FIXAÇÃO JOYSTICK ICHAIR
5	16552.2	6	PA P/ PLASTICO PN 2,5X6 RI ZB
6	16358	1	PLACA PAINEL FRE106
7	122592	1	TAMPA INFERIOR JOYSTICK ICHAR
8	122695	4	PA CABEÇA PANELA PLÁSTICO M2,5X6MM
9	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
10	261.5	2	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
11	6981.7	2	PA SEXT MA 8.8 5X12MM RT ZB (S)
12	16558.1	1	CHICOTE PAINEL CONNECT
13	108087	1	SUPORTE FIXACAO CANON JOYSTICK ICHAR(S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 7 DE 28

ESCALA: 1:4

DESCRIÇÃO:

PAINEL CONNECT

REV.:



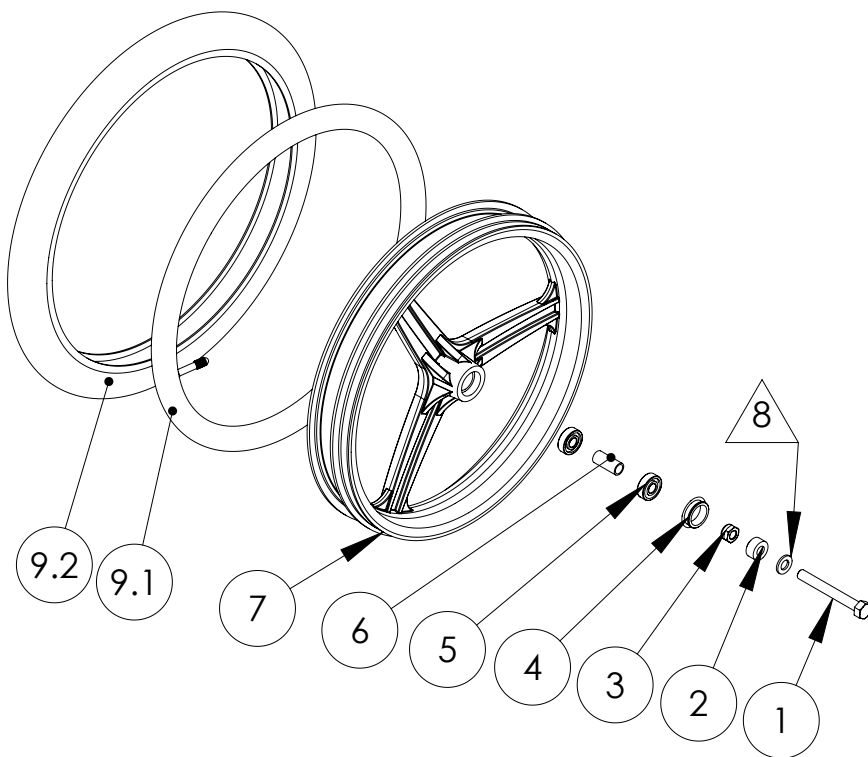
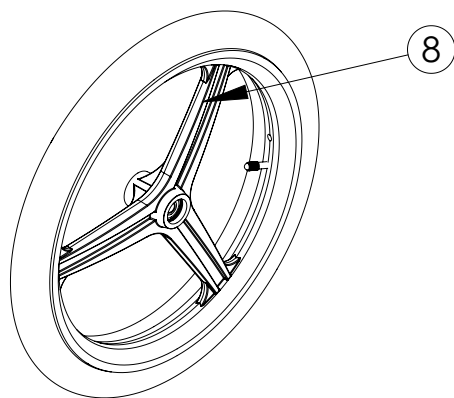


TABELA 1 PAG.8			
ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
8	183193	1	CONJUNTO RODA 3 RAIOS 20" PRETA (FUNDIDA)

TABELA 2 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
9.1	911	1	CAMARA DE AR MSE 20" (S)
9.2	119	1	PNEU BIC 20X1.75 PETIZ II CINZA(Z201972)(S)

TABELA 3 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	281	1	PA SEXT MA 8.8 12X100MM RP ZB(HASSMMAN)(S)
2	109807	1	SEPARADOR RDA PARA ARO 20" FUNDIDO
3	191.0	1	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
4	182607	1	TAMPA P/CUBO DE RODA TR PRETA (S)
5	6044	2	ROLAMENTO 6201 DDU C3 1 LINHA(S)
6	10309	1	TUBETE 36,5 mm RODA TRAS MT
7	182668	1	ARO ALUMINIO DIAM.420 3 RAIOS PRETO (MOD.2011)
8	2751	1	ARRUELA LISA 12MM ZB (S) (13X24X2,5)

APLICAÇÃO:
O item 8 é utilizado apenas na montagem da cadeira com placa traseira metálica.

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 8 DE 28


ESCALA: 1:9



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO RODA 20" MT

REV.:

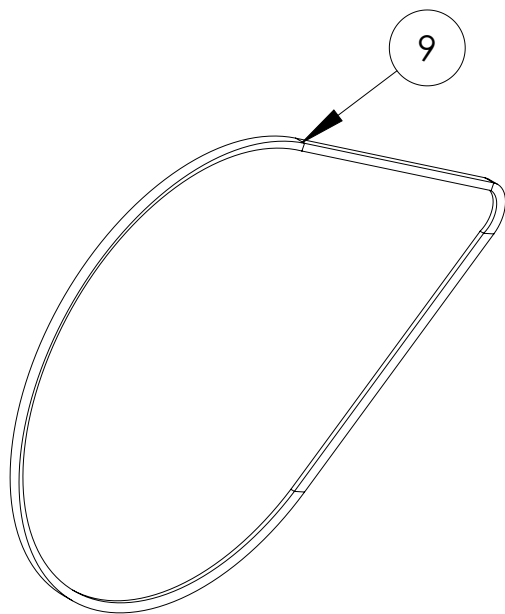

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	10906	CORREIA SHC MN 3VX560 (SPZ1420) (S)
	16268	CORREIA SHC MN 3VX550 (SPZ1387) (S)

APLICAÇÃO: 16268: CADEIRAS MOTORIZADAS P
10906: CADEIRAS MOTORIZADAS M/G

DES.: JONATHAN M.

DATA: 24/06/2019

FOLHA 9 DE 28

ESCALA: 1:6





DESCRIÇÃO:

CORREIA

REV.:

A.08

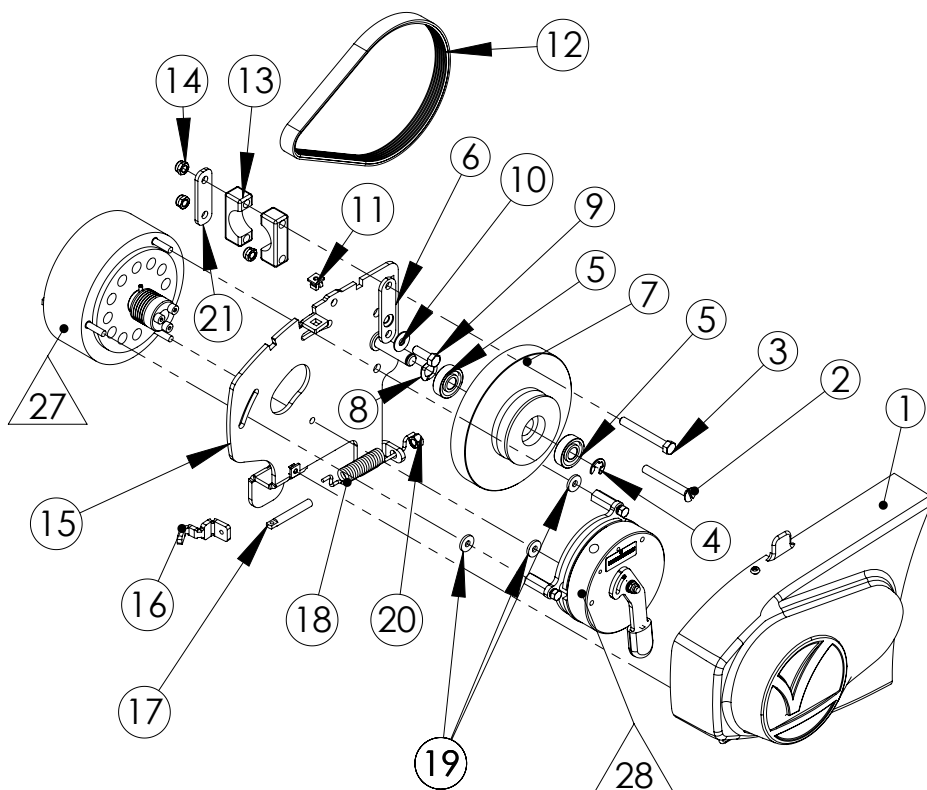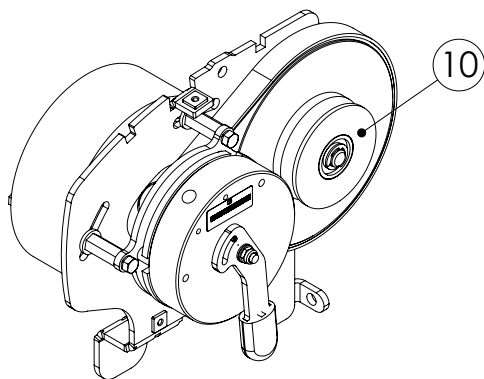

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	164167	MOTORIZACAO CCL M/P - LD MOD.2016
	164170	MOTORIZACAO CCL M/P - LE MOD.2016
	164829	MOTORIZAÇÃO CCL G - LD MOD. 2016
	164835	MOTORIZAÇÃO CCL G - LE MOD. 2016

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	28023	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LD M/G
	28022	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LE M/G
	28025	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LD P
	28024	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LE P
2	16662	1	PA MAQ CH FS 1/4X2 ZB
3	12406.0	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
4	5291.4	1	ANEL DE RETENCAO RS-8MM (MOD.503) (S)
5	1923.2	2	ROLAMENTO 6000 DDU 2RS NSK 1 LINHA (S)
6	116060	1	PRANCHETA FIX. MOTORIZACAO MOD. 2011 LUMINA
	116067	1	PRANCHETA FIX. MOTORIZACAO LG
7	11087.6	1	POLIA DE FERRO CAD L/S/SX 120MM
8	17164	1	ARRUELA ONDULADA AOC 10.5 FOSFATIZADO
9	11359	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X3/4 RT ZB
10	6087.9	1	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
11	157134	2	Bucha de Fixação Carenagem
12	10072.2	1	CORREIA MICRO V 180J6 (S)
13	1701.9	2	ABRACADEIRA 1" CAD.
14	491.0	3	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
15	164163	1	PLACA MOTORIZACAO M/P - LD MOD.2016
	164161	1	PLACA MOTORIZACAO M/P - LE MOD.2016
	173508	1	PLACA MOTORIZAÇÃO G - LD MOD. 2016
	164833	1	PLACA MOTORIZAÇÃO G - LE MOD. 2016
16	150677	1	ESTICADOR DOBRADO MOTORIZACAO STYLES
17	135190	1	PINO ESTICADOR CORREIA MOT 2013
	181349	1	PINO ESTICADOR CORREIA MOT.20 G / SCOOTER
18	531.2	1	MOLA SUSPENSAO/MOTORIZACAO 2,5X14X45X100 (S)
19	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
20	891	1	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
21	7311		FREIO UNIAO/FIXACAO PANTURRILHA
27	PG. 27		VER PAGINA 27
28	PG.28		VER PAGINA 28

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

MOTORIZAÇÃO 20"

DES.: Jacondino

FOLHA 10 DE 28

DATA:



ESCALA: 1:4



REV.:

F.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	109586	SUPORTE PEDALEIRA CADEIRA LP
	106634	SUPORTE PEDALEIRA CADEIRA LM
	109588	SUPORTE PEDALEIRA CADEIRA LG

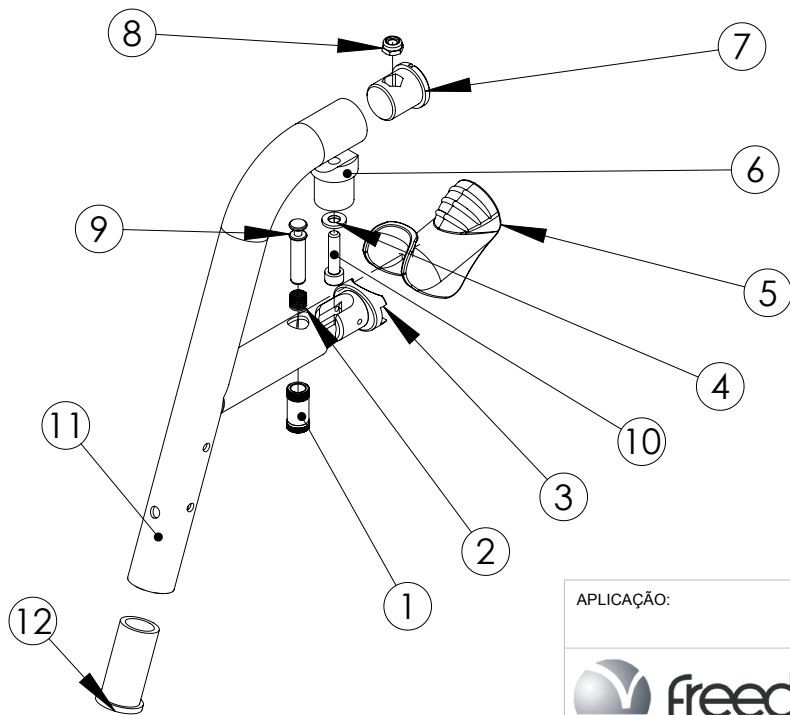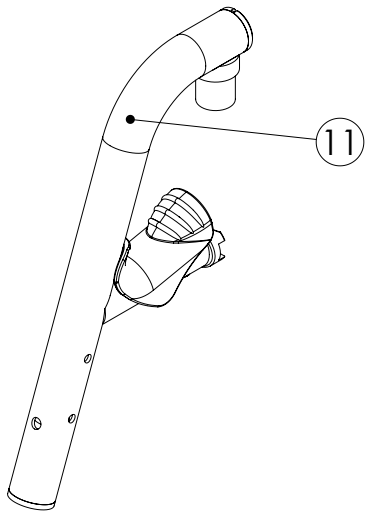

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	161762	1	BUCHA DESARME
2	163609	1	MOLA 8.53 x 0.60 x 20
3	107426	1	BUCHA TRAVA PEDALEIRA
4	15442.3	1	ARRUELA LISA 6MM ZB (S/L)
5	106957	1	ACIONADOR DESENGATE
6	107425	1	BUCHA ARTICULACAO PEDALEIRA
7	107424	1	FIX. ARTICULACAO PEDALEIRA
8	11852.4	1	PO SEXT NY BX CL8 6H10 ZB (S) 1.03.03.03
9	109806.3	1	PINO GATILHO PE-ARTICULADO
10	18158	1	PA ALLEM 6X25MM MA INOX A2 C/CILINDRICA(S)
11	126764	1	SUPORTE TUBO PEDALEIRA LP
	114076	1	SUPORTE TUBO PEDALEIRA LM
	114075	1	SUPORTE TUBO PEDALEIRA LG
12	107427	1	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

SUPORTE PEDALEIRA CADEIRA

DES.: JONATHAN M.

DATA:


FOLHA 11 DE 28

ESCALA: 1:4



REV.:

R

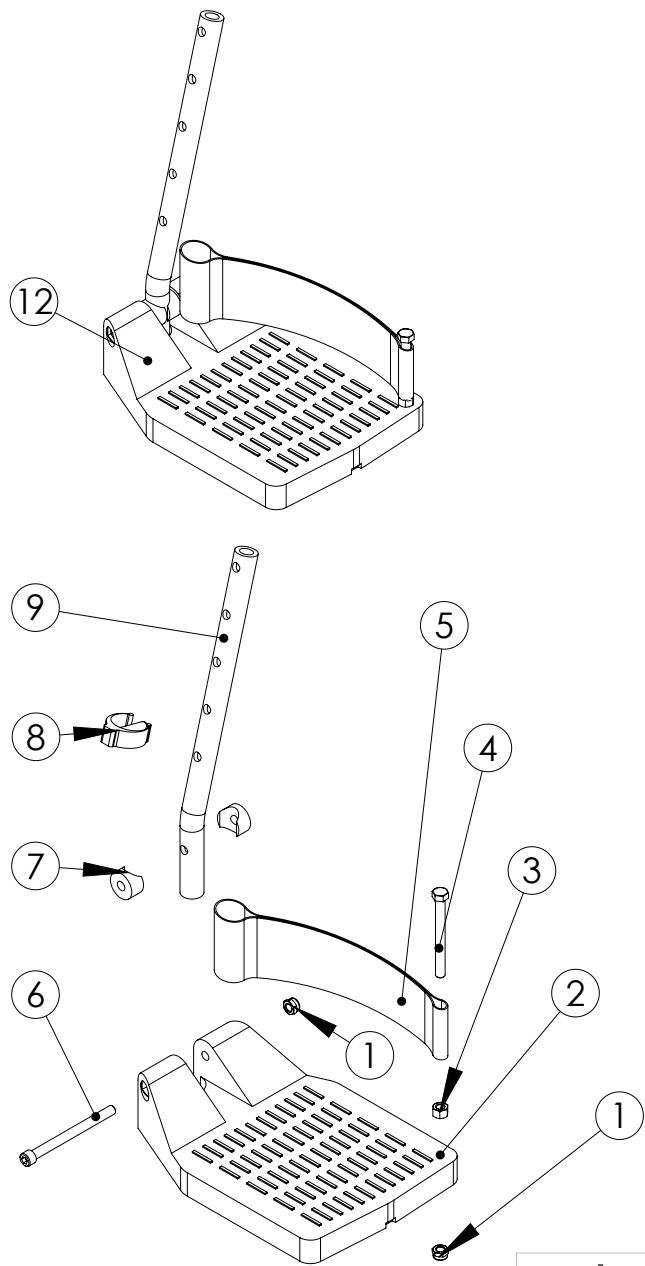

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
12	143059	CONJUNTO PEDALEIRA LUMINA LD 41/45/50/55/60
	143062	CONJUNTO PEDALEIRA LUMINA LE 41/45/50/55/60
	109542	CONJUNTO PEDALEIRA LUMINA LD 34/37
	143650	CONJUNTO PEDALEIRA LUMINA LE 34/37

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
	106147		PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
3	891.5	1	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	12407	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/2 RP ZB (S/L)
5	2459.7	1	TIRA APOIO CALCANHAR
6	18159.5	1	PA ALLEM 1/4X3 MA INOX C/CILINDRICA(S)
7	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA CAD.ALUM 2011 (S)
8	6889.6	1	CLIP E 1"
9	106150	1	TUBO PEDALEIRA LUMINA
	110844		TUBO PEDALEIRA LUMINA CAD. LP

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

PEDALEIRA

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 12 DE 28



ESCALA: 1:5



REV.:

E

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	26963	CONJUNTO GARFO SUSPENSAO RODA 8" INFLAVEL PRETO
	176257	CONJUNTO GARFO SUSPENSAO RODA 8" MACICA

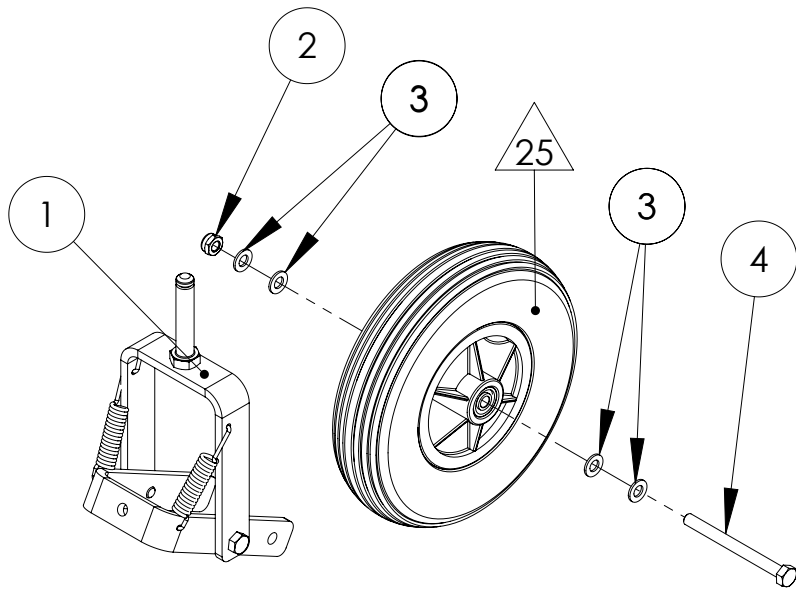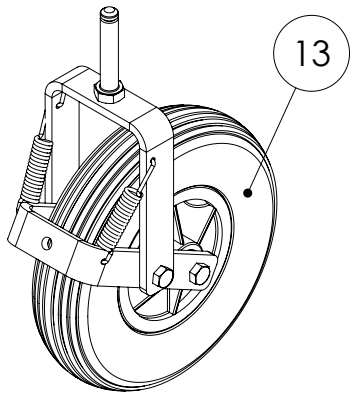

ÍTEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	3434	1	GARFO SUSPENSAO
2	791	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	10507	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
4	781	1	PA SEXT MA 8.8 8X90MM RP ZB (S/L)
25	PG.25		VER PÁGINA 25



ARRUELA LISA 8MM É USADA NO CONJUNTO COM PNEU MACIÇO

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 13 DE 28

ESCALA: 1:5




REV.:

F



DESCRIÇÃO:

GARFO SUSPENSÃO 8"

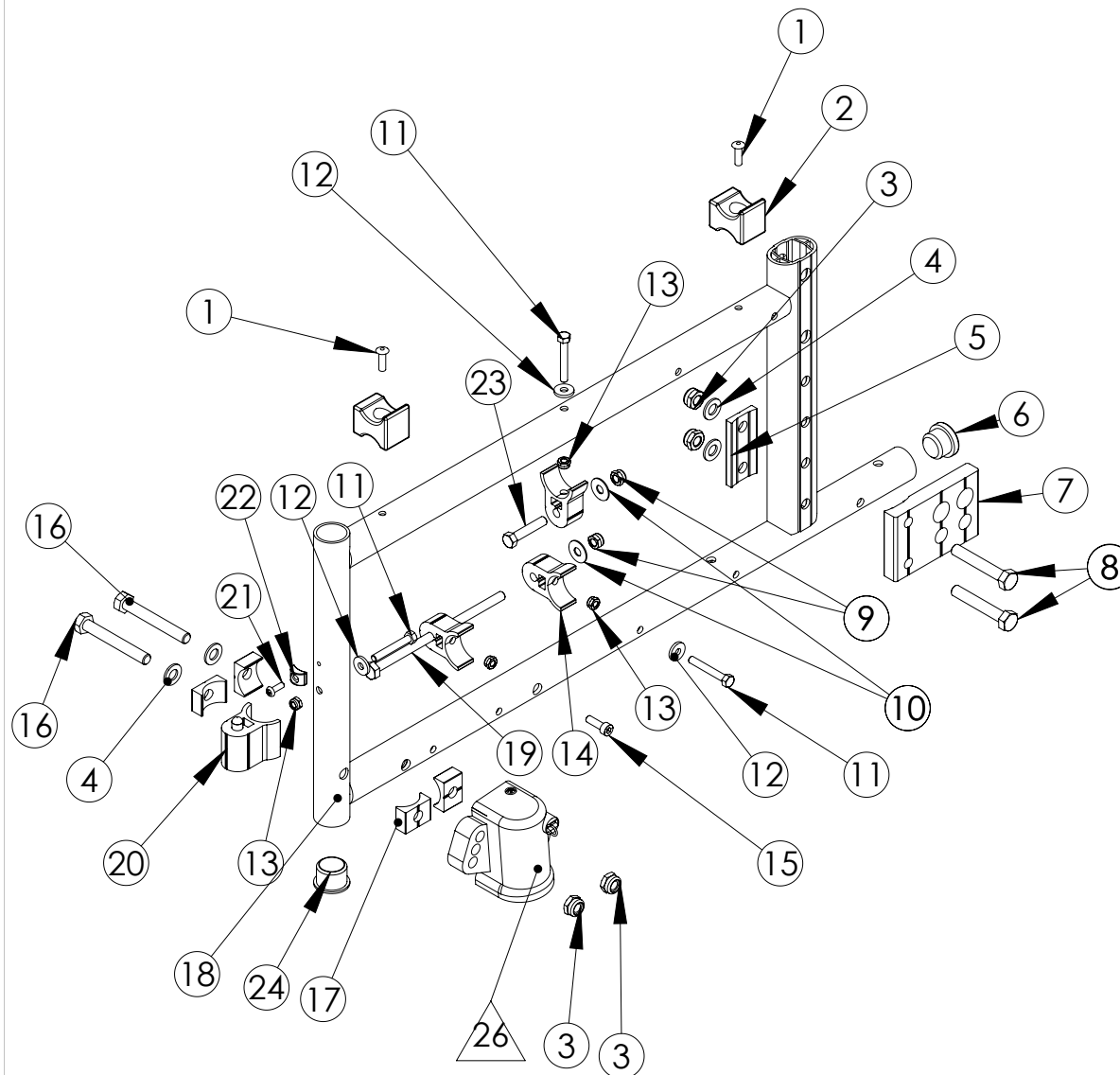

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	11418.9	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
2	1704.3	CADEIRINHA 1" CAD.ALUM. (S)
3	791.9	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
4	10507.4	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
5	173726	MEIA CANA TUBO OBLONGO
6	1703.5	TAMPAO 1" P/ 1/8" CAD.ALUM. (S)
7	173724	PLACA CAD. MANUAL LD [1804]
8	11310.7	PA SEXT MA 8.8 8X50MM RT ZB (S/L)
9	491.0	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
10	6087.9	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
11	133037	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
12	393.0	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
13	691.2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
14	124518	PERFIL U FURO PORCA
15	136306	PA ALLEM 5X16MM MA INOX A2 C/C(S)
16	11832.0	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
17	151197	PERFIL MEIA CANA 1 18MM FURO 8.5MM
18	22724	CHASSIS ALUMINIO P AMARELO
	22727	CHASSIS ALUMINIO P AZUL VERNIZ
	22722	CHASSIS ALUMINIO P GRAFITE
	22729	CHASSIS ALUMINIO P PRATA VERNIZ
	22721	CHASSIS ALUMINIO P PRETO BRILHANTE
	22725	CHASSIS ALUMINIO P VERDE VERNIZ
	22726	CHASSIS ALUMINIO P VERMELHO VERNIZ
	22723	CHASSIS ALUMINIO P VINHO
	22728	CHASSIS ALUMINIO P VIOLETA VERNIZ
	22733	CHASSIS ALUMINIO M AMARELO
	22736	CHASSIS ALUMINIO M AZUL VERNIZ
	22731	CHASSIS ALUMINIO M GRAFITE
	22738	CHASSIS ALUMINIO M PRATA VERNIZ
	22730	CHASSIS ALUMINIO M PRETO BRILHANTE
	22734	CHASSIS ALUMINIO M VERDE VERNIZ
	22735	CHASSIS ALUMINIO M VERMELHO VERNIZ
	22732	CHASSIS ALUMINIO M VINHO
	22737	CHASSIS ALUMINIO M VIOLETA VERNIZ
	22742	CHASSIS ALUMINIO G AMARELO
	22745	CHASSIS ALUMINIO G AZUL VERNIZ
	22740	CHASSIS ALUMINIO G GRAFITE
	22747	CHASSIS ALUMINIO G PRATA VERNIZ
	22739	CHASSIS ALUMINIO G PRETO BRILHANTE
	22743	CHASSIS ALUMINIO G VERDE VERNIZ
	22744	CHASSIS ALUMINIO G VERMELHO VERNIZ
	22741	CHASSIS ALUMINIO G VINHO
	22746	CHASSIS ALUMINIO G VIOLETA VERNIZ
19	16641	PA SEXT UNC G.5 1/4X5 RP ZB (S/L)
20	161770	MONTAGEM PERFIL SUPORTE PEDALEIRA 2016
21	617.3	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
22	107747	TRAVAMENTO PEDALEIRA
23	12409.5	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
24	107756	TAMPAO P/TUBO 1"X2MM CAD.ALUM 2011 (S)
26	VER PÁGINA 26	

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:
CHASSIS

DES.: JONATHAN M.


DATA:

FOLHA 14 DE 28

ESCALA: 1:5



REV.:

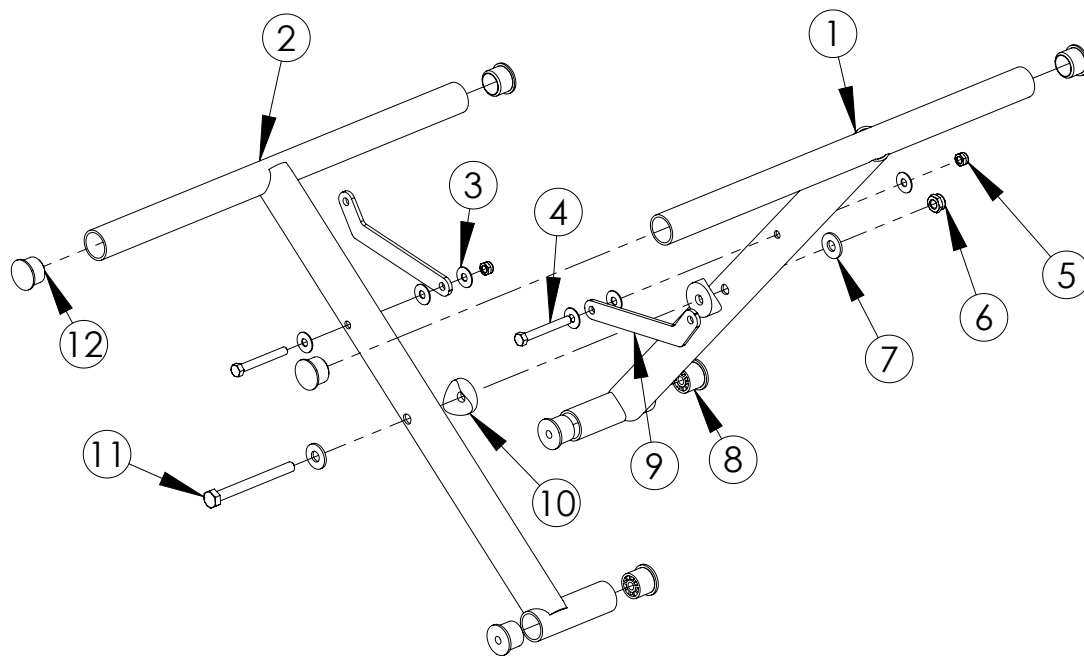

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	113646	1	TUBO X 34/37 LD P ALUMINIO
	113662	1	TUBO X 37/37 LD P ALUMINIO
	113665	1	TUBO X 37/42 LD M ALUMINIO
	113636	1	TUBO X 41/42 LD M ALUMINIO
	113685	1	TUBO X 45/42 LD M ALUMINIO
	113698	1	TUBO X 50/42 LD M ALUMINIO
	113748	1	TUBO X 41/47 LD G ALUMINIO
	113749	1	TUBO X 45/47 LD G ALUMINIO
	113692	1	TUBO X 50/47 LD G ALUMINIO
2	113645	1	TUBO X 34/37 LE P ALUMINIO
	113658	1	TUBO X 37/37 LE P ALUMINIO
	113637	1	TUBO X 41/42 LE M ALUMINIO
	113686	1	TUBO X 45/42 LE M ALUMINIO
	113699	1	TUBO X 50/42 LE M ALUMINIO
	113664	1	TUBO X 37/42 LE M ALUMINIO
	113747	1	TUBO X 41/47 LE G ALUMINIO
	113750	1	TUBO X 45/47 LE G ALUMINIO
	113691	1	TUBO X 50/47 LE G ALUMINIO
3	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
4	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
5	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
6	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
7	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
8	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO
9	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
10	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" (S)
11	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
12	107756	4	TAMPAO P/TUBO 1`X2MM CAD.ALUM 2011 (S)

APLICAÇÃO:
ITEM 11 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR

DES.: JONATHAN M.
FOLHA 15 DE 28

DATA:
ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO X ALUMINIO

REV.:

K

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	18196	DRIVE CONNECT

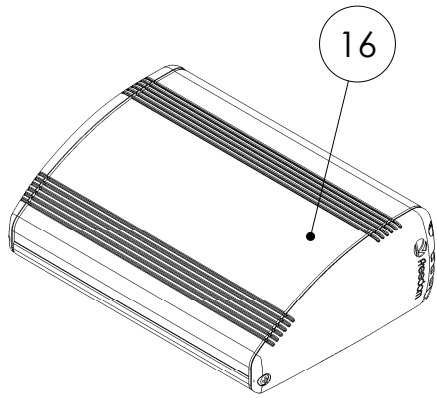

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 16 DE 28


ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:

DRIVE CONNECT

REV.:

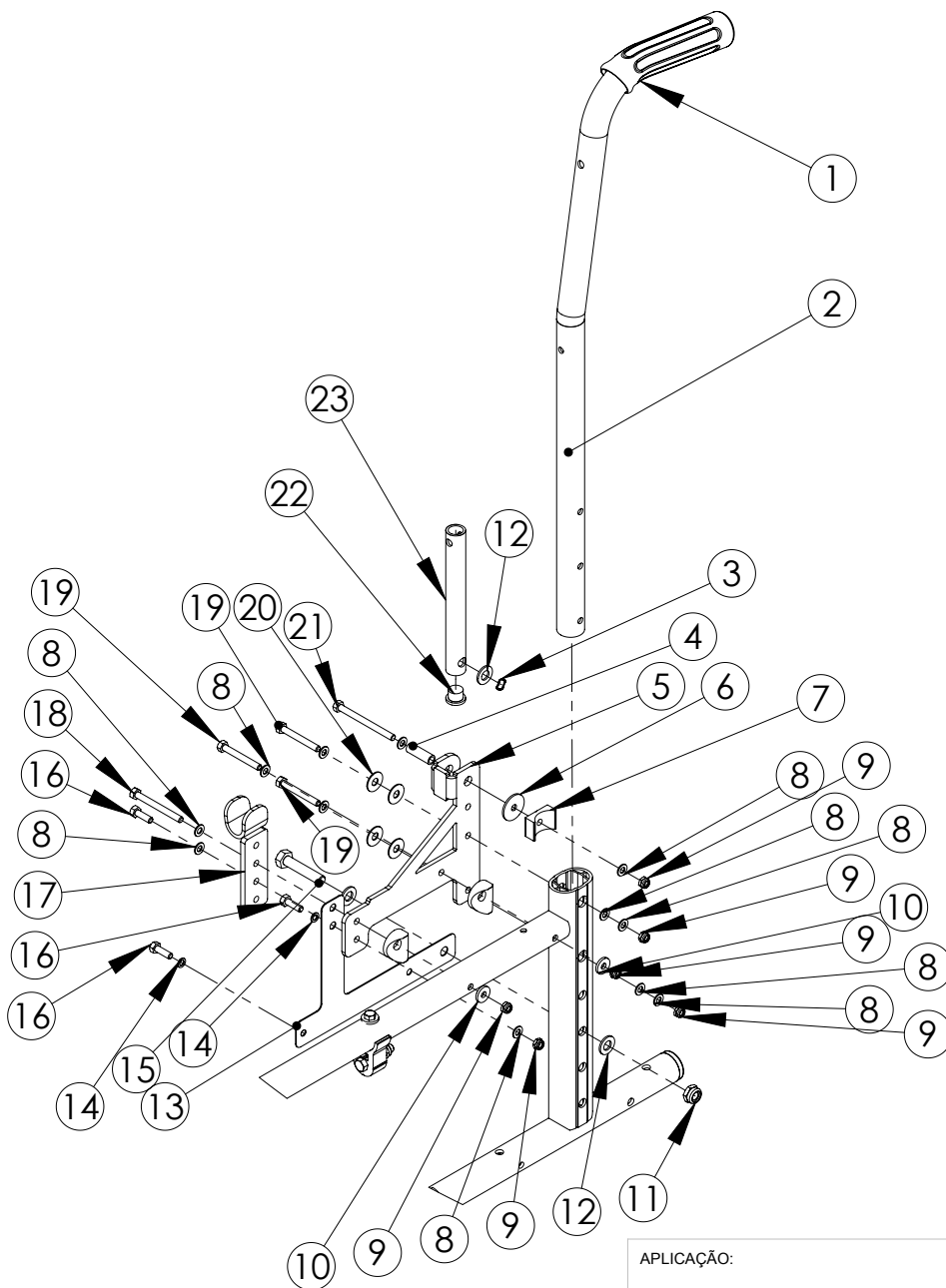

ITEM	CÓDIGO	QNT	DESCRIÇÃO
1	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	180440	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40/30 [1806]
	179334	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40 [1804]
	179336	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 45 [1804]
	179333	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 50 [1804]
3	15651	1	ARRUELA ONDULADA 8MM FOSFATIZADA
4	180507	1	BUCHA BRAÇO ARTICULADO [1807]
5	163056	1	PLACA BRACO RECLINAVEL LD
	165543	1	PLACA BRACO RECLINAVEL LE
6	23512	1	ARRUELA CHAPEADORA 3/16 ZB(5,6X23X1,5)
7	104383	1	PERFIL MEIA CANA 1" 18MM
8	261.5	12	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
9	691.2	10	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
10	393.0	5	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
11	791.9	3	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
12	10507.4	5	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
13	125311	1	SUPORE DRIVE STYLES / LUMINA M CORTE LASER
14	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
15	4004.5	1	PA SEXT MA 8.8 8X40MM RT ZB (S/L)
16	881.8	3	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
17	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
18	7821.2	1	PA SEXT MA 8.8 5X50MM RT ZB (S)
19	581.9	3	PA SEXT MA 8.8 5X40MM RT ZB (S)
20	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
21	19589.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X60MM RT ZB (S)
22	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO
23	182557	1	TUBO FIXACAO BRACO ART [1902]

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO FIXO

DES.: JONATHAN M.

DATA:


FOLHA 17 DE 28

ESCALA: 1:6



REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	3823	CAPA CHICOTE STAND-UP/CAD. MOT

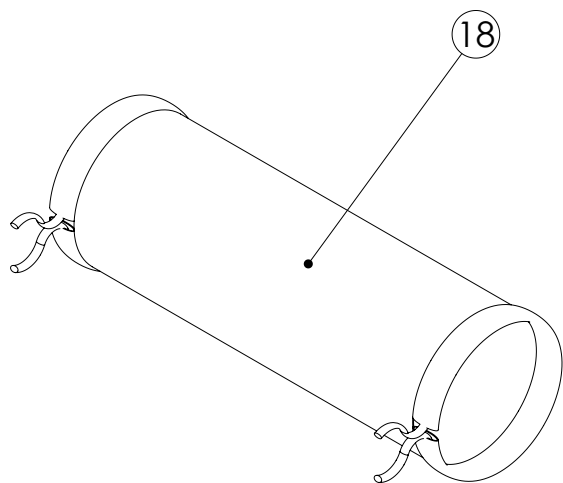

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 18 DE 28

ESCALA: 1:3




REV.:



DESCRIÇÃO:

CAPA CHICOTE

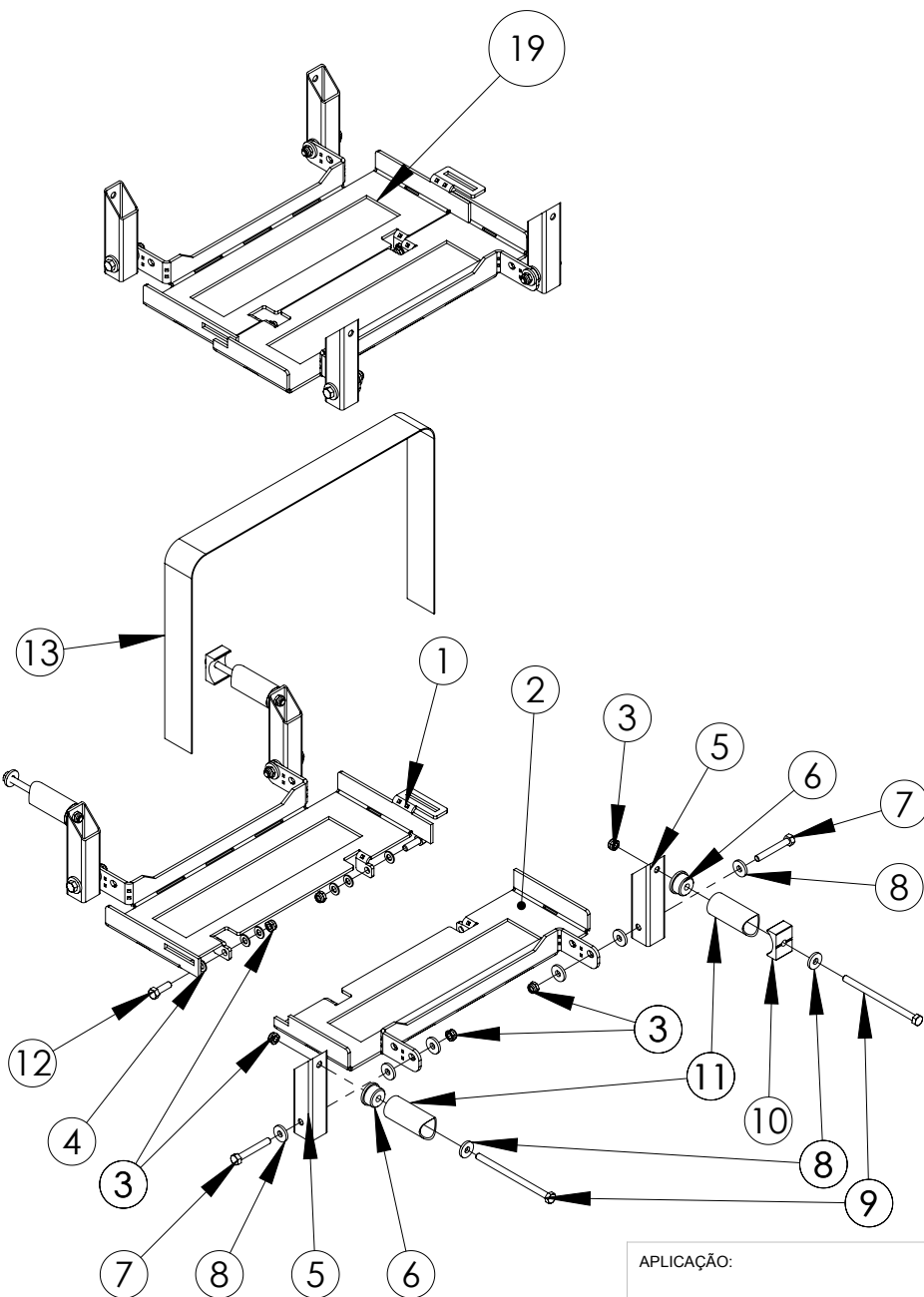

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
19	146252	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 34
	169193	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 37
	146096	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 37
	147064	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 41
	163485	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 45
	145949	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 41
	146835	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 41
	147063	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 45
	147065	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 45
	146318	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 50
	148744	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 50
	149465	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 50

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	147272	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG 34 LD
	169395	1	SUPORTE BATERIA 18AH LD LARG. 37
	153560	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 37
	147270	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 41
	149449	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 45
	169402	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 50
	168321	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 41
	168319	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 45
	168241	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 50
	153559	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 41
	147268	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 45
	149373	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 50
	153565	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 41
	147274	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 45
	149462	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 50
2	147271	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 34 LE
	169397	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 37 LE
	153561	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 37
	147269	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 41
	149454	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 45
	169393	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 50
	168324	1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 41
	168325	1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 45
	168238	1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 50
	153558	1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 41
	147267	1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 45
	149371	1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 50
	153564	1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 41
	147273	1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 45
	149461	1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 50
3	691.2	10	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
4	261.5	6	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
5	146654	4	Fixação do Sup. de Bateria
6	146291	4	BUCHA DE TÉCNIL DO SUPORTE DE BATERIA
7	133037	4	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
8	393.0	16	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
9	20105	4	PA SEXT MA 8.8 5X80MM
10	104383	2	PERFIL MEIA CANA 1 18MM FURO Ø5,5 MM
11	146115	4	TUBO FIXAÇÃO DO APOIO DO SUPORTE
12	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
13	19692	1	CINTO BATERIA 18A
	19625	1	CINTO BATERIA 26A/33A/34A
	19693	1	CINTO BATERIA 38A/55A

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

SUPORTE DE BATERIA

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 19 DE 28


ESCALA: 1:6



REV:

D.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20	147100	PROLONGADOR TUBO CHASSIS BAIXO ALUM.

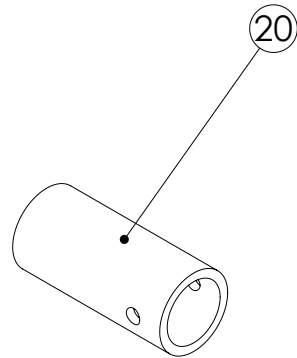

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 20 DE 28

ESCALA: 1:2





DESCRIÇÃO:

PROLONGADOR TUBO CHASSIS BAIXO ALUM.

REV.:

C

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
21	183965	CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO ARO 20/24

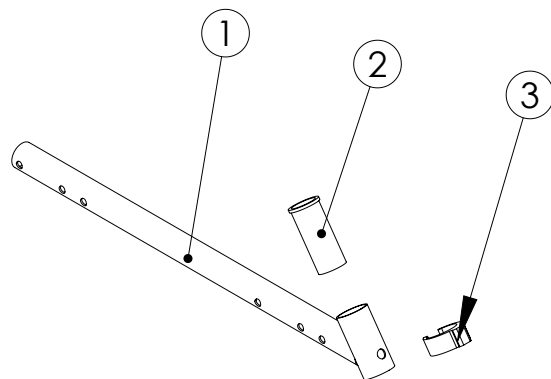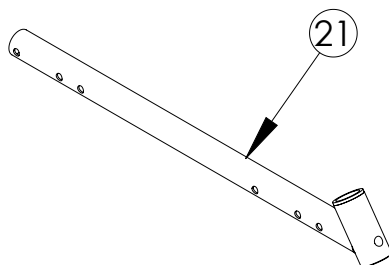

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
	148877	1	FIXAÇÃO SUPORTE RODA APOIO ARO 20/24
2	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
3	174699	1	CLIP E 7/8` (S) NÃO PASSANTE

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 21 DE 28

ESCALA: 1:5





DESCRIÇÃO:

CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO

REV.:

A

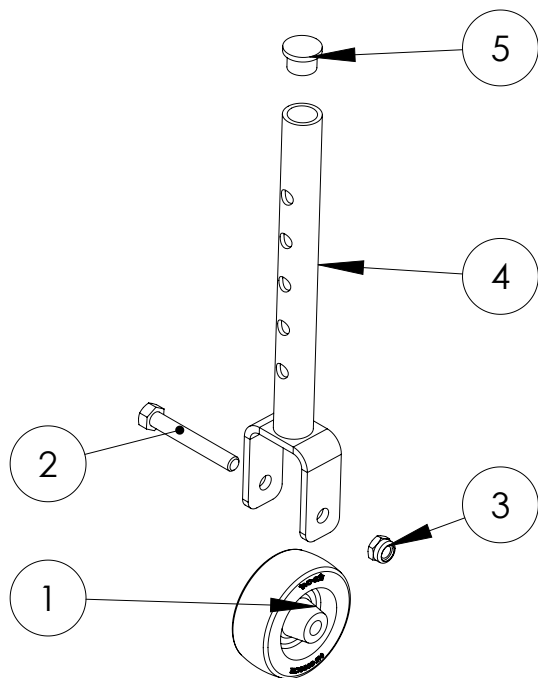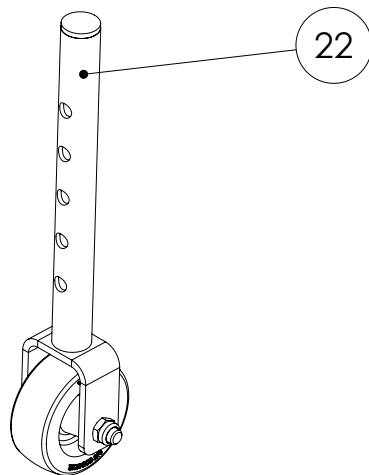

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22	19915	RODA APOIO CAD. MT

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	133920	1	RODA ROD CAR - TECNI ROD 210 (2")
2	12405.2	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
3	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	150094	1	TUBO RODA APOIO CHASSIS EXTENDIDO
5	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 22 DE 28

ESCALA: 1:3




DESCRIÇÃO:

RODA DE APOIO CAD MT


REV.:

D


OBS. TAMPA BATERIA EM SERIE E TAMPA BATERIA FREE DEVEM SER VENDIDAS JUNTAS.

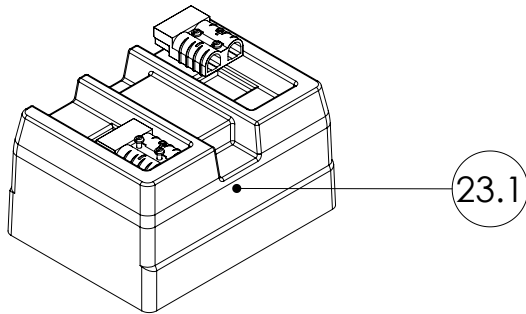

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
23.1	19626	TAMPA BATERIA FREE 26A SERIE(MONTADA)
	19195	TAMPA BATERIA FREE 26A(MONTADA)
	22270	TAMPA BATERIA FREE 33/34A SERIE(MONTADA)
	22271	TAMPA BATERIA FREE 33/34A (MONTADA)
	19627	TAMPA BATERIA FREE 38A SERIE(MONTADA)
	19196	TAMPA BATERIA FREE 38A(MONTADA)
	19628	TAMPA BATERIA FREE 55A SERIE(MONTADA)
	19197	TAMPA BATERIA FREE 55A(MONTADA)

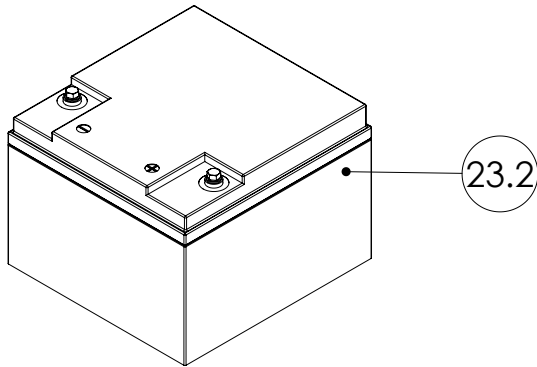

ITEM	QTD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
23.2	2	18846	KIT FORCA 12-18 12V 18AH P/CAD.RODA
	2	18847	KIT FORCA 12-26 12V 26AH P/CAD.RODA
	2	18848	KIT FORCA 12-33 12V 33AH P/CAD.RODA
	2	23165	KIT FORCA 12-34 12V 34AH P/CAD.RODA
	2	18849	KIT FORCA 12-38 12V 38AH P/CAD.RODA
	2	18851	KIT FORCA 12-55 12V 55AH P/CAD.RODA

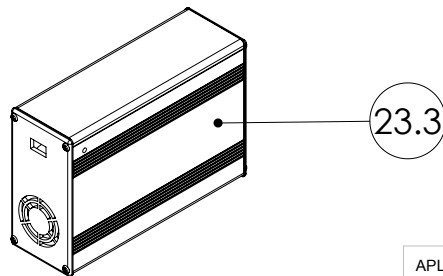

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
23.3	26265	CARREGADOR CADEIRA 24V/2.5A
	19972	CARREGADOR CADEIRA 24V/5.0A

APLICAÇÃO:

DES.: Jacondino

DATA:

FOLHA 23 DE 28

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

BATERIA SELADA VRLA FREE


REV.:

A

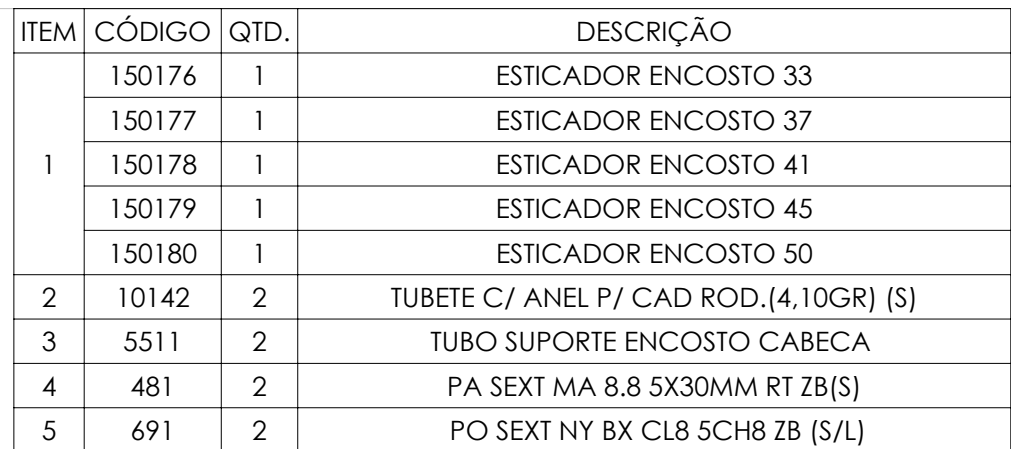

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	150176	1	ESTICADOR ENCOSTO 33
	150177	1	ESTICADOR ENCOSTO 37
	150178	1	ESTICADOR ENCOSTO 41
	150179	1	ESTICADOR ENCOSTO 45
	150180	1	ESTICADOR ENCOSTO 50
2	10142	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
3	5511	2	TUBO SUPORTE ENCOSTO CABECA
4	481	2	PA SEXT MA 8.8 5X30MM RT ZB(S)
5	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L)



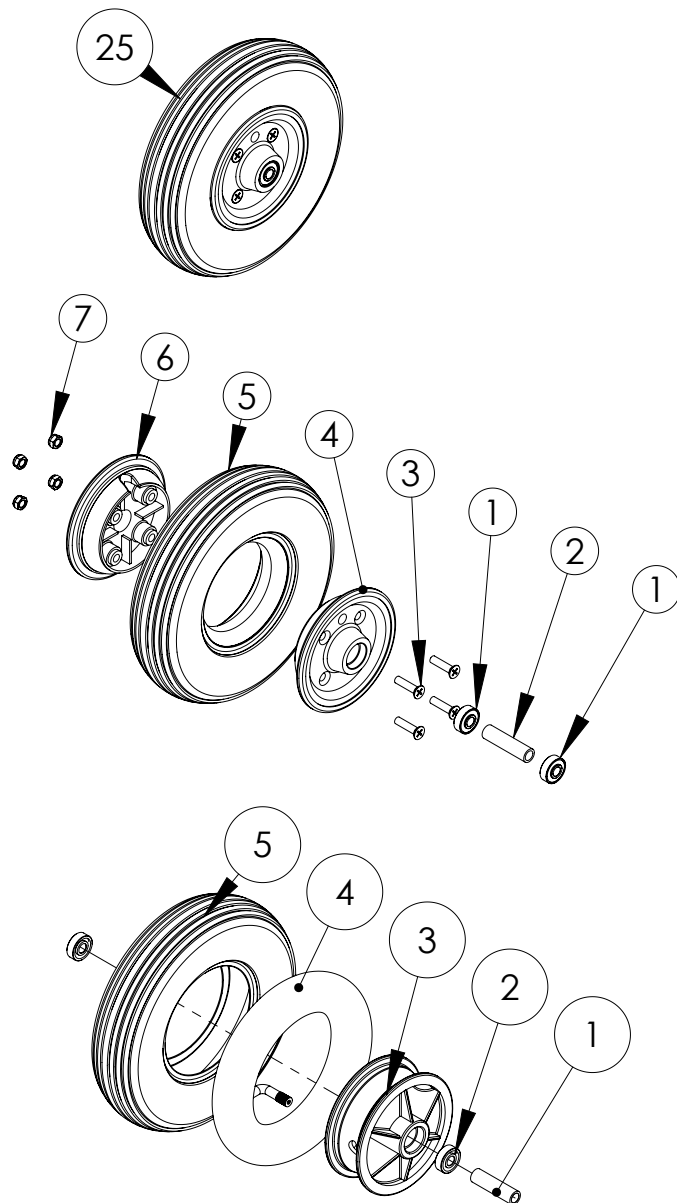

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
25	21508	RODA 8" BI PARTIDO CONJ/ROLAMENTO P/CAD.RODA(F70136)PARA CADEIRA DE RODAS
	184463	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 8" PRETO

ÍTEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	188290	2	ROLAMENTO 608 - C2005 PR1MO
2	175013	1	SEPARADOR RODA 8" MACICA
3	175012	4	PA MAQ CH PH 6X30MM ZB (S)
4	175002	1	ARO BI-PARTIDO LADO C/ VALVULA
5	22404	1	PNEU 8" MACICO
6	175003	1	ARO BI-PARTIDO LADO S/ VALVULA
7	136543	4	PO SEXT NY 6MM MA INOX A2(6X6X10MM)(S)

ÍTEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	169553	1	SEPARADOR 44 RODA 8" INF
2	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
3	184460	1	ARO NYLON 8"141GR PRETO BICO TORTO(S)
4	13925.4	1	CAMARA DE AR 8 - 200X4 TR 87(BICO TORTO) (S)
5	23269	1	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 200X50 (Z255793)PARA CADEIRA DE RODAS

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

RODA DIANTEIRA 8"

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 25 DE 28



ESCALA: 1:6



REV.:

B

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	181359	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD LUMINA ANTI SHIMMING (QUICK RELEASE)
	181356	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD LUMINA ANTI SHIMMING (QUICK RELEASE)

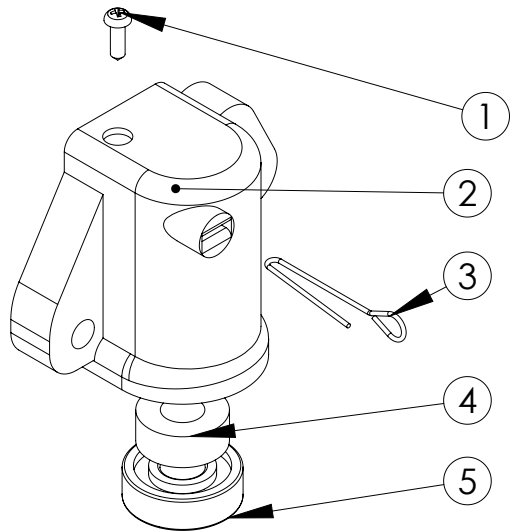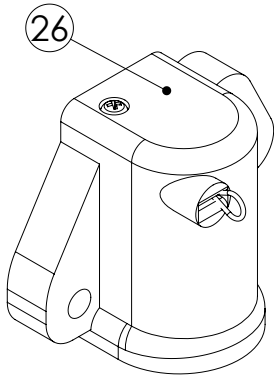

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
2	19446	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD LUMINA. (S)
	19447	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD LUMINA.(S)
3	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)
4	178326	1	BUCHA GARFO CADEIRA MT [1801]
5	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 01/10/2009

FOLHA 26 DE 28

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

D

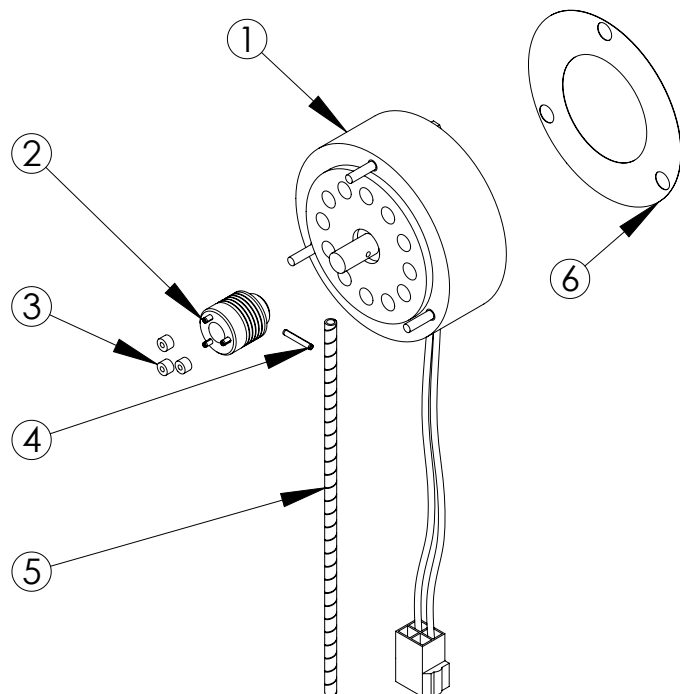

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	21648	1	MOTOR FREE 24 CPH
2	164169	1	PINHÃO MICRO V 27MM C/PINOS MOD. 2016
3	7733.0	3	MANGUEIRA PINHAO MV
4	23972	1	PINO ESPIRAL 3X20(S)
5	4348	1	TUBO ESPIRAL 1/4 POLIET.PRE
6	24115	1	ETIQUETA ANTI RUÍDO MOTOR CPH

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 27 DE 28

ESCALA: 1:4




DESCRIÇÃO:

MOTOR CPH

REV.:

B.01

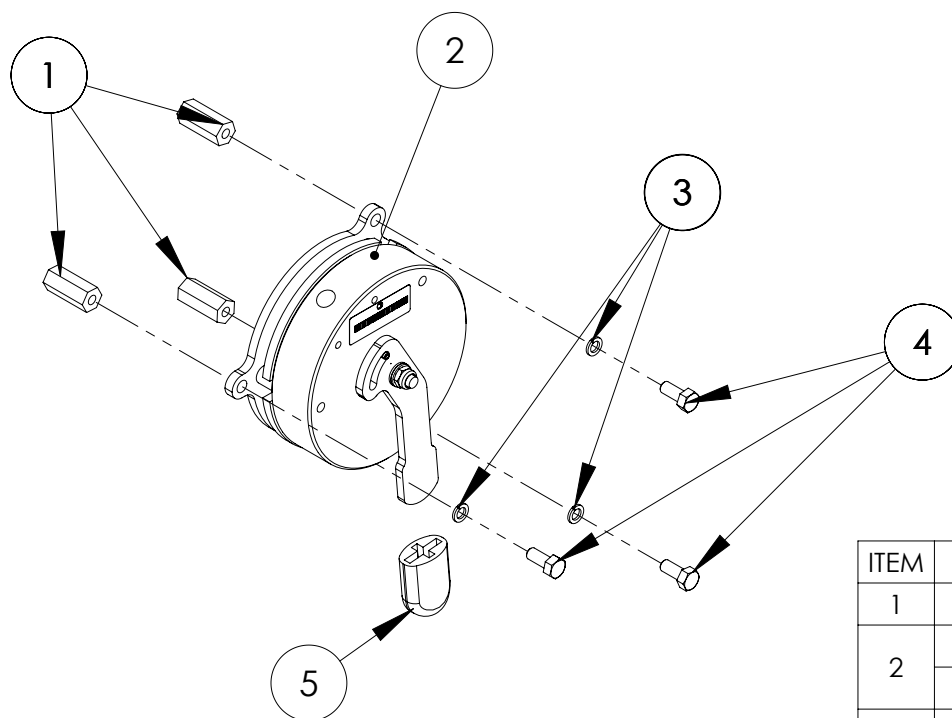

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11117.1	3	SEPARADOR SEXTAVADO FREIO
2	164166	1	FREIO ELETROMAGNETICO LD MOD.2016
	164164	1	FREIO ELETROMAGNETICO LE MOD.2016
3	6885.3	3	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
4	6981.7	3	PA SEXT MA 8.8 5X12MM RT ZB (S)
5	182902	1	LUVA PRETA PVC P/CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 28 DE 28

ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:

FREIO

REV.: