


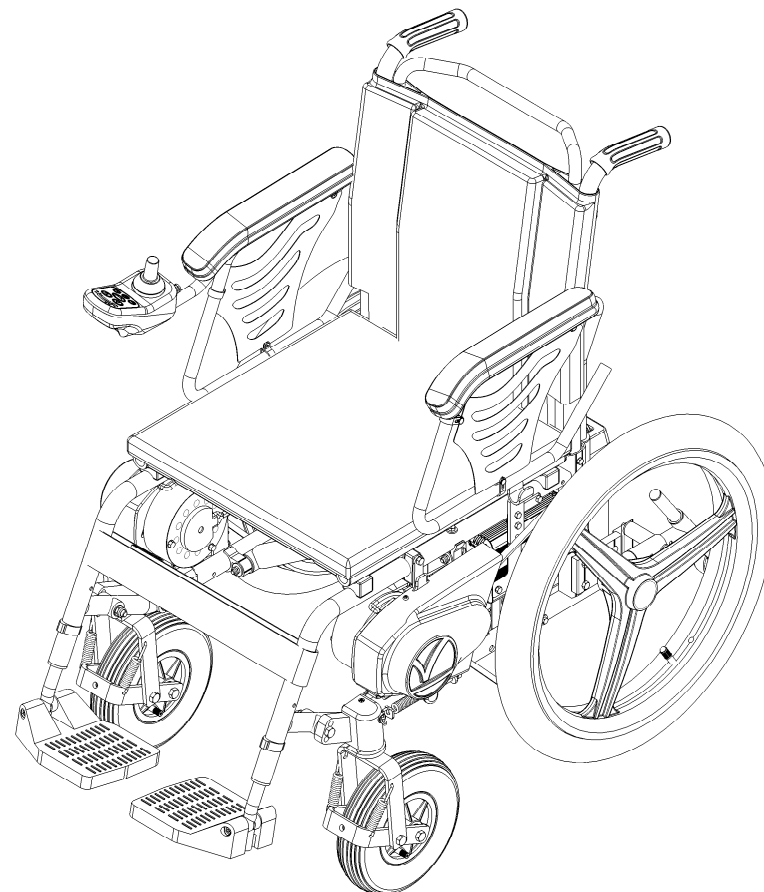

APLICAÇÃO:

DES.: otavio

DATA:

FOLHA 1 DE 28


ESCALA: 1:10



DESCRIÇÃO:
STYLES

REV.:

B.03

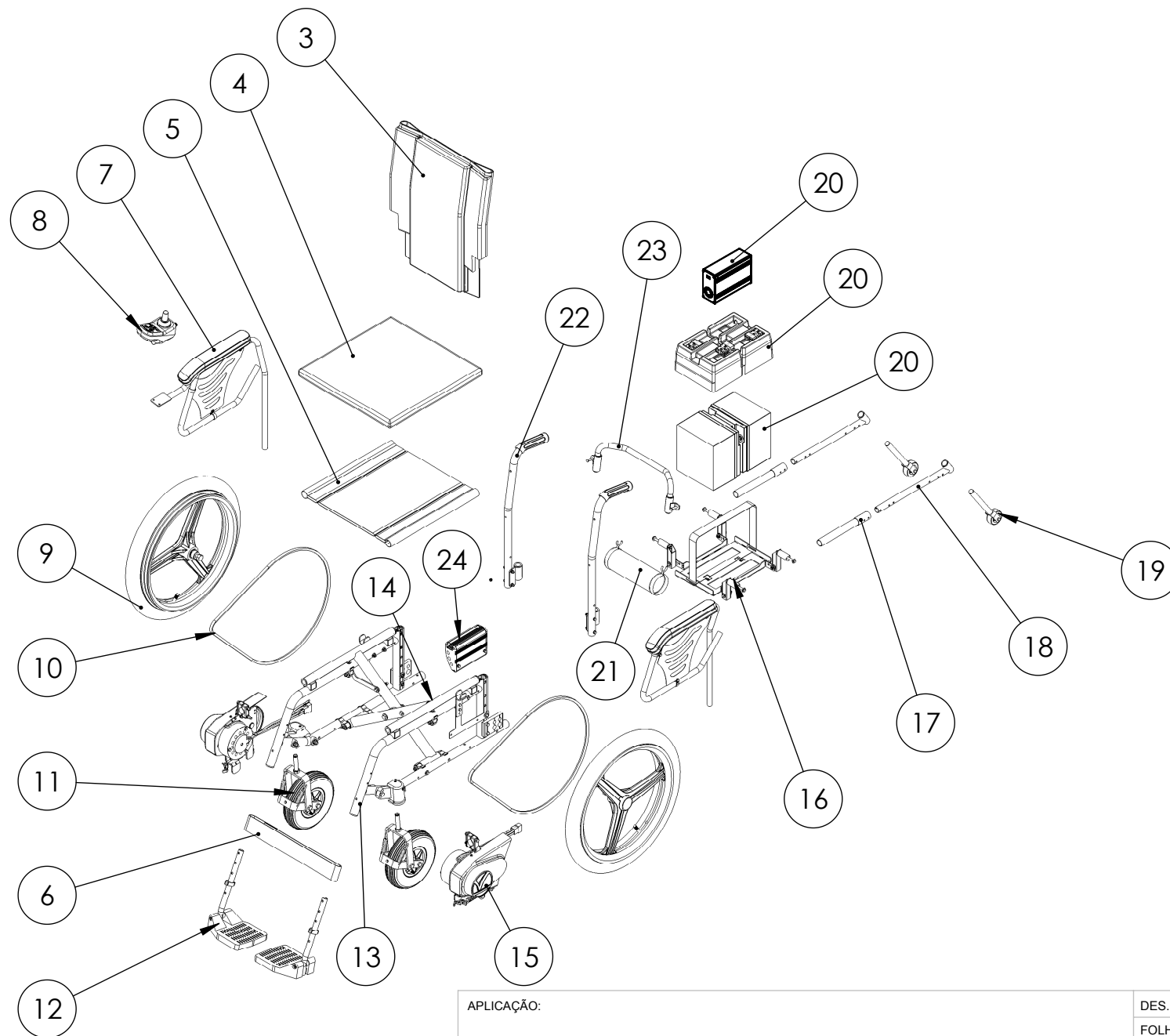

APLICAÇÃO:

DES.: otavio

DATA:

FOLHA 2 DE 28

ESCALA: 1:19




REV.:

B.03



DESCRIÇÃO:
STYLES

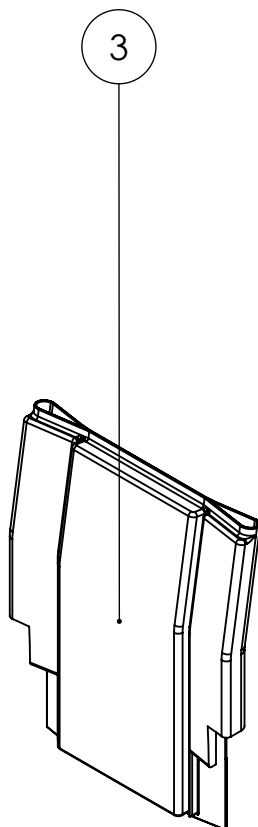

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23715	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 34/30
	23716	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 34/35
	20447	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 34/40
	20448	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 34/45
	20449	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 34/50
	23717	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 37/30
	23718	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 37/35
	20192	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 37/40
	20200	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 37/45
	20208	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 37/50
	23719	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 41/35
	20193	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 41/40
	20201	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 41/45
	20209	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 41/50
	23332	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 41/55
	23720	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 45/35
	20196	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 45/40
	20204	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 45/45
	20212	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 45/50
	23333	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 45/55
	23721	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 50/35
	20197	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 50/40
	20205	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 50/45
	20213	ENCOSTO PLUS/STYLES/LUMINA 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: gabriel

DATA:

FOLHA 3 DE 28

ESCALA: 1:10




REV.:

F



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

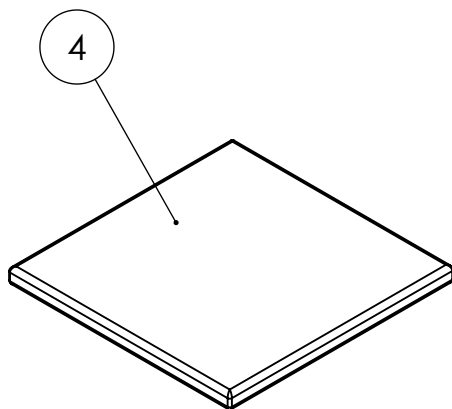

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	23104	ALMOFADA ASSENTO L.34/P.37 3CM
	20289	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.37 3CM
	20827	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.42 3CM
	23019	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.47 3CM
	20295	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.42 3CM
	20301	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.47 3CM
	23216	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.52 3CM
	20297	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.42 3CM
	20304	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.47 3CM
	23179	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.52 3CM
	20299	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.42 3CM
	20306	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.47 3CM
	23287	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.52 3CM

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 4 DE 28

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

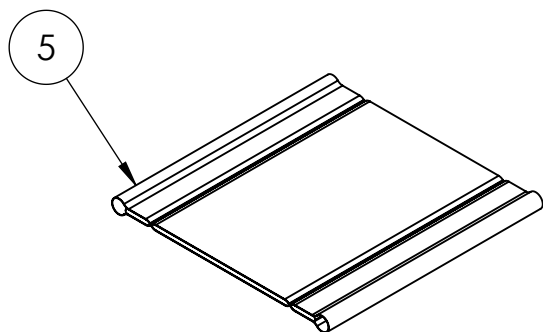

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: ---

DATA:

FOLHA 5 DE 28

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

C

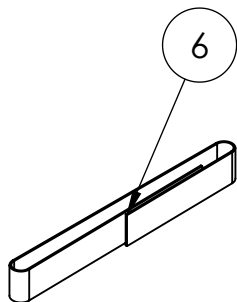

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	2568	TIRA PANTURRILHA 34
	2389	TIRA PANTURRILHA 37
	514	TIRA PANTURRILHA 41
	1514	TIRA PANTURRILHA 45
	2523	TIRA PANTURRILHA 50

APLICAÇÃO:

DES.: osvaldo

DATA:

FOLHA 6 DE 28

ESCALA: 1:10





DESCRIÇÃO:

TIRA PANTURRILHA

REV.:

C

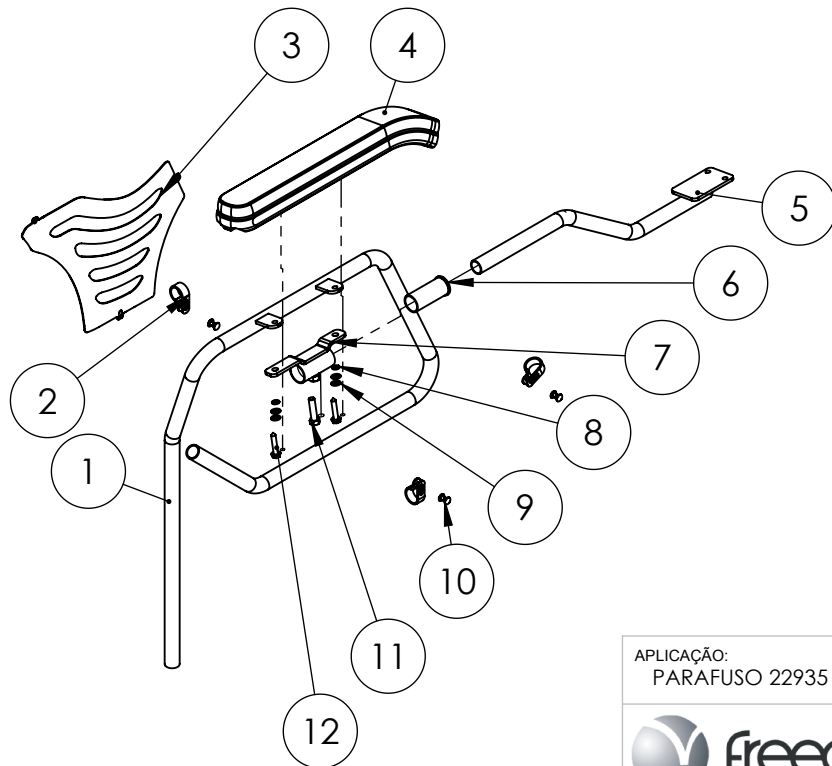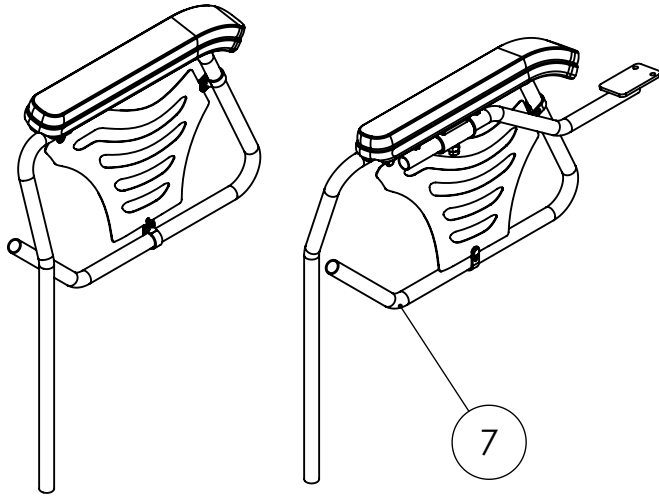

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	166460	CONJUNTO BRACO STYLES FIXO C/SUP. JOY P LD STANDARD
	166459	CONJUNTO BRACO STYLES FIXO C/SUP. JOY P LE STANDARD
	166458	CONJUNTO BRACO STYLES FIXO C/SUP. JOY M LD STANDARD
	166457	CONJUNTO BRACO STYLES FIXO C/SUP. JOY M LE STANDARD
	166456	CONJUNTO BRACO STYLES FIXO C/SUP. JOY G LD STANDARD
	166455	CONJUNTO BRACO STYLES FIXO C/SUP. JOY G LE STANDARD
	165818	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO P LD STANDARD
	165817	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO P LE STANDARD
	165816	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO M LD STANDARD
	165815	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO M LE STANDARD
	165813	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO G LD STANDARD
	165812	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO G LE STANDARD

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	165497	1	BRACO FIXO ACO P LD
	165496	1	BRACO FIXO ACO P LE
	165499	1	BRACO FIXO ACO M LD
	165498	1	BRACO FIXO ACO M LE
	165501	1	BRACO FIXO ACO G LD
	165500	1	BRACO FIXO ACO G LE
2	110152.8	3	ABRACADEIRA NXR-8 PRETA P-CABO (12,7 A 15,9) (S)
3	165594	1	CARENAGEM BRAÇO P
	165589	1	CARENAGEM BRAÇO M
	165595	1	CARENAGEM BRAÇO G
4	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
5	156789	1	SUORTE HASTE FIX. JOYSTICK
6	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
7	156787	1	Regulador do Joystick
8	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
9	261.5	4	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
10	2821.5	3	REBITE DE REMANCHO NR 3 FPTO (S)
11	10107.9	1	PA SEXT MA 8.8 5X25MM RT ZB (S)
12	22936	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X25MM ZB (S/L)
	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)

APLICAÇÃO:
PARAFUSO 22935 USADO NO BRAÇO SEM JOYSTICK

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 7 DE 28

ESCALA: 1:8





DESCRIÇÃO:

BRAÇO STYLES/PLUS FIXO

REV.:

J

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
8	9965.1	PAINEL CONNECT
	22694	PAINEL CONNECT ACOMPANHANTE/L50/L55/L60

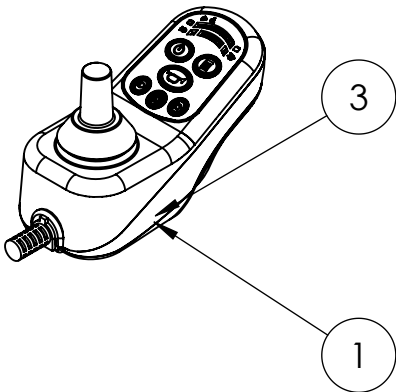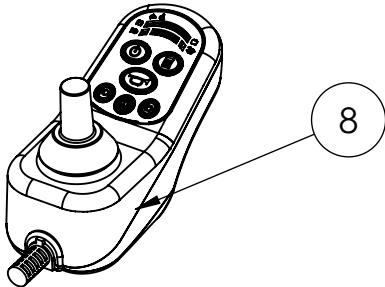

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	6981.7	2	PA SEXT MA 8.8 5X12MM RT ZB (S)
2	261.5	2	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
3	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)

APLICAÇÃO:	DES.: garcia	DATA:	
	FOLHA 8 DE 28	ESCALA: 1:4	
	DESCRIÇÃO: PAINEL CONNECT	REV.:	

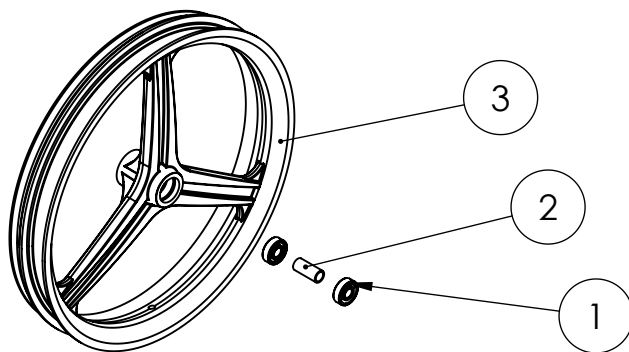


TABELA 1 PAG.9			
ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	6044	2	ROLAMENTO 6201 DDU 2RS NSK 1 LINHA (S)
2	10309	1	TUBETE 36,5MM RODA TRAS MT
3	182668	1	ARO ALUMINIO DIAM.420 3 RAIOS PRETO (MOD.2011)
ATENÇÃO!		O ITEM 3 NÃO POSSUI CAMARA DE AR/PNEU VER TABELA 2 PG.9	

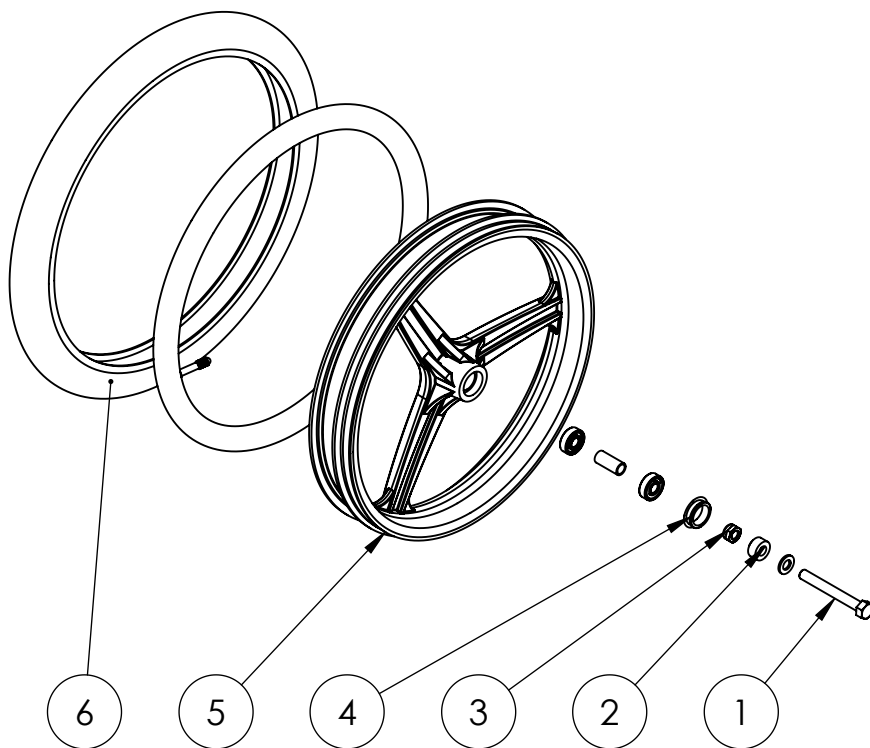


TABELA 2 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
6.1	911	1	CAMARA DE AR MSE 20" (S)
6.2	119	1	PNEU BIC 20X1.75 PETIZ II CINZA(Z201972)(S)

TABELA 3 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11035.3	1	PA SEXT MA 8.8 12X90MM RP ZB (S/L)
2	109807	1	SEPARADOR RDA PARA ARO 20" FUNDIDO
3	191.0	1	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
4	182607	1	TAMPA P/CUBO DE RODA TR PRETA (S)
5	184242	1	CONJUNTO ARO 20" MT P/ EIXO FIXO

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO RODA 20" MT

DES.: garcia


FOLHA 9 DE 28

DATA:

ESCALA: 1:9



REV.:

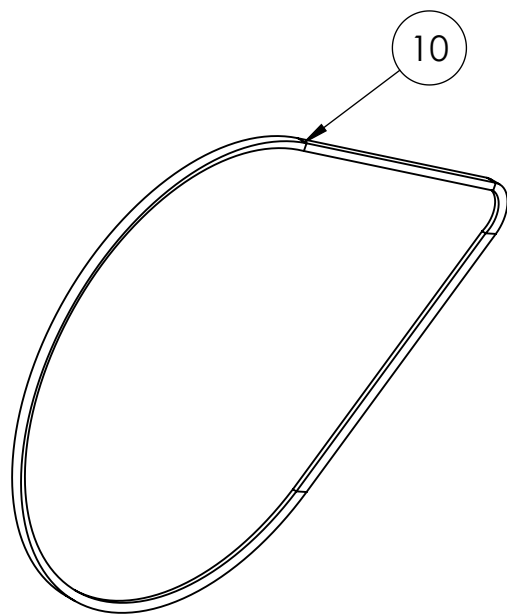

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	10906	CORREIA SHC MN 3VX560 (SPZ1420) (S)
	13811	CORREIA SHC MN 3VX570 (SPZ1437) (S)

APLICAÇÃO:
CÓDIGO 13811 É USADO NA MOTORIZAÇÃO G


DES.: OTAZÚ
FOLHA 10 DE 28

DATA: 23/06/2010
ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:
CORREIA

REV.:
A.08

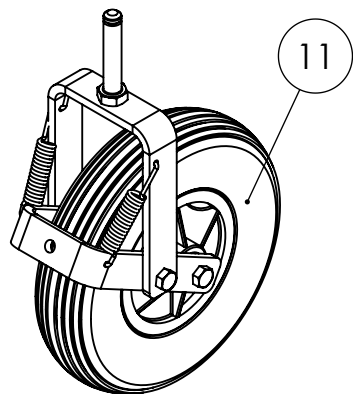

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	26963	CONJUNTO GARFO SUSPENSAO RODA 8" INFLAVEL PRETO
	176257	CONJUNTO GARFO SUSPENSAO RODA 8" MACICA

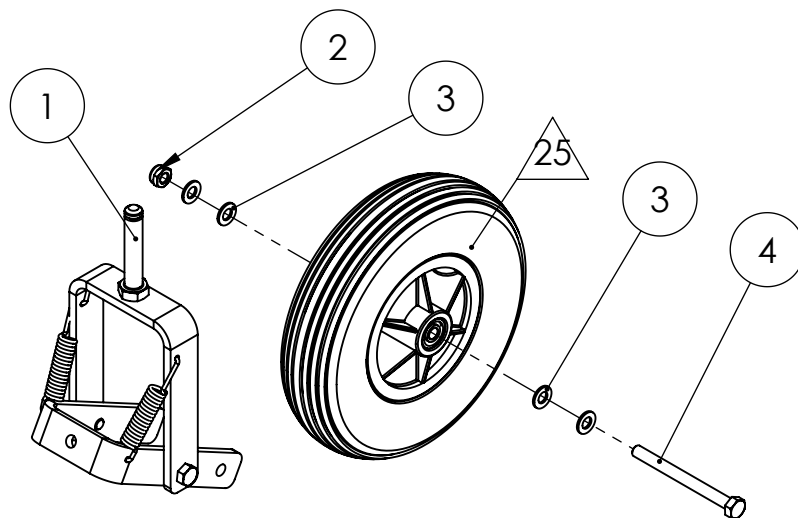

ÍTEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	3434	1	GARFO SUSPENSAO
2	791	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	10507	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
4	781	1	PA SEXT MA 8.8 8X90MM RP ZB (S/L)
25	PG.25		VER PÁGINA 25



ARRUELA LISA 8MM É USADA NO CONJUNTO COM PNEU MACIÇO

DES.: henrique

DATA:

FOLHA 11 DE 28

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:


GARFO SUSPENSÃO 8"

REV.:

F.01

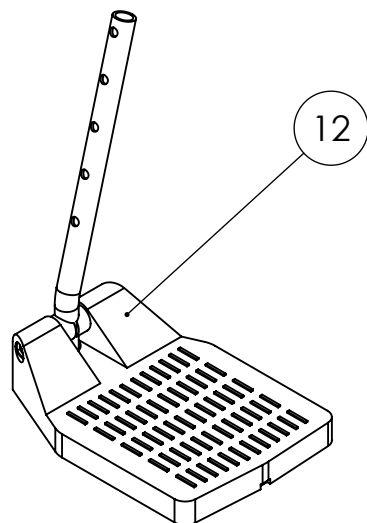

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
12	146916	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 34/37
	146915	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 34/37
	146200	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 41/45/50
	146287	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 41/45/50

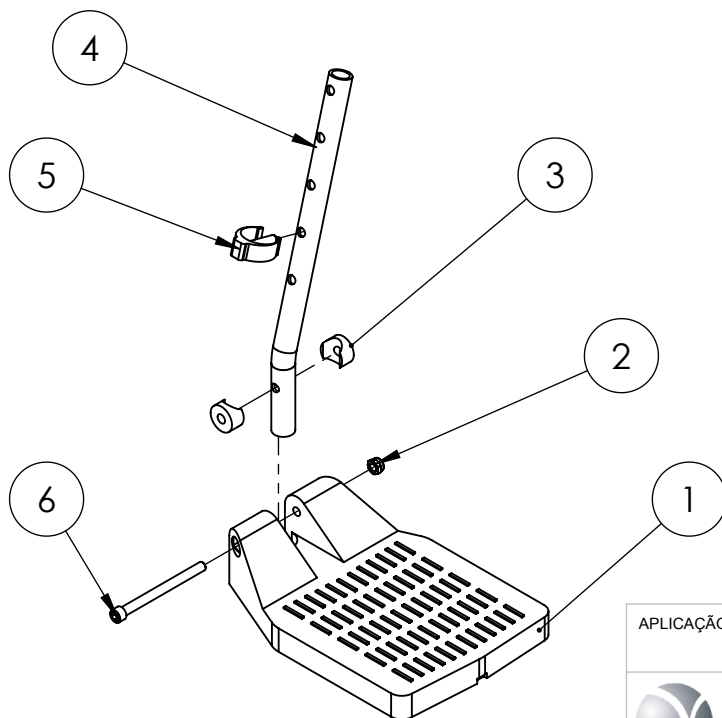

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
	106147	1	PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
2	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA LUMINA
4	146201	1	TUBO PEDALEIRA
5	6889.6	1	CLIP E 1"
6	18159.5	1	PA ALLEM 1/4X3 MA INOX C/CILINDRICA(S)

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

PEDALEIRA COMPACT/CLEAN/STYLES/PLUS

DES.: yuri

FOLHA 12 DE 28


DATA:

ESCALA: 1:5



REV.:

A.02

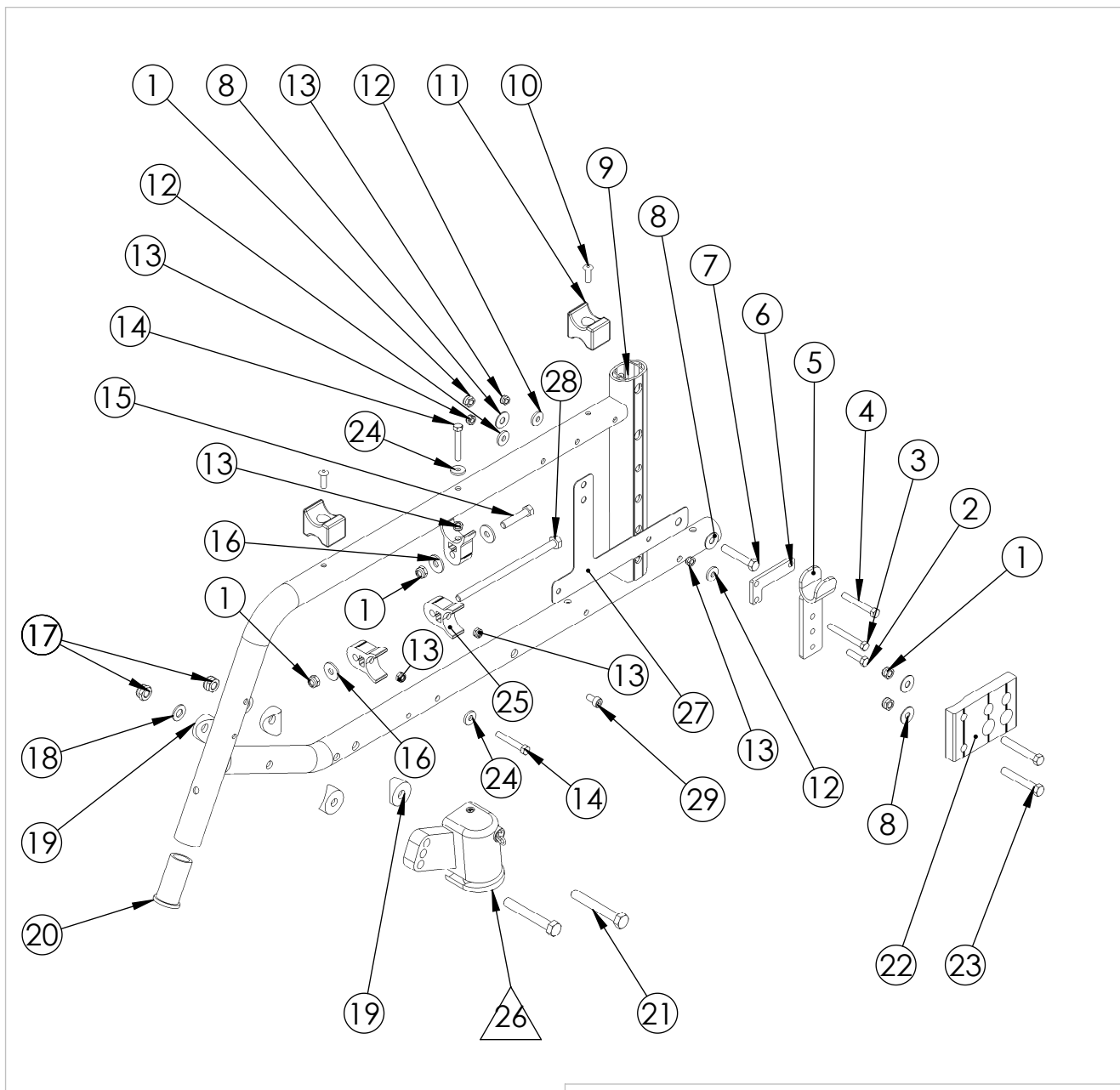

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	491.0	5	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	10388.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X20MM RT ZB (S)
3	142915	1	PA SEXT MA 8.8 5X45MM RT ZB (S)
4	581.9	1	PA SEXT MA 8.8 5X40MM RT ZB (S)
5	154548	1	PERFIL SUPORTE BRAÇO EM ACO
6	180813	1	L FIXAÇÃO BRAÇO PLUS/STYLES/LUMINA
7	12426.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT
8	6087.9	4	ARRUELA LISA 1/4X18X1.2 ZB LUMINA (S) (7X17X1.7)
9	22724	1	CHASSIS ALUMINIO P AMARELO
	22727	1	CHASSIS ALUMINIO P AZUL VERNIZ
	22722	1	CHASSIS ALUMINIO P GRAFITE
	22729	1	CHASSIS ALUMINIO P PRATA VERNIZ
	22721	1	CHASSIS ALUMINIO P PRETO BRILHANTE
	22725	1	CHASSIS ALUMINIO P VERDE VERNIZ
	22726	1	CHASSIS ALUMINIO P VERMELHO VERNIZ
	22723	1	CHASSIS ALUMINIO P VINHO
	22728	1	CHASSIS ALUMINIO P VIOLETA VERNIZ
	22733	1	CHASSIS ALUMINIO M AMARELO
	22736	1	CHASSIS ALUMINIO M AZUL VERNIZ
	22731	1	CHASSIS ALUMINIO M GRAFITE
	22738	1	CHASSIS ALUMINIO M PRATA VERNIZ
	22730	1	CHASSIS ALUMINIO M PRETO BRILHANTE
	22734	1	CHASSIS ALUMINIO M VERDE VERNIZ
	22735	1	CHASSIS ALUMINIO M VERMELHO VERNIZ
	22732	1	CHASSIS ALUMINIO M VINHO
	22737	1	CHASSIS ALUMINIO M VIOLETA VERNIZ
	22742	1	CHASSIS ALUMINIO G AMARELO
	22745	1	CHASSIS ALUMINIO G AZUL VERNIZ
	22740	1	CHASSIS ALUMINIO G GRAFITE
	22747	1	CHASSIS ALUMINIO G PRATA VERNIZ
	22739	1	CHASSIS ALUMINIO G PRETO BRILHANTE
	22743	1	CHASSIS ALUMINIO G VERDE VERNIZ
	22744	1	CHASSIS ALUMINIO G VERMELHO VERNIZ
	22741	1	CHASSIS ALUMINIO G VINHO
	22746	1	CHASSIS ALUMINIO G VIOLETA VERNIZ
10	11418.9	2	REBITE RX AL 4.8X16 (S/L)
11	1704.3	2	CADEIRINHA 1" CAD.ALUM. (S)
12	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5.3X14X2)
13	691.2	6	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
14	133037	2	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
15	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
16	10083.8	3	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6.45X18X1.8)
17	791.9	2	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
18	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8.5X16X1.5)
19	10017.0	4	BOCA DE LOBO 1" (2.34GR) (S)
20	107427	1	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM
21	11832.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
22	178143	1	PLACA CAD. MANUAL LE [1804]
23	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
24	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (S) (5.3X14X2)
25	124518	3	PERFIL U FURO PORCA
26	PG.26		VER PAGINA 26
27	125311	1	SUPORTE DRIVE STYLES / LUMINA M CORTE LASER
28	16641	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X5 RP ZB (S/L)
29	138078	1	PA ALLEN MA 5X10MM C/C (S)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 13 DE 28

ESCALA: 1:6




REV.:



DESCRIÇÃO:

CHASSIS

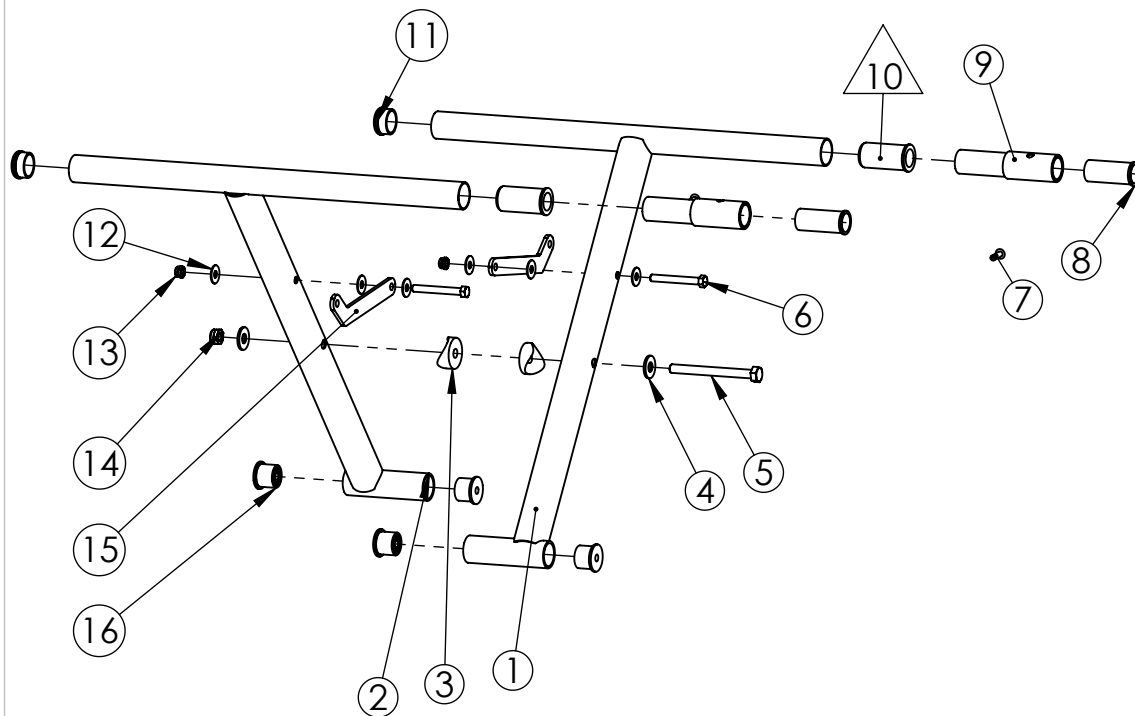

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	150150	1	TUBO X 34/37 LD P ACO
	146672	1	TUBO X 37/37 LD P ACO
	150083	1	TUBO X 37/42 LD M ACO
	146298	1	TUBO X 41/42 LD M ACO
	149522	1	TUBO X 45/42 LD M ACO
	149523	1	TUBO X 50/42 LD M ACO
	146507	1	TUBO X 41/47 LD G ACO
	146510	1	TUBO X 45/47 LD G ACO
	146503	1	TUBO X 50/47 LD G ACO
	146674	1	TUBO X 37/37 LE P ACO
2	150082	1	TUBO X 37/42 LE M ACO
	146299	1	TUBO X 41/42 LE M ACO
	149524	1	TUBO X 45/42 LE M ACO
	149525	1	TUBO X 50/42 LE M ACO
	146508	1	TUBO X 41/47 LE G ACO
	146509	1	TUBO X 45/47 LE G ACO
	146506	1	TUBO X 50/47 LE G ACO
	150151	1	TUBO X 34/37 LE P ACO
3	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" CAD.ALUM.
4	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
5	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	11418.9	2	REBITE RX AL 4.8X16 (S/L)
8	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
9	159463	2	PROLONGADOR PUNHO/X STYLES
10	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
11	149290	2	TAMPAO 1"
12	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
13	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
14	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L)
15	154383	2	SUP. FIXACAO DO X 34 SP CORTE LASER
	146313	2	SUP. FIXACAO DO X 37 SM/SP CORTE LASER
	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
	146312	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SM CORTE LASER
	146314	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SM CORTE LASER
	146523	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SG CORTE LASER
	146522	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SG CORTE LASER
	146521	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SG CORTE LASER
16	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO

APLICAÇÃO:
ITEM 10 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR


DES.: garcia
FOLHA 14 DE 28

DATA:
ESCALA: 1:7



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO X AÇO

REV.:
F.03

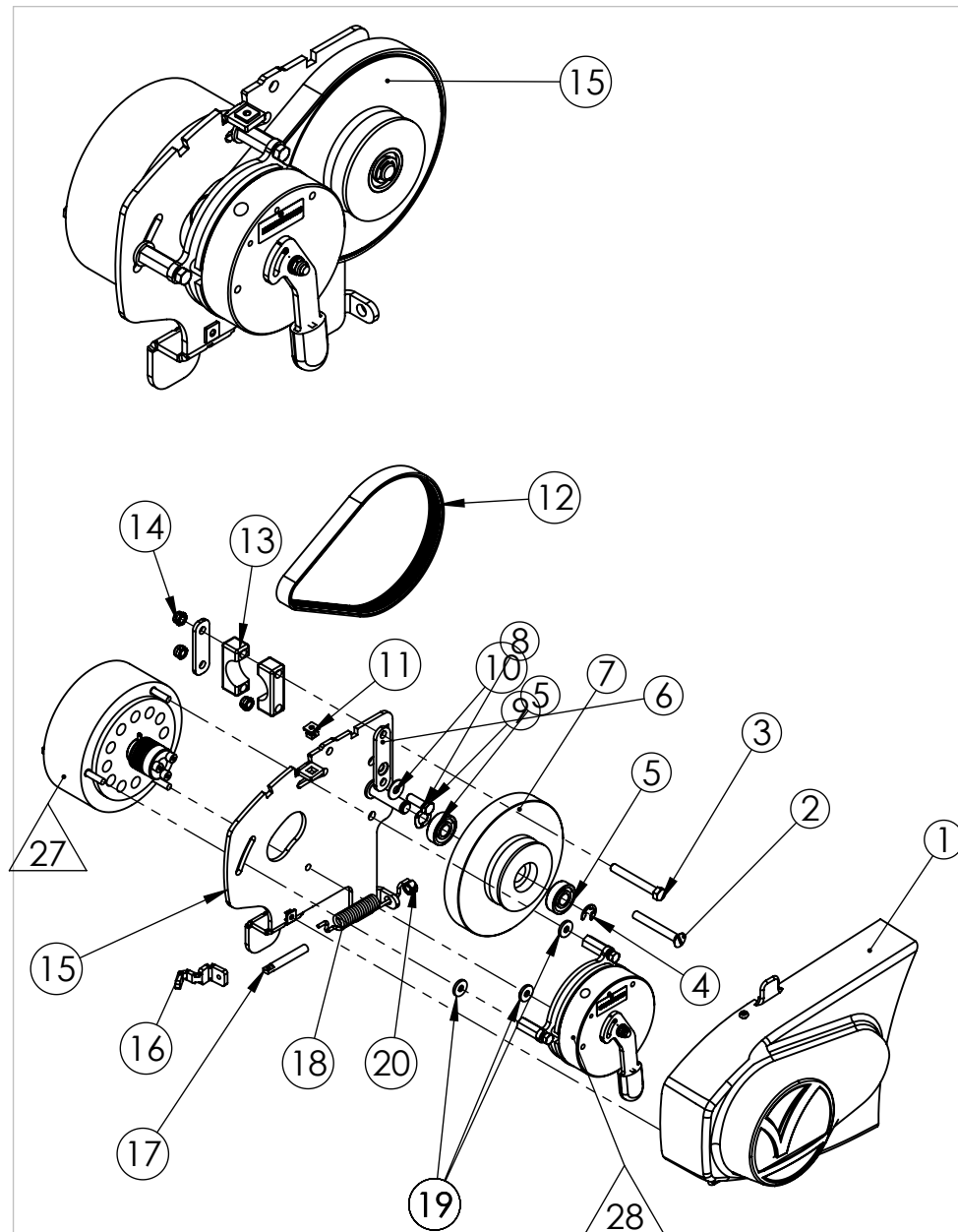

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	164167	MOTORIZACAO CCL M/P - LD MOD.2016
	164170	MOTORIZACAO CCL M/P - LE MOD.2016
	164829	MOTORIZAÇÃO CCL G - LD MOD. 2016
	164835	MOTORIZAÇÃO CCL G - LE MOD. 2016

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	28023	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LD M/G
	28022	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LE M/G
	28025	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LD P
	28024	1	CONJUNTO CARENAGEM UNIDADE DE POTENCIA 20" LE P
2	16662	1	PA MAQ CH FS 1/4X2 ZB
3	12406.0	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
4	5291.4	1	ANEL DE RETENCAO RS-8MM (MOD.503) (S)
5	1923.2	2	ROLAMENTO 6000 DDU 2RS NSK 1 LINHA (S)
6	116060	1	PRANCHETA FIX. MOTORIZACAO MOD. 2011 LUMINA
7	11087.6	1	POLIA DE FERRO CAD L/S/SX 120MM
8	17164	1	ARRUELA ONDULADA AOC 10.5 FOSFATIZADO
9	11359	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X3/4 RT ZB
10	6087.9	1	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
11	157134	2	Bucha de Fixação Carenagem
12	10072.2	1	CORREIA MICRO V 180J6 (S)
13	1701.9	2	ABRACADEIRA 1" CAD.
14	491.0	3	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
15	164163	1	PLACA MOTORIZACAO M/P - LD MOD.2016
	164161	1	PLACA MOTORIZACAO M/P - LE MOD.2016
	173508	1	PLACA MOTORIZAÇÃO G - LD MOD. 2016
	164833	1	PLACA MOTORIZAÇÃO G - LE MOD. 2016
16	150677	1	ESTICADOR DOBRADO MOTORIZACAO STYLES
17	135190	1	PINO ESTICADOR CORREIA MOT 2013
	181349	1	PINO ESTICADOR CORREIA MOT.20 G / SCOOTER
18	531.2	1	MOLA SUSPENSAO/MOTORIZACAO 2,5X14X45X100 (S)
19	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
20	891	1	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
27	PG. 27		VER PAGINA 27
28	PG.28		VER PAGINA 28

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

MOTORIZAÇÃO 20"

DES.: Jacondino

FOLHA 15 DE 28

DATA:

ESCALA: 1:4



REV.:

F.01

Exploded view diagram of a battery support assembly. Callouts 1-16 point to various components including the main support frame, side rails, mounting brackets, and fasteners.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	146252	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 34
	169193	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 37
	146096	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 37
	147064	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 41
	163485	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 45
	145949	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 41
	146835	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 41
	147063	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 45
	147065	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 45
	146318	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 38AH LARG. 50
	148744	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 26AH LARG. 50
	149465	CONJUNTO SUPORTE BATERIA 55AH LARG. 50

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	
1	147272	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG 34 LD	
	169395	1	SUPORTE BATERIA 18AH LD LARG. 37	
	153560	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 37	
	147270	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 41	
	149449	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 45	
	169402	1	SUPORTE BATERIA 26AH LD LARG. 50	
	168321	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 41	
	168319	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 45	
	168241	1	SUPORTE BATERIA 33AH LD LARG. 50	
	153559	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 41	
	147268	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 45	
	149373	1	SUPORTE BATERIA 38AH LD LARG. 50	
	153565	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 41	
	147274	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 45	
	149462	1	SUPORTE BATERIA 55AH LD LARG. 50	
	2	147271	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 34 LE
		169397	1	SUPORTE BATERIA 18AH LARG. 37 LE
		153561	1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 37
147269		1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 41	
149454		1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 45	
169393		1	SUPORTE BATERIA 26AH LE LARG. 50	
168324		1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 41	
168325		1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 45	
168238		1	SUPORTE BATERIA 33AH LE LARG. 50	
153558		1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 41	
147267		1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 45	
149371		1	SUPORTE BATERIA 38AH LE LARG. 50	
153564		1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 41	
147273		1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 45	
149461		1	SUPORTE BATERIA 55AH LE LARG. 50	
3		691.2	10	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
4		261.5	10	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
5		146654	4	Fixação do Sup. de Bateria
6	146291	4	BUCHA DE TECNIL DO SUPORTE DE BATERIA	
7	133037	4	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)	
8	393.0	16	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)	
9	20105	4	PA SEXT MA 8.8 5X80MM	
10	10017.0	4	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)	
11	146115	4	TUBO FIXACAO DO APOIO DO SUPORTE	
12	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)	
13	19692	1	Cinto Bateria 18A	
	19625	1	Cinto Bateria 26A	
	19693	1	Cinto Bateria 38A / 55A	

APLICAÇÃO:

DESCRÇÃO:

freedom


SUPORTE DE BATERIA

DES.: Jacodino	DATA:
FOLHA 16 DE 28	ESCALA: 1:6

REV:



D.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
17	149892	PROLONGADOR TUBO CHASSIS BAIXO SOLDADO

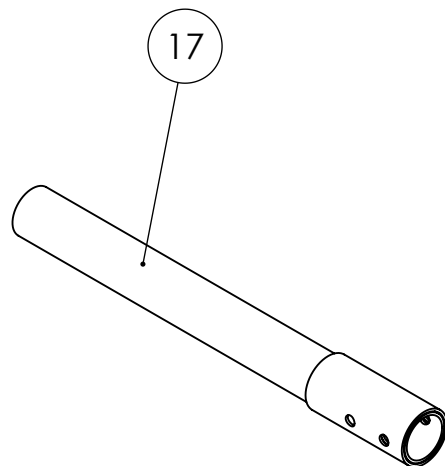

APLICAÇÃO:	DES.: Jacondino	DATA:		
	FOLHA 17 DE 28	ESCALA: 1:3		
 DESCRIÇÃO: PROLONGADOR TUBO CHASSIS BAIXO SOLDADO				REV.: D

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	183965	CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO ARO 20/24
	183964	CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO ARO 13

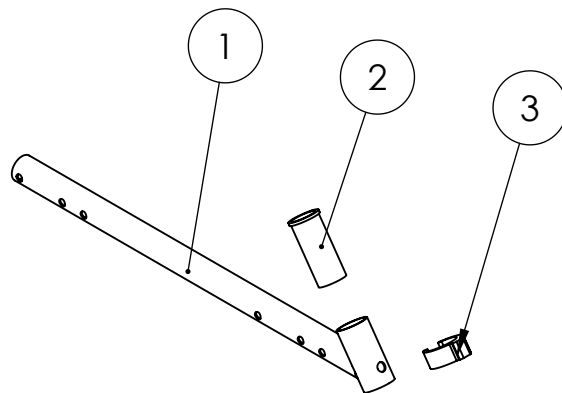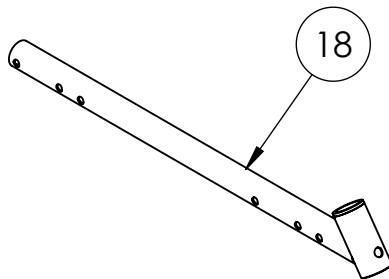

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	148864	1	FIXAÇÃO SUPORTE RODA APOIO ARO 13
	148877	1	FIXAÇÃO SUPORTE RODA APOIO ARO 20/24
2	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
3	174699	1	CLIP E 7/8` (S) NÃO PASSANTE

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 18 DE 28

ESCALA: 1:5





DESCRIÇÃO:

CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO

REV.:

A

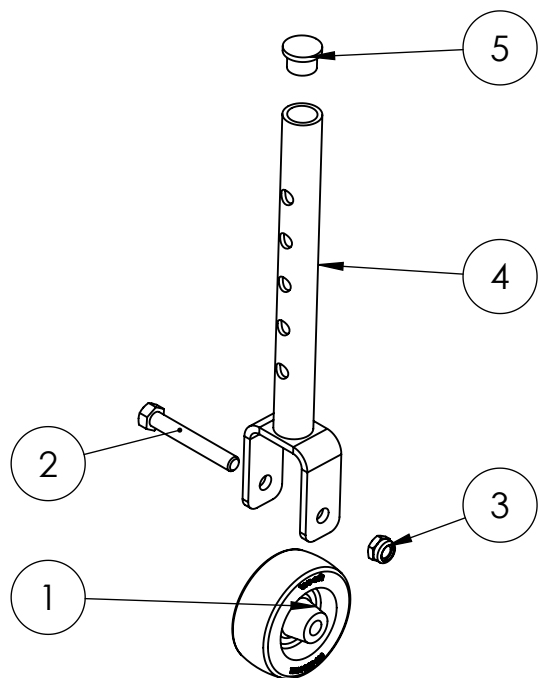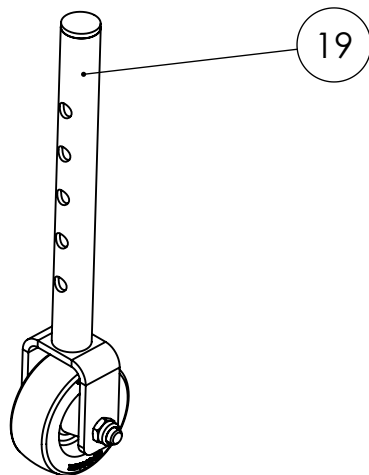

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
19	19915	RODA APOIO CAD. MT

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	133920	1	RODA ROD CAR - TECNI ROD 210 (2")
2	12405.2	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
3	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	150094	1	TUBO RODA APOIO CHASSIS EXTENDIDO
5	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 19 DE 28

ESCALA: 1:3




DESCRIÇÃO:

RODA DE APOIO CAD MT


REV.:

D


OBS. TAMPA BATERIA EM SERIE E TAMPA BATERIA FREE DEVEM SER VENDIDAS JUNTAS.

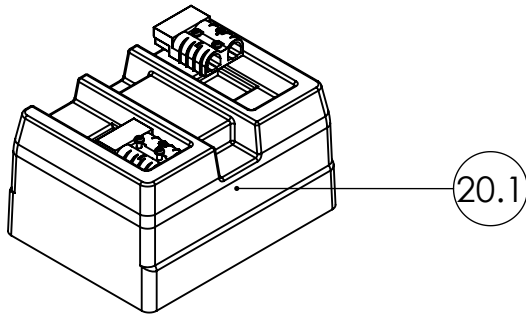

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20.1	19626	TAMPA BATERIA FREE 26A SERIE(MONTADA)
	19195	TAMPA BATERIA FREE 26A(MONTADA)
	22270	TAMPA BATERIA FREE 33/34A SERIE(MONTADA)
	22271	TAMPA BATERIA FREE 33/34A (MONTADA)
	19627	TAMPA BATERIA FREE 38A SERIE(MONTADA)
	19196	TAMPA BATERIA FREE 38A(MONTADA)
	19628	TAMPA BATERIA FREE 55A SERIE(MONTADA)
	19197	TAMPA BATERIA FREE 55A(MONTADA)

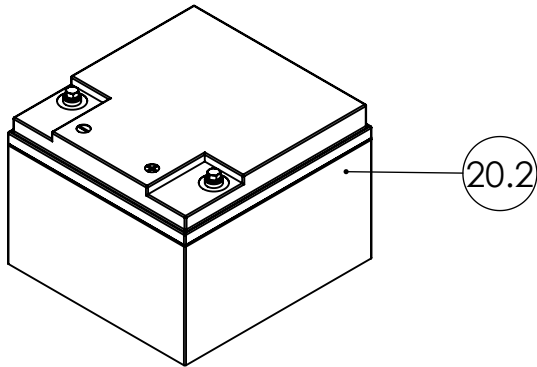

ITEM	QTD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20.2	2	18846	KIT FORCA 12-18 12V 18AH P/CAD.RODA
	2	18847	KIT FORCA 12-26 12V 26AH P/CAD.RODA
	2	18848	KIT FORCA 12-33 12V 33AH P/CAD.RODA
	2	23165	KIT FORCA 12-34 12V 34AH P/CAD.RODA
	2	18849	KIT FORCA 12-38 12V 38AH P/CAD.RODA
	2	18851	KIT FORCA 12-55 12V 55AH P/CAD.RODA

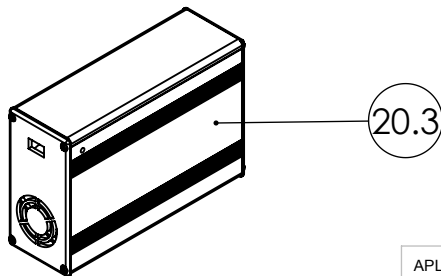

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20.3	26265	CARREGADOR CADEIRA 24V/2.5A
20.3	19972	CARREGADOR CADEIRA 24V/5.0A

APLICAÇÃO:

DES.: Jacondino

DATA:

FOLHA 20 DE 28

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

BATERIA SELADA VRLA FREE

REV.:

A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
21	3823	CAPA CHICOTE STAND-UP/CAD. MOT

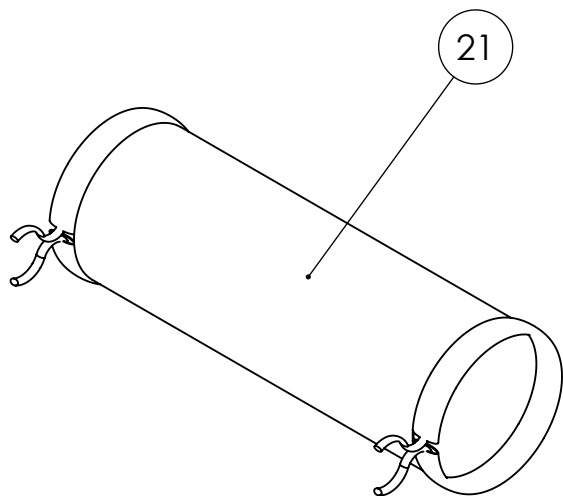

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 21 DE 28


ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:

CAPA CHICOTE

REV.:

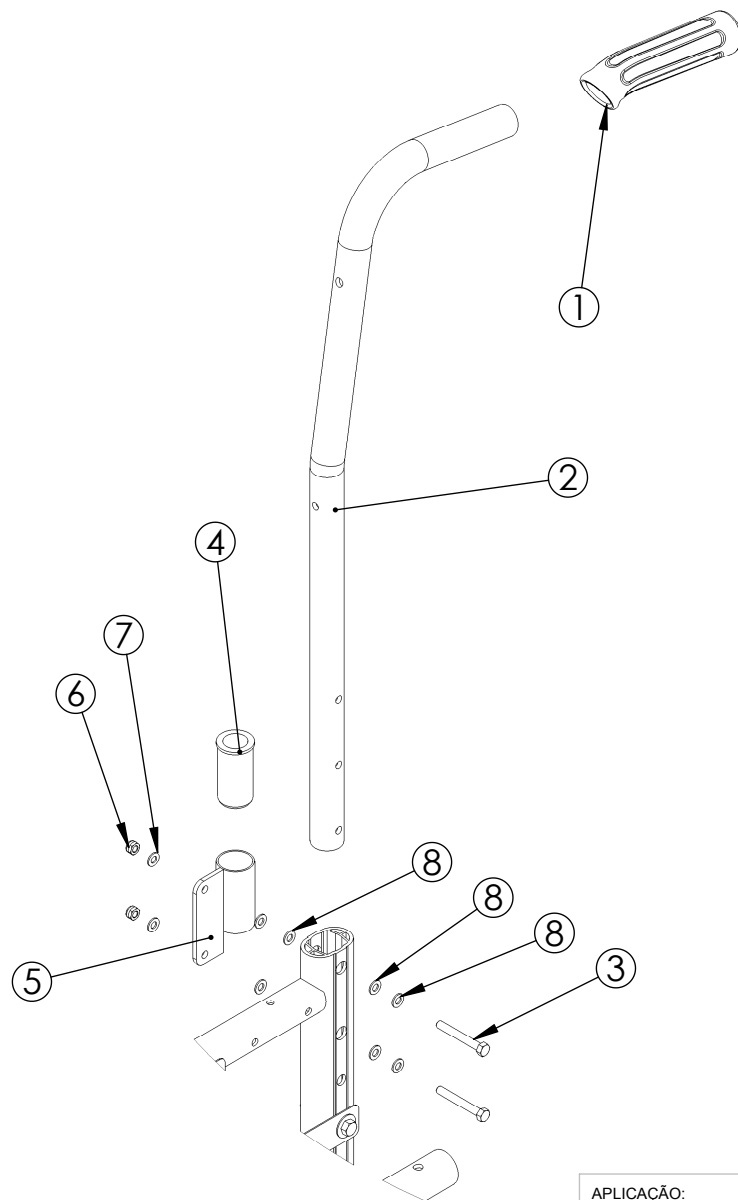

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	180440	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40/30 [1806]
	179334	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40 [1804]
	179336	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 45 [1804]
	179333	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 50 [1804]
	179340	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 55 [1804]
3	581.9	2	PA SEXT MA 8,8 5X40MM RT ZB (S)
4	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1" PAREDE 1,2MM
5	164875	1	SUPORTE BRACO FIXO ENCOSTO AÇO
6	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L)
7	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
8	261.5	10	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 22 DE 28

ESCALA: 1:5




REV.:



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO FIXO

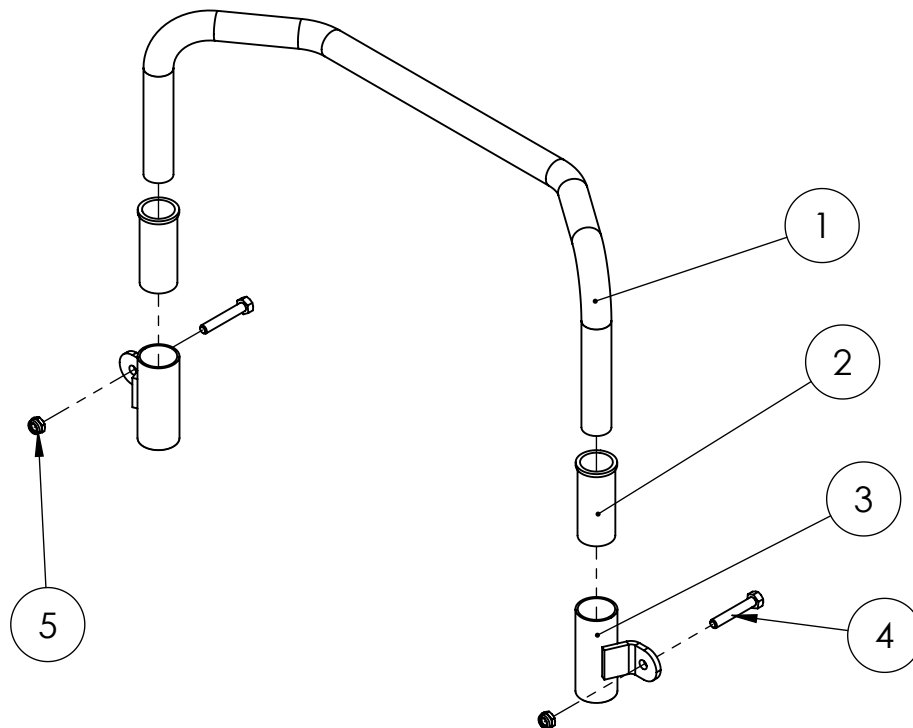

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	150176	1	ESTICADOR ENCOSTO 33
	150177	1	ESTICADOR ENCOSTO 37
	150178	1	ESTICADOR ENCOSTO 41
	150179	1	ESTICADOR ENCOSTO 45
	150180	1	ESTICADOR ENCOSTO 50
2	10142	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
3	5511	2	TUBO SUPORTE ENCOSTO CABECA
4	133037	2	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
5	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: tiago

DATA:

FOLHA 23 DE 28

ESCALA: 1:4




DESCRIÇÃO:

SUPORTE ESTICADOR DE ENCOSTO

REV.:

A.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
24	18196	DRIVE CONNECT

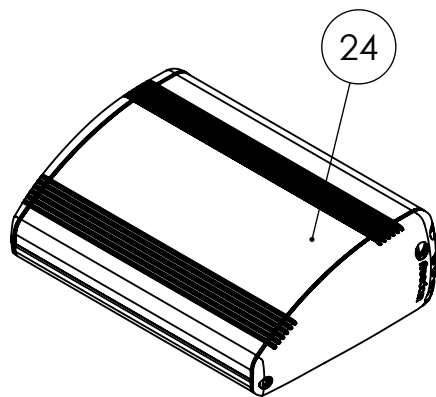

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 24 DE 28


ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:

DRIVE CONNECT

REV.:

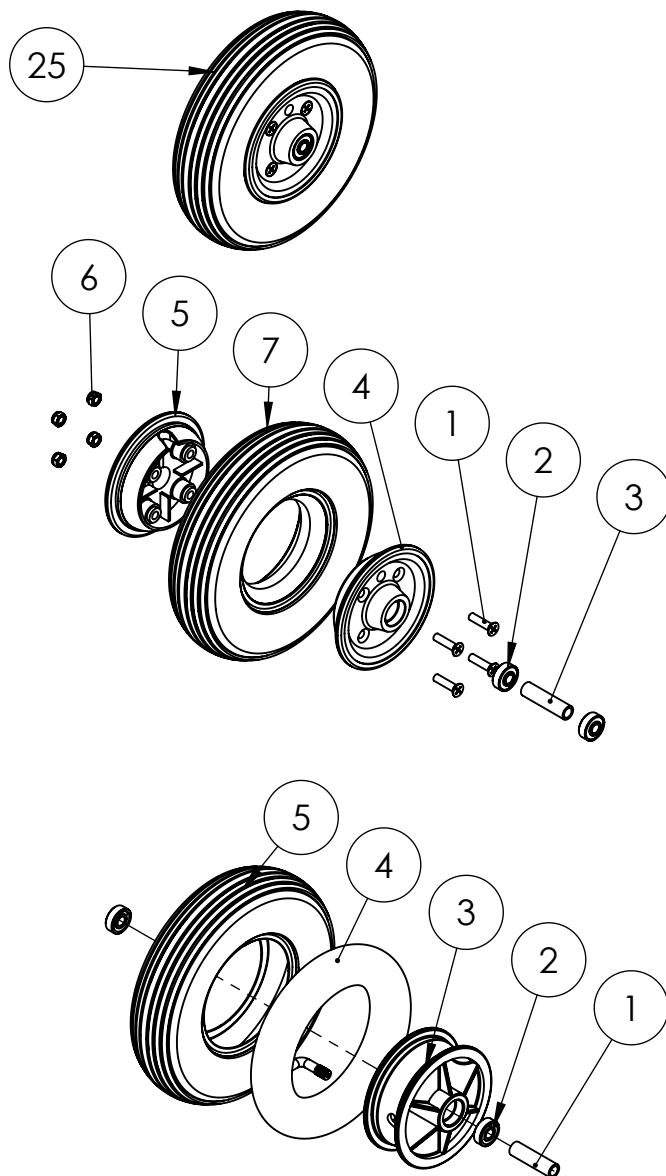

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
25	184463	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 8" PRETO
	403	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 8"CINZA
	21508	RODA 8" BI PARTIDO CONJ/ROLAMENTO P/CAD.RODA(F70136)PARA CADEIRA DE RODAS

ITENS PARA RODA MACIÇA			
ÍTEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	175012	4	PA MAQ CH PH 6X30MM ZB (S)
2	10298.9	2	ROLAMENTO 608 DDU NSK 1 LINHA (S)
3	175013	1	SEPARADOR RODA 8" MACICA
4	175002	1	ARO BI-PARTIDO LADO C/ VALVULA
5	175003	1	ARO BI-PARTIDO LADO S/ VALVULA
6	11852.4	4	PO SEXT NY BX CL8 6H10 ZB (S) 1.03.03.03
7	22404	1	PNEU 8" MACICO

ITENS PARA RODA INFLÁVEL			
ÍTEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	169553	1	SEPARADOR 44 RODA 8" INF
2	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
3	185104	1	ARO NYLON 8"141GR CINZA BICO TORTO (S)
	932.6	1	ARO NYLON 8"141GR CINZA (S)
	179848	1	ARO NYLON 8"141GR CINZA BICO RETO (S)
4	13925.4	1	CAMARA DE AR 8 - 200X4 TR 87(BICO TORTO) (S)
5	23269	1	RODA DIANTEIRA INFLAVEL 200X50 (Z255793)PARA CADEIRA DE RODAS

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 25 DE 28

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:


RODA DIANTEIRA 8"

REV.:

B

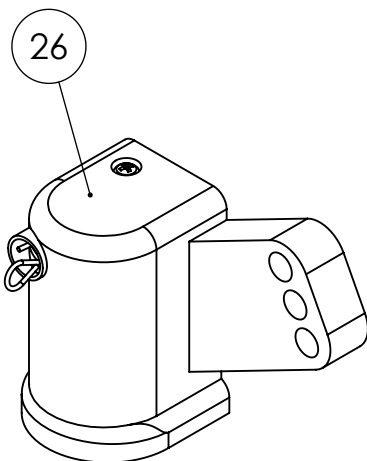

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	178350	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. ANTI SHIMMING (QUICK RELEASE)
	178351	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. ANTI SHIMMING (QUICK RELEASE)

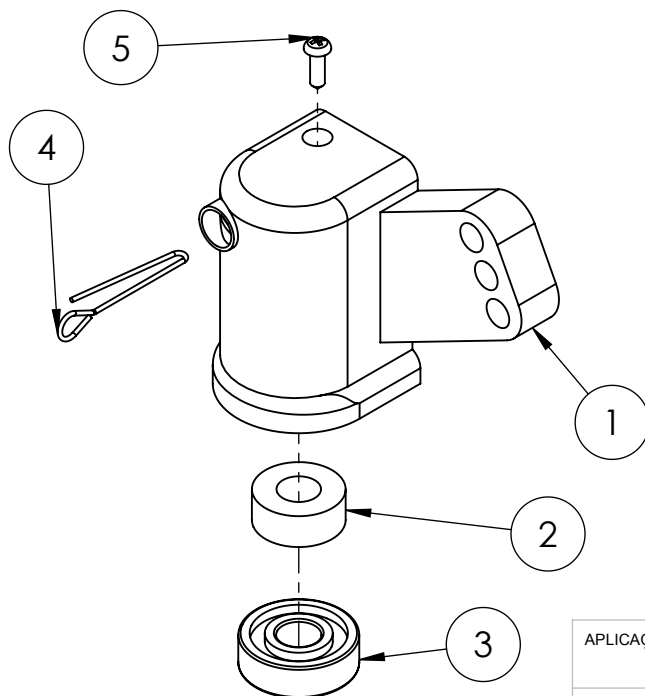

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	709.9	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
	809.5	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
2	178326	1	BUCHA GARFO CADEIRA MT [1801]
3	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
4	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
5	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 26 DE 28

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

G

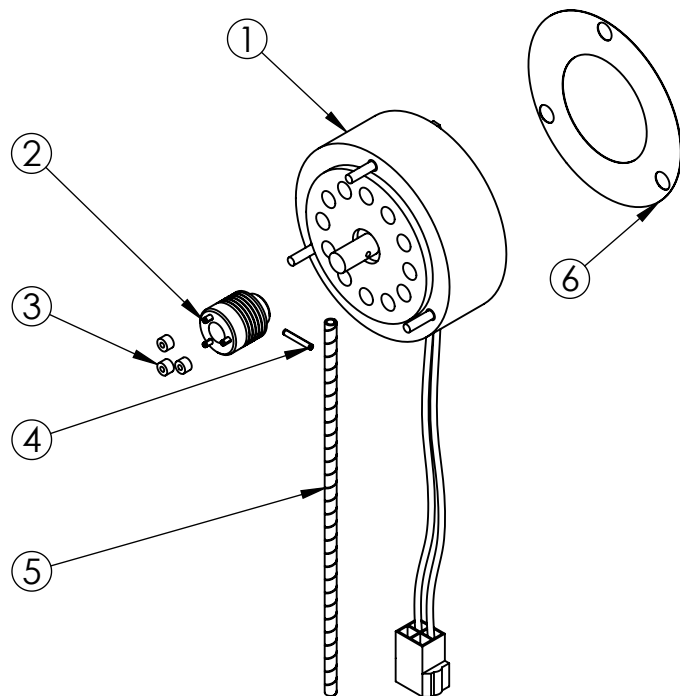

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	21648	1	MOTOR FREE 24 CPH
2	164169	1	PINHÃO MICRO V 27MM C/PINOS MOD. 2016
3	7733.0	3	MANGUEIRA PINHAO MV
4	23972	1	PINO ESPIRAL 3X20(S)
5	4348	1	TUBO ESPIRAL 1/4 POLIET.PRE
6	24115	1	ETIQUETA ANTI RUÍDO MOTOR CPH

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 27 DE 28

ESCALA: 1:4




DESCRIÇÃO:

MOTOR CPH

REV.:

B.01

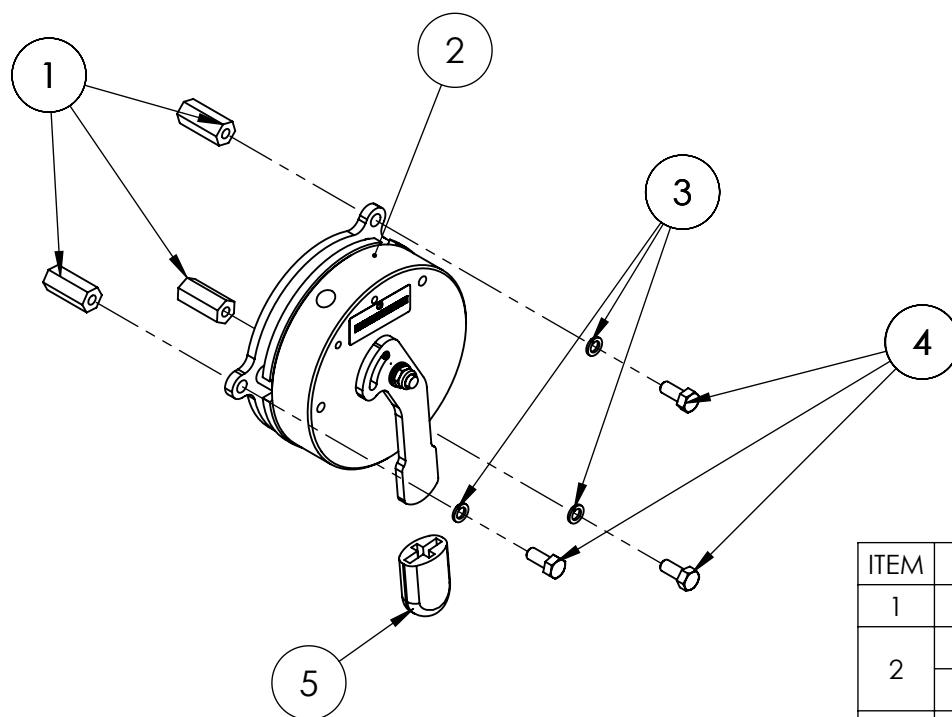

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11117.1	3	SEPARADOR SEXTAVADO FREIO
2	164166	1	FREIO ELETROMAGNETICO LD MOD.2016
	164164	1	FREIO ELETROMAGNETICO LE MOD.2016
3	6885.3	3	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
4	6981.7	3	PA SEXT MA 8.8 5X12MM RT ZB (S)
5	138643	1	LUVA PRETA PVC P/CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 28 DE 28

ESCALA: 1:3



REV.:

DESCRIÇÃO:

FREIO