



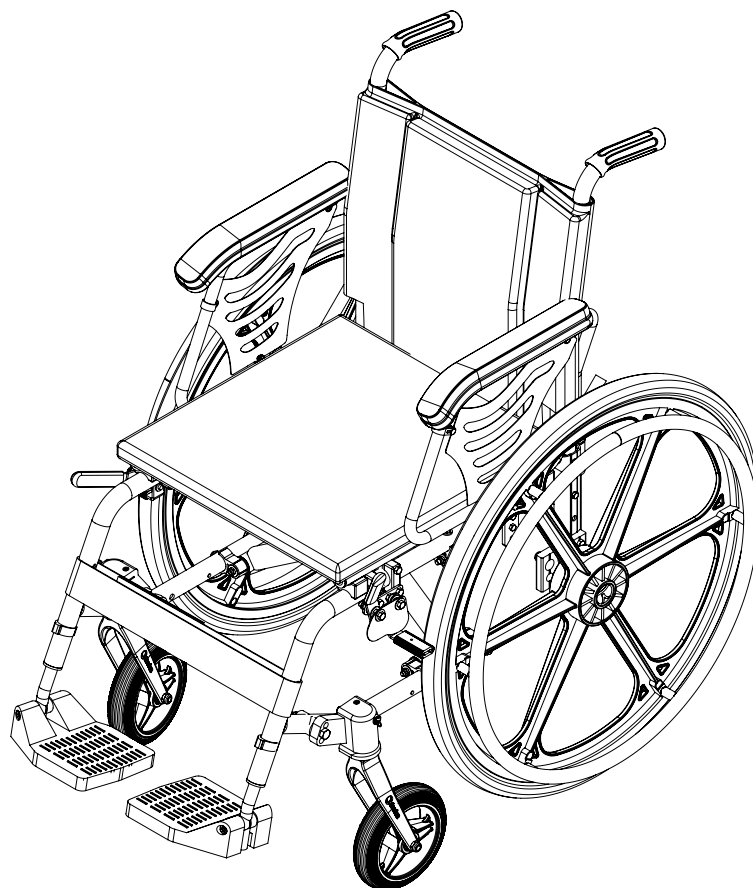

DESCRIÇÃO:
PLUS

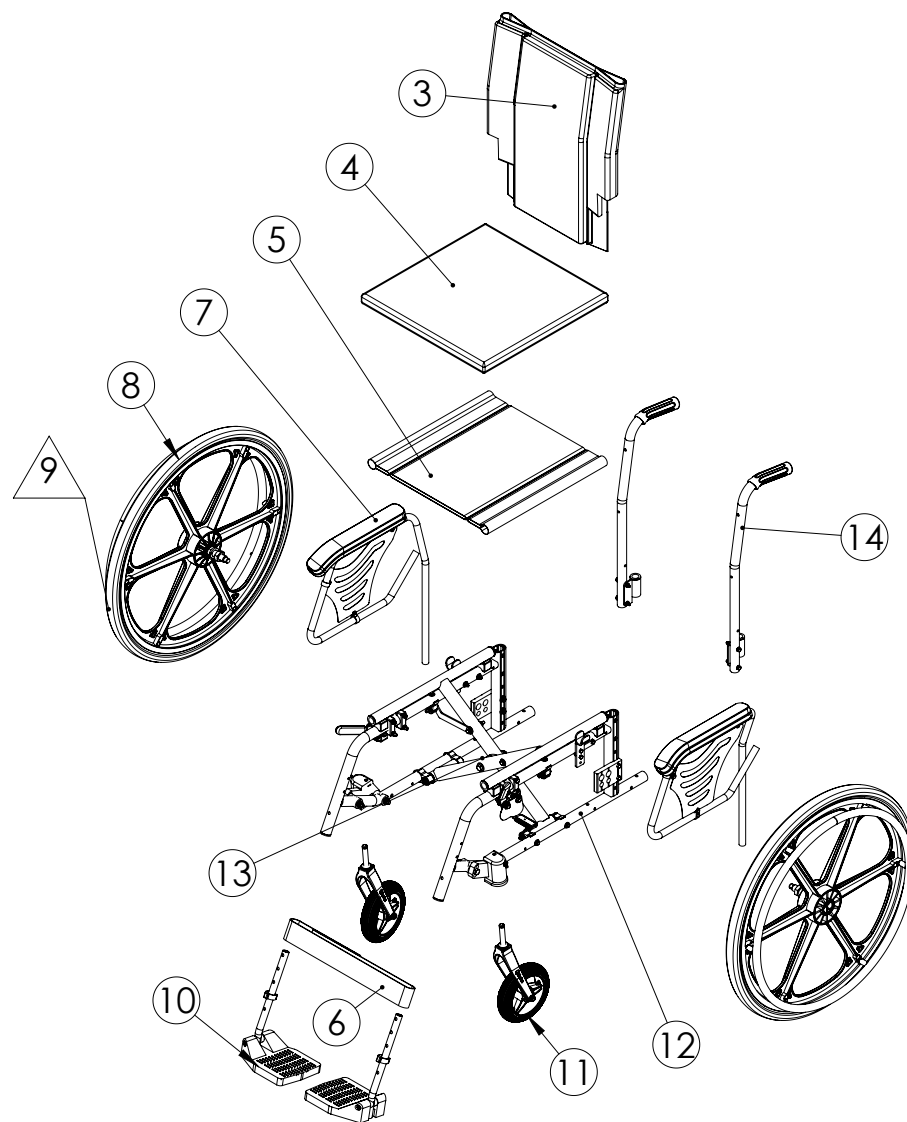

APLICAÇÃO:

ARO 20" RAIADO PG 9

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 2 DE 16

ESCALA: 1:18




DESCRIÇÃO:

PLUS

REV.:

E.03

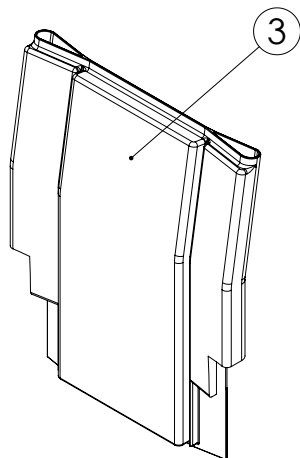

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	23556	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/30
	23659	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/35
	20444	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/40
	20445	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/45
	20446	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 33/50
	23562	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/30
	23660	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/35
	20191	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/40
	20199	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/45
	20207	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 37/50
	23661	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/35
	20194	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/40
	20202	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/45
	20210	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 41/50
	23662	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/35
	20195	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/40
	20203	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/45
	20211	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 45/50
	23663	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/35
	20198	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/40
	20206	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/45
	20214	ENCOSTO CLN/CMT/PLS/STY 2CM 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: gabriel

DATA:

FOLHA 3 DE 16

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

REV.:

F

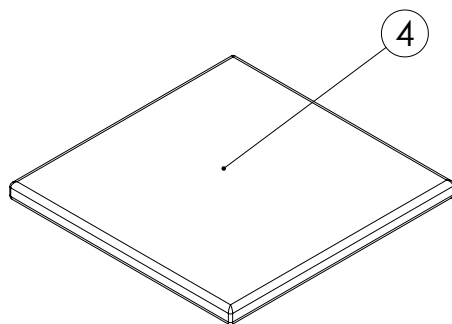

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	20288	ALMOFADA ASSENTO L.33/P.37 3CM
	20290	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.37 3CM
	20294	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.42 3CM
	21829	ALMOFADA ASSENTO L.37/P.47 3CM
	20296	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.42 3CM
	20302	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.47 3CM
	23309	ALMOFADA ASSENTO L.41/P.52 3CM
	20298	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.42 3CM
	20305	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.47 3CM
	23182	ALMOFADA ASSENTO L.45/P.52 3CM
	20300	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.42 3CM
	20307	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.47 3CM
	23317	ALMOFADA ASSENTO L.50/P.52 3CM

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 4 DE 16

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

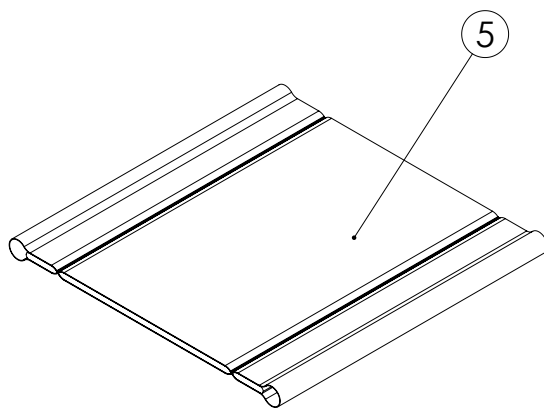

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	20107	BASE ASSENTO P L.34/P.37
	20108	BASE ASSENTO P L.37/P.37
	20109	BASE ASSENTO P L.41/P.37
	25724	BASE ASSENTO P L.37/P.42
	20110	BASE ASSENTO M L.37/P.42
	20111	BASE ASSENTO M L.41/P.42
	20112	BASE ASSENTO M L.45/P.42
	20113	BASE ASSENTO M L.50/P.42
	20822	BASE ASSENTO M L.37/P.47
	20114	BASE ASSENTO M/G L.41/P.47
	20115	BASE ASSENTO M/G L.45/P.47
	20116	BASE ASSENTO M/G L.50/P.47
	23298	BASE ASSENTO G L.41/P.52
	23177	BASE ASSENTO G L.45/P.52
	23300	BASE ASSENTO G L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: ---

DATA:

FOLHA 5 DE 16

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

REV.:

C

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	2568	TIRA PANTURRILHA 34
	2389	TIRA PANTURRILHA 37
	514	TIRA PANTURRILHA 41
	1514	TIRA PANTURRILHA 45
	2523	TIRA PANTURRILHA 50

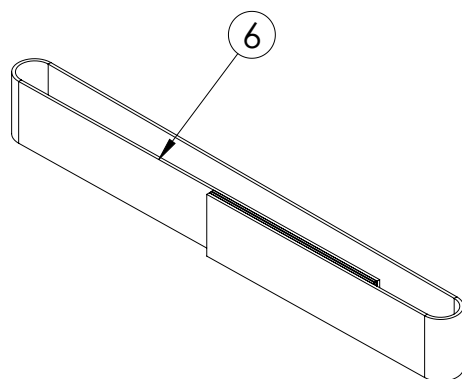

APLICAÇÃO:

DES.: osvaldo

DATA:

FOLHA 6 DE 16

ESCALA: 1:5





DESCRIÇÃO:

TIRA PANTURRILHA

REV.:

C

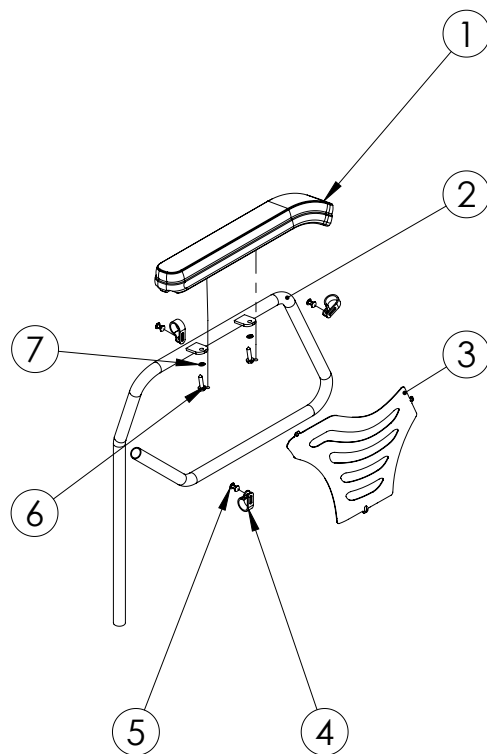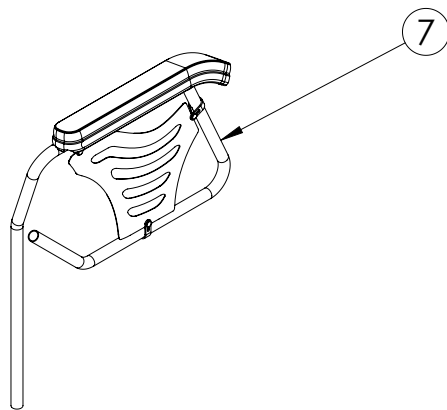

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	165818	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO P LD STANDARD
	165817	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO P LE STANDARD
	165816	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO M LD STANDARD
	165815	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO M LE STANDARD
	165813	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO G LD STANDARD
	165812	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES FIXO G LE STANDARD

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
2	165497	1	BRACO FIXO ACO P LD
	165496	1	BRACO FIXO ACO P LE
	165499	1	BRACO FIXO ACO M LD
	165498	1	BRACO FIXO ACO M LE
	165501	1	BRACO FIXO ACO G LD
	165500	1	BRACO FIXO ACO G LE
3	165594	1	Carenagem Braço P
	165589	1	Carenagem Braço M
	165595		Carenagem Braço G
4	110152.8	3	ABRACADEIRA NXR-8 PRETA P-CABO (12,7 A 15,9) (S)
5	2821.5	3	REBITE DE REMANCHO NR 3 FPTO (S)
6	22935	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
7	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 7 DE 16

ESCALA: 1:10



DESCRIÇÃO:

BRACO PLUS/STYLES FIXO

REV.:

J

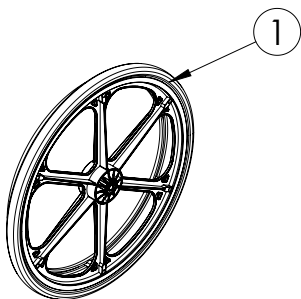


TABELA 1 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	169144	1	CONJUNTO RODA 24" NY INF. ARG. NYLON P/ EIXO FIXO/EIXO QUICK
	182327	1	CONJUNTO RODA 24" NY INF. ARG. ALUMINIO P/ EIXO FIXO/EIXO QUICK
	169147	1	CONJUNTO RODA 24" NY MAC. ARG. ALUMINIO EIXO FIXO/QUICK
	169146	1	CONJUNTO RODA 24" NY MAC. ARG. NYLON EIXO FIXO/QUICK

TABELA 2 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
11	241.0	1	PNEU BIC 24X 1 3/8 CINZA (S)
	121.0	1	CAMARA DE AR 26 A (S)
	23267	1	RODA TRAS.PU 24X1,3/8 PARA CADEIRA DE RODAS

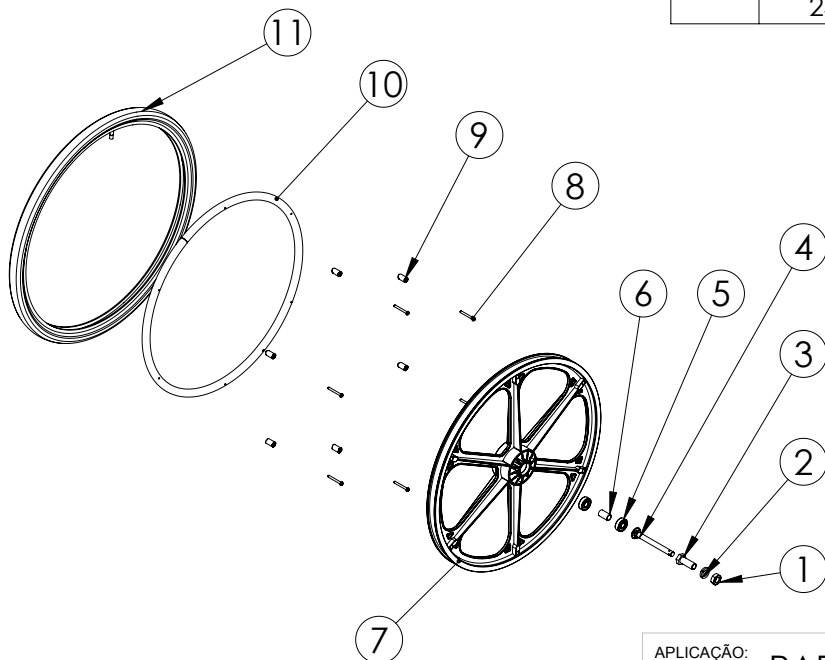


TABELA 3 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009EIXO QUICK
	11035.3	1	PA SEXT MA 8.8 12X90 RP ZB (S/L)
5	351	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
6	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
7	181729	1	ARO NYLON P/CAD.RODA 6 RAIOS 24 S/ARGOLA
8	10195.8	6	PA AAT CP PH 4,8X45MM ZB (S/L)
9	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
10	168371	1	ARGOLA DE PROPULSAO ALUMINIO ARO 24" 6 RAIOS

APLICAÇÃO: PADRÃO M/G

DES.: Lucas
FOLHA 8 DE 16

DATA:
ESCALA: 1:18



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO RODA NY 24"

REV.:
A.01

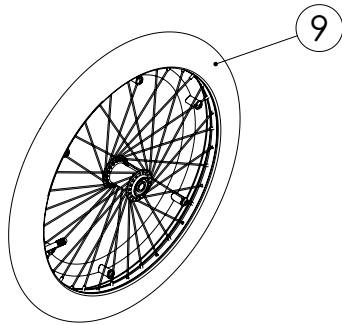


TABELA 1 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
9	181892	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. EIXO FIXO/EIXO QUICK
	181895	1	CONJUNTO RODA 20" ALUM. RAIADO C/ ARGOLA ALUM. C/ PINOS EIXO FIXO/EIXO QUICK

TABELA 2 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
12	119.8	1	PNEU BIC 20X1.75 PETIZ II CINZA
	911.3	1	CAMARA DE AR MSE 20"

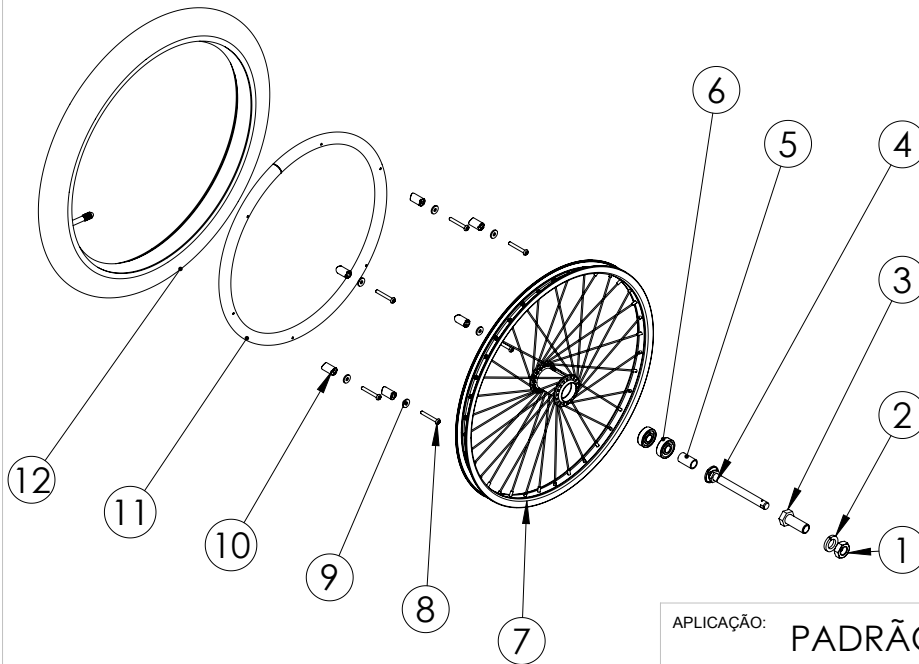


TABELA 3 PG.9			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
	11035.3	1	PA SEXT MA 8.8 12X90 RP ZB (S/L)
5	169113	1	SEPARADOR 27MM ARO 24 NYLON 6 RAIOS
6	351.4	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
7	181898	1	CONJUNTO 20" C/ RAIOS
8	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
9	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
10	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
11	3021.0	1	ARGOLA PROPULSAO 20"
	172449	1	ARGOLA PROPULSAO 20" COM PINOS

APLICAÇÃO: PADRÃO P




DESCRIÇÃO: CONJUNTO RODA RAIADA 20"

DES.: garcia
FOLHA 9 DE 16


DATA:
ESCALA: 1:12



REV.:
C.01

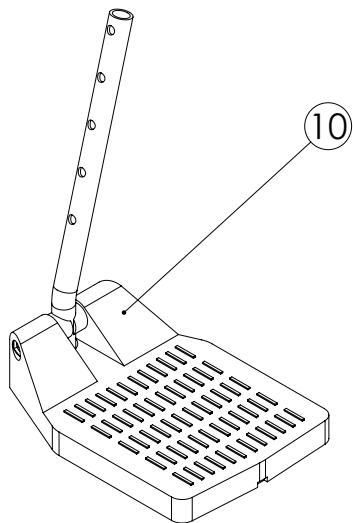

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	146916	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 34/37
	146915	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 34/37
	146200	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LD 41/45/50
	146287	CONJUNTO PEDALEIRA CLEAN/PLUS/COMPACT/STYLES LE 41/45/50

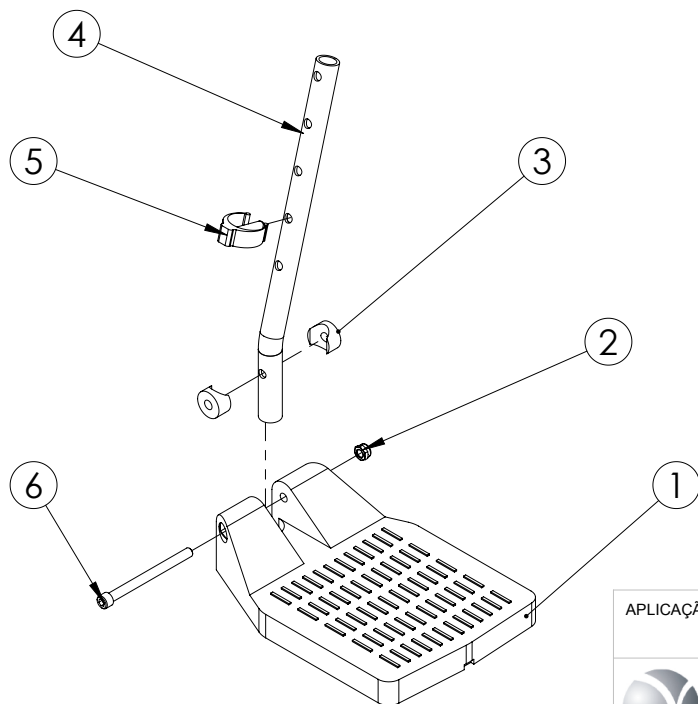

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	127483	1	PEDALEIRA MOD. 2011 34/37
	106147	1	PEDALEIRA MOD. 2011 41/45/50
2	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	106153	2	BOCA DE LOBO PEDALEIRA LUMINA
4	146201	1	TUBO PEDALEIRA
5	6889.6	1	CLIP E 1"
6	18159.5	1	PA ALLEM 1/4X3 MA INOX C/CILINDRICA(S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 10 DE 16

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:


PEDALEIRA COMPACT/CLEAN/STYLES/PLUS

REV.:

A.02

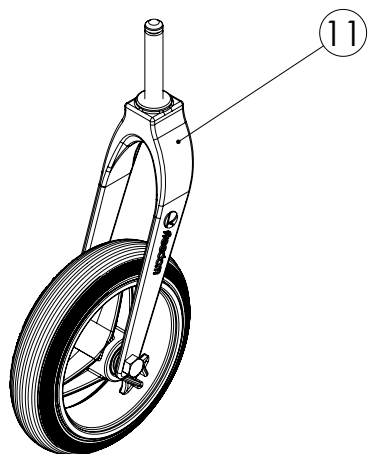

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	181950	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/PRETO)
	141904	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/CINZA)
	178812	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	178811	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/PRETO)

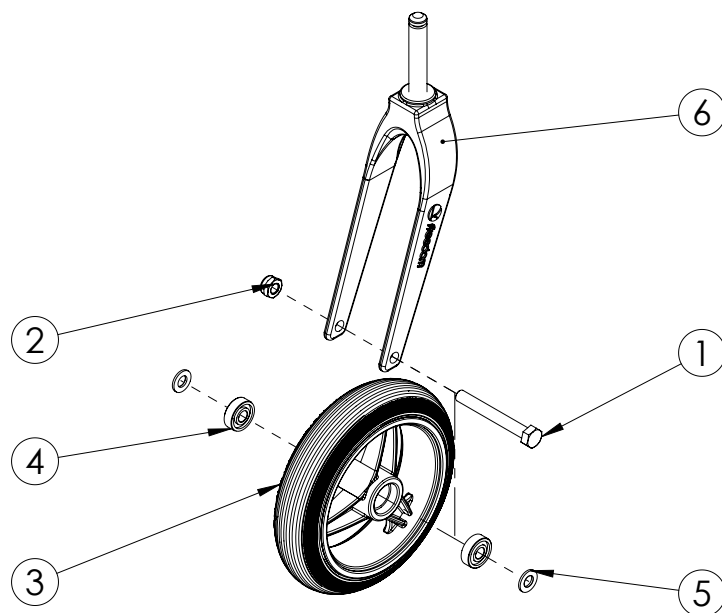

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	20131	1	PA SEXT MA 8.8 8X65MM RP ZB (S/L)
2	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	174747	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/CINZA
	174718	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/PRETO
4	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
5	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
6	182663	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 P
	182662	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 M/G

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 01/10/2009

FOLHA 11 DE 16

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"

REV.:

K

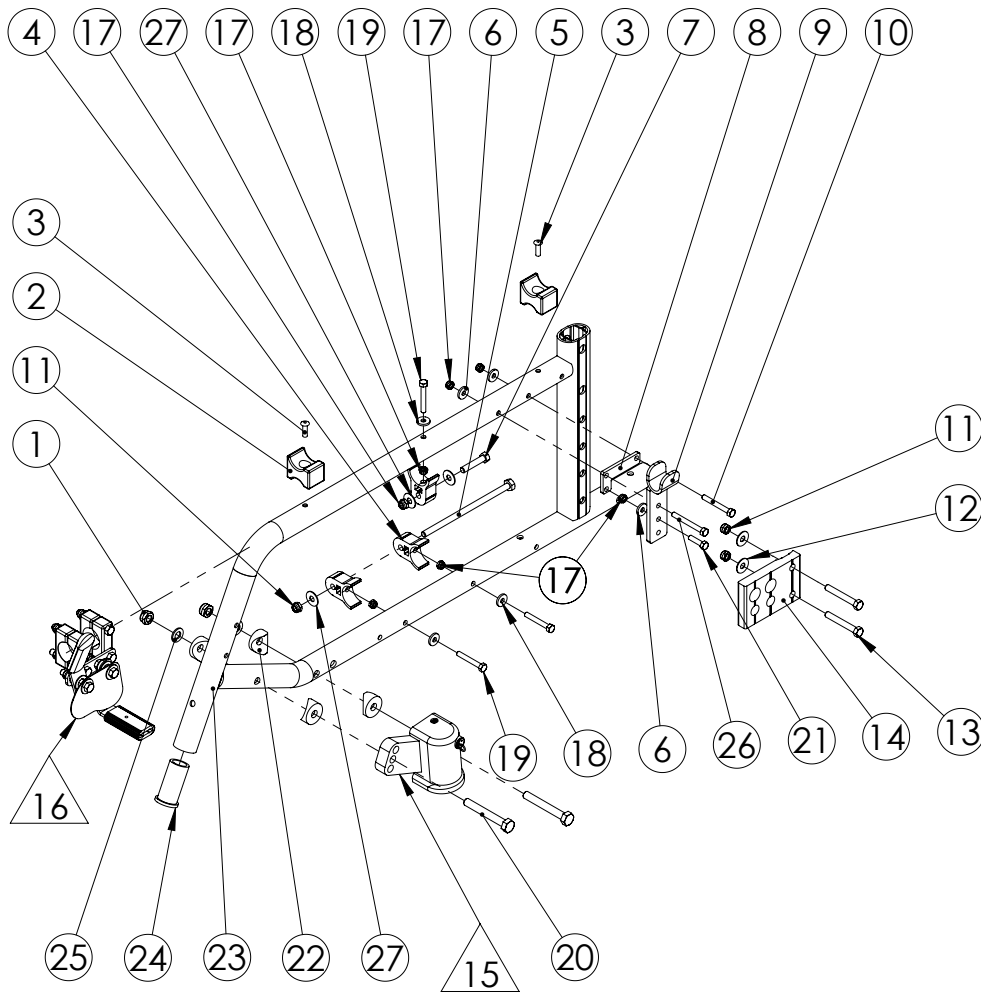

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	791.9	2	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
2	1704.3	2	CADEIRINHA 1" CAD.
3	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
4	124518	3	PERFIL U FURO PORCA
5	16641	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X5 RP ZB (S/L)
6	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
7	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
8	180813	1	L FIXAÇÃO BRAÇO PLUS/STYLES/LUMINA
9	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
10	581.9	1	PA SEXT MA 8.8 5X40MM RT ZB (S)
11	491.0	10	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
12	6087.9	2	ARRUELA LISA 1/4X18X1.2 ZB LUMINA (S) (7X17X1.7)
13	12405.2	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
14	173724	1	PLACA CAD. MANUAL LD [1804]
15	178143	1	PLACA CAD. MANUAL LE [1804]
16	PG.15	1	VER PÁGINA 15
17	PG.16	1	VER PÁGINA 16
18	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
19	393.0	3	ARRUELA LISA 3/16" ZB (S) (5,3X14X2)
20	133037	3	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
21	11832.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X60MM RP ZB (S/L)
22	10388.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X20MM RT ZB (S)
23	10017.0	4	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
	22724	1	CHASSIS ALUMINIO P AMARELO
	22727	1	CHASSIS ALUMINIO P AZUL VERNIZ
	22722	1	CHASSIS ALUMINIO P GRAFITE
	22729	1	CHASSIS ALUMINIO P PRATA VERNIZ
	22721	1	CHASSIS ALUMINIO P PRETO BRILHANTE
	22725	1	CHASSIS ALUMINIO P VERDE VERNIZ
	22726	1	CHASSIS ALUMINIO P VERMELHO VERNIZ
	22723	1	CHASSIS ALUMINIO P VINHO
	22728	1	CHASSIS ALUMINIO P VIOLETA VERNIZ
	22733	1	CHASSIS ALUMINIO M AMARELO
	22736	1	CHASSIS ALUMINIO M AZUL VERNIZ
	22731	1	CHASSIS ALUMINIO M GRAFITE
	22738	1	CHASSIS ALUMINIO M PRATA VERNIZ
	22730	1	CHASSIS ALUMINIO M PRETO BRILHANTE
	22734	1	CHASSIS ALUMINIO M VERDE VERNIZ
	22735	1	CHASSIS ALUMINIO M VERMELHO VERNIZ
	22732	1	CHASSIS ALUMINIO M VINHO
	22737	1	CHASSIS ALUMINIO M VIOLETA VERNIZ
	22742	1	CHASSIS ALUMINIO G AMARELO
	22745	1	CHASSIS ALUMINIO G AZUL VERNIZ
	22740	1	CHASSIS ALUMINIO G GRAFITE
	22747	1	CHASSIS ALUMINIO G PRATA VERNIZ
	22739	1	CHASSIS ALUMINIO G PRETO BRILHANTE
	22743	1	CHASSIS ALUMINIO G VERDE VERNIZ
	22744	1	CHASSIS ALUMINIO G VERMELHO VERNIZ
	22741	1	CHASSIS ALUMINIO G VINHO
	22746	1	CHASSIS ALUMINIO G VIOLETA VERNIZ
24	107427	1	TUBETE ENCAIXE PEDALEIRA P/2MM
25	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
26	142915	1	PA SEXT MA 8.8 5X45MM RT ZB (S)
27	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 12 DE 16


ESCALA: 1:8



DESCRIÇÃO:

CHASSIS

REV.:

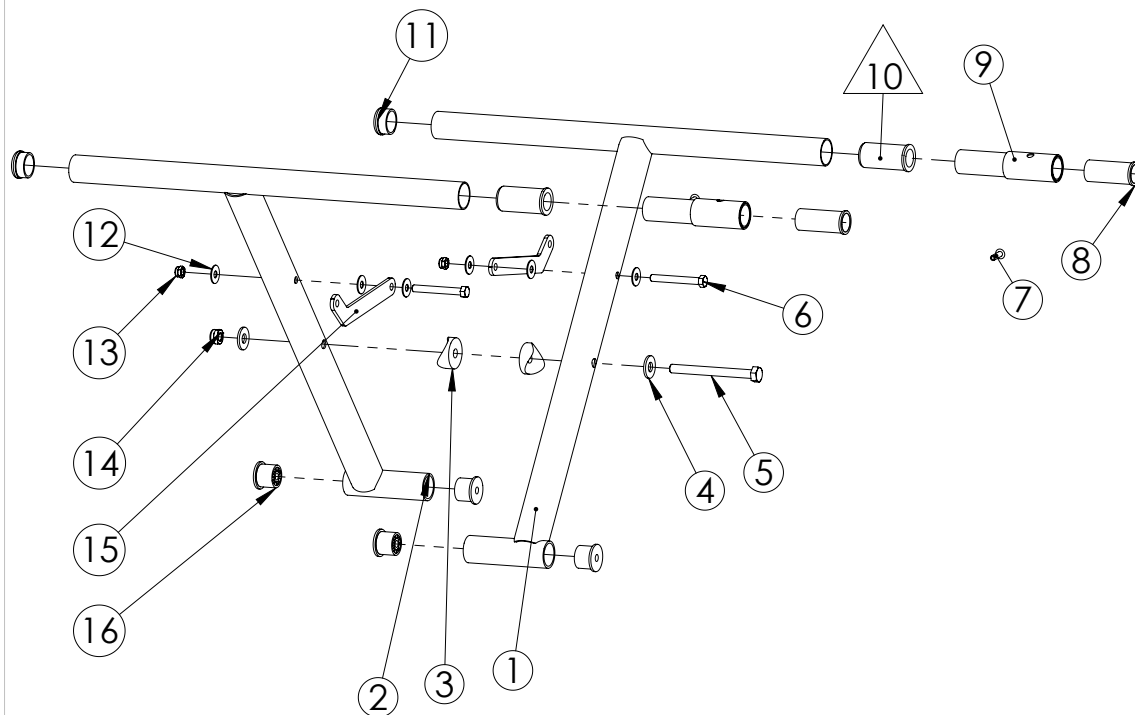

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	150150	1	TUBO X 34/37 LD P ACO
	146672	1	TUBO X 37/37 LD P ACO
	150083	1	TUBO X 37/42 LD M ACO
	146298	1	TUBO X 41/42 LD M ACO
	149522	1	TUBO X 45/42 LD M ACO
	149523	1	TUBO X 50/42 LD M ACO
	146507	1	TUBO X 41/47 LD G ACO
	146510	1	TUBO X 45/47 LD G ACO
	146503	1	TUBO X 50/47 LD G ACO
	146674	1	TUBO X 37/37 LE P ACO
2	150082	1	TUBO X 37/42 LE M ACO
	146299	1	TUBO X 41/42 LE M ACO
	149524	1	TUBO X 45/42 LE M ACO
	149525	1	TUBO X 50/42 LE M ACO
	146508	1	TUBO X 41/47 LE G ACO
	146509	1	TUBO X 45/47 LE G ACO
	146506	1	TUBO X 50/47 LE G ACO
	150151	1	TUBO X 34/37 LE P ACO
3	1702.7	2	BOCA DE LOBO 1 1/4" CAD.ALUM.
4	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
5	21598	1	PA SEXT MA 8.8 8X85 RP ZB
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	11418.9	2	REBITE RX AL 4,8X16 (S/L)
8	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
9	159463	2	PROLONGADOR PUNHO/X STYLES
10	149281	2	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
11	149290	2	TAMPAO 1"
12	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
13	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
14	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L)
15	154383	2	SUP. FIXACAO DO X 34 SP CORTE LASER
	146313	2	SUP. FIXACAO DO X 37 SM/SP CORTE LASER
	146311	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SM CORTE LASER
	146312	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SM CORTE LASER
	146314	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SM CORTE LASER
	146523	2	SUP. FIXACAO DO X 41 SG CORTE LASER
	146522	2	SUP. FIXACAO DO X 45 SG CORTE LASER
	146521	2	SUP. FIXACAO DO X 50 SG CORTE LASER
16	107748	4	BUCHA ARTICULACAO X BAIXO

APLICAÇÃO:
ITEM 10 É USADO NA AUSÊNCIA DO PROLONGADOR

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 13 DE 16

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO X AÇO

REV.:

F.03

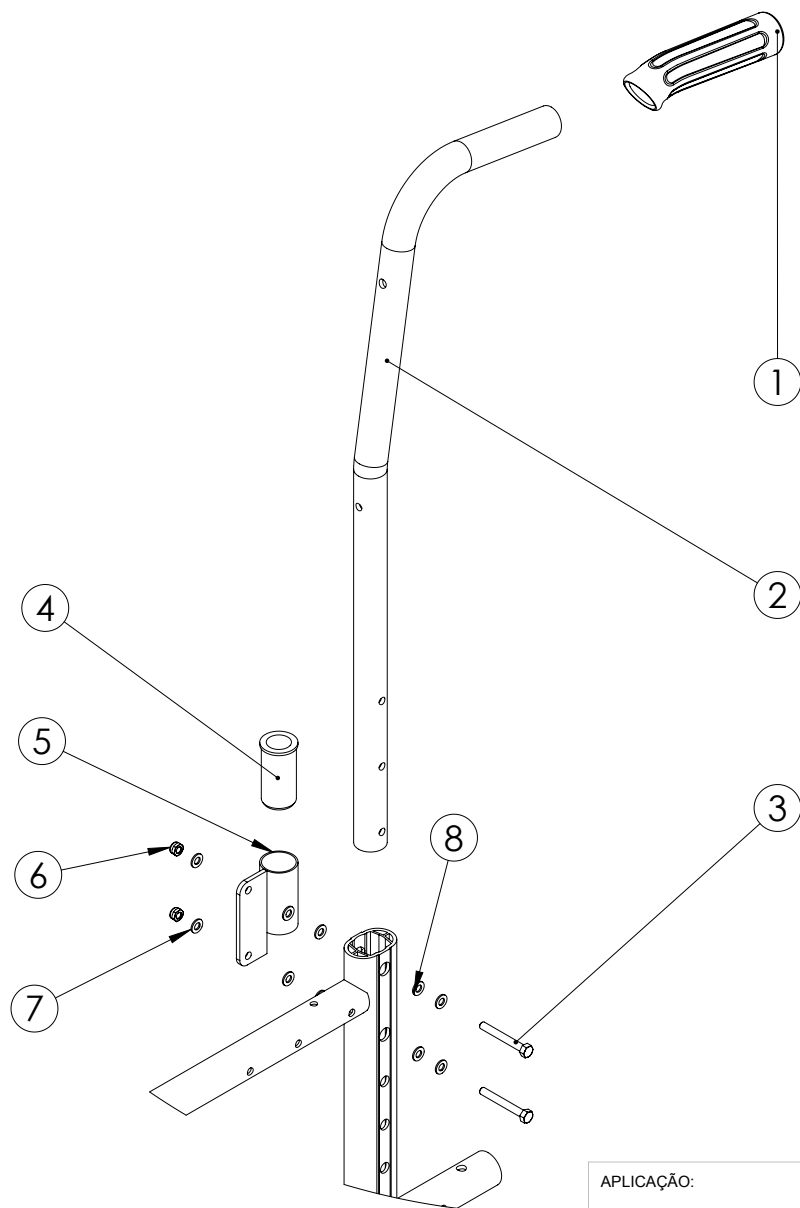

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	180440	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40/30 [1806]
	179334	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 40 [1804]
	179336	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 45 [1804]
	179333	1	TUBO ENCOSTO FIXO ALUMINIO 50 [1804]
3	581.9	2	PA SEXT MA 8.8 5X40MM RT ZB (S)
4	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1" PAREDE 1,2MM
5	164875	1	SUORTE BRACO FIXO ENCOSTO AÇO
6	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L)
7	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
8	261.5	10	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 14 DE 16

ESCALA: 1:7





REV.:



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO FIXO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	7965.0	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)
	7960.0	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)

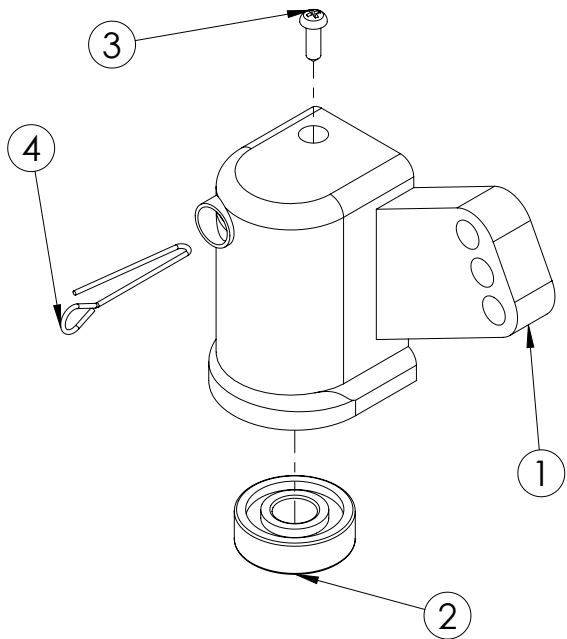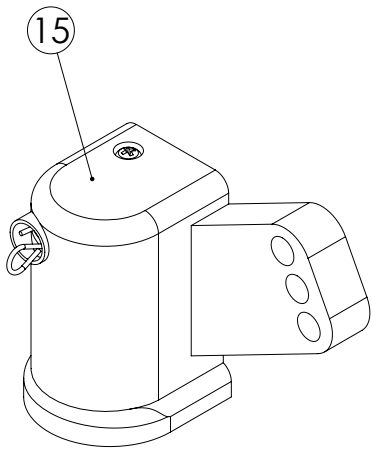

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	709.9	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
	809.5	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
2	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
3	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
4	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: yuri

DATA:

FOLHA 15 DE 16

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:


CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

REV.:

G

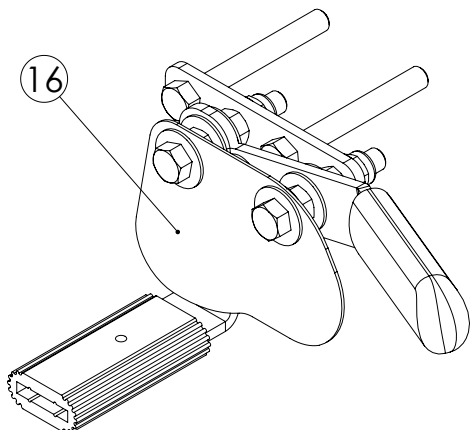

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	182921	CONJUNTO FREIO 4 FUROS LUMINA/PLUS/LIFE LD [1801]
	182920	CONJUNTO FREIO 4 FUROS LUMINA/PLUS/LIFE LE [1801]

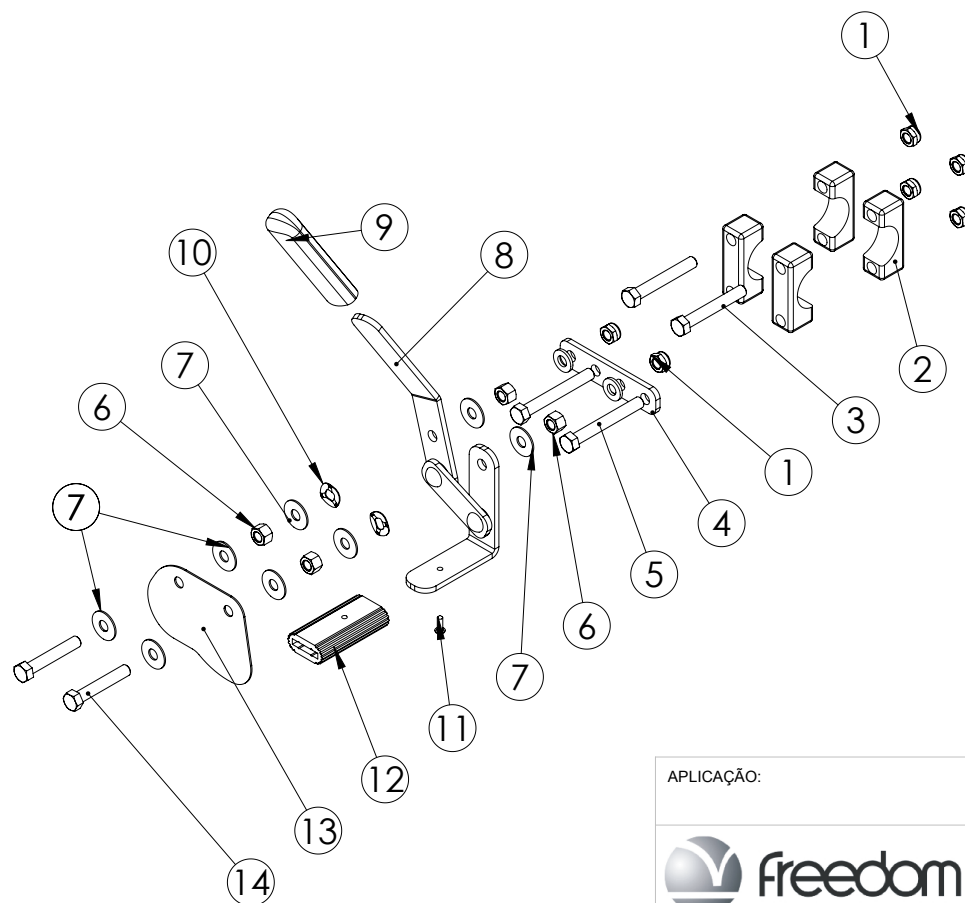

ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	1701.9	4	ABRACADEIRA 1" CAD.
3	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	177950	1	PRANCHETA FREIO 4 FUROS [1801]
5	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
6	891.5	4	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
7	10083.8	8	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
8	8991.5	1	FREIO LADO DIREITO
	5121.7	1	FREIO LADO ESQUERDO
9	182661	1	LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS PRETO (17,2GR) (S)
10	24492	2	ARRUELA ONDULADA AOC 6,3X14X0,46
11	417.0	1	PA AAT CP PH 2.9X9.5MM ZP
12	125450	1	perfil freio manual
13	137190	1	PLACA FREIO MANUAL (MOD. 2011) CORTE LASER
14	12426.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO FREIO

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 16 DE 16

ESCALA: 1:2



REV.:

G