




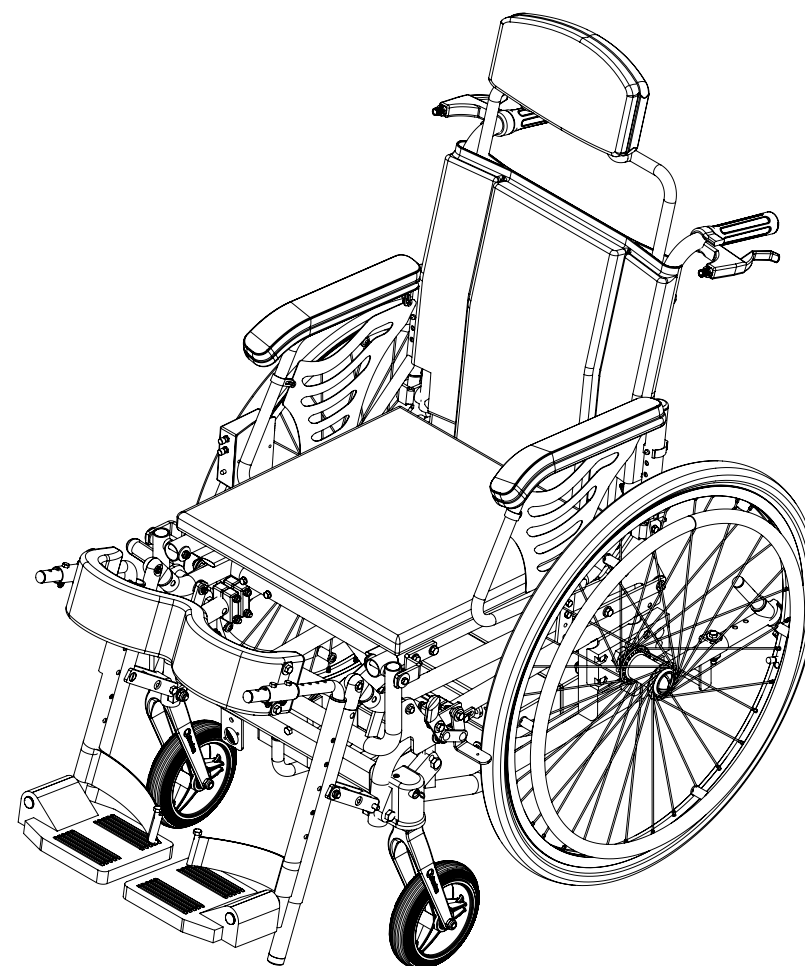

DESCRIÇÃO:
STAND UP MANUAL

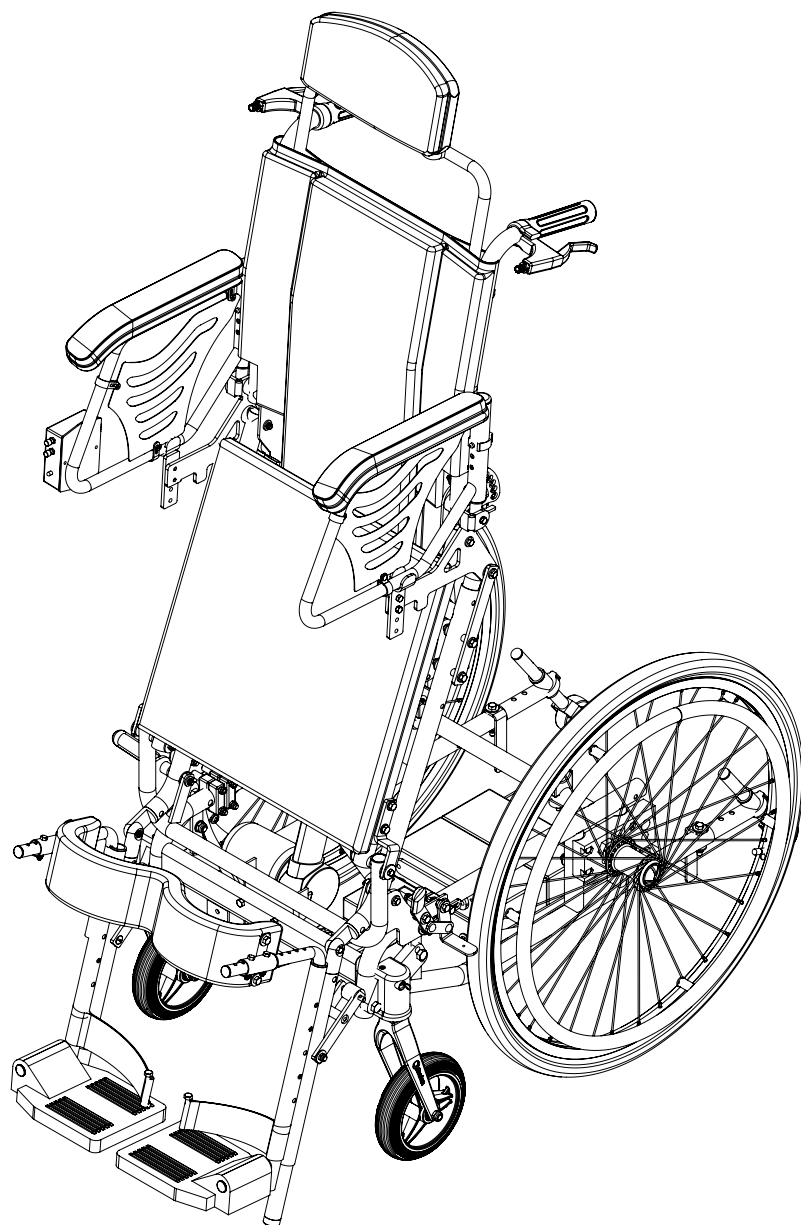

APLICAÇÃO: RODA 12 1/2" PG. 9

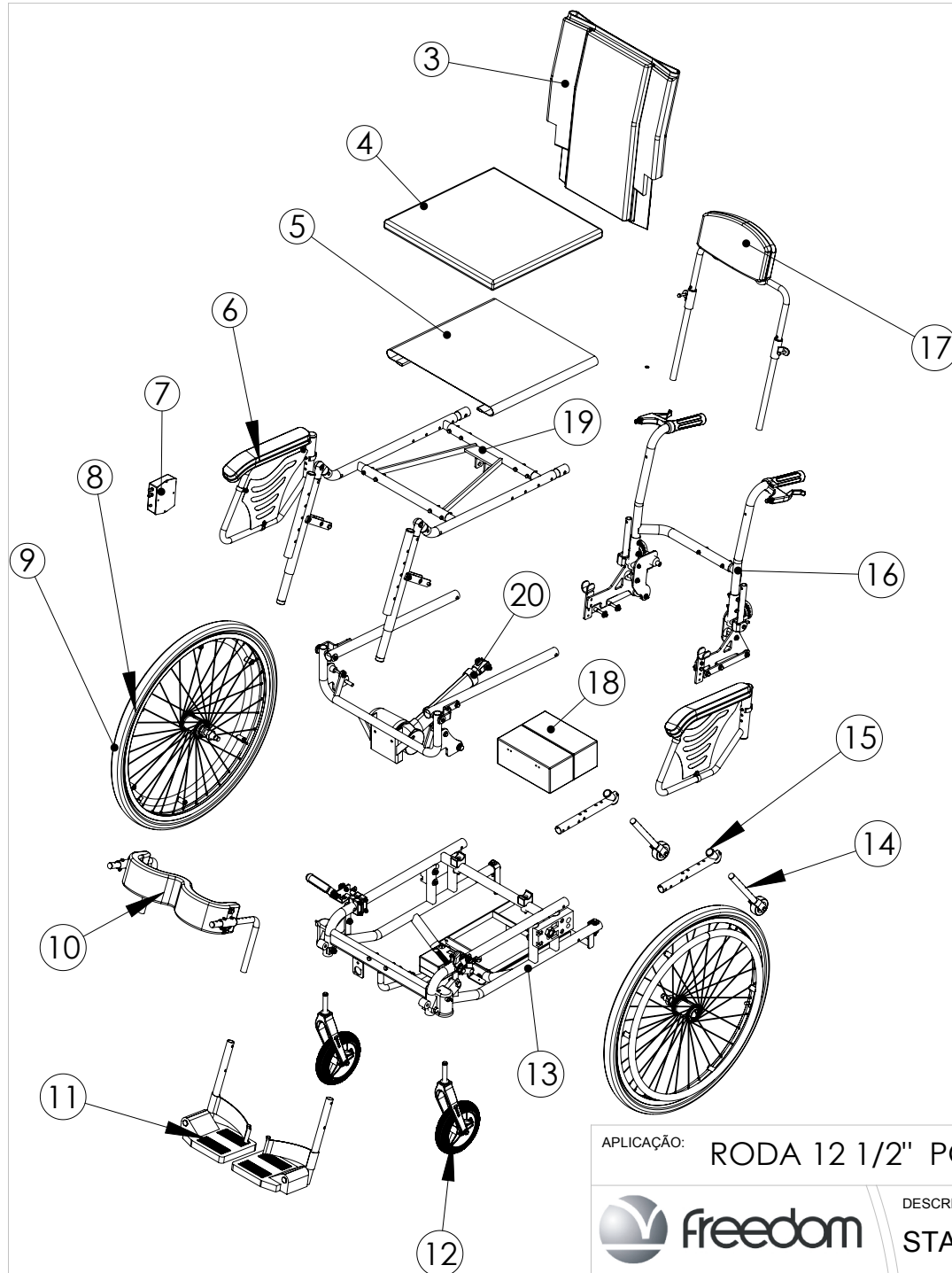


DESCRIÇÃO:
STAND UP MANUAL

DES.: garcia
FOLHA 2 DE 22

DATA:
ESCALA: 1:18



REV.:
B

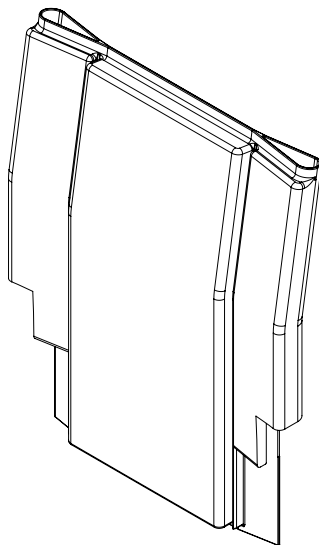

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	25223	ENCOSTO STAND-UP 41/40
	25224	ENCOSTO STAND-UP 41/45
	25225	ENCOSTO STAND-UP 41/50
	25227	ENCOSTO STAND-UP 45/40
	25228	ENCOSTO STAND-UP 45/45
	25229	ENCOSTO STAND-UP 45/50
	25231	ENCOSTO STAND-UP 50/40
	25232	ENCOSTO STAND-UP 50/45
	25233	ENCOSTO STAND-UP 50/50

APLICAÇÃO:

DES.: gabriel

DATA:

FOLHA 3 DE 22

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

REV.:

F

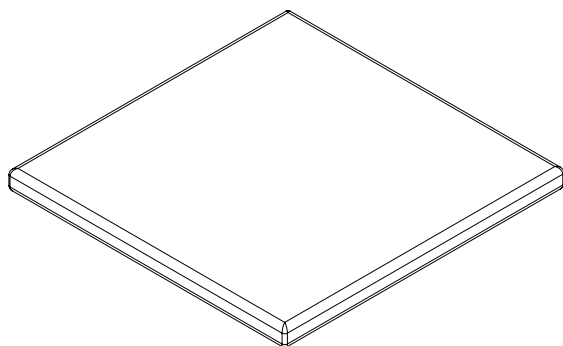

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4	25044	ALMOFADA PELVICA 5CM L.41/P.42
	25058	ALMOFADA PELVICA 5CM L.41/P.47
	25056	ALMOFADA PELVICA 5CM L.41/P.52
	25045	ALMOFADA PELVICA 5CM L.45/P.42
	25057	ALMOFADA PELVICA 5CM L.45/P.47
	25050	ALMOFADA PELVICA 5CM L.45/P.52
	25046	ALMOFADA PELVICA 5CM L.50/P.42
	25049	ALMOFADA PELVICA 5CM L.50/P.47
	25051	ALMOFADA PELVICA 5CM L.50/P.42

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 4 DE 22

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

ALMOFADA ASSENTO

REV.:

A

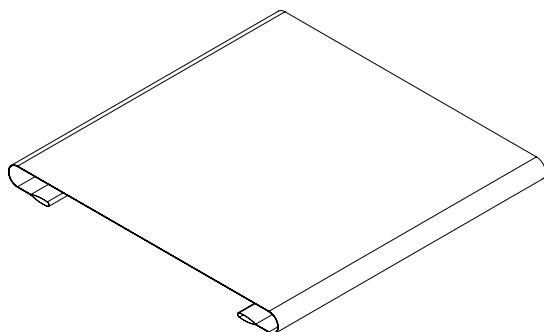

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	25601	BASE ASSENTO STAND-UP L.41/P.42
	25245	BASE ASSENTO STAND-UP L.41/P.47
	25607	BASE ASSENTO STAND-UP L.41/P.52
	25603	BASE ASSENTO STAND-UP L.45/P.42
	25246	BASE ASSENTO STAND-UP L.45/P.47
	25611	BASE ASSENTO STAND-UP L.45/P.52
	25605	BASE ASSENTO STAND-UP L.50/P.42
	25247	BASE ASSENTO STAND-UP L.50/P.47
	25614	BASE ASSENTO STAND-UP L.50/P.52

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 5 DE 22

ESCALA: 1:8




REV.:




DESCRIÇÃO:

BASE ASSENTO

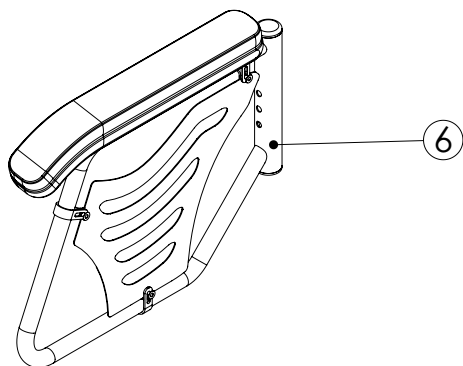

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	182608	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES/STAND UP ART. P LD STANDARD
	182604	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES/STAND UP ART. P LE STANDARD
	182606	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES/STAND UP ART. M LD STANDARD
	182617	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES/STAND UP ART. M LE STANDARD
	182609	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES/STAND UP ART. G LD STANDARD
	182605	CONJUNTO BRACO PLUS/STYLES/STAND UP ART. G LE STANDARD

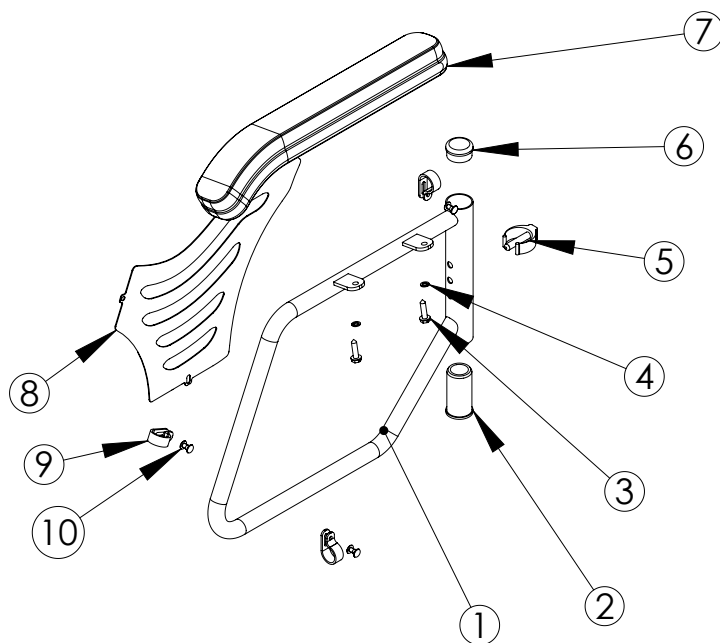

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	164854	1	BRACO ARTICULADO ACO P LD
	164855	1	BRACO ARTICULADO ACO P LE
	164856	1	BRACO ARTICULADO ACO M LD
	164857	1	BRACO ARTICULADO ACO M LE
	164858	1	BRACO ARTICULADO ACO G LD
	164853	1	BRACO ARTICULADO ACO G LE
2	149281	1	TUBETE C/ ANEL P/ TUBO 1"X1,2MM
3	22936	2	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X25MM ZB (S/L)
4	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
5	6889.6	1	CLIP E 1"
6	149290	1	TAMPAO 1"
7	151822	1	ALMOFADA BRACO INJETADO STANDARD 5.0(S)
	108962	1	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
8	165594	1	Carenagem Braço P
	165589	1	Carenagem Braço M
	165595	1	Carenagem Braço G
9	110152.8	3	ABRACADEIRA NXR-8 PRETA P-CABO (12,7 A 15,9) (S)
10	2821.5	3	REBITE DE REMANCHO NR 3 FPTO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 6 DE 22

ESCALA: 1:7





REV.:



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO BRAÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	1919	CAIXA ACIONAMENTO STAND UP MN

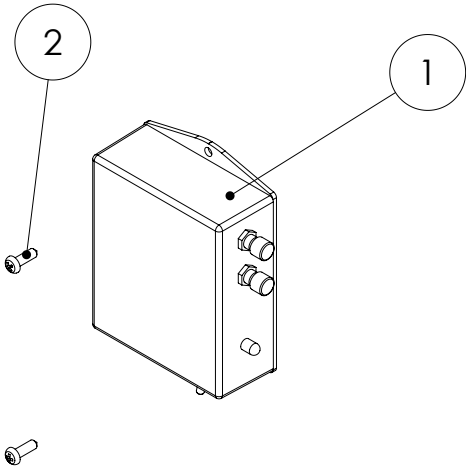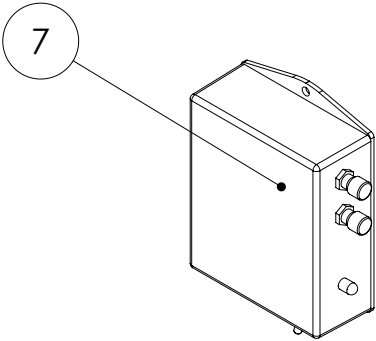

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	1919	1	CAIXA ACIONAMENTO STAND UP MN
2	617	2	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP

APLICAÇÃO:

DES.: everton

DATA:

FOLHA 7 DE 22

ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:
CAIXA ACIONAMENTO

REV.:

-.04

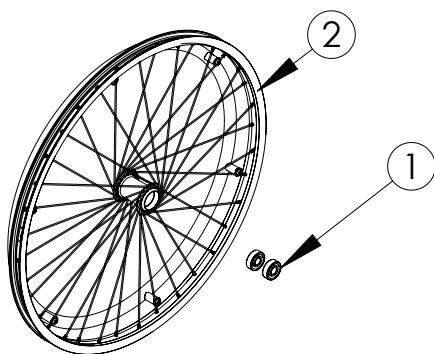


TABELA 1 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	351.4	2	ROLAMENTO 6201 ZZ 2LINHA (S/L)
2	182342	1	CONJUNTO ARO 24" ALUMINIO INF. ARG. ALUMINIO EIXO QUICK
	182341	1	CONJUNTO ARO 24" ALUMINIO INF. ARG. PINOS EIXO QUICK
ATENÇÃO!			O ITEM 2 NÃO POSSUI CAMARA DE AR/PNEU. VER TABELA 2 PG.7

TABELA 2 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
10	241.0	1	PNEU BIC 24X 1 3/8 CINZA (S)
	121.0	1	CAMARA DE AR 26 A (S)
	23267	1	RODA TRAS.PU 24X1,3/8 PARA CADEIRA DE RODAS

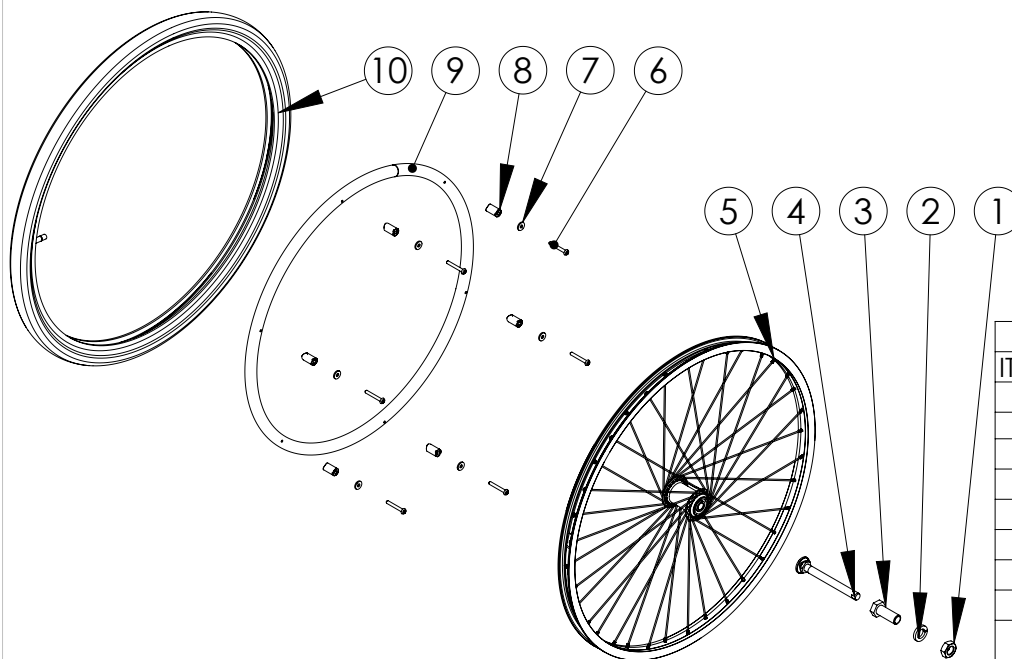


TABELA 3 PG.8			
ITEM	CÓDIGO	QNT.	DESCRIÇÃO
1	15289.7	1	PO SEXT UNF 5/8" BXA CH15/16 ZB (S/L)
2	198.8	1	ARRUELA PRESSAO 5/8"ZB (115PC=1KG)(S) (16,5X27X4,3
3	12442.7	1	BUCHA QUICK 5/8"X1 3/4"
4	26232	1	EIXO QUICK RELEASE INOX QR120009
5	185083	1	CONJUNTO 24" C/ RAIOS
6	402.2	6	PA AAT CP PH 4,8X38MM ZB
7	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
8	114.7	6	PINO ARGOLA NYLON (2,83GR) (S)
9	4021.5	1	ARGOLA PROPULSAO 24"
	172448 + 182661	1	ARGOLA PROPULSAO 24" COM PINOS + LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS PRETO (17,2GR) (S)

APLICAÇÃO:

Obs.: Códigos 172448 e 182661 devem ser vendidos juntos.

DES.: JONATHAN M.

DATA: 12/05/2010

FOLHA 8 DE 22

ESCALA: 1:12




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO RODA RAIADA 24"

REV.:

S.01

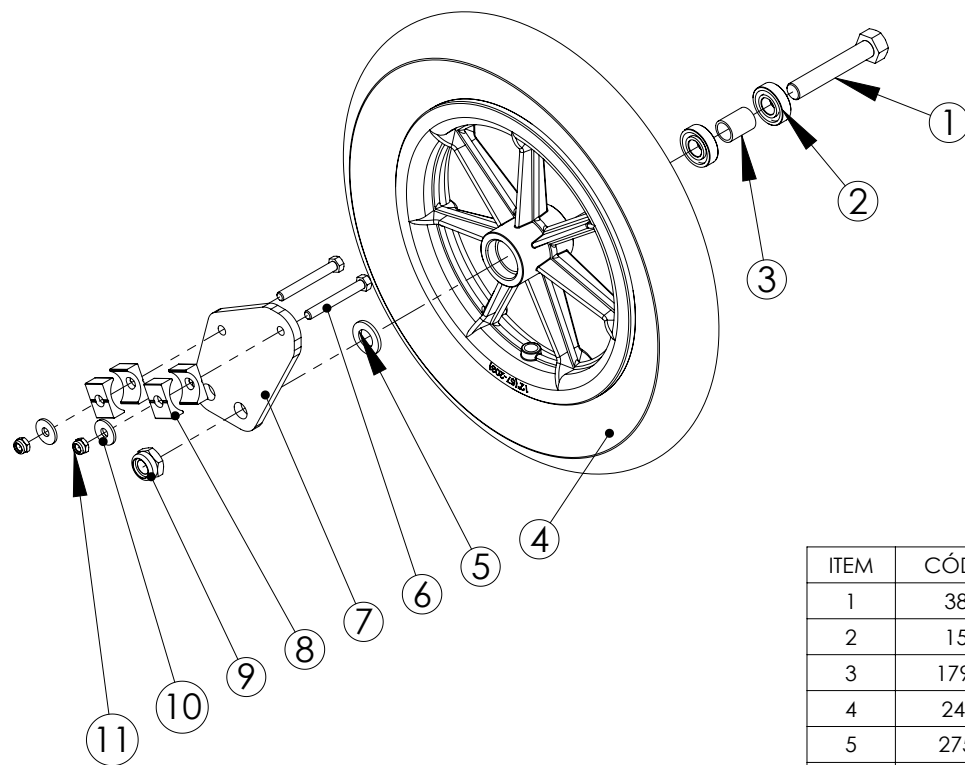

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	381.6	1	PA SEXT MA 8.8 12X70MM RP ZB (S/L)
2	151.1	2	ROLAMENTO 6001 DDU NSK 1LINHA (S)
3	179660	1	BUCHA EIXO RODA PR1MO 12"
4	24098	1	RODA ARO COMPLETA PU 12 1/2X1 1/4 PARA CADEIRA DE RODAS (P70200)
5	2751.0	1	ARRUELA LISA 12MM ZB (S) (13X24X2,5)
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	181266	1	PLACA TRASEIRA 13 MANUAL CORTE LASER
8	151197	4	PERFIL MEIA CANA 1" 18mm FURO 8,5mm
9	191.0	1	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
10	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
11	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 9 DE 22

ESCALA: 1:5




REV.:




DESCRIÇÃO:

RODA 12 1/2"

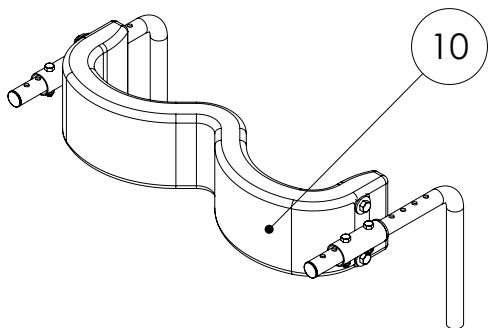

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	2705	CONJUNTO JOELHEIRA STAND-UP 41
	2716	CONJUNTO JOELHEIRA STAND-UP 45
	25253	CONJUNTO JOELHEIRA STAND-UP 50

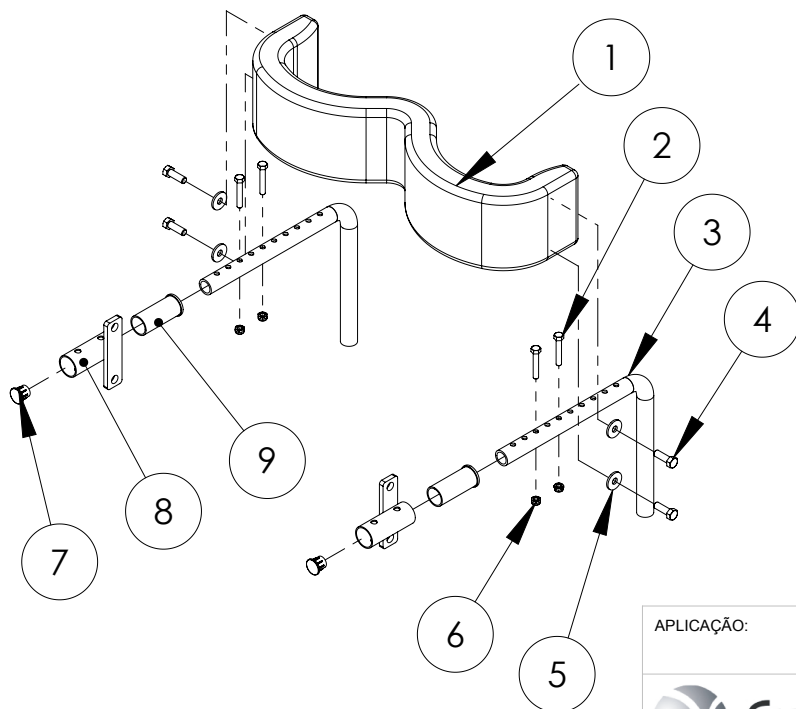

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	12009	1	APOIO JOELHO STAND-UP 41
	2717	1	APOIO JOELHO STAND-UP 45
	25250	1	APOIO JOELHO STAND-UP 50
2	481	4	PA SEXT MA 8.8 5X30MM RT ZB (S)
3	933	2	TUBO REGULADOR JOELHEIRA
4	11359	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X3/4 RT ZB
5	10083	4	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
6	691	4	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
7	352	2	PONTEIRA CAD.INTERNA RED.PTO 5/8" (52102) (S)
8	937	2	FIXACAO JOELHEIRA
9	10142	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD 7/8" P/1,2MM(4,10GR) (S)

APLICAÇÃO:

DES.: everton

DATA:

FOLHA 10 DE 22

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:


JOELHEIRA STAND UP

REV.:

A.01

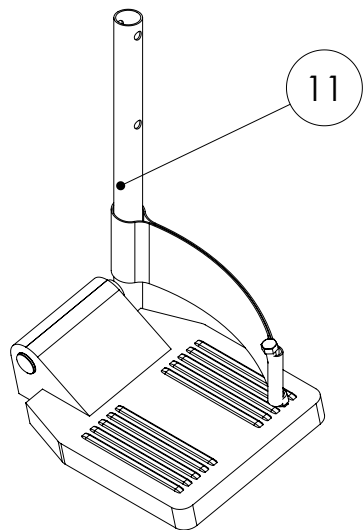

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
11	187668	1	CONJUNTO PEDALEIRA STAND UP DIR
	187669	1	CONJUNTO PEDALEIRA STAND UP ESQ

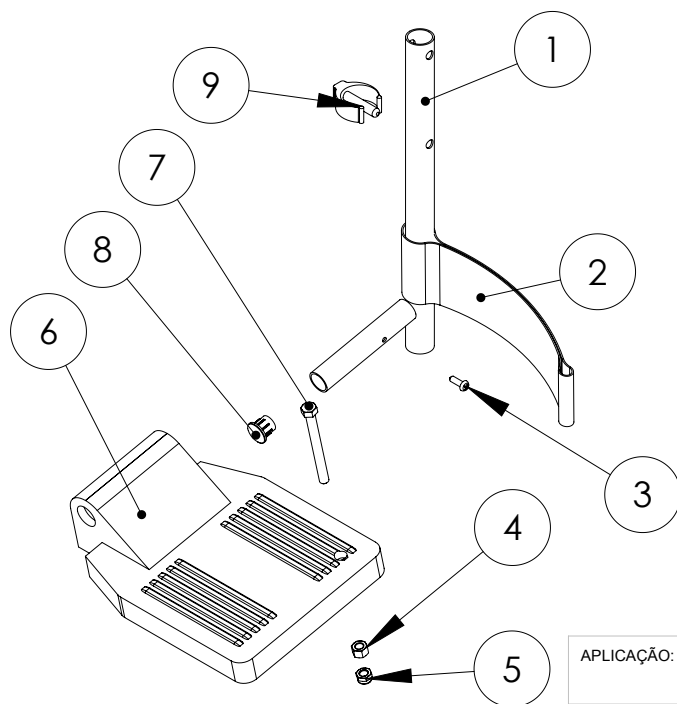

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	7575.2	1	TUBO PEDALEIRA 41/45/50
2	2459.7	1	TIRA APOIO CALCANHAR
3	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
4	891.5	1	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
5	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
6	8617.7	1	PEDALEIRA ALUMINIO (STAND UP)
7	12407.9	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/2 RP ZB
8	352.2	1	PONTEIRA CAD.INTERNA RED.PTO 5/8" (52102) (S)
9	6889.6	1	CLIP E 1"

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO PEDALEIRA STAND UP DIR

DES.: everton

FOLHA 11 DE 22



DATA: 14/06/2010

ESCALA: 1:50



REV.:

F

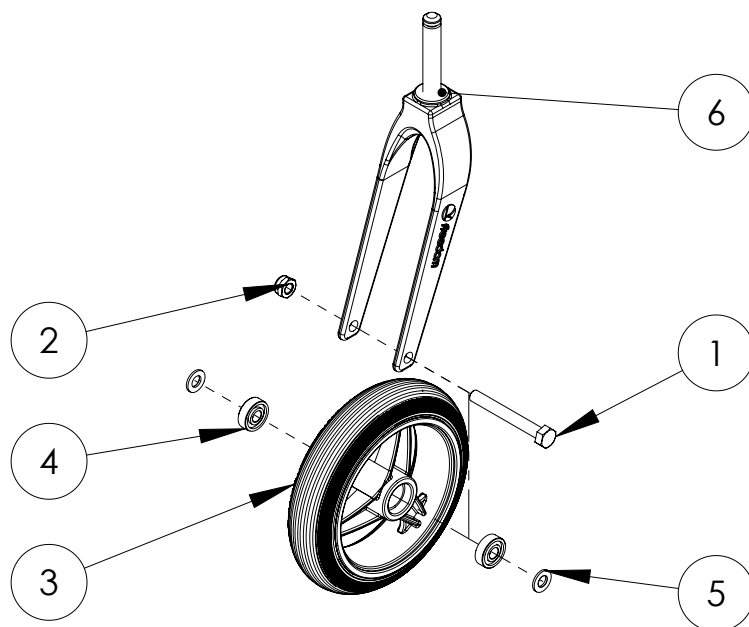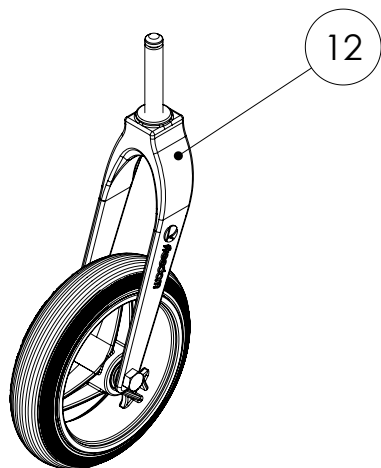

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
12	181950	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/PRETO)
	141904	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" P (PRETO/CINZA)
	178812	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/CINZA)
	178811	CONJUNTO GARFO RODA MACIÇA 6" M/G (PRETO/PRETO)

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	20131	1	PA SEXT MA 8.8 8X65MM RP ZB (S/L)
2	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	174747	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/CINZA
	174718	1	RODA MACICA 6" 3 RAIOS PRETO/PRETO
4	251.8	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
5	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
6	182662	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 M/G
	182663	1	GARFO MANUAL ALUMINIO PRETO 46 P

APLICAÇÃO:

DES.: tiago

DATA: 01/10/2009

FOLHA 12 DE 22

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO GARFO RODA MAC. 6"

REV.:

K

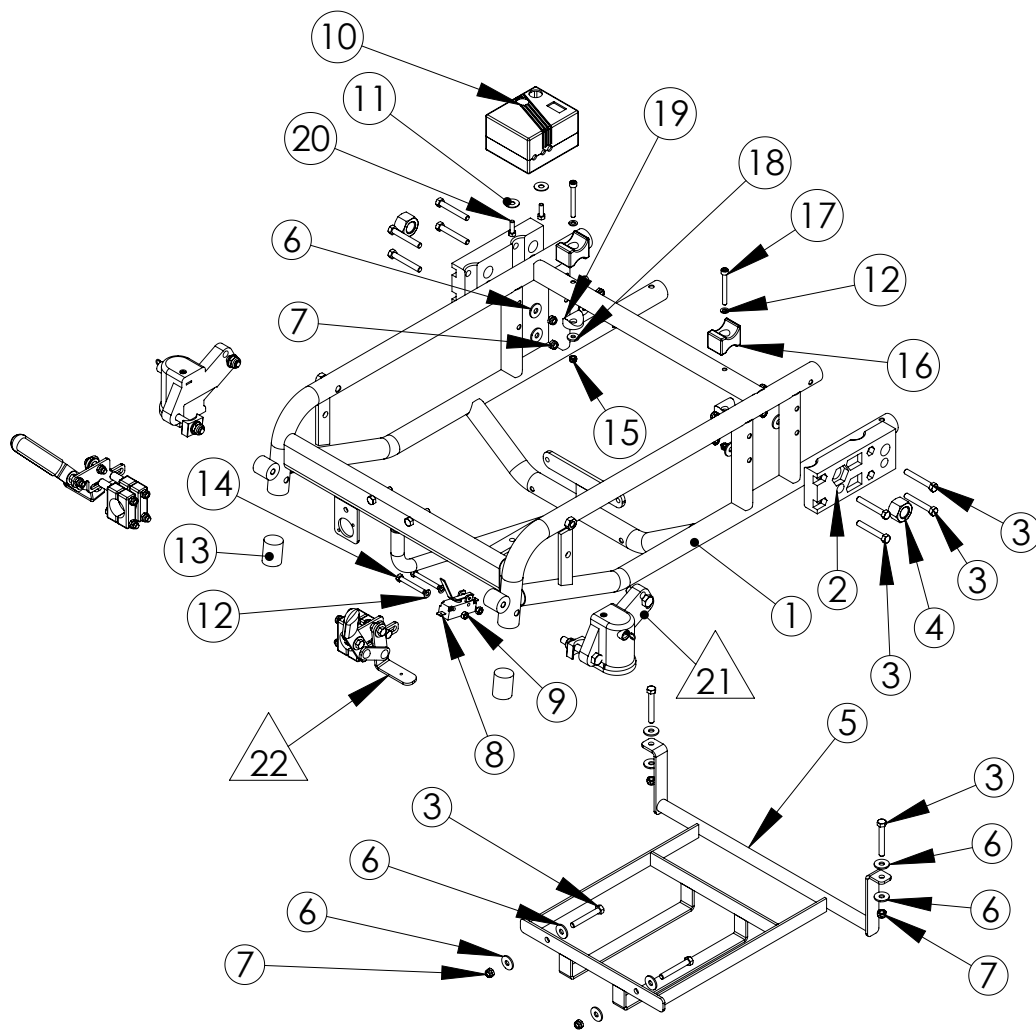

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	22810	1	CHASSIS STAND UP 41 AMARELO
	22813	1	CHASSIS STAND UP 41 AZUL VERNIZ
	22808	1	CHASSIS STAND UP 41 GRAFITE
	22815	1	CHASSIS STAND UP 41 PRATA VERNIZ
	22807	1	CHASSIS STAND UP 41 PRETO BRILHANTE
	22811	1	CHASSIS STAND UP 41 VERDE VERNIZ
	22812	1	CHASSIS STAND UP 41 VERMELHO VERNIZ
	22809	1	CHASSIS STAND UP 41 VINHO
	22814	1	CHASSIS STAND UP 41 VIOLETA VERNIZ
	22819	1	CHASSIS STAND UP 45 AMARELO
	22822	1	CHASSIS STAND UP 45 AZUL VERNIZ
	22817	1	CHASSIS STAND UP 45 GRAFITE
	22824	1	CHASSIS STAND UP 45 PRATA VERNIZ
	22816	1	CHASSIS STAND UP 45 PRETO BRILHANTE
	22820	1	CHASSIS STAND UP 45 VERDE VERNIZ
	22821	1	CHASSIS STAND UP 45 VERMELHO VERNIZ
	22818	1	CHASSIS STAND UP 45 VINHO
	22823	1	CHASSIS STAND UP 45 VIOLETA VERNIZ
	22828	1	CHASSIS STAND UP 50 AMARELO
	22831	1	CHASSIS STAND UP 50 AZUL VERNIZ
	22826	1	CHASSIS STAND UP 50 GRAFITE
	22833	1	CHASSIS STAND UP 50 PRATA VERNIZ
	22825	1	CHASSIS STAND UP 50 PRETO BRILHANTE
	22829	1	CHASSIS STAND UP 50 VERDE VERNIZ
	22830	1	CHASSIS STAND UP 50 VERMELHO VERNIZ
	22827	1	CHASSIS STAND UP 50 VINHO
	22832	1	CHASSIS STAND UP 50 VIOLETA VERNIZ
2	19445.0	1	PLACA TRASEIRA INJETADA DIR CAD.1". (S)
	19444.1	1	PLACA TRASEIRA INJETADA ESQ CAD.1". (S)
3	12405.2	12	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	11008.6	2	PO SEXT UNF 5/8" CH15/16 ZB (S/L)
5	177650	1	SUPORTE BATERIA STAND UP MANUAL 41 [1801]
	177676	1	SUPORTE BATERIA STAND UP MANUAL 45 [1801]
	177677	1	SUPORTE BATERIA STAND UP MANUAL 50 [1801]
6	10083.8	16	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
7	491.0	12	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
8	125650	1	MICRO SWITCH MARGIRUS IMG 2603 (S/L)
9	291.7	2	PO SEXT MA 5 MM CH 8 ZB - 0,8 MM (S/L)
10	7599.0	1	CAIXA RELE STAND-UP MANUAL(PLASTICA)
11	6087.9	2	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
12	261.5	4	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
13	159900	2	Bucha reforço mancal stand up
14	581.9	2	PA SEXT MA 8.8 5X40MM RT ZB (S)
15	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
16	1704.3	2	CADEIRINHA 1" CAD.ALUM. (S)
17	127866	2	PA ALLEN M5 X 45 MM C/C
18	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
19	10017.0	2	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
20	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
21	PG. 21		VER PAGINA 21
22	PG. 22		VER PAGINA 22

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CHASSIS

DES.: garcia


FOLHA 13 DE 22

DATA:


ESCALA: 1:9



REV.:

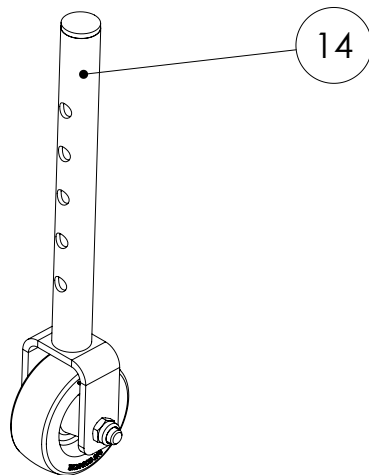

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14	19915	RODA APOIO CAD. MT

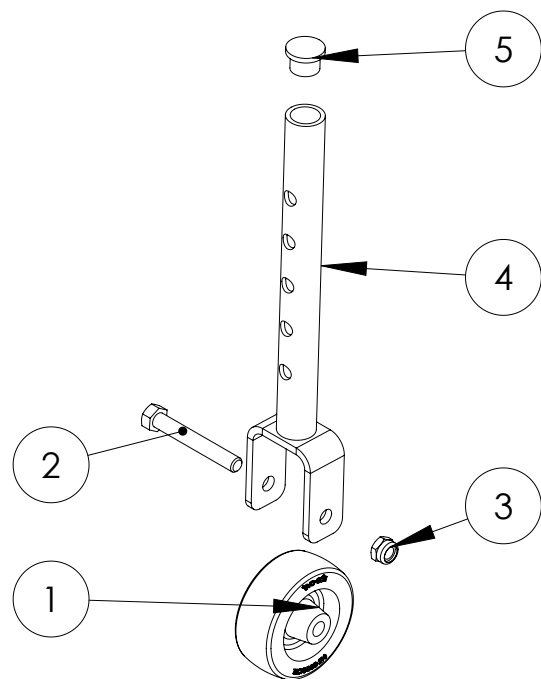

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	133920	1	RODA ROD CAR - TECNI ROD 210 (2")
2	12405.2	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
3	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	150094	1	TUBO RODA APOIO CHASSIS EXTENDIDO
5	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO

APLICAÇÃO:

DES.: Lucas

DATA:

FOLHA 14 DE 22

ESCALA: 1:3




DESCRIÇÃO:

RODA DE APOIO CAD MT

REV.:

D

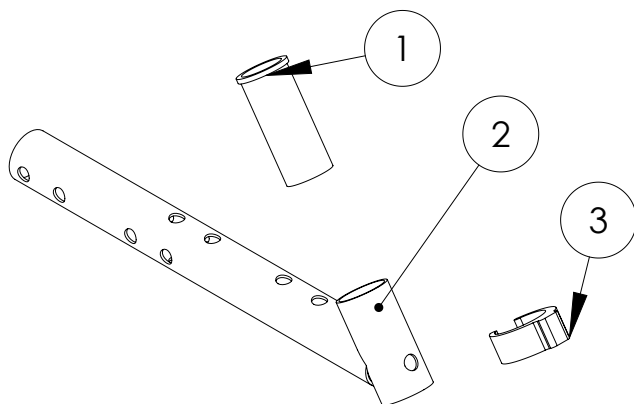

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	10142.7	1	TUBETE C/ ANEL P/ CAD 7/8" P/1,2MM(4,10GR) (S)
2	177892	1	FIXAÇÃO SUPORTE RODA APOIO STAND UP [1801]
3	174699	1	CLIP E 7/8" (S) NÃO PASSANTE

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 15 DE 22


ESCALA: 1:3



DESCRIÇÃO:

CONJUNTO SUPORTE FIXACAO RODA APOIO

REV.:

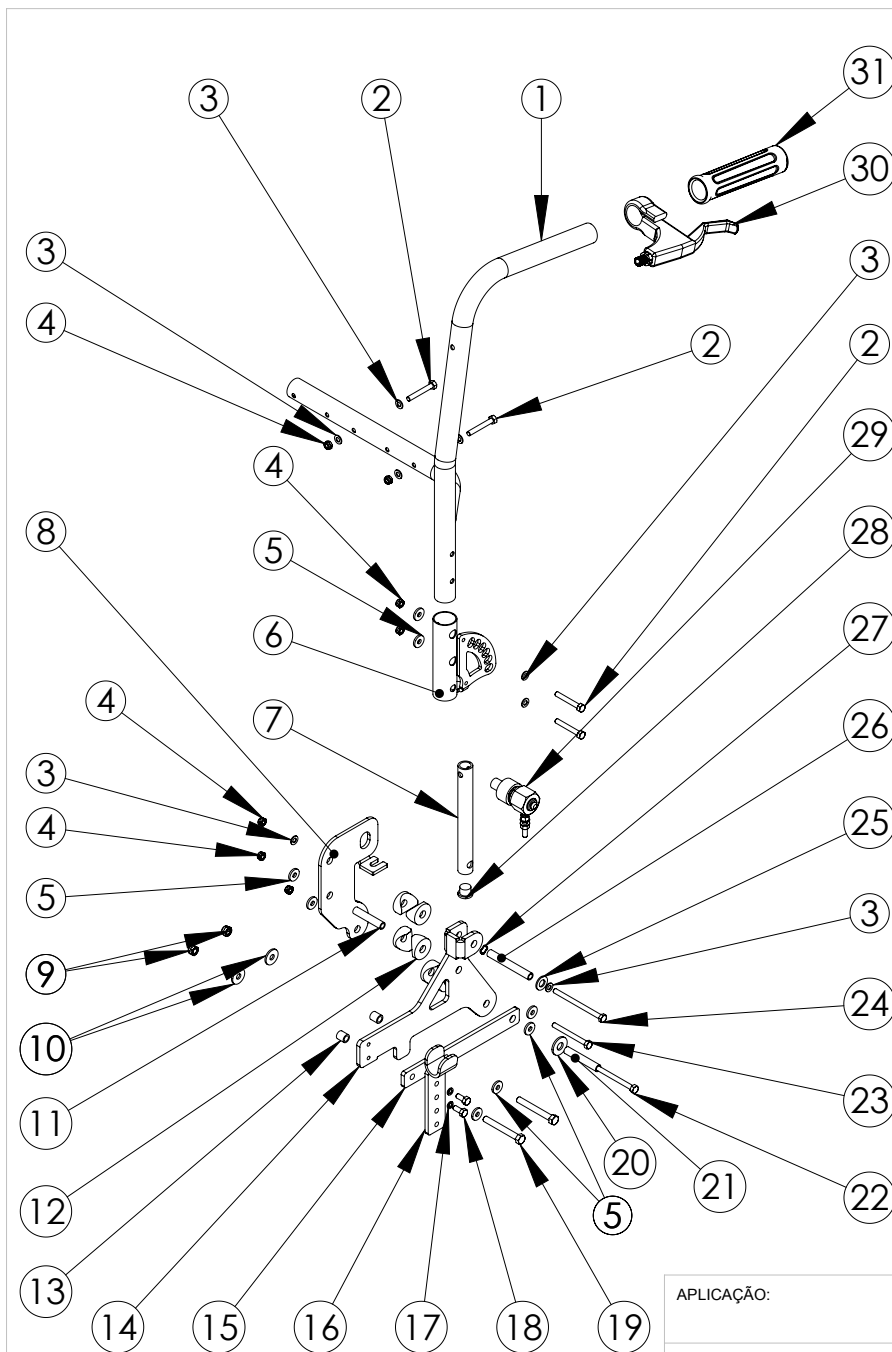

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

ENCOSTO

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	168398	1	TUBO ENCOSTO STAND UP LD 40 [1801]
	168148	1	TUBO ENCOSTO STAND UP LE 40 [1801]
	178690	1	TUBO ENCOSTO STAND UP LD 45 [1801]
	178689	1	TUBO ENCOSTO STAND UP LE 45 [1801]
	173376	1	TUBO ENCOSTO STAND UP LD 50 [1801]
	173377	1	TUBO ENCOSTO STAND UP LE 50 [1801]
2	133037	4	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
3	261.5	8	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
4	691.2	7	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
6	177844	1	REGULAGEM DO ENCOSTO RECLINAVEL LD [1801]
	177847	1	REGULAGEM DO ENCOSTO RECLINAVEL LE [1801]
7	182557	1	TUBO FIXACAO BRACO ART [1902]
8	177666	1	PLACA SUP. ENCOSTO STAND UP LADO DIR. [1801]
	177667	1	PLACA SUP. ENCOSTO STAND UP LADO ESQ. [1801]
9	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
10	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
11	172885	1	BUCHA ARTICULAÇÃO 4 STAND UP
12	10017.0	6	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
13	168376	2	separador stand up
14	177673	1	PLACA DO BRAÇO STAND UP LD [1801]
	177671	1	PLACA DO BRAÇO STAND UP LE [1801]
15	177039	1	REFORCO INFERIOR TRASEIRO ASSENTO STAND UP [1801]
16	154548	1	PERFIL SUPORTE BRACO EM ACO
17	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
18	6981.7	2	PA SEXT MA 8.8 5X12MM RT ZB (S)
19	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
20	461.8	1	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
21	172878	1	BUCHA ARTICULAÇÃO 3 STAND UP
22	19589.8	1	PA SEXT MA 8.8 5X60MM RT ZB (S)
23	7821.2	1	PA SEXT MA 8.8 5X50MM RT ZB (S)
24	165017	1	PA SEXT M 5X70MM
25	10507.4	1	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
26	180502	1	BUCHA ENCOSTO RECLINAVEL CLEAN/COMPACT [1807]
27	15651	1	ARRUELA ONDULADA 8MM FOSFATIZADA
28	176240	1	TAMPAO 5/8" RODA DE APOIO
29	187321	1	MONT. VE. TRAVA ENCOSTO RECLINAVEL [1801] CATALOGO
30	131.7	1	MANETE FREIO JKS (ADVENCE-VB) (S)RECLIN E BIGGA
31	231.3	1	MANOPLA COMBATE PRETA (S)

DES.: garcia


DATA:

FOLHA 16 DE 22


ESCALA: 1:8



REV.:

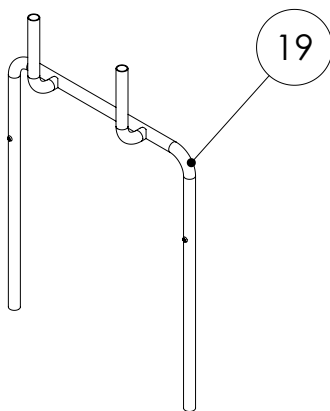

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
19	182980	CONJUNTO SUPORTE ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL L41
	182981	CONJUNTO SUPORTE ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL L45
	182982	CONJUNTO SUPORTE ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL L50

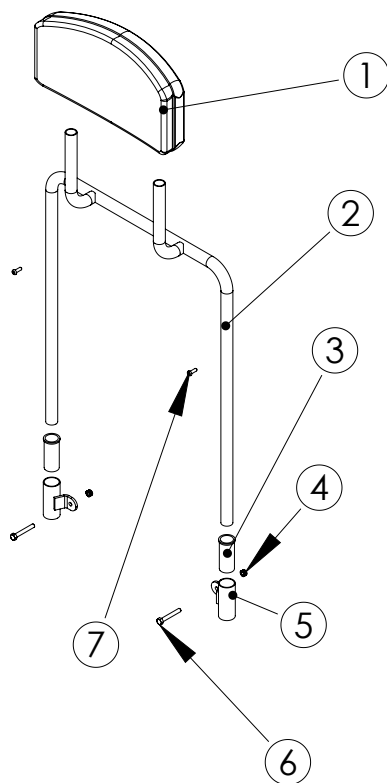

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	110454	1	ALMOFADA ENCOSTO DE CABEÇA CAD. MOD 2011
	961	1	ALMOFADA ENCOSTO DE CABECA CONCAVO
2	11200	1	TUBO ENCOSTO CABECA 41
	52955	1	TUBO ENCOSTO CABECA 45
	5012	1	TUBO ENCOSTO CABECA 50
3	1042	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD ROD.(4,10GR) (S)
4	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
5	5511	2	TUBO SUPORTE ENCOSTO CABECA
6	133037	2	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
7	617	2	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA: 01/10/2009

FOLHA 17 DE 22

ESCALA: 1:6





DESCRIÇÃO:

ENCOSTO DE CABEÇA

REV.:

A

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
18.1	11622	2	BATERIA SELADA PM 12-7.2 (S)

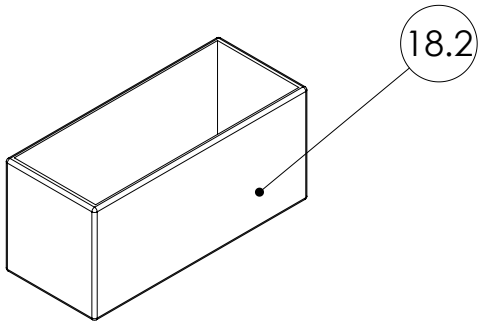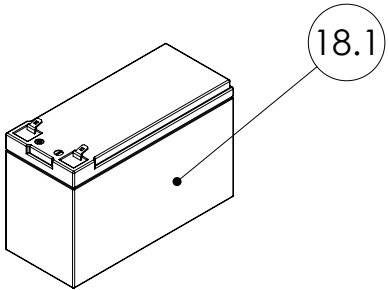

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
18.2	10382	2	TAMPA BATERIA BIKE INJETADA (283GR) (S)

APLICAÇÃO:

DES.: everton

DATA:

FOLHA 18 DE 22


ESCALA: 1:5



DESCRIÇÃO:
TAMPA BATERIA

REV.:

A.01

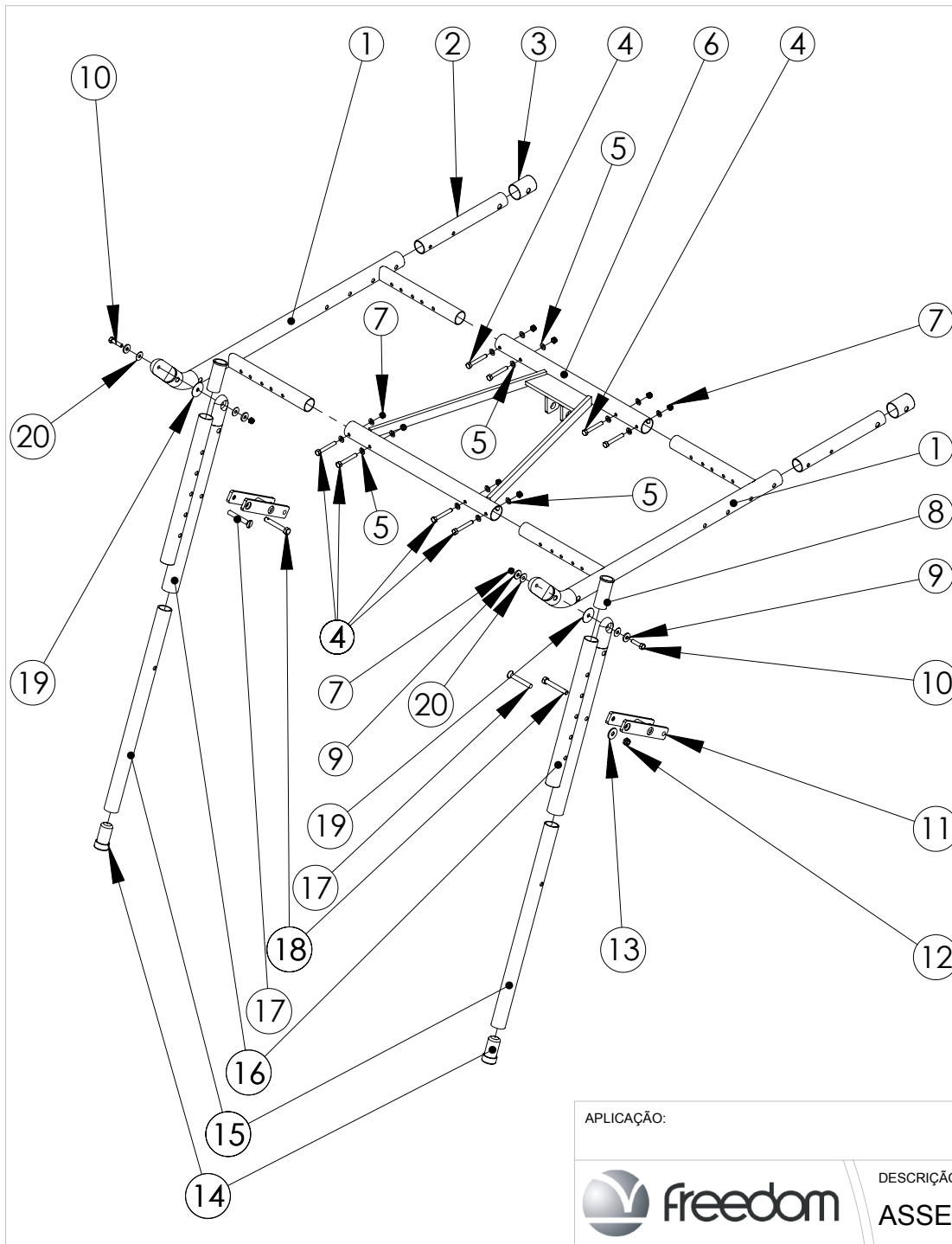

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	177662	1	TUBO ASSENTO STAND-UP LD [1801]
	176895	1	TUBO ASSENTO STAND-UP LE [1801]
2	177038	2	REGULADOR DO ASSENTO [1801]
3	179854	2	LUVA REGULADOR DO ASSENTO [1801]
4	133037	8	PA SEXT MA 8.8 5X35MM RT ZB (S)
5	261.5	16	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
6	176952	1	REGULADOR ASSENTO [1801]
7	691.2	10	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	10142.7	2	TUBETE C/ ANEL P/ CAD 7/8" P/1,2MM(4,10GR) (S)
9	393.0	4	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
10	10388.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X20MM RT ZB (S)
11	172893	2	ENGATE PEDALEIRA STAND UP
12	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
13	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
14	172896	2	BUCHA DA PEDALEIRA TECNIL [1801]
15	173014	2	TUBO BUCHA DA PEDALEIRA TECNIL [1801]
16	172848	2	TUBO SUPORTE PEDALEIRA STAND UP
17	11309.3	2	PA MAQ CH FS 1/4X1.3/4 RT ZB (S)
18	967.9	2	PINO FIXACAO SUPORTE PEDALEIRA
19	156924	2	Arruela Maylar Maior
20	156923	4	Arruela Maylar Menor

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

ASSENTO

DES.: garcia


FOLHA 19 DE 22

DATA:

ESCALA: 1:10



REV.:

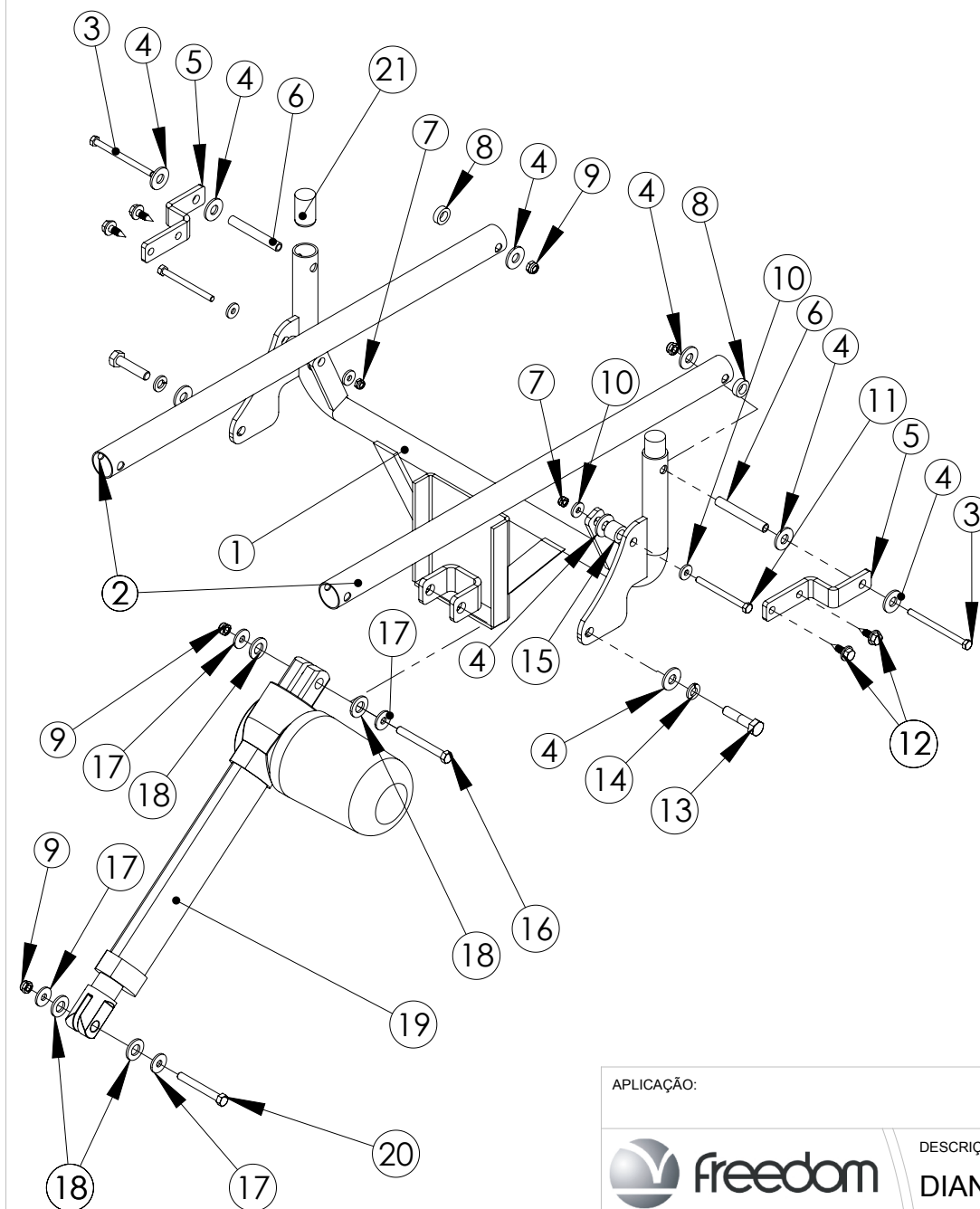

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	176963	1	DIANTEIRA STAND-UP 41 [1801]
	177664	1	DIANTEIRA STAND-UP 45 [1801]
	177665	1	DIANTEIRA STAND-UP 50 [1801]
2	177554	2	TUBO BANCO STAND UP P [1801]
	176897	2	TUBO BANCO STAND UP M [1801]
	177552	2	TUBO BANCO STAND UP G [1801]
3	165017	2	PA SEXT M 5X70MM
4	461.8	10	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
5	172875	2	REFORÇO DIANTEIRO ASSENTO STAND UP
6	172876	2	BUCHA ARTICULAÇÃO 2 STAND UP
7	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	392.1	2	SEPARADOR ALUMINIO RODA DIANT. CAD. MOT.
9	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
10	393.0	4	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
11	19589.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X60MM RT ZB (S)
12	10087.0	4	PA AAT AR 6,3X19MM RI ZB (S/L)
13	2491	2	PA SEXT MA 8.8 8X35MM RT ZB (S/L)
14	10337.3	2	ARRUELA PRESSAO 8MM 2MM ZB
15	172902	2	SEPARADOR 1 FRENTE STAND UP
16	3081	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/4 RT ZB
17	10083	4	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
18	161	4	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
19	192906	1	ATUADOR PHOENIX MECANO MEGAMAT MCZ M73369
20	12406	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
21	394	2	BUCHA SEM CABECA 30MM TECNIL 20MM

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

DIANTEIRA

DES.: garcia


FOLHA 20 DE 22

DATA:


ESCALA: 1:6



REV.:

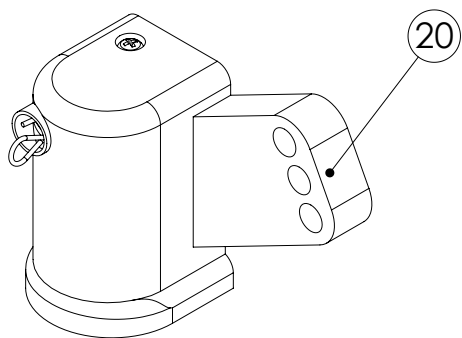

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
20	7965	CONJUNTO MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)
	7960	CONJUNTO MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD. (QUICK RELEASE)
ATENÇÃO		O MANCAL 7960 (ESQUERDO) É USADO NO LADO DIREITO DA CADEIRA, ASSIM COMO O MANCAL 7965 (DIREITO) É USADO NO LADO ESQUERDO DA CADEIRA

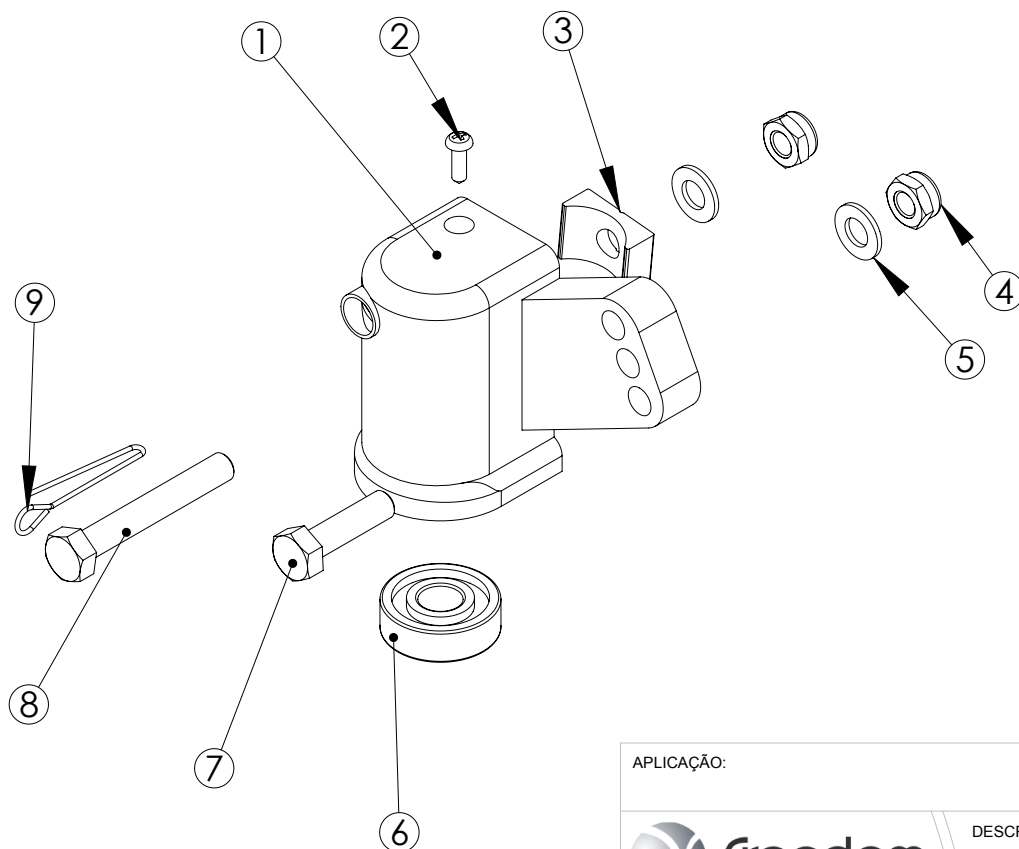

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	809	1	MANCAL DIAN DIR P/ CAD ROD.
	709	1	MANCAL DIAN ESQ P/ CAD ROD.
2	617.3	1	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
3	151197	1	PERFIL MEIA CANA 1" 18mm FURO 8,5mm
4	791.9	2	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
5	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
6	351.4	1	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
7	5573.5	1	PA SEXT MA 8.8 8X30MM RT ZB (S/L)
8	124781	1	PA SEXT MA 8.8 8X55MM ZB (S/L)
9	1531.8	1	MOLA ANZOL 1,25 EIXO DIANTEIRO (S)

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 21 DE 22

ESCALA: 1:2




REV:




DESCRIÇÃO:

CONJUNTO MANCAL DIANTEIRO

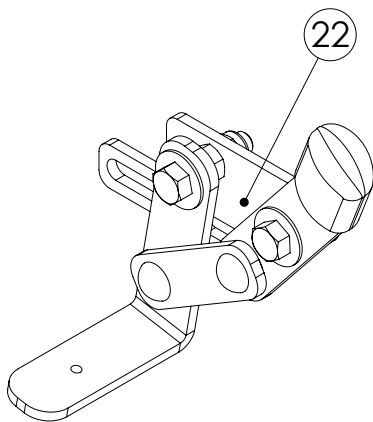

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
22	187838	CONJUNTO FREIO STAND UP LD
	187842	CONJUNTO FREIO STAND UP LE

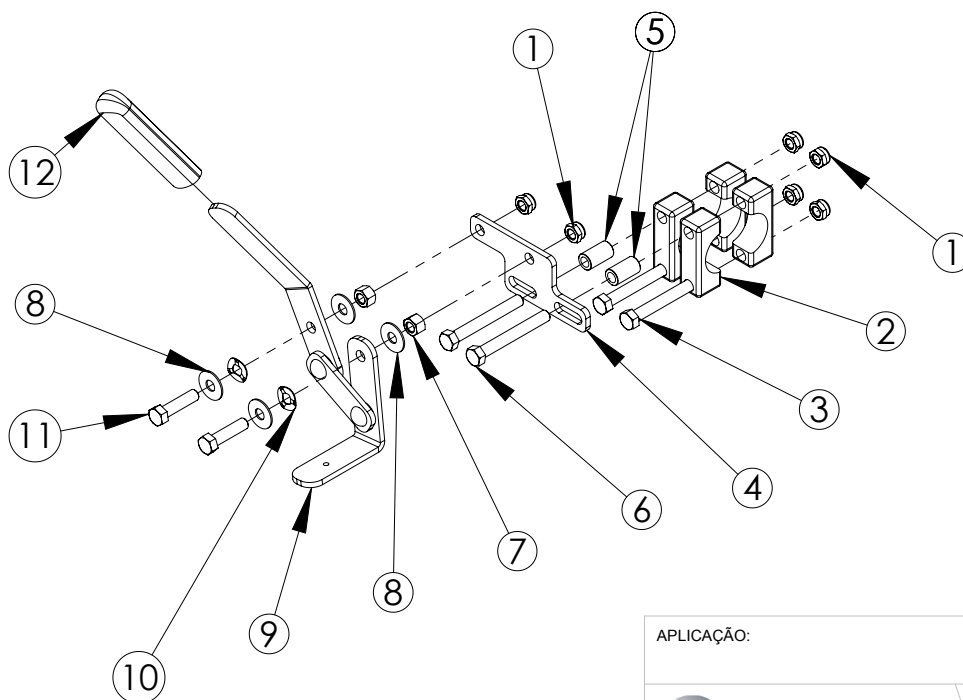

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	491.0	6	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	1701.9	4	ABRACADEIRA 1" CAD.
3	12405.2	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	181140	1	FIXAÇÃO FREIO STAND UP MN13 [1808]
5	182864	2	SEPARADOR FREIO STAND UP
6	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
7	891.5	2	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
8	6087.9	4	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
9	8991	1	FREIO LADO DIREITO
	5121	1	FREIO LADO ESQUERDO
10	24492	2	ARRUELA ONDULADA AOC 6,3X14X0,46
11	12523.7	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1 RT ZB
12	182661	1	LUVA PVC P/CADEIRA DE RODAS PRETO (17,2GR) (S)

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

FREIO

DES.: garcia

FOLHA 22 DE 22

DATA:

ESCALA: 1:4



REV.: