



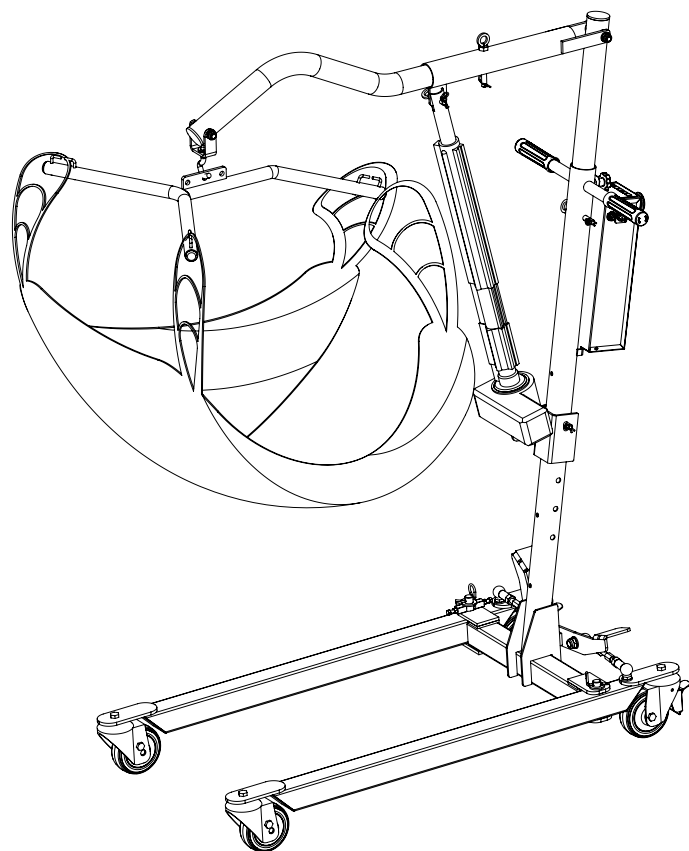

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER

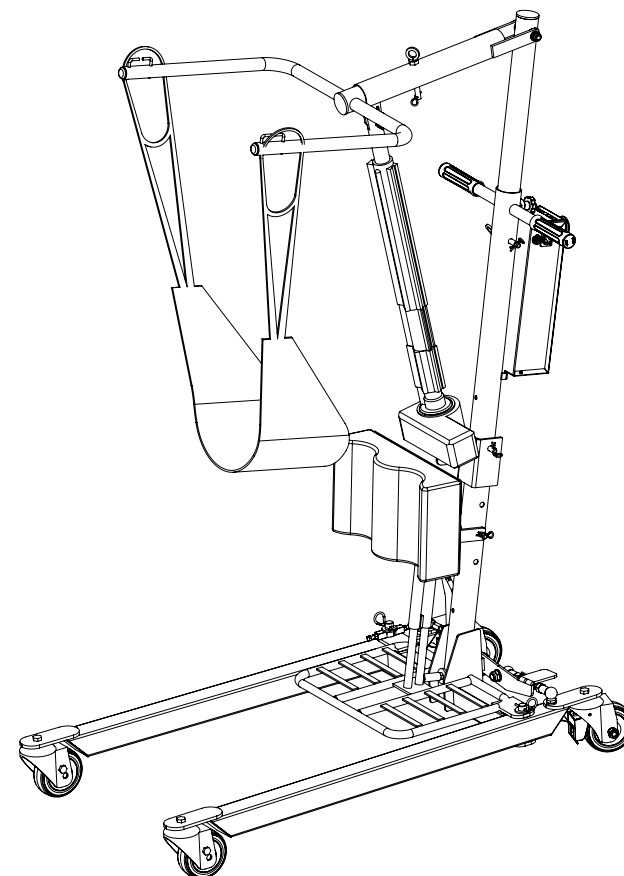

ELEVADOR INDIVIDUAL STAND-UP

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 08/06/2010

FOLHA 1 DE 11

ESCALA: 1:15




DESCRIÇÃO:


ELEVADOR 130KG

REV.:

H

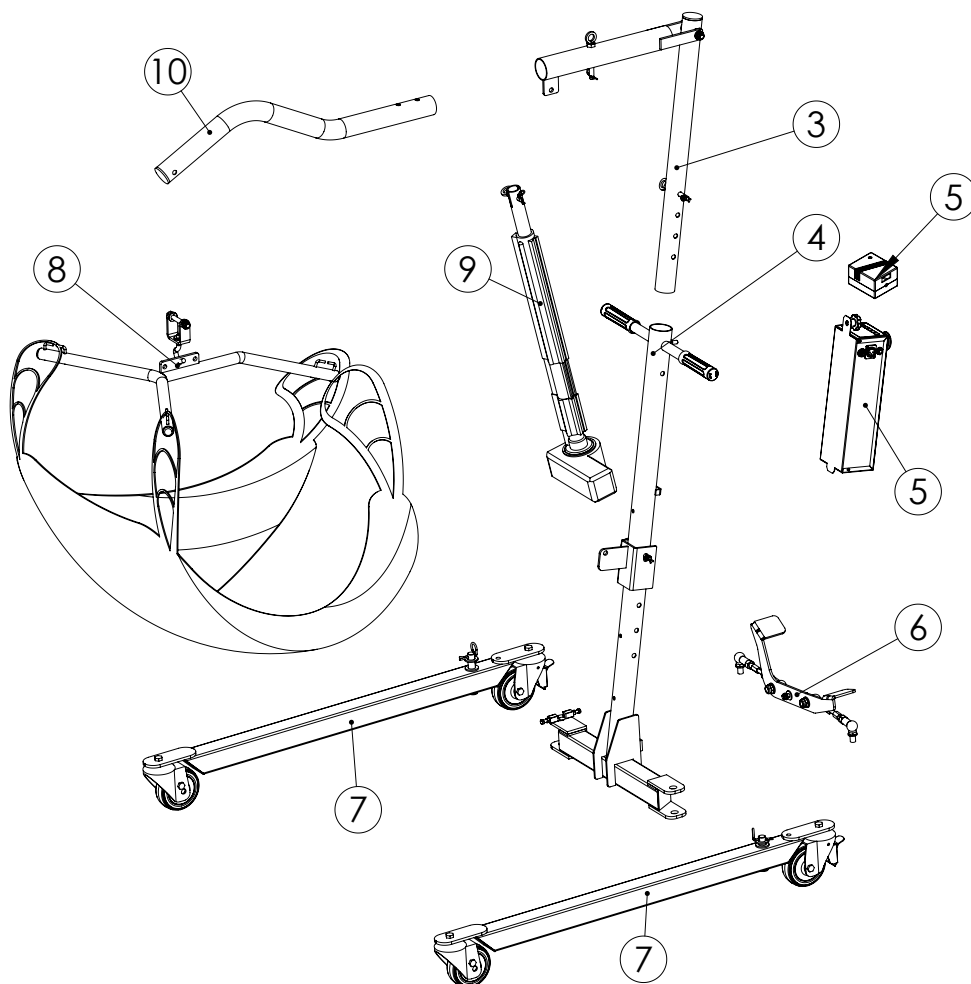

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER

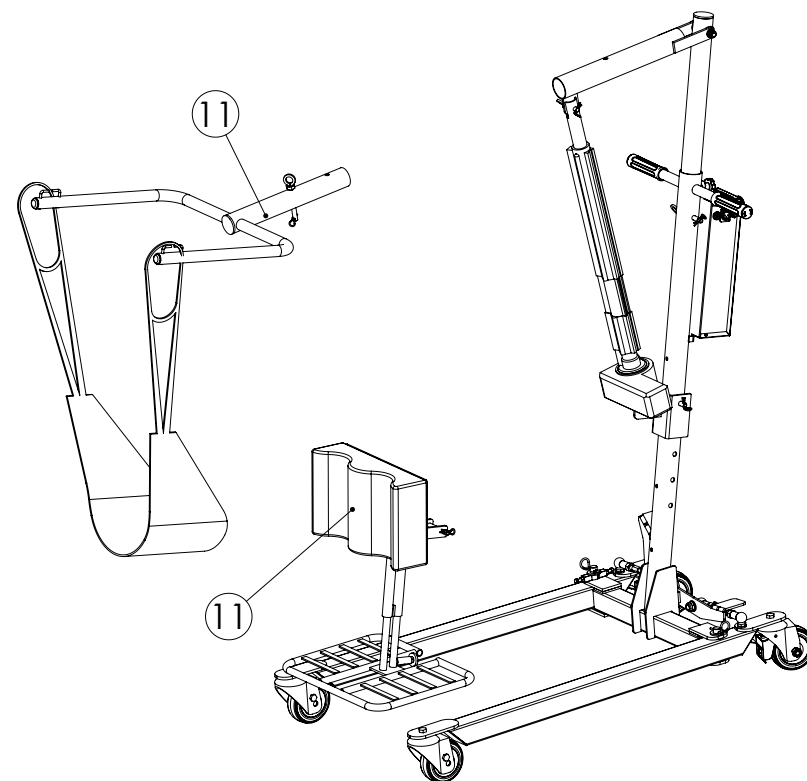

ELEVADOR INDIVIDUAL STAND-UP

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 08/06/2010

FOLHA 2 DE 11

ESCALA: 1:17





DESCRIÇÃO:

ELEVADOR 130KG

REV.:

H

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	187515	CONJUNTO FIXAÇÃO TUBO LANÇA ELEV. 130KG/HOSPITALAR

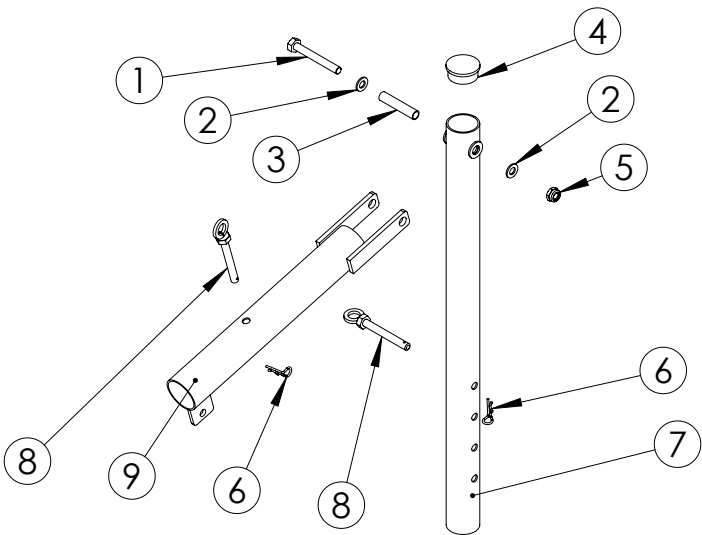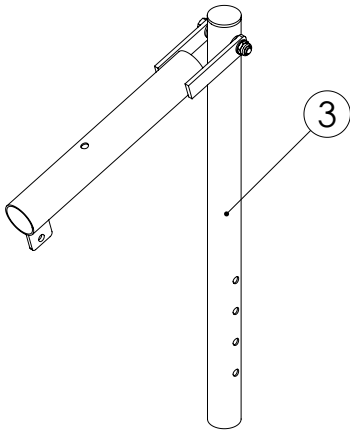

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11183.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X80MM RP ZB
2	161.9	2	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
3	168020	1	BUCHA FIXAÇÃO SUPORTE ELEV. INDIVIDUAL E HOSPITALAR
4	137706	1	TAMPAO LANÇA ELEVADOR 130KG
5	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
6	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
7	137069	1	PROLONGADOR MASTRO ELEV. INDIVIDUAL E HOSPITALAR
8	12129.0	2	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR
9	137212	1	SUPORTE ELEVADOR INDIVIDUAL E HOSPITALAR

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 3 DE 11

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

FIXAÇÃO TUBO LANÇA ELEV.

REV.:

A

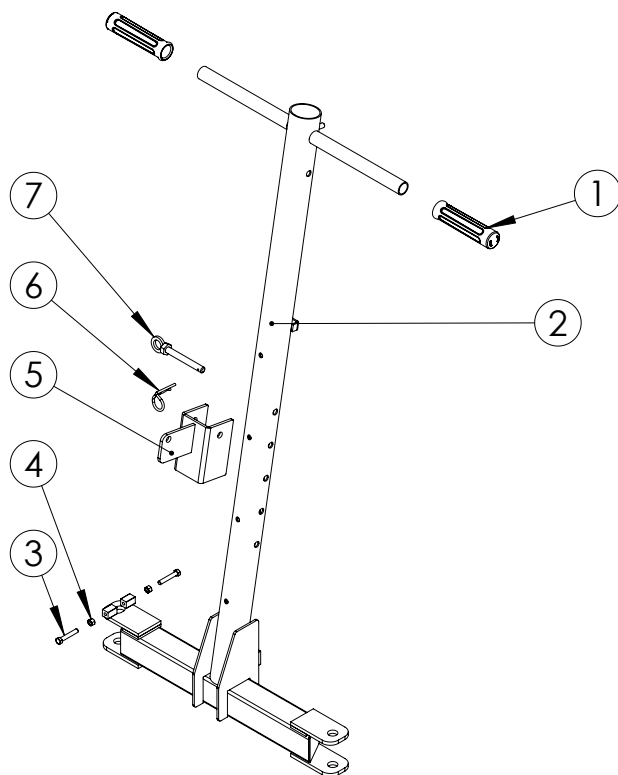

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	231.3	2	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
2	144594	1	MASTRO COM BASE PADRÃO RESIDENCIAL 130KG
3	12426.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT
4	891.5	2	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
5	137709	1	REGULADOR ALTURA ELEV. INDIVIDUAL
6	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
7	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 4 DE 11

ESCALA: 1:12





REV.:



DESCRIÇÃO:

MASTRO

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	9772	1	CARREGADOR ELEVADOR/STAND-UP MN AUTOMATICO

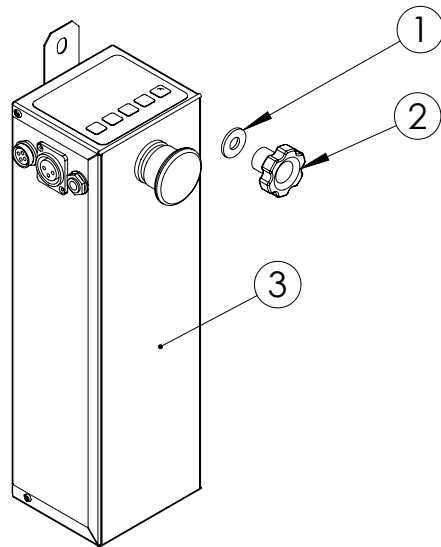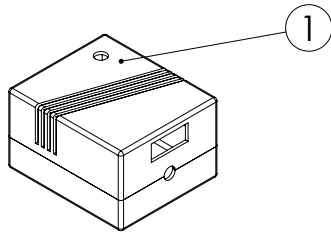

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	461.8	1	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
2	147878	1	MANIPULO TERMOPLASTICO MACHO M8X1,25
3	18906	1	COMANDO GUINCHO CONNECT C/FIO

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 5 DE 11

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

COMANDO / BATERIA ELEVADOR E CARREGADOR

REV.:

E.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	186554	CONJUNTO PEDAL DE ABERTURA PLATAFORMA ELEVADOR 130KG

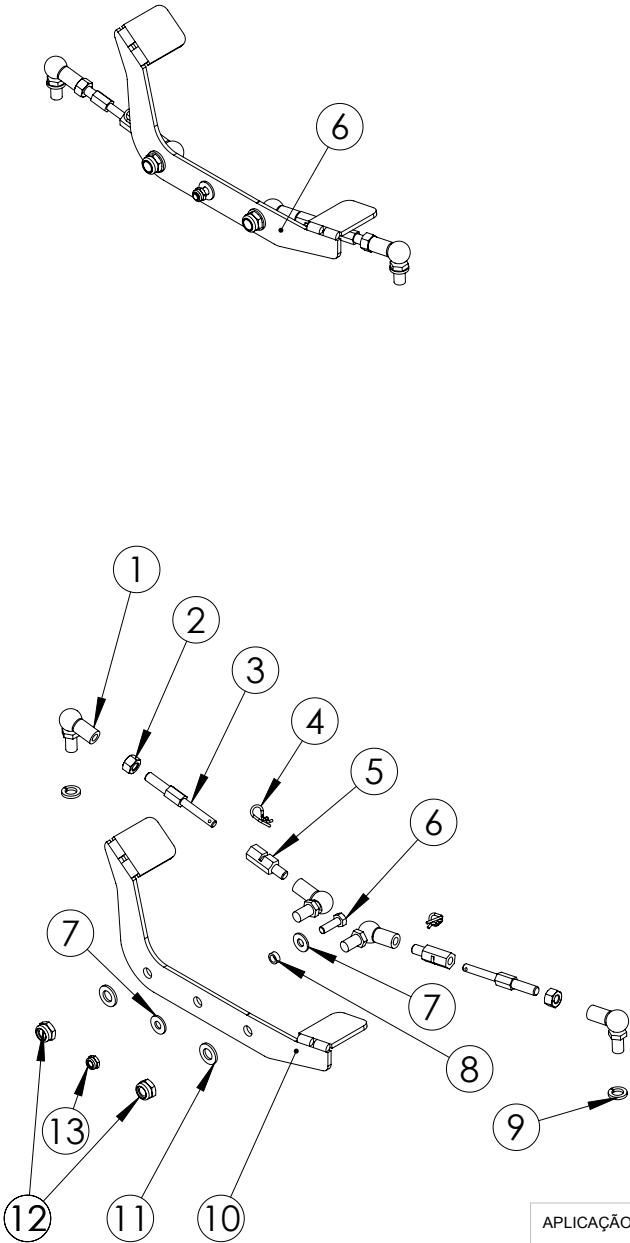

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	173722	4	TERMINAL DE EMBREAGEM 10X12 CAMINHOES MB 1113
2	12270.0	2	PO SEXT MA 10 MM CH 17 ZB - 1,5 MM (S/L)
3	173757	2	VARAO ABERTURA PLATAFORMA INDIVIDUAL
4	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
5	178110	2	REGULADOR ABERTURA INDIVIDUAL/HOSPITALAR USINADO [1801]
6	12534.2	1	PA SEXT MA 8.8 8X25MM RT ZB (S/L)
7	461.8	2	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
8	180527	1	BUCHA DO PEDAL ELEVADOR
9	6148.4	2	ARRUELA PRESSAO 12MM MM ZB
10	170935	1	PEDAL ABERTURA ELEVADOR
11	2751.0	2	ARRUELA LISA 12MM ZB (S) (13X24X2,5)
12	191.0	2	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
13	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 6 DE 11

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

PEDAL DE ABERTURA PLATAFORMA ELEVADOR

REV.:

A.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	187535	CONJUNTO BASE PLATAFORMA ELEVADOR 130KG

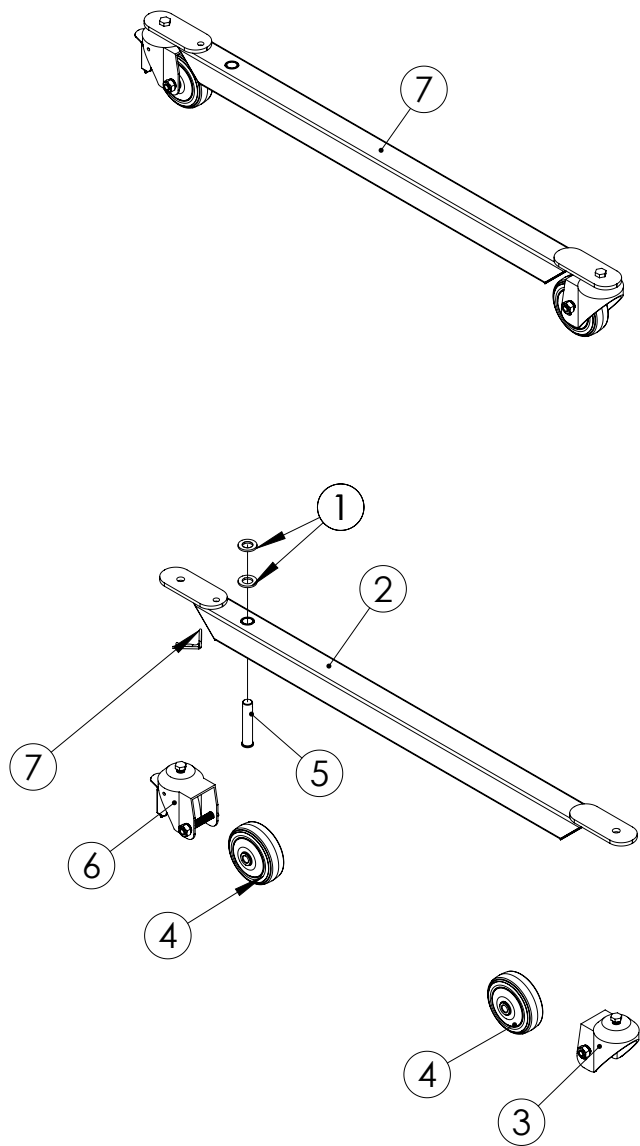

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	8003.9	2	ARRUELA LISA 16MM ZB (L)
2	137629	1	PLATAFORMA ELEVADOR 130KG
3	10894.4	1	GARFO GRR 414 S/RODA C/EIXO (S)
4	13578.0	2	RODA 4-CINZA P/ GARFO DE GUINCHO(R 414 BPKC)
5	137439	1	PINO PLATAFORMA ELEV. INDIVIDUAL LE
	145914	1	PINO PLATAFORMA ELEV. INDIVIDUAL LD
6	10895.2	1	GARFO GRR0A 414 S/RODA C/EIXO (S)
7	33602	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 3,5MM EIXO 5/8POL

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 7 DE 11


ESCALA: 1:12



DESCRIÇÃO:
BASE PLATAFORMA ELEVADOR

REV.:

A.01

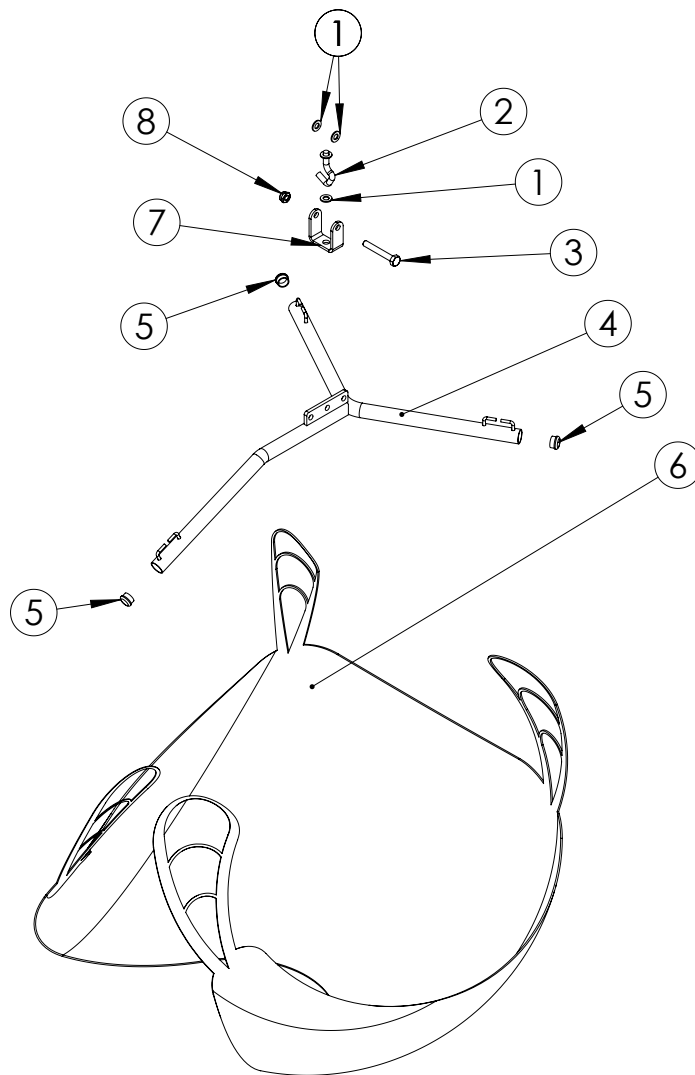

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	161.9	3	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
2	11366.2	1	GANCHEIRA ELEVADOR
3	181.3	1	PA SEXT MA 8.8 10X70MM RP ZB (S/L)
4	11368.9	1	CABIDE ELEVADOR
5	252.6	3	TAMPAO 7/8" (2,48GR) (S)
6	11524	1	SELETE M 130KG
7	11365.4	1	SUPORTE GANCHEIRA
8	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 8 DE 11

ESCALA: 1:13




DESCRIÇÃO:

ELEVADOR TRANSFER

REV.:

C.01

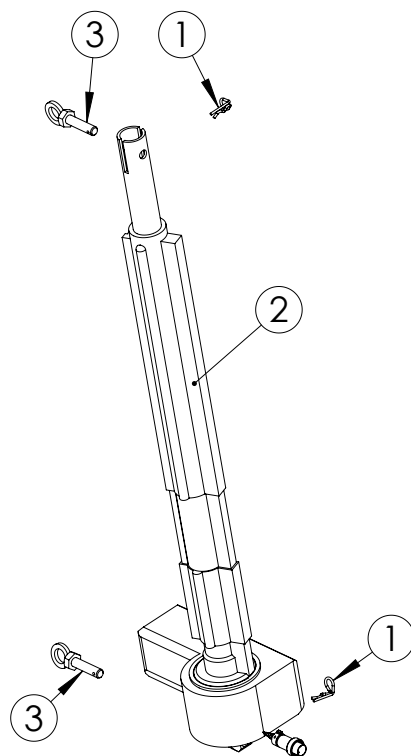

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
2	28082	1	ATUADOR ELEVADOR 130/200KG
3	12130.4	2	PINO 10X40 MM

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 9 DE 11

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

ATUADOR ELEVADOR 130/200KG

REV.:

A

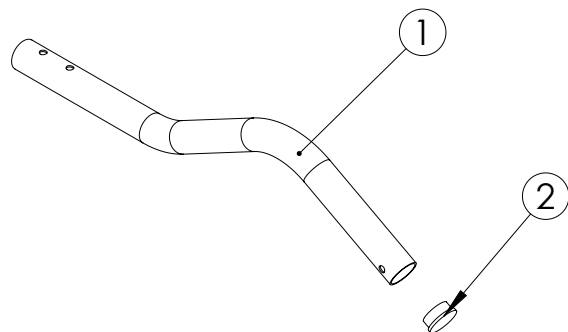

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	137646	1	TUBO LANÇA ELEVADOR 130KG
2	137706	1	TAMPAO LANÇA ELEVADOR 130KG

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 10 DE 11

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:


LANÇA

REV.:

A.01

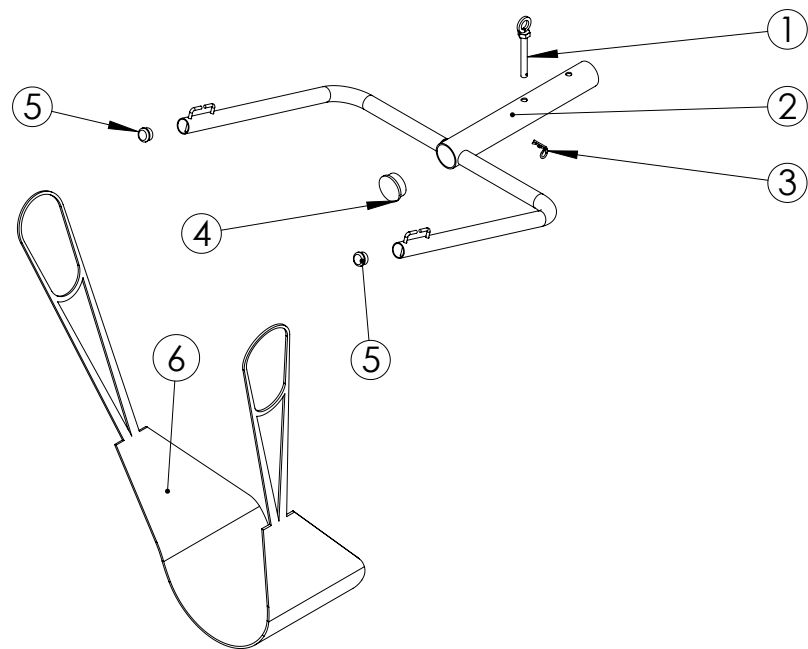

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR
2	11367.0	1	LANCA DUPLA GUINCHO
3	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
4	137706	1	TAMPAO LANÇA ELEVADOR 130KG
5	252.6	2	TAMPAO 7/8" (2,48GR) (S)
6	239	1	COLETE GUINCHO

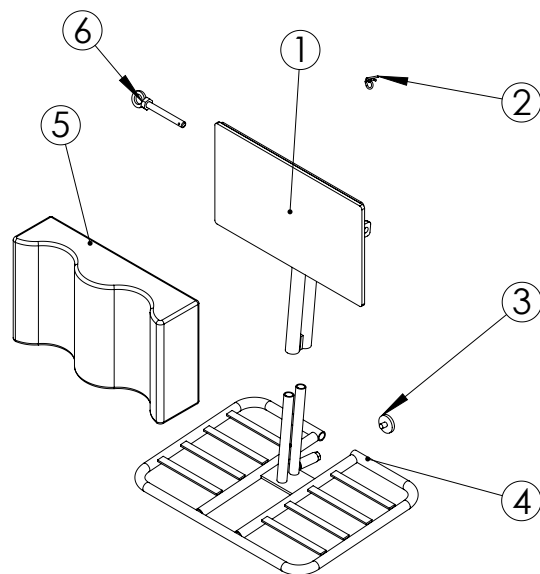

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	188344	1	SUORTE JOELHEIRA GUINCHO C/ EVA
2	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
3	6991.4	1	COXIM MENOR ESCAPAMENTO 8MM (S/L)
4	146035	1	PE GUINCHO BASE QUADRADA
5	28658	1	CONJUNTO ESTOFADO GUINCHO STAND UP
6	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

STAND UP

DES.: garcia

FOLHA 11 DE 11

DATA:

ESCALA: 1:12



REV.: