



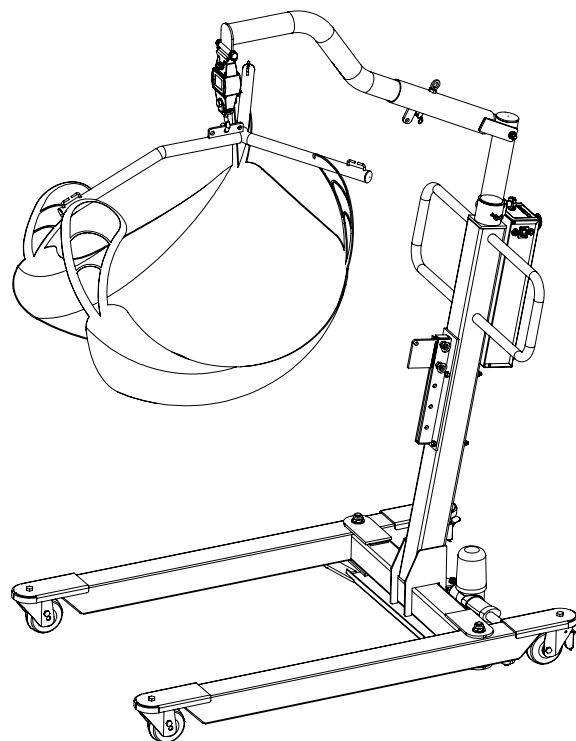

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR PLUS

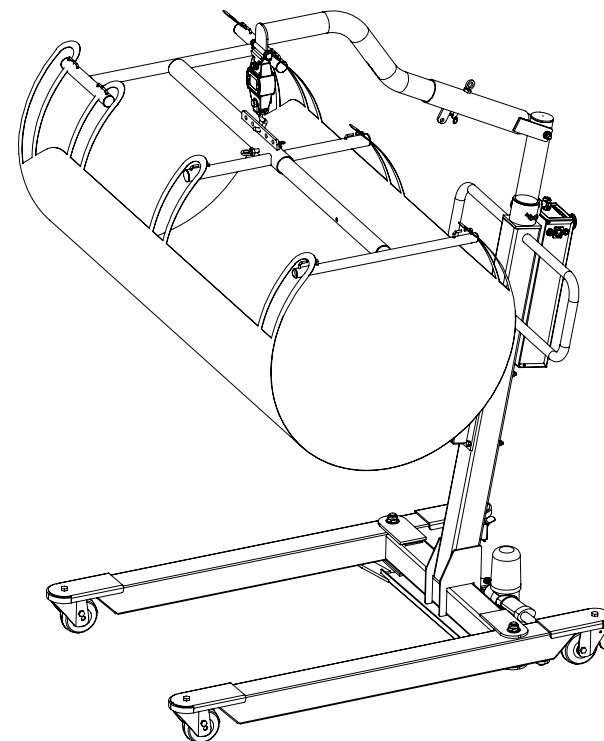

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR PLUS C/ MACA

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 1 DE 14

ESCALA: 1:20




DESCRIÇÃO:


ELEVADOR 300KG

REV.:

F

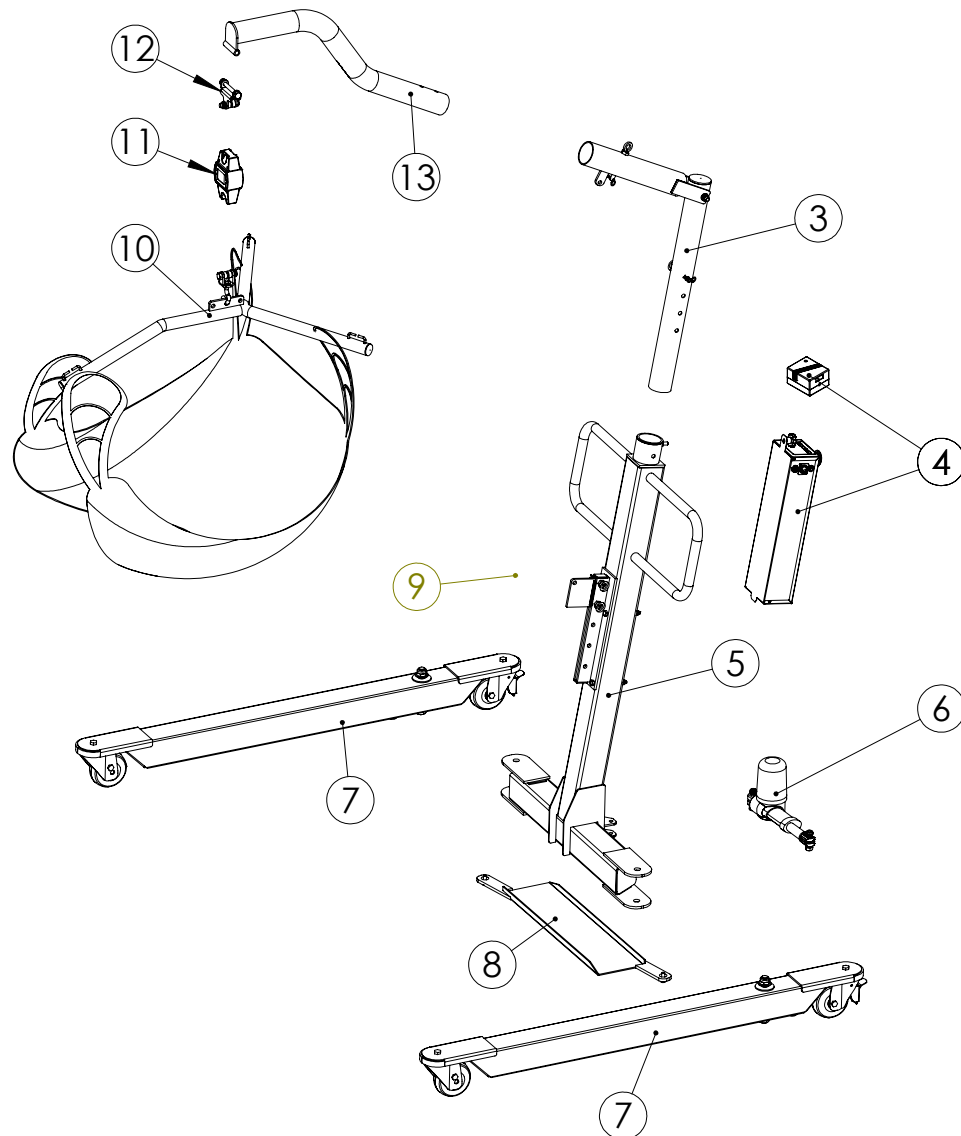

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR PLUS

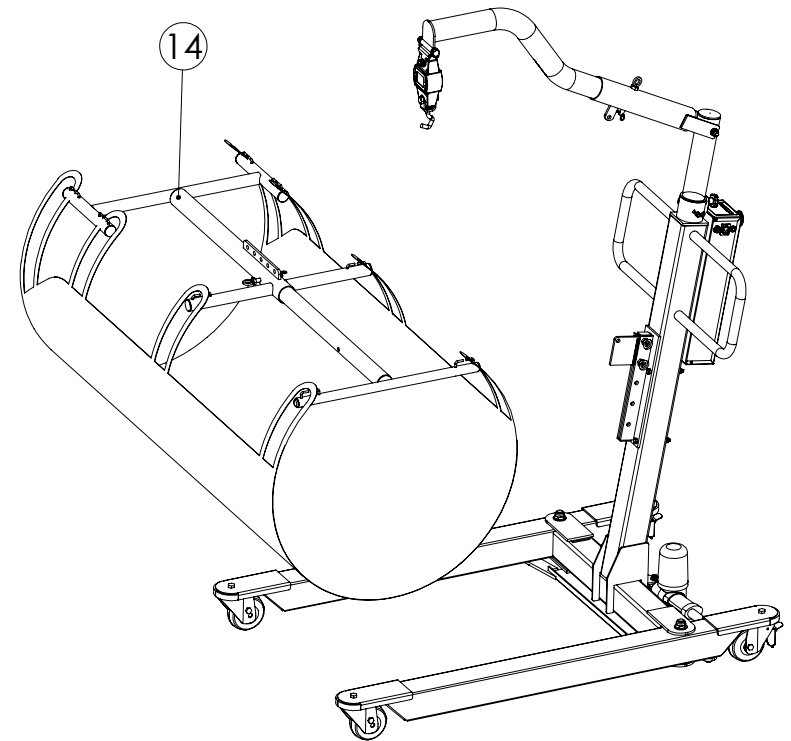

ELEVADOR INDIVIDUAL TRANSFER HOSPITALAR PLUS C/ MACA

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

ELEVADOR 300KG

DES.: JONATHAN M.

FOLHA 2 DE 14



DATA: 29/08/2019

ESCALA: 1:20



REV.:

F

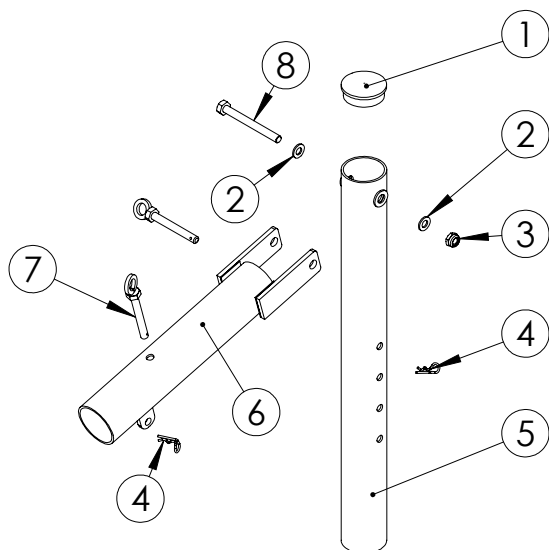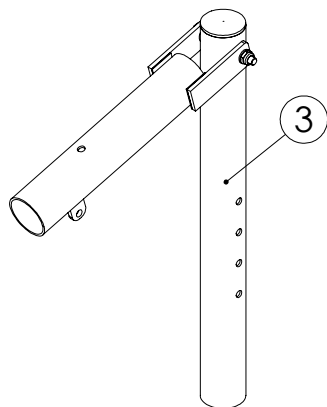

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3	187903	CONJUNTO FIXAÇÃO TUBO LANÇA ELEV. HOSPITALAR PLUS [1908]

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	137550	1	TAMPAO GUINCHO 300Kg
2	161.9	2	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
3	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
4	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
5	137269	1	PROLONGADOR MASTRO ELEV. PLUS
6	137271	1	SUPORE ELEVADOR PLUS
7	12129.0	2	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR GUINCHO
8	11918.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X100MM RP ZB (L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 3 DE 14

ESCALA: 1:10





DESCRIÇÃO:

FIXAÇÃO TUBO LANÇA ELEV. HOSPITALAR PLUS

REV.:

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	9772	1	CARREGADOR ELEVADOR/STAND-UP MN AUTOMATICO

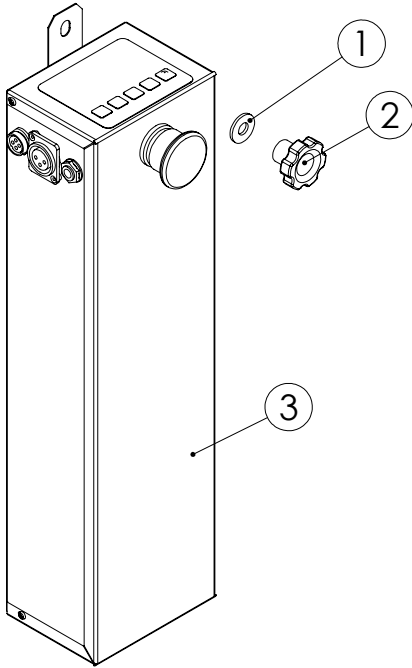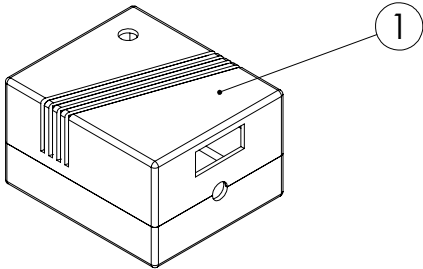

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	461.8	1	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
2	147878	1	MANIPULO TERMOPLASTICO MACHO M8X1,25
3	155248	1	COMANDO / BATERIA ELEV. HOSPITALAR PLUS 7,5A COMP. ELET.

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 4 DE 14

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

COMANDO / BATERIA ELEV. HOSPITALAR PLUS 7,5A
 COMP. ELET.

REV.:

C

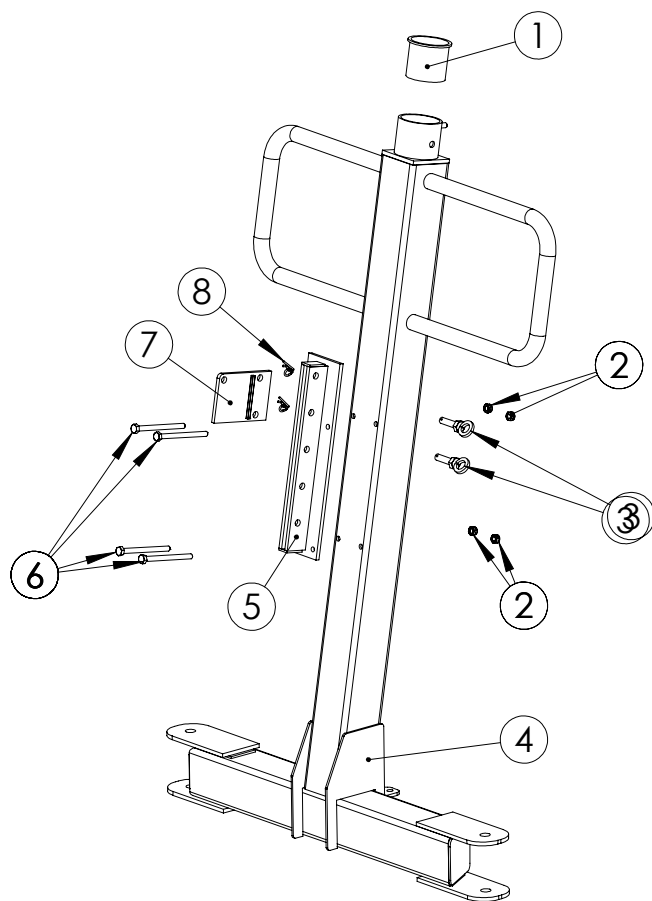

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	171729	1	TUBETE USINADO MASTRO ELEVADOR INDIVIDUAL PLUS
2	791.9	4	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
3	12130.4	2	PINO 10X40 MM
4	144176	1	MASTRO GUINCHO 300KG
5	144173	1	REGUA DE ALTURA GUINCHO 300KG
6	10264.4	4	PA SEXT MA 8.8 8X100MM RP ZB (S/L)
7	144731	1	SUPORE REGULADOR ALTURA LANÇA GUINCHO
8	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 5 DE 14


ESCALA: 1:12



DESCRIÇÃO:

MASTRO ELEV. HOSPITALAR PLUS

REV.:

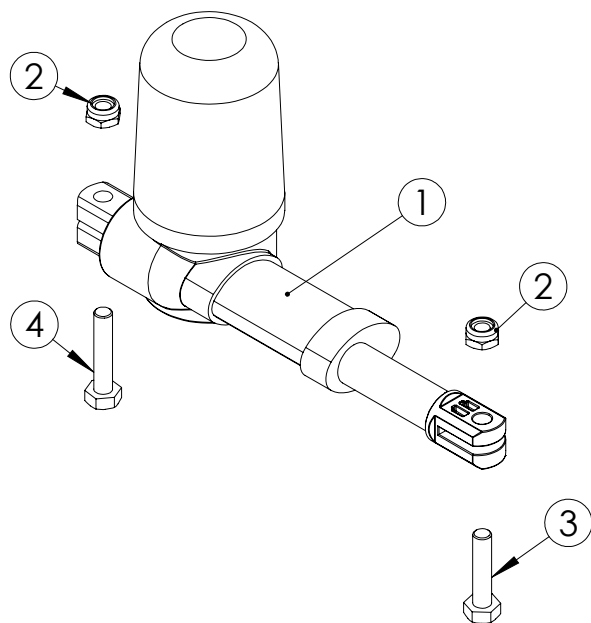

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	18729.1	1	ATUADOR MEGAMAT MCZ 24V 230 50 TF 6KN CINZA
2	91.4	2	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
3	6887.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X45MM RT ZB (S/L)
4	10146.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X50MM RT ZB (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 6 DE 14

ESCALA: 1:4





REV.:



DESCRIÇÃO:

ATUADOR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	187887	CONJUNTO PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR PLUS LD [1908]
	187886	CONJUNTO PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR PLUS LE [1908]

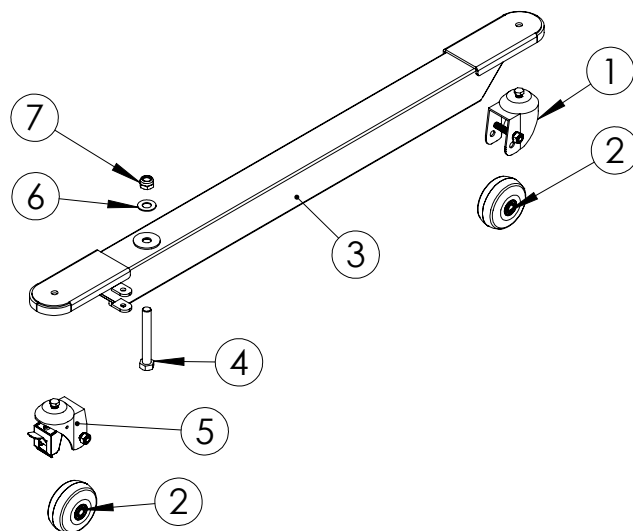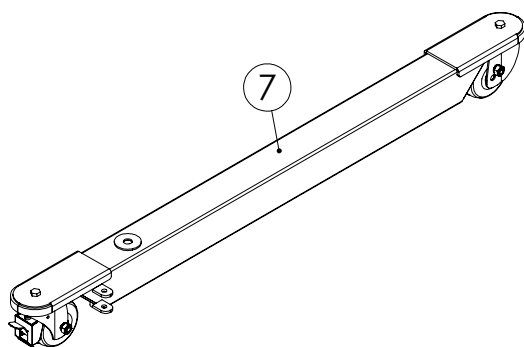

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	10894.4	1	GARFO GRR 414 S/RODA C/EIXO (S)
2	147068	2	RODA MONTADA GUINCHO 300KG
3	137556	1	PLATAFORMA GUINCHO 300KG LD
	137574	1	PLATAFORMA GUINCHO 300KG LE
4	18909.0	1	PA SEXT MA 8.8 16X120 RP ZB
5	10895	1	GARFO GRR0A 414 S/RODA C/EIXO (S)
6	4779.1	1	ARRUELA LISA 3/4 ZB (L) (17X34X2)
7	9956.2	1	PO SEXT NY MB 16 MM (L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 7 DE 14


ESCALA: 1:14



DESCRIÇÃO:

PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR PLUS

REV.:

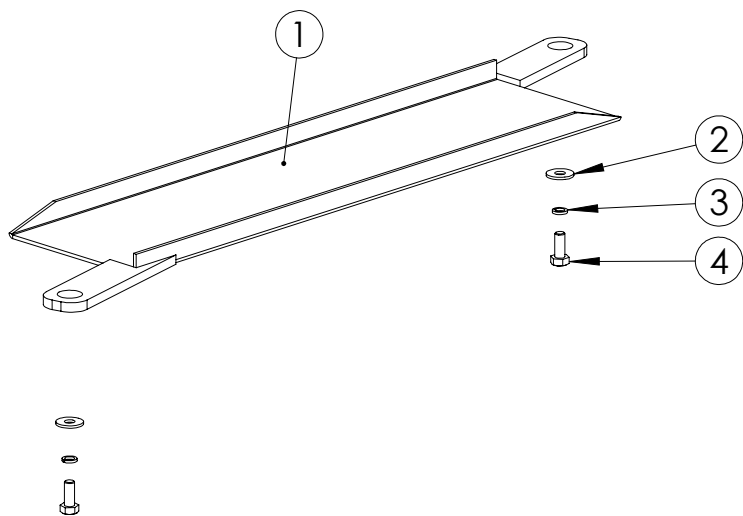

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	143290	1	ABERTURA PLATAFORMA GUINCHO 300KG
2	15191.2	2	ARRUELA CHAPIADORA 5/16 ZB (L)
3	10337.3	2	ARRUELA PRESSAO 8MM 2MM ZB
4	4578.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X20MM RT ZB (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 8 DE 14

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:

ABERTURA PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR PLUS

REV.:

-.01

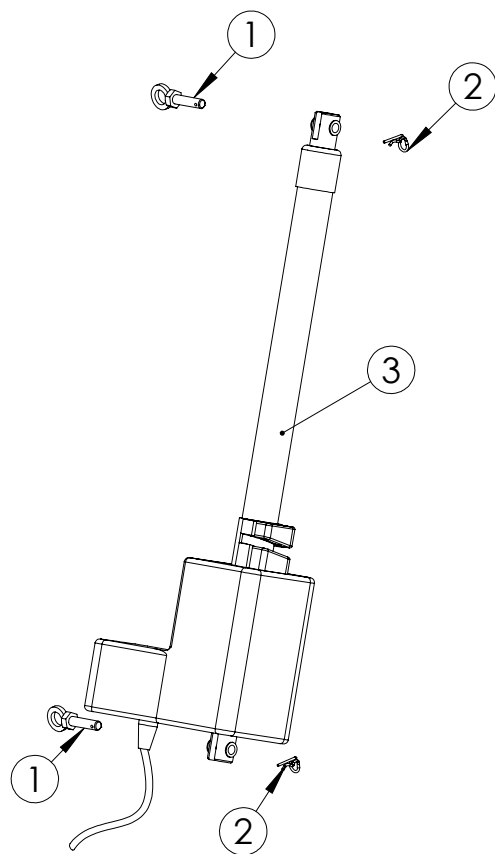

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	12130.4	2	PINO 10X40 MM
2	33565	2	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
3	17578.1	1	ATUADOR LINEAR LA 34 400MM 10000N (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 9 DE 14

ESCALA: 1:8





REV.:



DESCRIÇÃO:
ATUADOR LINEAR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10	186033	CONJUNTO GUINCHO TRANSFER HOSPITALAR PLUS

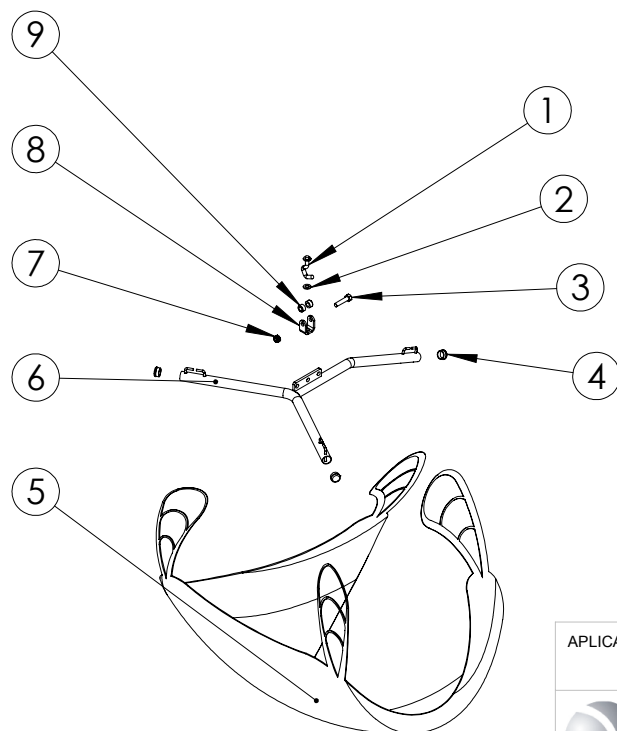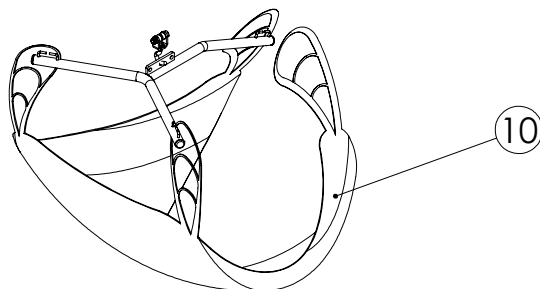

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11366.2	1	GANCHEIRA GUINCHO
2	161.9	1	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
3	6887.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X45MM RT ZB (S/L)
4	147062	3	TAMPÃO "Y" GUINCHO 300KG
5	18788	1	SELETE 300KG
6	137334	1	CABIDE GUINCHO 300KG
7	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
8	137068	1	SUPORE GANCHEIRA INVERTIDO
9	14987.0	2	BUCHA SEM CABECA 10MM TECNIL (GUIDOM SCOOTER)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 10 DE 14

ESCALA: 1:20




DESCRIÇÃO:

GUINCHO TRANSFER HOSPITALAR PLUS

REV.:

D.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	17968.0	DINAMOMETRO ELETRONICO

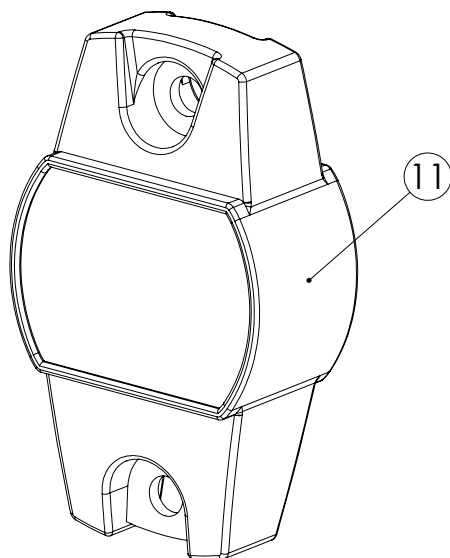

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 11 DE 14

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

DINAMOMETRO ELETRONICO

REV.:

A

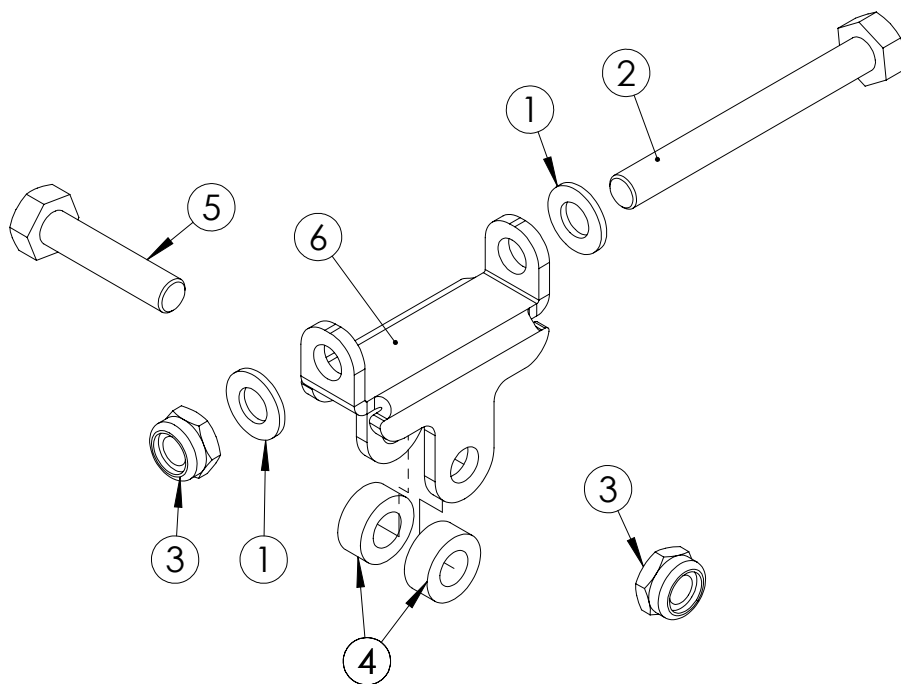

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	161.9	2	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
2	12902.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X90MM RP ZB (S/L)
3	91.4	2	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
4	141412	2	SEPARADOR SUPERIOR DINAMÔMETRO GUINCHO
5	6887.0	1	PA SEXT MA 8.8 10X45MM RT ZB (S/L)
6	144170	1	CRUZETA GUINCHO 300KG

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 12 DE 14

ESCALA: 1:2




DESCRIÇÃO:

SUPORTE FIXAÇÃO BALANÇA ELEV. HOSPITALAR PLUS

REV.:

-.02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14	137273	LANÇA ELEV. TRANSFER HOSPITALAR PLUS

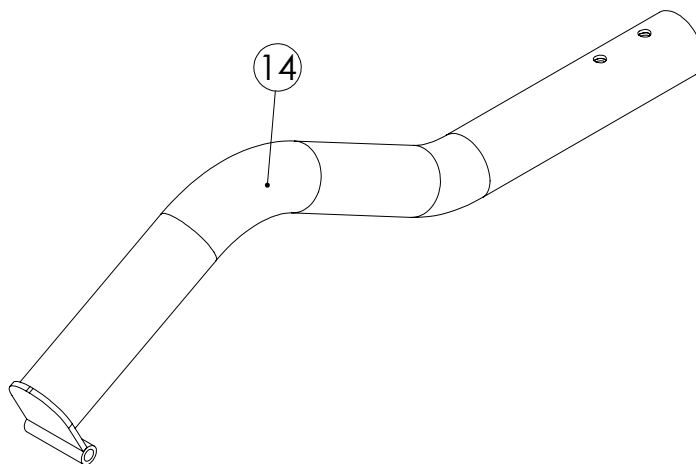

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 29/08/2019

FOLHA 13 DE 14

ESCALA: 1:6




DESCRIÇÃO:


PLATAFORMA ELEV. HOSPITALAR PLUS

REV.:

E

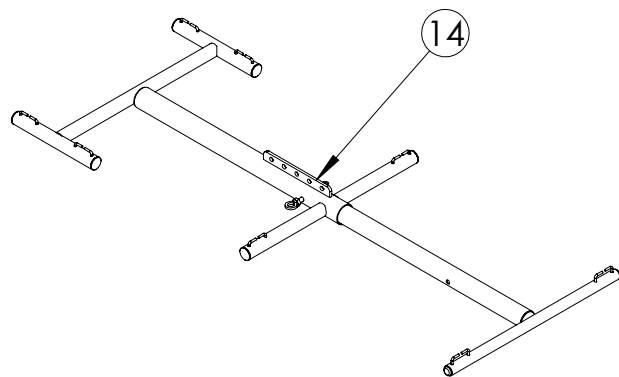

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
14	175179	CONJUNTO SUPORTE MACA ELEVADOR HOSPITALAR

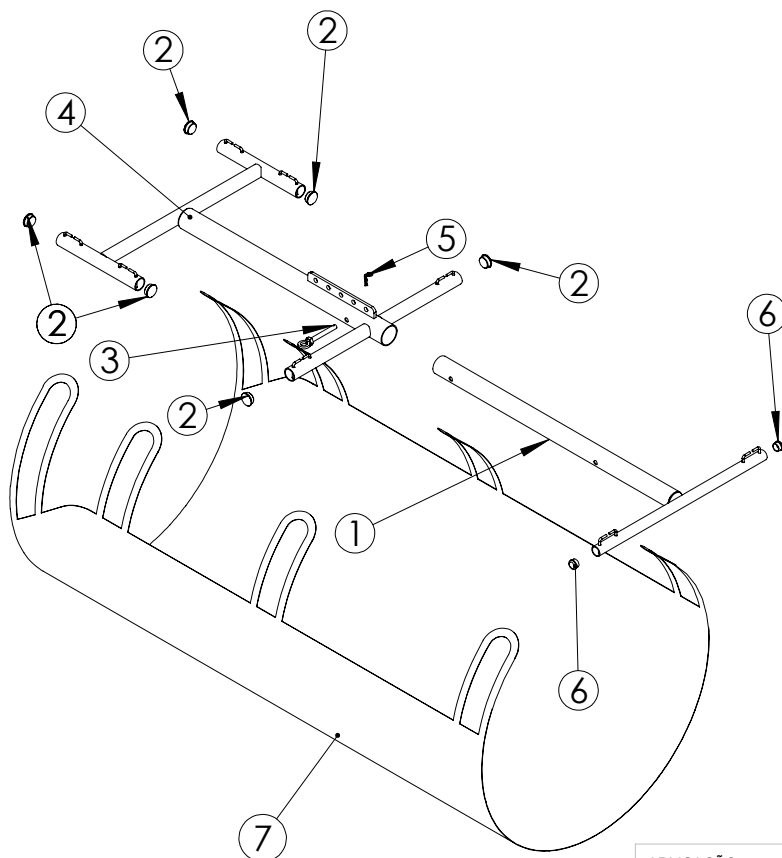

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	175178	1	SUPORTE PERNAS MACA ELEVADOR HOSPITALAR
2	180212	6	TAMPÃO 1"1/4 PAREDE 2,25
3	12129.0	1	PINO LANCA/MASTRO/BASE ATUADOR ELEVADOR
4	175167	1	SUPORTE TRONCO MACA ELEVADOR HOSPITALAR
5	33565	1	GRAMPO R COM PESCOÇO 2,4MM EIXO 3/8POL
6	252.6	2	TAMPAO 7/8" (2,48GR) (S)
7	25202	1	SELETE MACA 300KG
	25204	1	SELETE MACA 300KG C/ENCOSTO CABECA

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 14 DE 14

ESCALA: 1:17



DESCRIÇÃO:

MACA

REV.:

A.03