


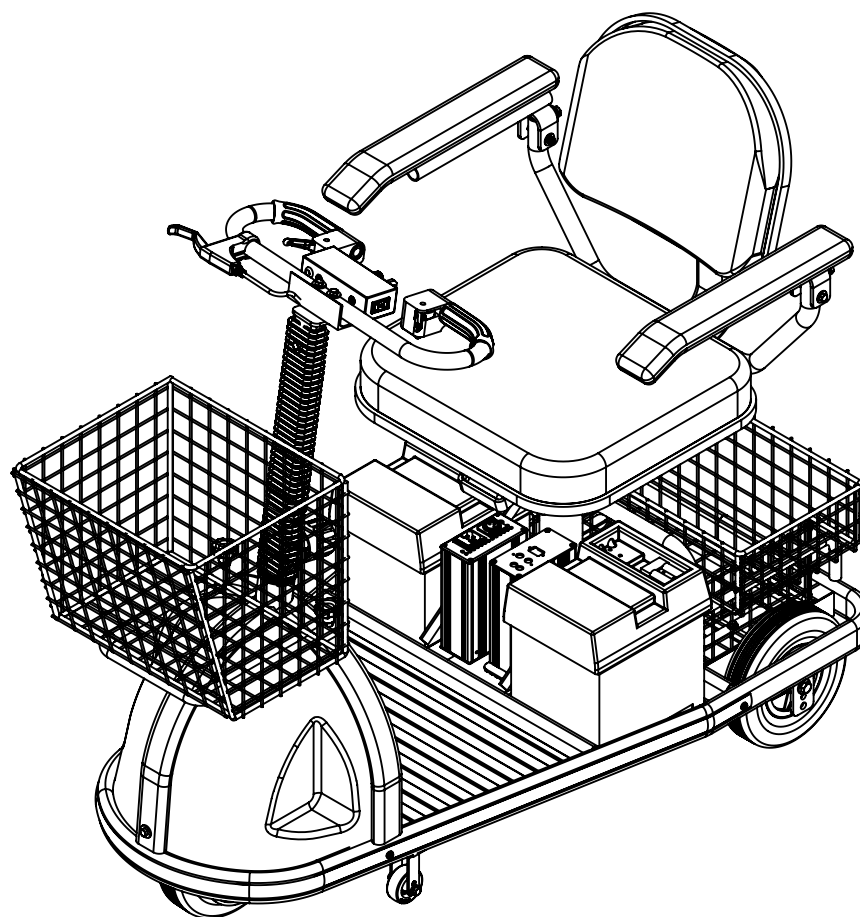

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 1 DE 18

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

SCOOTER 2001

REV.:

B

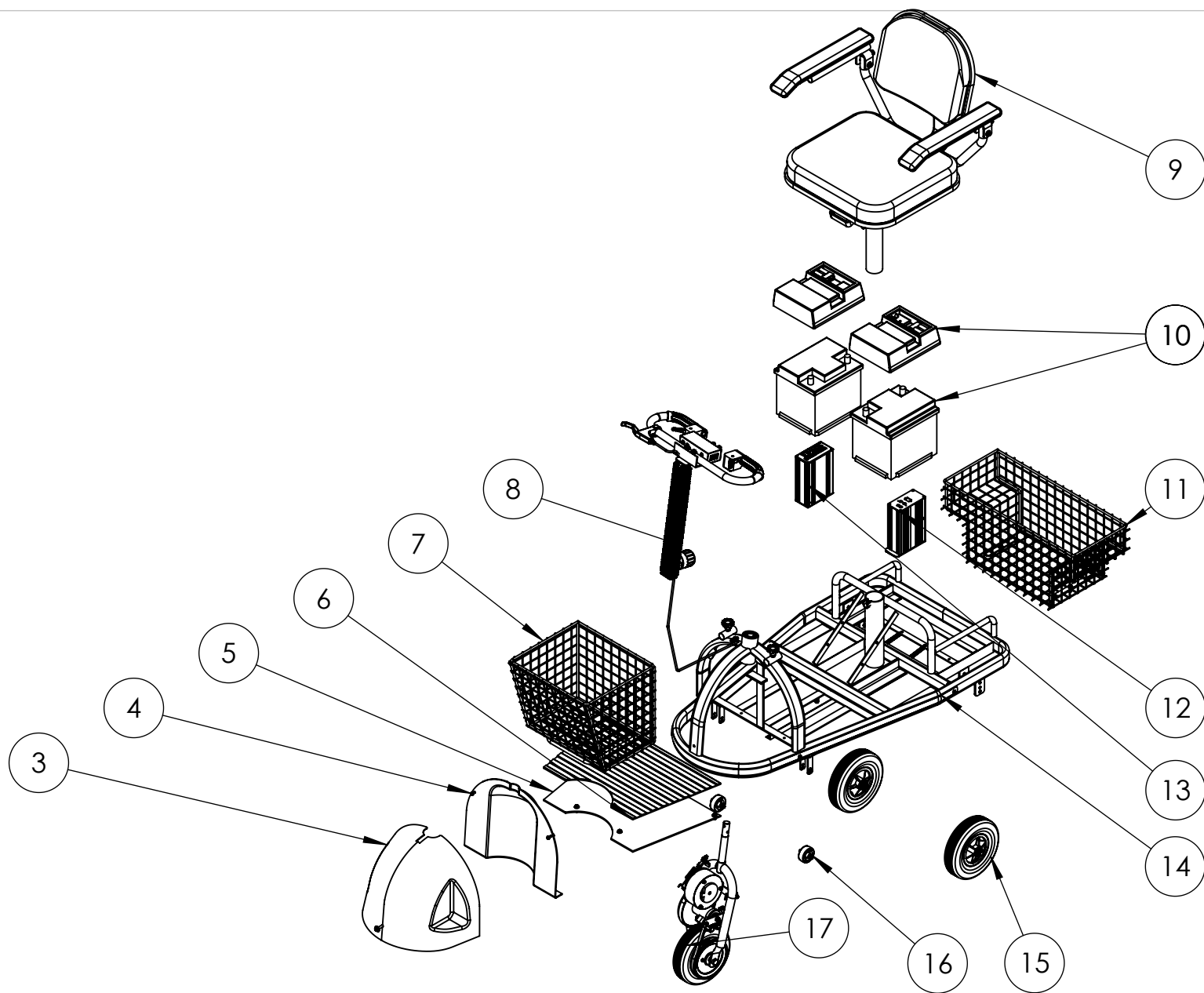

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 2 DE 18

ESCALA: 1:18




DESCRIÇÃO:

SCOOTER 2001

REV.:

B

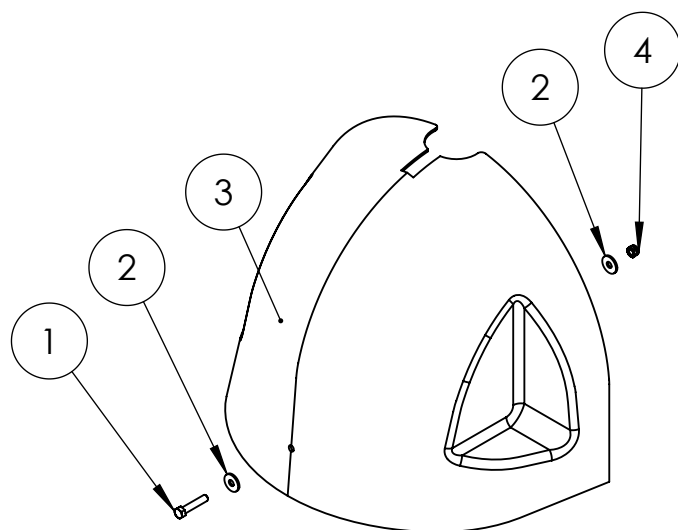

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
2	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
3	10109	1	CARENAGEM DIANTEIRA 2001 AMARELA (S)
	10110	1	CARENAGEM DIANTEIRA 2001 AZUL (S)
	10420	1	CARENAGEM DIANTEIRA 2001 VERMELHA (S)
	10427	1	CARENAGEM DIANTEIRA 2001 VERDE (S)
	10963	1	CARENAGEM DIANTEIRA 2001 PRETA (S)
4	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 3 DE 18


ESCALA: 1:7



REV.:

DESCRIÇÃO:

CARENAGEM DIANTEIRA SCOOTER 2001

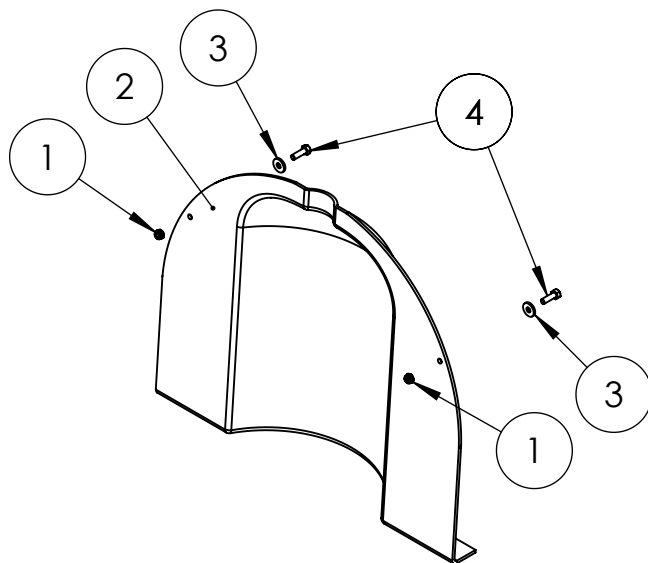

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
2	10449.3	1	DESCANSO DOS PES SCOOTER 2001 (S)
3	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
4	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 4 DE 18


ESCALA: 1:7



DESCRIÇÃO:

DESCANSO DOS PES SCOOTER 2001

REV.:

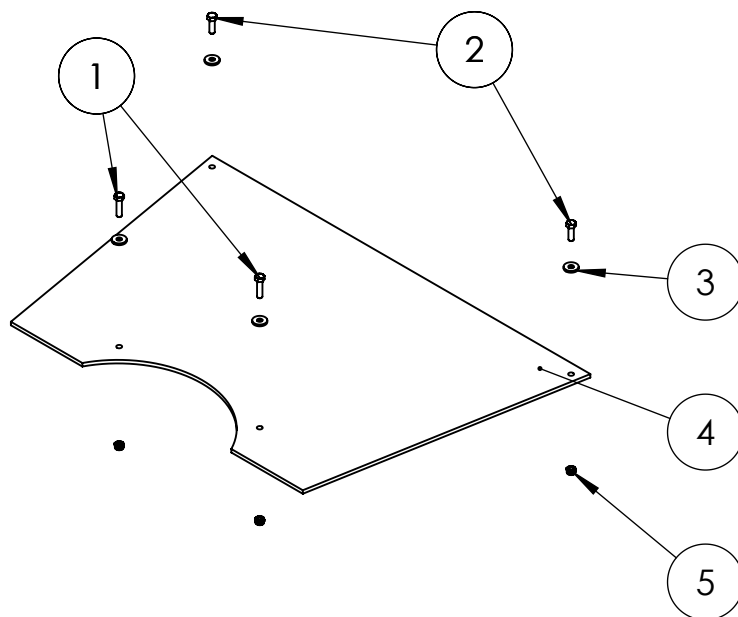

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	10388.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X20MM RT ZB (S)
2	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
3	393.0	4	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
4	1491.5	1	ASSOALHO 2001 (S)
5	691.2	4	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 5 DE 18

ESCALA: 1:7




REV.:



DESCRIÇÃO:

ASSOALHO SCOOTER 2001

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6	10301	TAPETE PARA SCOOTER 2001

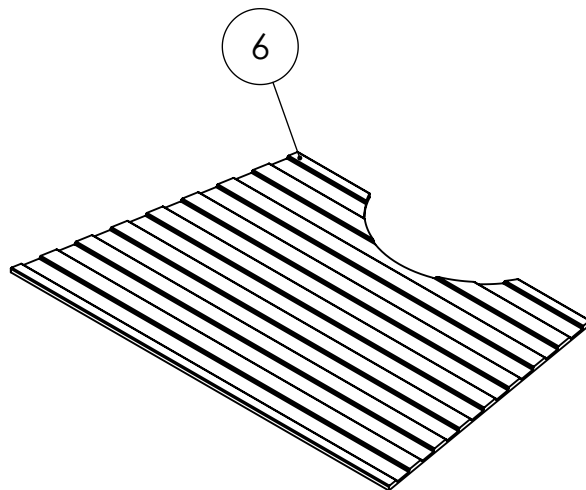

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 6 DE 18

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:

BORRACHA ASSOALHO SCOOTER 2001

REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7	1827	CESTO DIANTEIRO 2001/2002
	5075	CESTO DIANTEIRO SUPER 2001

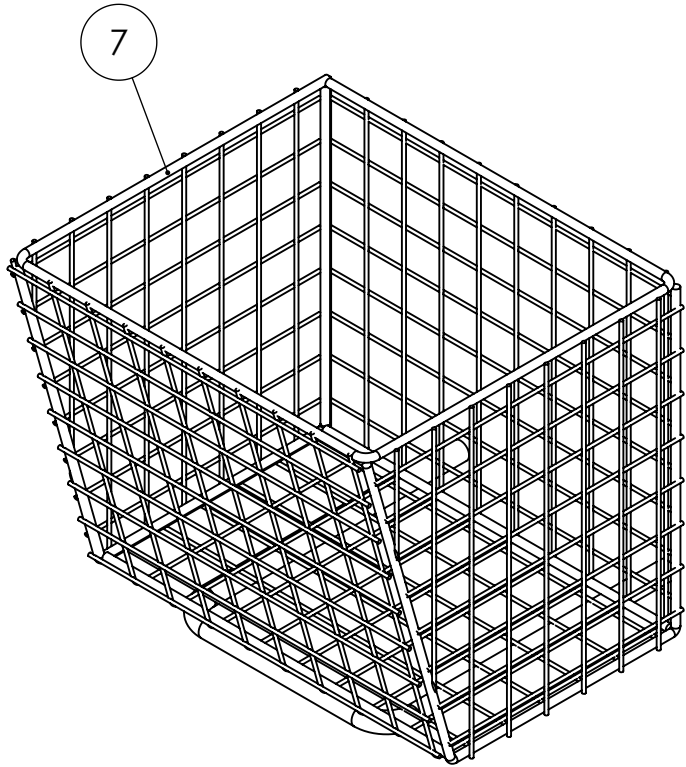

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 7 DE 18

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

CESTO DIANTEIRO SCOOTER 2001

REV.:

B.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
8	106766	CONJUNTO GUIDOM SCOOTER 2001

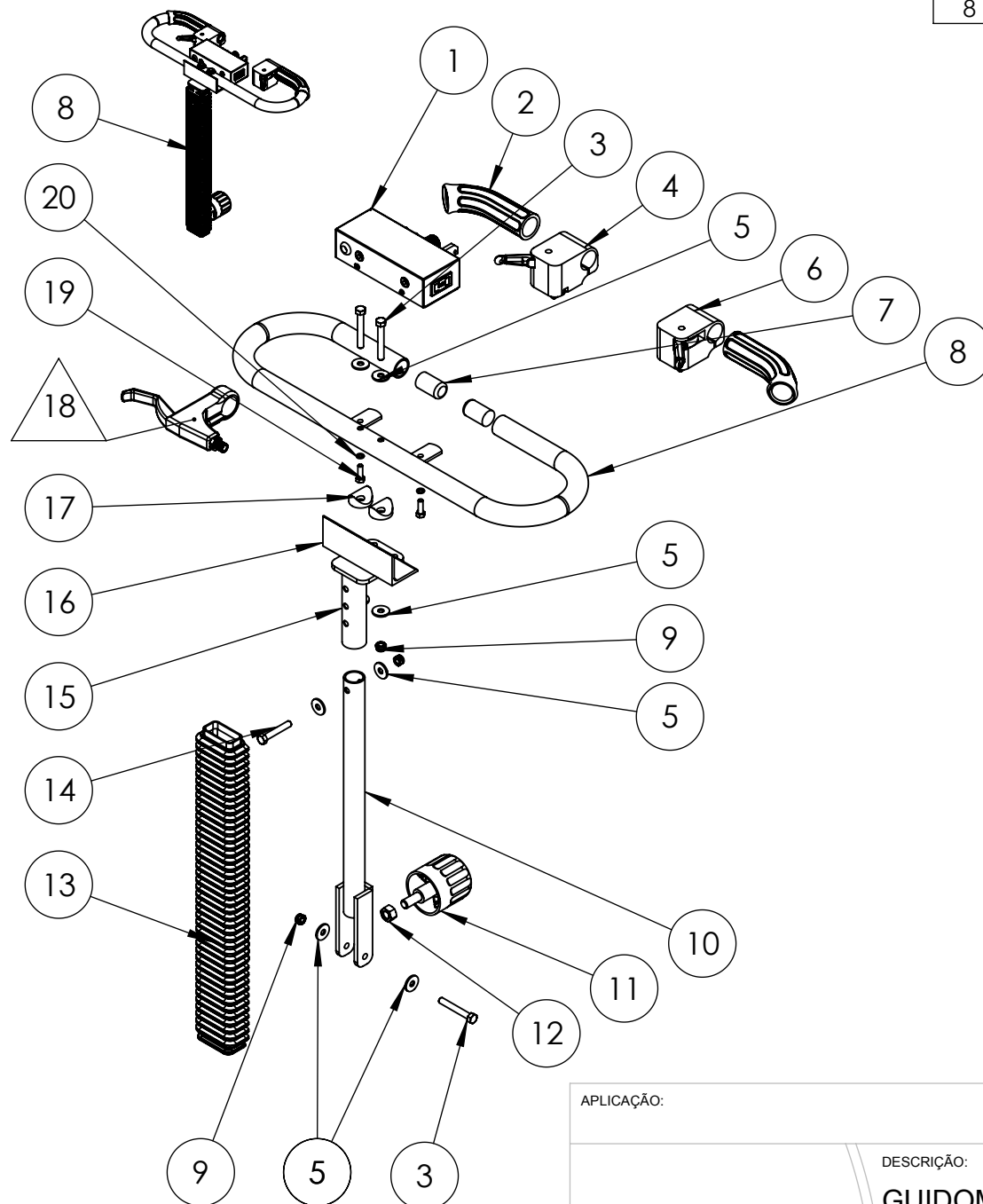

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	4596	1	CAIXA CONTROLE SCOOTER 2001 MICROPROCESSADA
2	231.3	2	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
3	12405.2	3	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
4	5386	1	GATILHO SCOOTER 2001/2002/TORQUE LD DR-HALL
5	10083.8	8	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
6	5387	1	GATILHO SCOOTER 2001/2002/TORQUE LD ESQ-HALL
7	394.8	2	BUCHA SEM CABECA 30MM TECNIL 20MM
8	3931.4	1	GUIDOM 2001/2002
9	491.0	4	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
10	675.0	1	AVANCO DO GUIDOM 2001
11	11322.0	1	MANIPULO 3/8 (SEM PORCA) (S)
12	4431.8	1	PO SEXT UNC 3/8 ZB (S)
13	11132.5	1	SANFONA P/CAD.SECRET PRETA SEM REGULAGEM (S)
14	12426.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT
15	19460.3	1	SUORTE UNIAO DO AVANCO AO GUIDOM 2001/2002
16	12432.0	1	CANTONEIRA FIXACAO REFLETOR
17	10017.0	2	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
18	VER PÁGINA 18		
19	881.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
20	6885.3	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 8 DE 18

ESCALA: 1:7



DESCRIÇÃO:

GUIDOM SCOOTER 2001

REV:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	4	CONJUNTO BANCO SCOOTER

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	12059.6	2	ALMOFADA BRACO SCOOTER
2	2675.1	1	TUBO BRACO 2001/2002 LD
3	11134.1	2	PO SEXT MA 8 MM CH 13 ZB - 1,25 MM (S/L)
4	12534.2	2	PA SEXT MA 8.8 8X25MM RT ZB (S/L)
5	12635.7	1	ENCOSTO SCOOTER 2001/2002
6	11038.8	1	L DO SUPORTE DO ENCOSTO 1004/1003 (S)
7	19459.0	1	ASSENTO SCOOTER 2001/2002 (S)
8	8931.1	1	SUPORTE FIXACAO BANCO/BRACO 2001/2002
9	180719	1	PLATAFORMA ERGO FLEX COM SUP PARA SANFONA MAIOR [1807]
10	6087.9	10	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
11	12409.5	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
12	1775.2	1	SANFONA MENOR
13	4191.2	1	PISTAO A GAS
14	12524.5	3	PA SEXT UNC G.5 1/4X3 1/2 RP
15	491.0	5	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
16	10337.3	2	ARRUELA PRESSAO 8MM 2MM ZB
17	5573.5	1	PA SEXT MA 8.8 8X30MM RT ZB (S/L)
18	775.7	1	SANFONA MAIOR
19	9931.7	1	ABRACADEIRA BANCO 2001/2002
20	3157.7	1	TUBO BRACO 2001/2002 LE
21	561.4	4	ARRUELA PRESSAO 1/4" ZB (S/L) (6,5X11,5X2)
22	11558.4	4	PA AAT CP PH 4,8X19MM ZB
23	2844	2	TAMPAO SUPORTE BANCO BRACO 2001/2002
24	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:
CONJUNTO BANCO SCOOTER 2001/2002

DES.: JONATHAN M.
FOLHA 9 DE 18

DATA:
ESCALA: 1:16

REV.:
B

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
10.1	19794	1	TAMPA BATERIA FREE 38A CONECTOR DIREITA
	19795	1	TAMPA BATERIA FREE 38A CONECTOR ESQUERDA

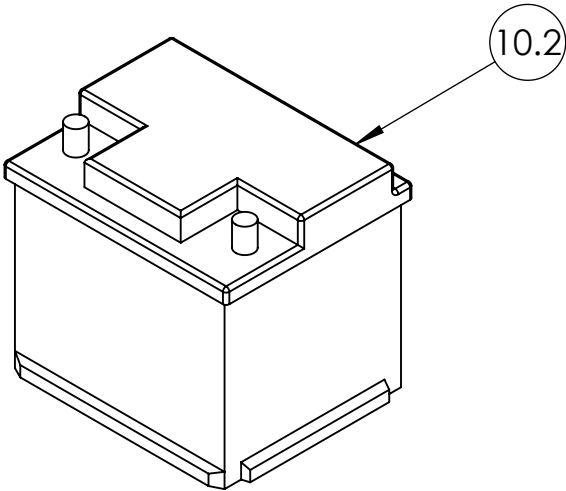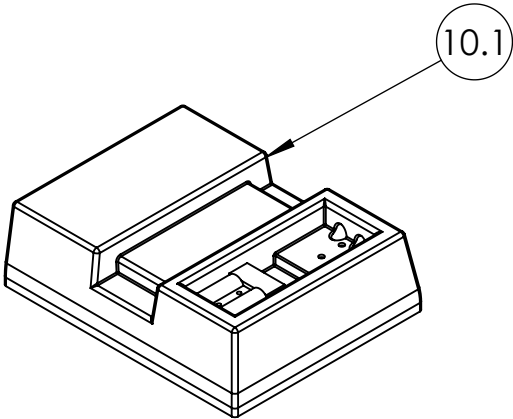

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
10.2	18849	2	KIT FORCA 12-38 12V 38AH P/CAD.RODA

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 21/06/2010

FOLHA 10 DE 18

ESCALA: 1:5




REV.:

B



DESCRIÇÃO:
BATERIA

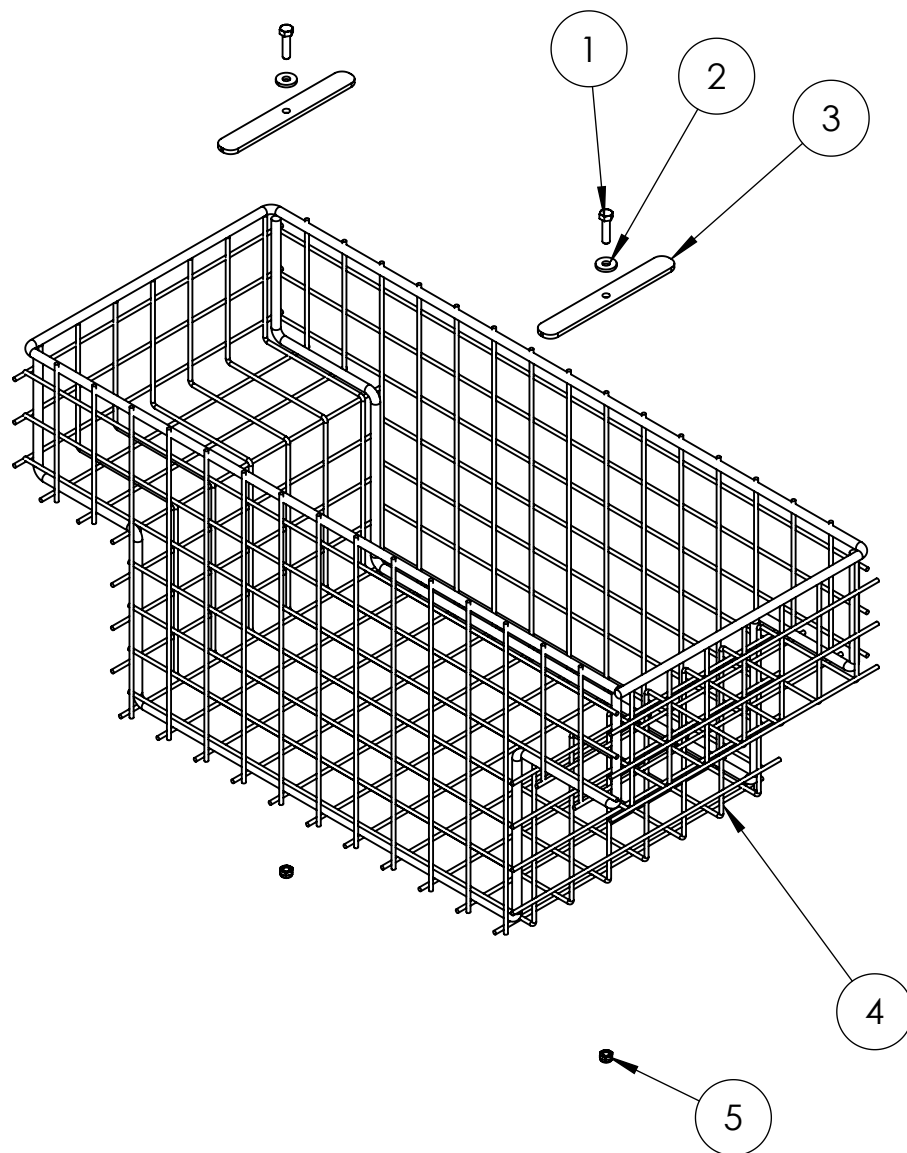

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	10388.8	2	PA SEXT MA 8.8 5X20MM RT ZB (S)
2	393.0	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
3	7375.0	2	FIXACAO CESTO 2001 TRASEIRO
4	6061.5	1	CESTO TRASEIRO 2001
5	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 11 DE 18

ESCALA: 1:5




REV.:



DESCRIÇÃO:

CESTO TRASEIRO SCOOTER 2001

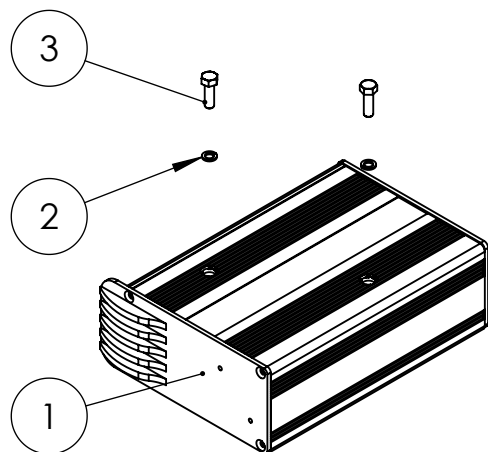

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	9926	1	DRIVE "2001 MICROPROCESSADO"
2	6885	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
3	881	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 12 DE 18

ESCALA: 1:4




REV.:



DESCRIÇÃO:

DRIVE SCOOTER 2001

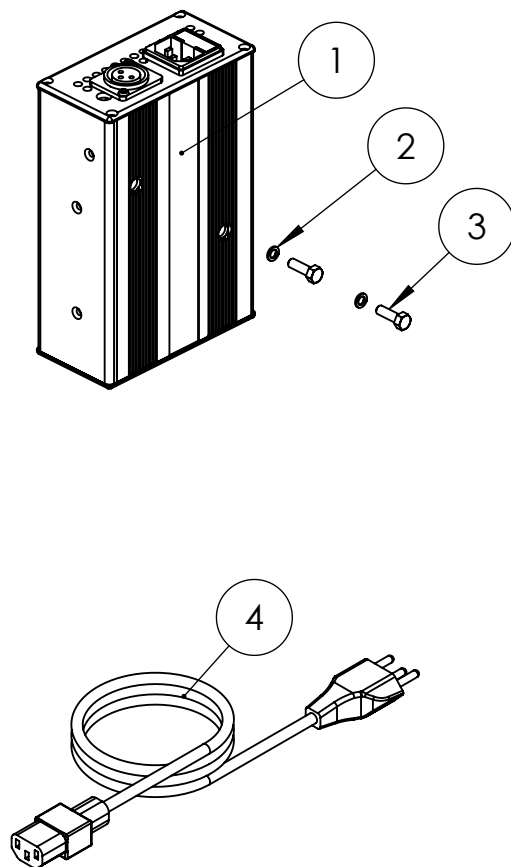

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	2171	1	CARREGADOR SCOOTER 2001 SEM CABO
2	6885	2	ARRUELA PRESSAO 5MM ZB (S) (5X9X1)
3	881	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
4	10275	1	CABO TRIPOLAR FORCA P/MICRO 1,0M(S)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 13 DE 18

ESCALA: 1:4




REV.:



DESCRIÇÃO:

CARREGADOR SCOOTER 2001

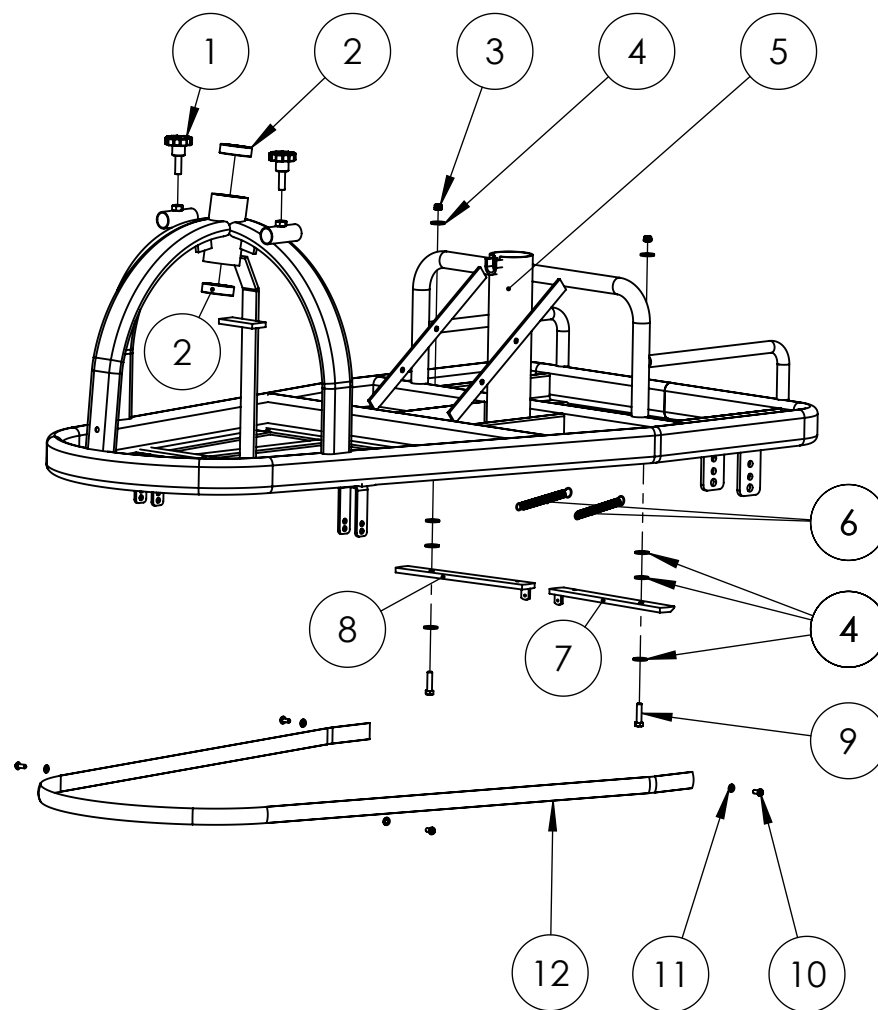

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	1220	2	MANIPULO TERMOPLASTICO MACHO (MTM-3522-M8X25)(S/L)
2	39.6	2	ROLAMENTO 6004 2RS 1LINHA
3	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	10083.8	8	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
5	1931.3	1	CHASSIS 2001
6	3605.6	2	MOLA TRACAO 1,25 X 10 X 66,3 PATINETE (L)
7	395.6	1	PRANCHETA DO FREIO 2001 LE
8	2842.8	1	PRANCHETA DO FREIO 2001 LD
9	12523.7	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1 RT ZB
10	22524	4	PA AAT CP PH 4,8X13MM ZB
11	261	4	ARRUELA LISA 5MM ZB(5,3X10X1)(S)
12	187389	1	PERFIL PVC AUTO ADESIVO SCOOTER 2001

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 14 DE 18

ESCALA: 1:10





DESCRIÇÃO:

CHASSIS SCOOTER 2001

REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
15	106795	CONJUNTO RODA 8 TRASEIRA MACICA PRETA SCOOTER 2001

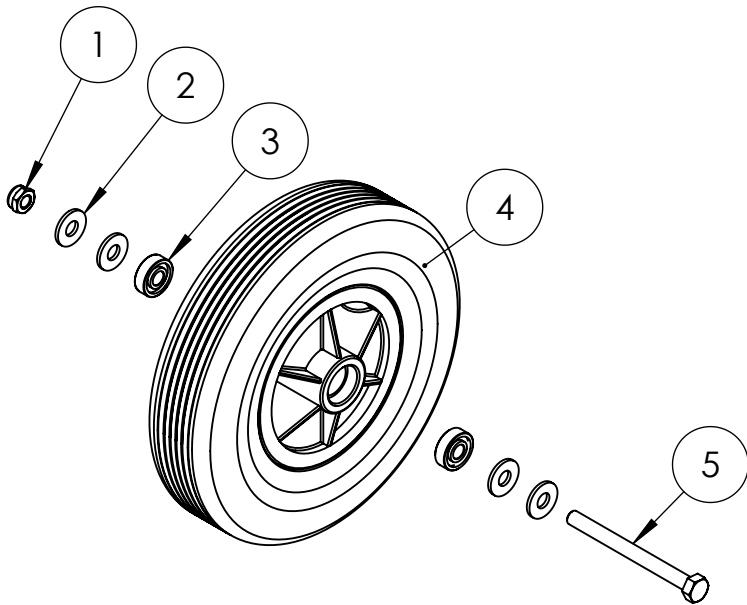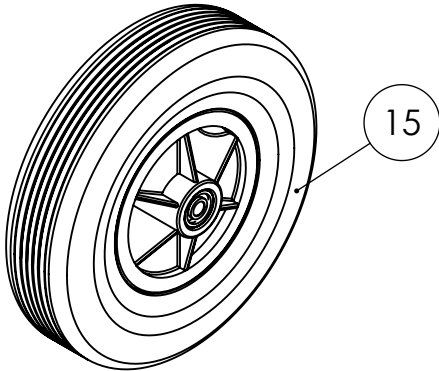

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
2	461.8	4	ARRUELA LISA 5/16" ZB(281 PC-KG)(S) (9X21X2)
3	251	2	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
4	10139	1	MONT. RODA TRAS. SCOOTER 2001
5	781.1	1	PA SEXT MA 8.8 8X90MM RP ZB (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 15 DE 18

ESCALA: 1:4




REV.:



DESCRIÇÃO:

RODA TRASEIRA SCOOTER 2001

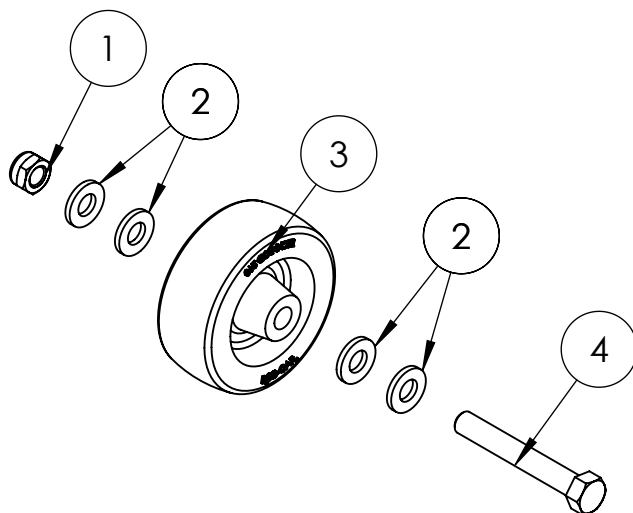

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	491.0	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
2	15442.3	4	ARRUELA LISA 6MM ZB (S/L)
3	133920	1	RODA ROD CAR-TECNI ROD 210(2`)(S)
4	12405.2	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 16 DE 18

ESCALA: 1:2




REV.:



DESCRIÇÃO:

RODA APOIO SCOOTER 2001

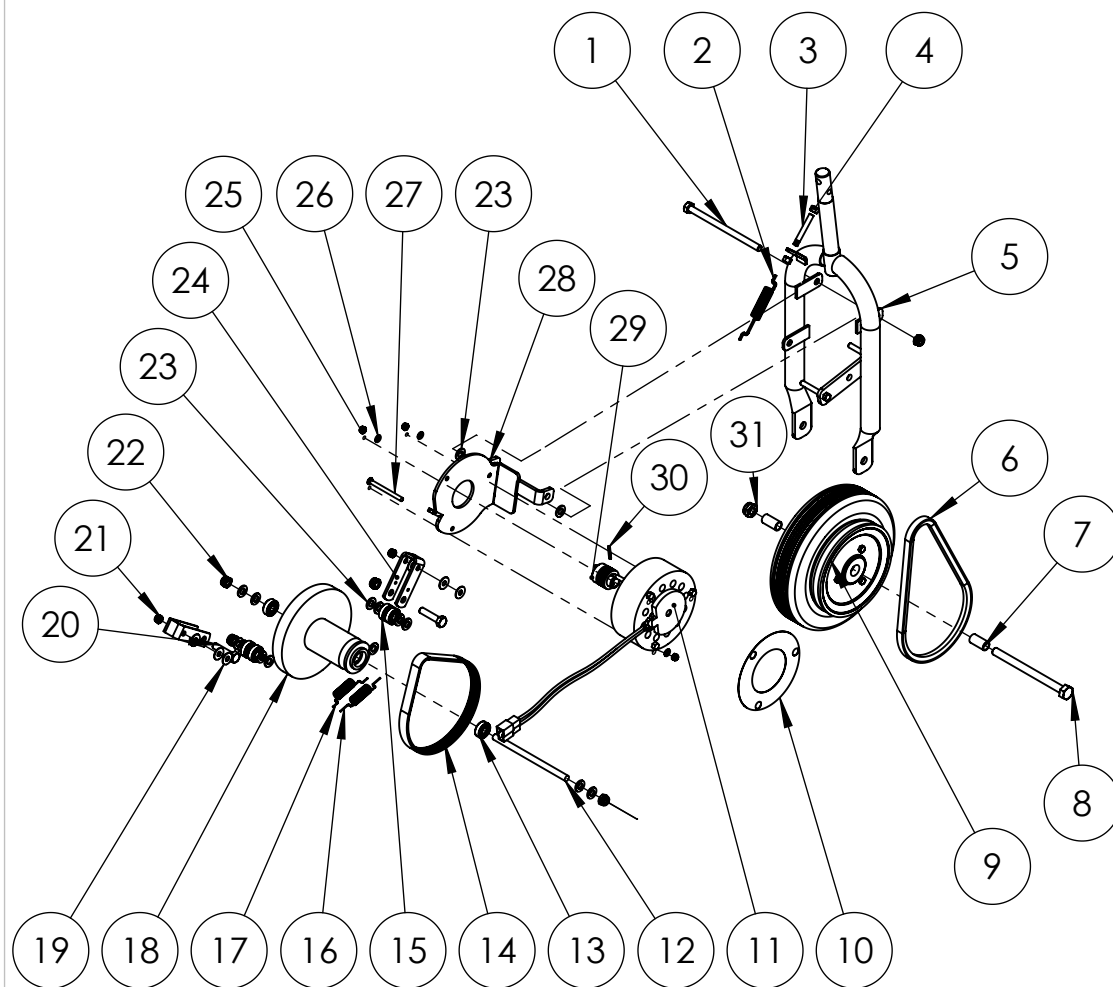

ITEM	COGIDO	QTD	DESCRIÇÃO
1	470.7	1	PA SEXT MA 8.8 8X130MM RP ZB (S/L)
2	531.2	1	MOLA SUSPENSÃO/MOTORIZAÇÃO 2,5X14X15X100 (S)
3	135190	1	PINO ESTICADOR CORREIA MOT 2013
4	891.5	2	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
5	275.5	1	GARFO 2001
6	8161	1	CORREIA AUTOMOTIVA P.OURO (7234) (S)
7	885.0	2	SEPARADORA DE RODA DIANTEIRA EXTERNA 2001UN
8	10089.7	1	PA SEXT MA 8.8 10X130MM RP ZB (S/L)
9	54065.0	1	RODA MACICA DIAN.8 PRETA 2001 C/POLIA
10	24115	1	ETIQUETA ANTI RUÍDO MOTOR CPH
11	21648	1	MOTOR FREE 24 CPH
12	3551.1	1	EIXO POLIA/MOTOR 2001
13	10298.9	2	ROLAMENTO 608 DDU NSK 1 LINHA (S)
14	10072.2	1	CORREIA MICRO V 180J6 (S)
15	251.8	4	ROLAMENTO 608 ZZ 2LINHA (S)
16	1670.5	1	MOLA ES 001 (S)
17	1672.1	1	MOLA ES 002 (S)
18	11070.1	1	POLIA DE FERRO 130MM 2001 (MOTORIZAÇÃO)
19	6087.9	6	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
20	2491.0	2	PA SEXT MA 8.8 8X35MM RT ZB (S/L)
21	491.0	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
22	791.9	5	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
23	10507.4	15	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
24	6785.7	2	ESTICADOR CORREIA 2001
25	691.2	3	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
26	261.0	3	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
27	18713	1	PA MAQ CH PH 5X60MM 5.8 RT ZB
28	175159	1	SUPORTE FIXAÇÃO CPH SCOOTER 2001 [1811]
29	164169	1	PINHÃO MICRO V 27MM C/PINOS MOD. 2016
30	23972	1	PINO ESPIRAL 3X20(S)
31	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0

APLICAÇÃO:

DES.: LUCAS VIEGAS

DATA:

FOLHA 17 DE 18

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

MOTORIZAÇÃO GARFO SCOOTER 2001

REV.:

F

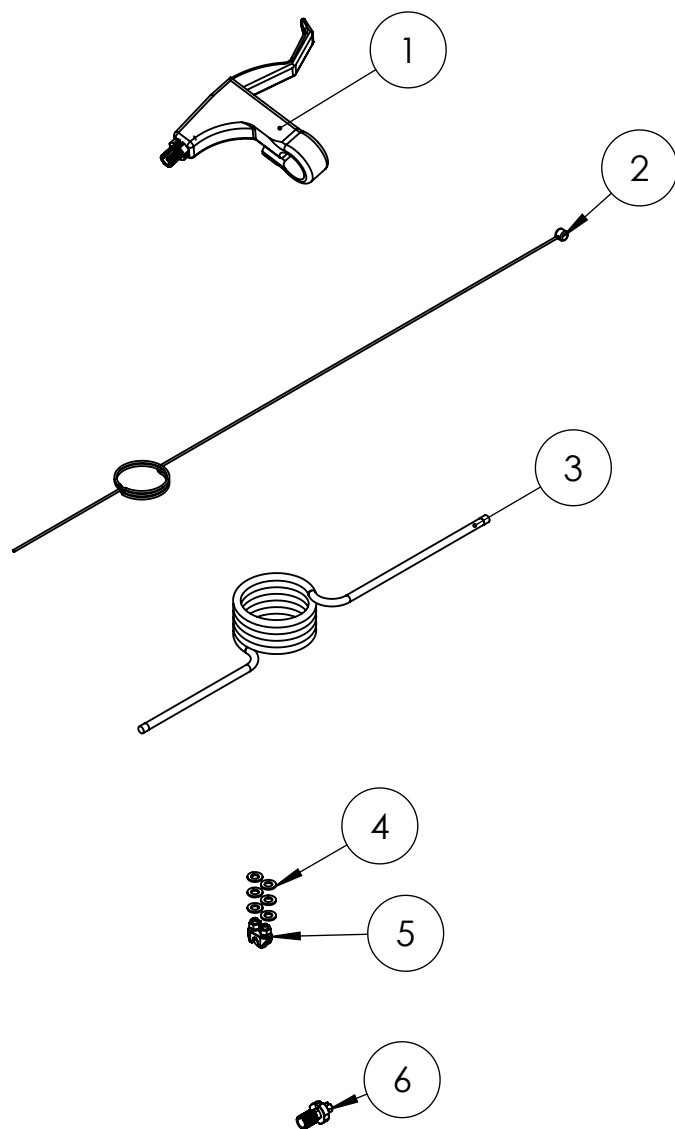

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	131	1	MANETE FREIO JKS (ADVENCE-VB) (S)RECLIN E BIGGA
2	5991	1	CABO DE ACO DE FREIO 1.400MM(2001/2002) (S)
3	188722	1	CONDUITE (S) SCOOTER 2001
4	261	6	ARRUELA LISA 5MM ZB(5,3X10X1)(S)
5	15307	2	CLIPS P/ CABO 1/8 DIV.
6	10129	1	REGULADOR P/CABOS UNIVERSAL DO FREIO (S/L)

APLICAÇÃO:	DES.: LUCAS VIEGAS	DATA:	
	FOLHA 18 DE 18	ESCALA: 1:5	
DESCRIÇÃO:			REV:
COMPONENTES DO FREIO SCOOTER 2001			A