


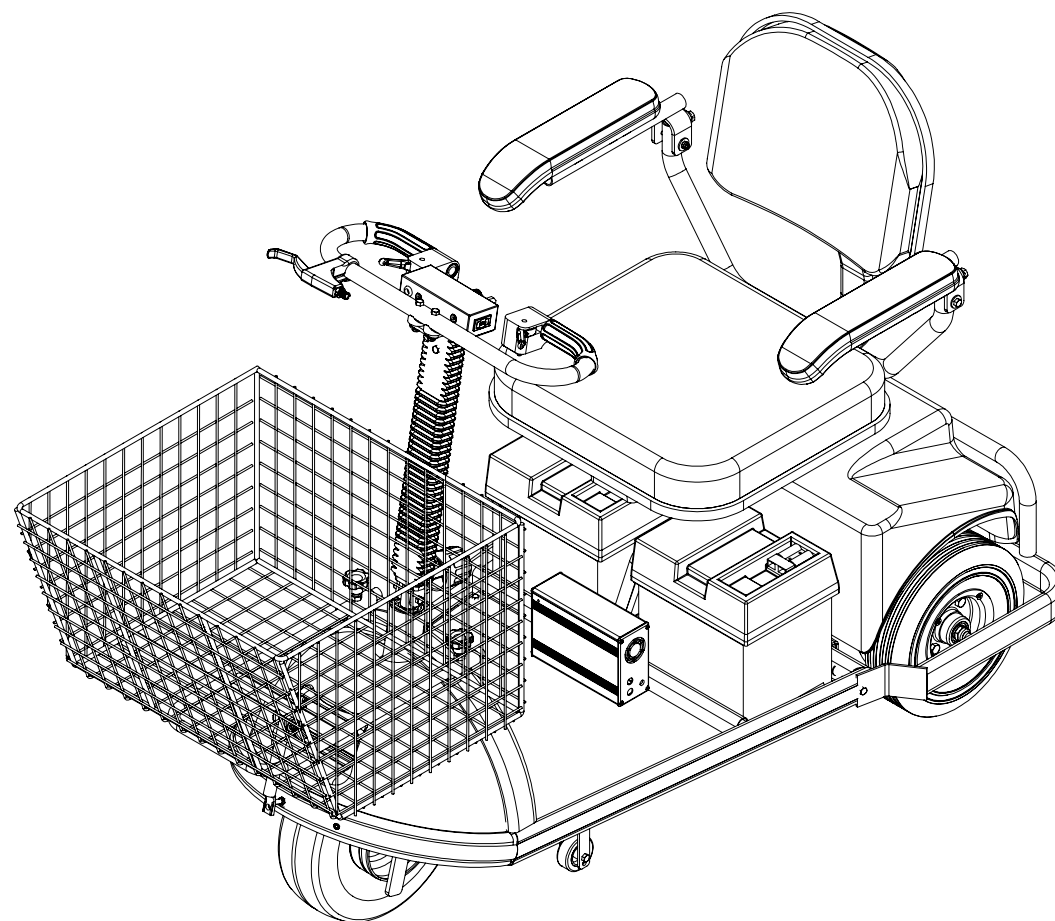

APLICAÇÃO:

DES.: vinicius

DATA:

FOLHA 1 DE 19

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

SCOOTER 2002

REV.:

C.01

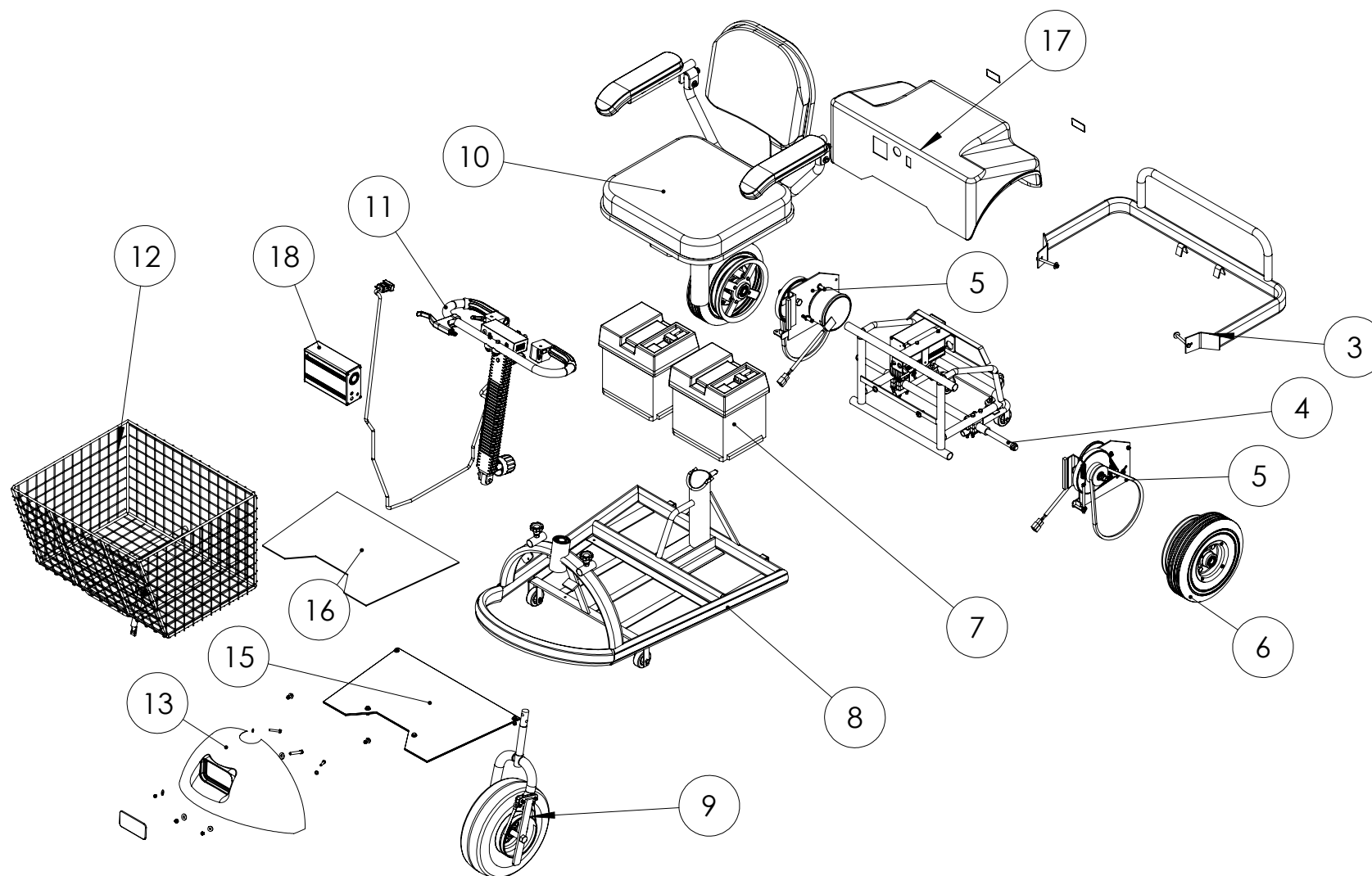

APLICAÇÃO:

DES.: vinicius

DATA:

FOLHA 2 DE 19

ESCALA: 1:17




DESCRIÇÃO:

SCOOTER 2002

REV.:

C.01

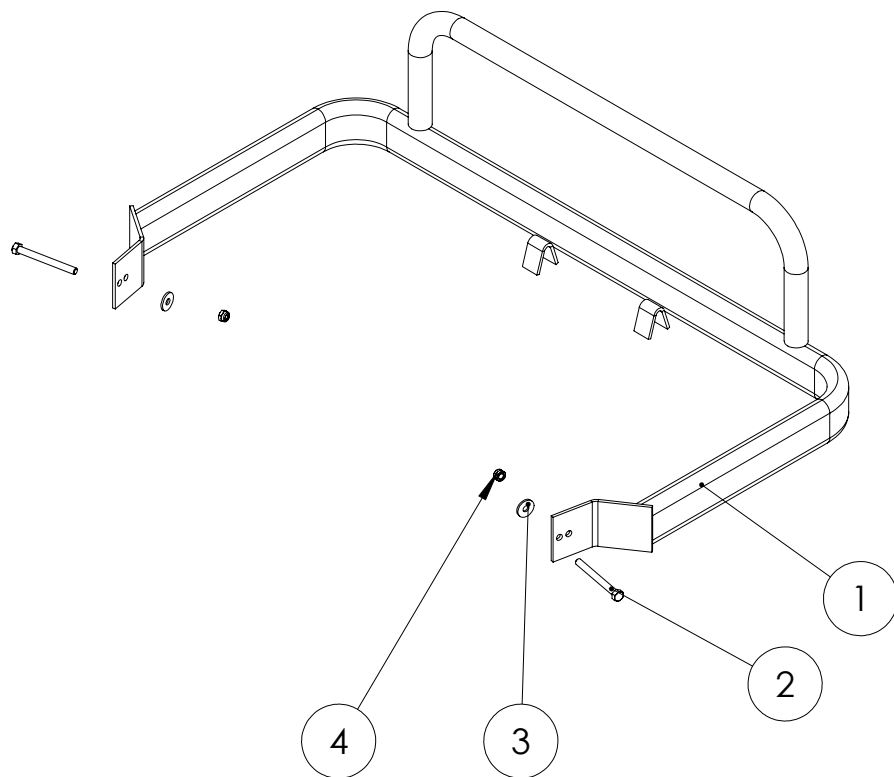

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	742	1	PARACHOQUE SCOOTER 2002
2	12407	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/2 RP ZB
3	10083	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
4	491	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: vinicius

DATA:

FOLHA 3 DE 19

ESCALA: 1:7




DESCRIÇÃO:

PARACHOQUE SCOOTER 2002

REV.:

A

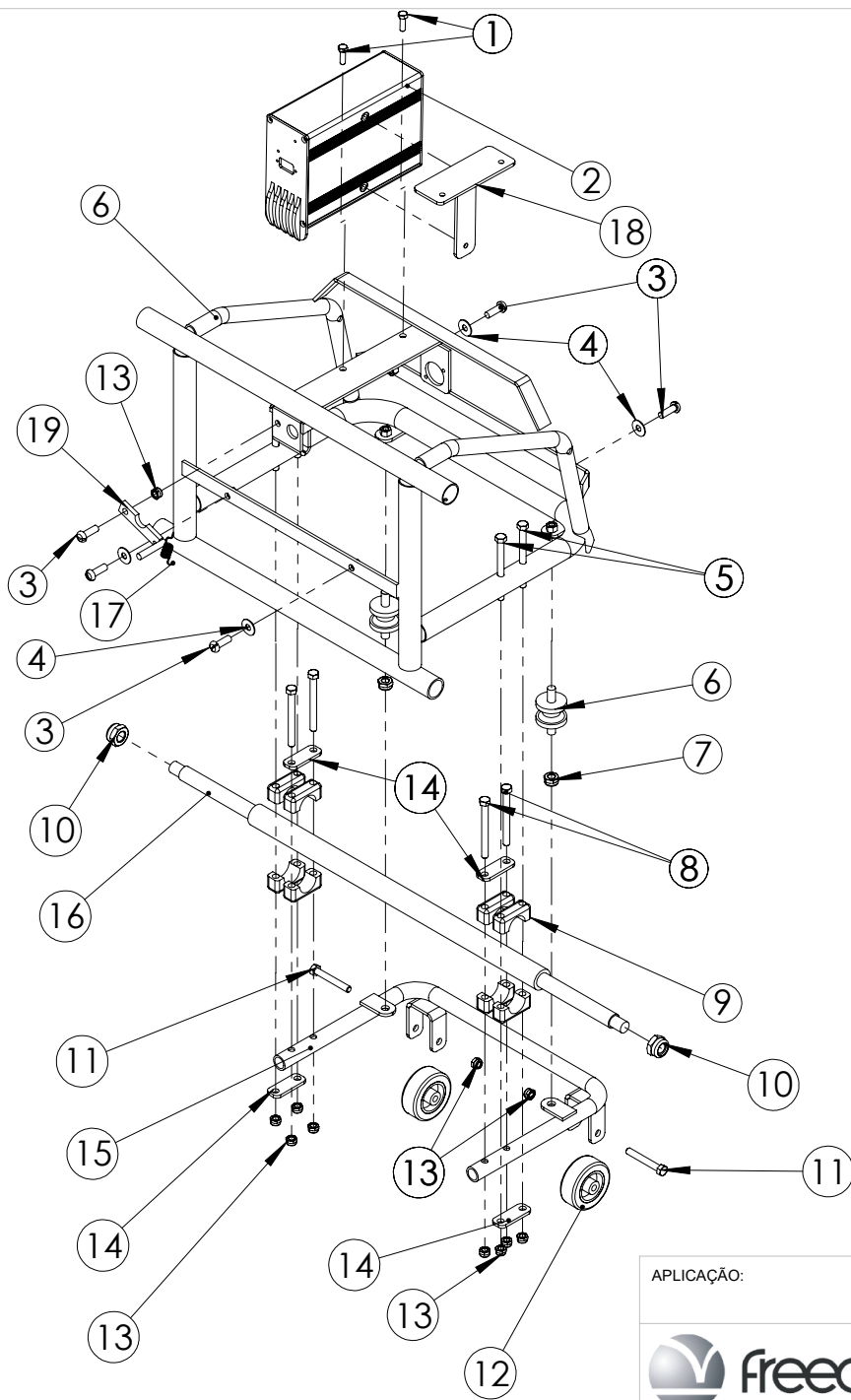

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	881	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
2	9886	1	DRIVE "2002 MICROPROCESSADO"
3	171	5	PA MAQ RED FS 1/4X3/4 RT ZB (S)
4	6087	4	ARRUELA LISA 1/4 ZB LUMINA(S)(6,4x17x1,2
5	10261	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.3/4 RP ZB
6	6991	2	COXIM MENOR ESCAPAMENTO 8MM (S/L)
7	791	4	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
8	12531	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2.1/2 RT ZB
9	10126	8	ABRACADEIRA P/ CAD ROD.(8,79GR) (S)
10	191	2	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
11	12405	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
12	8231	2	RODA R 210 BPF 2"(S)
13	491	11	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
14	8411	4	REFORCO BUCHA ART. PANT.
15	8185	1	ARCO RODA APOIO 2002
16	11800	1	EIXO TRASEIRO 2002
17	10395	1	MOLA TRACAO 1,0X9X14 BIKE/SCOOTER (S)
18	178106	1	SUPORTE COMANDO SCOOTER 2002
19	7280	1	TRAMELA TRATOR 2002

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

TRATOR SCOOTER 2002

DES.: vinicius

FOLHA 4 DE 19


DATA:

ESCALA: 1:7.2




REV.:

A.01

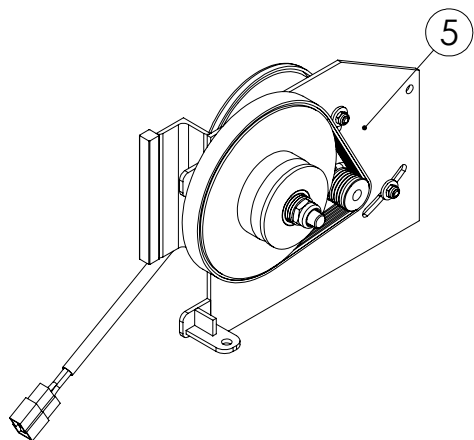

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	10251.2	MOTORIZACAO SCOOTER 2002 ESQUERDA COMPLETA
	8294	MOTORIZACAO SCOOTER 2002 DIREITA COMPLETA

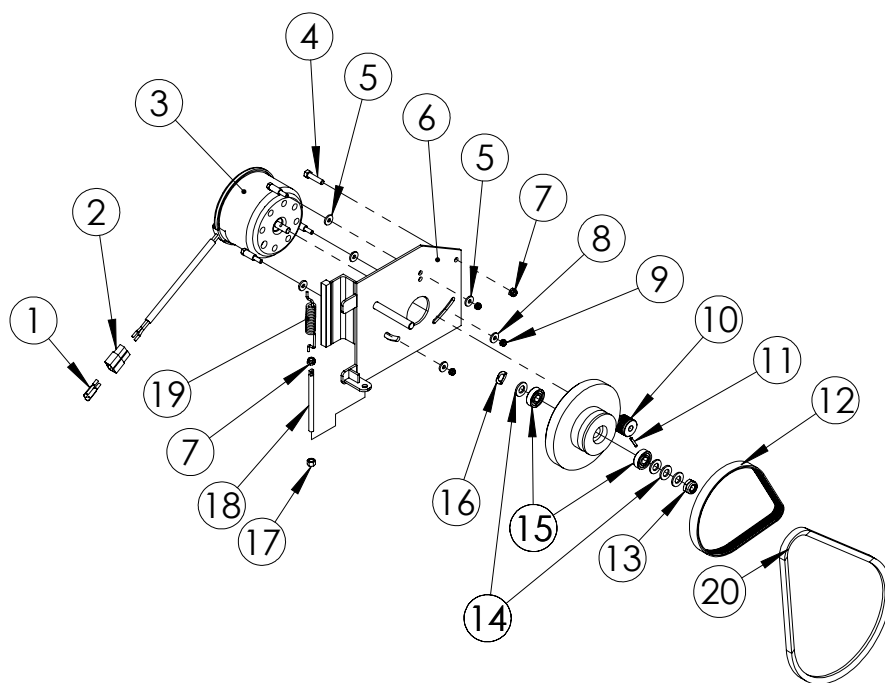

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	428.6	2	TERMINAL 880636 FAST 6,3MC(64182)FASTON MACHO
2	11033.7	1	ISOLADOR 180907-0 SOQUETE 2V P/FASTON MC(90155)
3	185201	1	MOTOR FREE 400/12 P/ SF 2002 C/ TERMINAIS E ISOLADOR
4	12523	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1 RT ZB
5	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
6	9185.5	1	PLACA DE MOTOR SCOOTER 2002 LE
	7275.3	1	PLACA DE MOTOR SCOOTER 2002 LD
7	491	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
8	393.0	6	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
9	691.2	3	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
10	10400	1	PINHAO MICRO V 24 MM (SF 2002)
11	23972	1	PINO ESPIRAL 3X20(S)
12	10072.2	1	CORREIA MICRO V 180J6 (S)
13	91.4	1	PO SEXT NY MA 10 MM CH 17 - 1.5 MM (S/L) 1.03.03.0
14	161.9	4	ARRUELA LISA 10MM ZB (S/L) (10,5X20X2)
15	1923	2	ROLAMENTO 6000 DDU 2RS NSK 1 LINHA (S)
16	17164	1	ARRUELA ONDULADA AOC 10.5 FOSFATIZADO
17	891.5	1	PO SEXT UNC 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
18	181349	1	PA ESTICADOR MOLA SCOOTER
19	531.2	1	MOLA SUSPENSAO/MOTORIZACAO 2,5X14X45X100 (S)
20	13812	1	CORREIA SHC MN 3VX290 (SPZ722)(S)

APLICAÇÃO:

JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 5 DE 19

ESCALA: 1:10




DESCRIÇÃO:

MOTORIZACAO SCOOTER 2002

REV.:


ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	10337.3	4	ARRUELA PRESSAO 8MM 2MM ZB
2	462.6	4	ROLAMENTO 6002 DDU NSK 1 LINHA (S)
3	6389.4	1	SEPARADOR INTERNO ARO SCOOTER
4	11111.2	4	ARRASTADOR POLIA RODA TRASEIRA 2002
5	11134.1	4	PO SEXT MA 8 MM CH 13 ZB - 1,25 MM (S/L)
6	2887.8	1	SEPARADOR EXTERNO POLIA 2002 PL/RD
7	8478.6	1	POLIA ALUMINIO 190 Z (RODA SCOOTER 2002)
8	14080.5	2	ANEL I 32 (S)
9	7342.3	1	SEPARADOR INTERNO POLIA SCOOTER 2002
10	681.5	4	PA SEXT MA 8.8 8X70MM RP ZB (S/L)
11	187203	1	ESPELHO TRAS. C/ CUBO SCOOTER 2002
12	17377	1	PNEU MACICO P350X4(SCOOTER)(S)
13	18713	4	PA MAQ CH PH 5X60MM 5.8 RT ZB
14	691.2	4	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
15	187229	3	CORREIA RODA MACICA SCOOTER 2002
16	612	6	GRAMPO 14 P/GRAMP.10,8X30MM
17	183482	1	ESPELHO RODA MAC. SCOOTER 2002

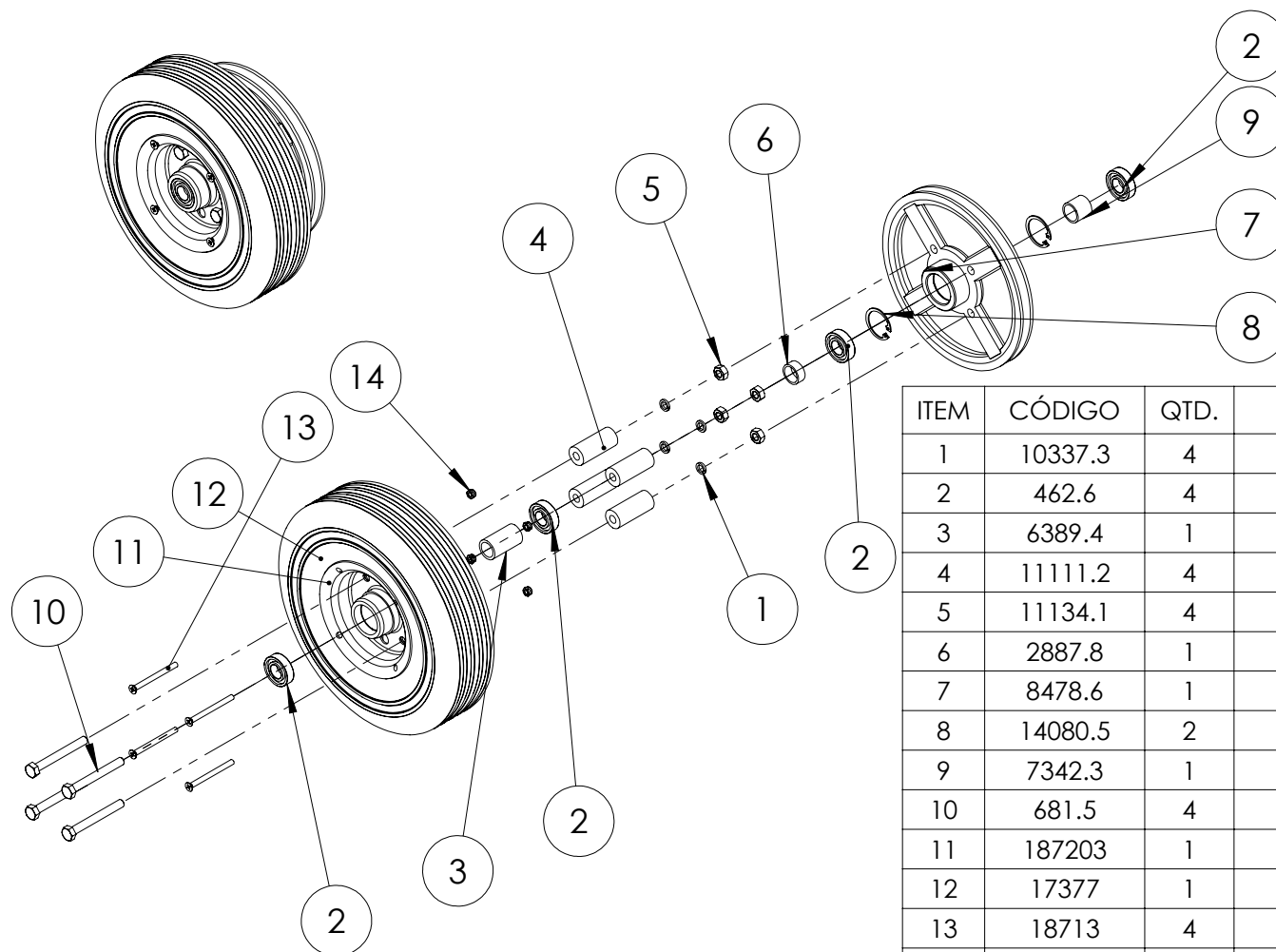


RODA MACICA TRASEIRA SCOOTER 2002

REV.:



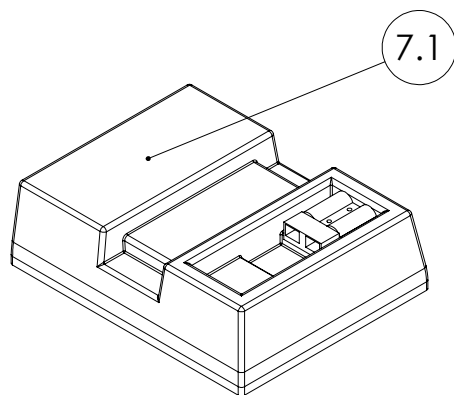

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7.1	19794	TAMPA BATERIA FREE 38A CONECTOR DIREITA
	19795	TAMPA BATERIA FREE 38A CONECTOR ESQUERDA

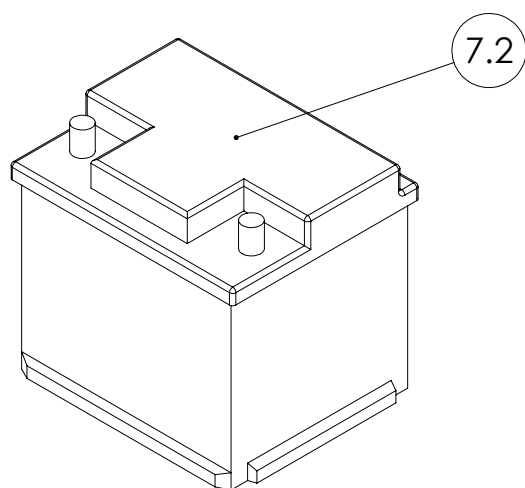

ITEM	QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7.2	2	18849	KIT FORÇA 12-38 12V 38AH P/CAD.RODA

APLICAÇÃO:

DES.: OTAZÚ

DATA: 21/06/2010

FOLHA 7 DE 19

ESCALA: 1:5




DESCRIÇÃO:

BATERIA 38Ah

REV.:

B

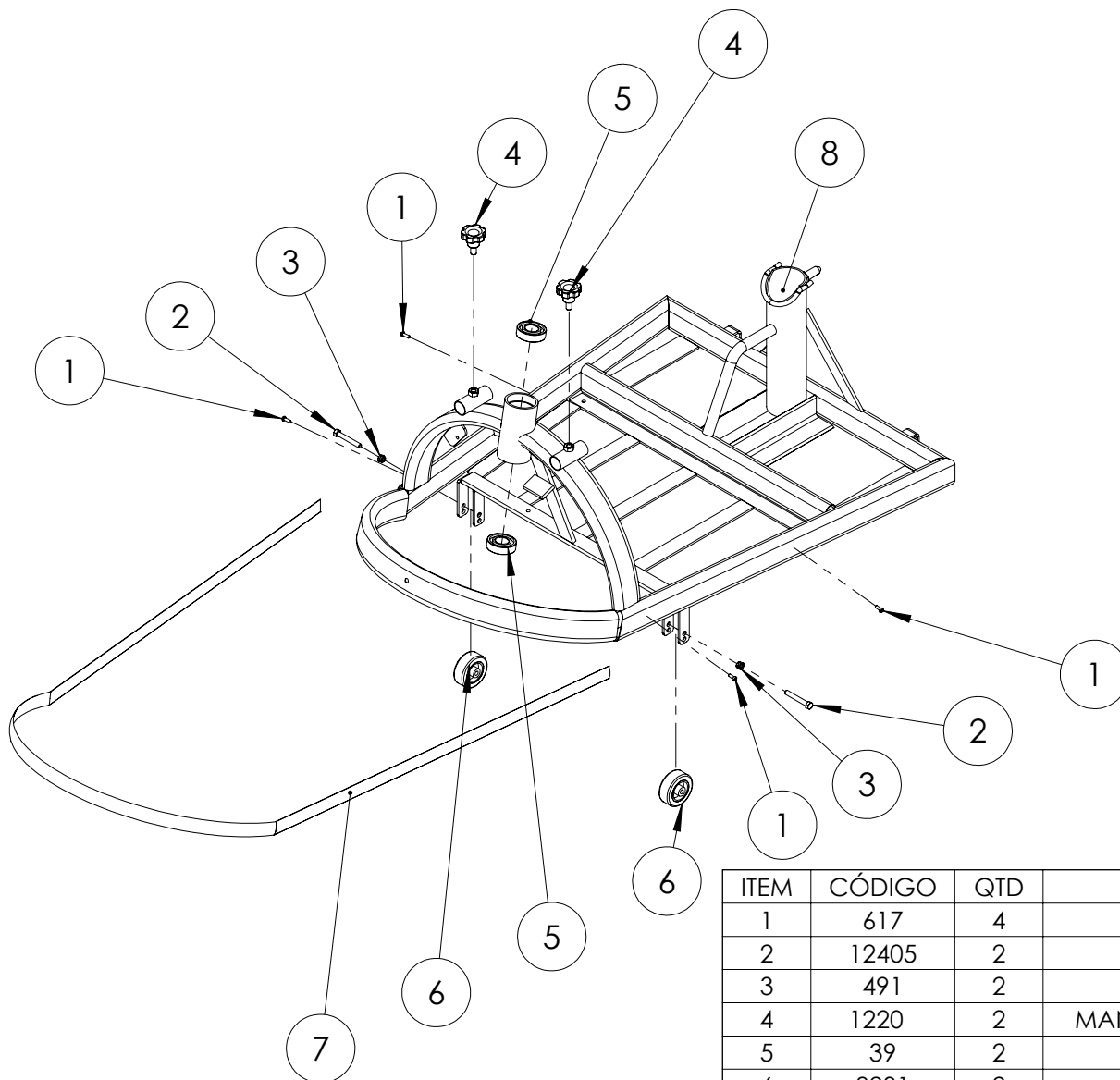

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	617	4	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
2	12405	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
3	491	2	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
4	1220	2	MANIPULO TERMOPLASTICO MACHO (MTM-3522-M8X25)(S/L)
5	39	2	ROLAMENTO 6004 2RS 1LINHA
6	8231	2	RODA R 210 BPF 2"(S)
7	187180	1	PERFIL PVC AUTO ADESIVO SCOOTER 2002
8	661	1	CHASSIS 2002

APLICAÇÃO:

DES.: vinicius

DATA:

FOLHA 8 DE 19

ESCALA: 1:50





DESCRIÇÃO:

CHASSIS SCOOTER 2002

REV.:

A.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9	132055	MONTAGEM GARFO RODA MACIÇA SCOOTER 2002

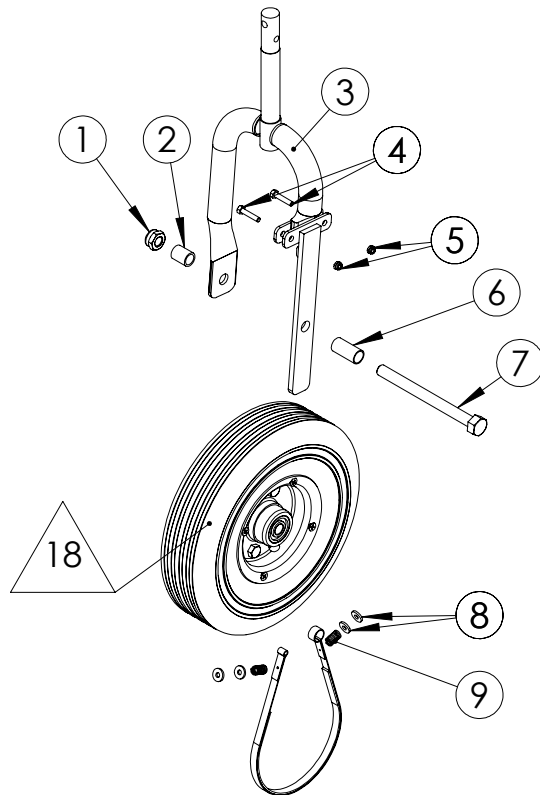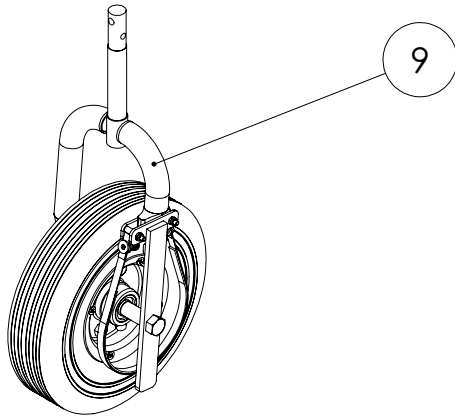

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	191.0	1	PO SEXT NY MA 12 MM CH 19 ZB - 1,75 MM (S) 1.03.03
2	14605.6	1	SEPARADOR EXT MENOR RODA MACICA SCOOTER 2002-DIANT
3	1661.6	1	GARFO 2002
4	10107.9	2	PA SEXT MA 8.8 5X25MM RT ZB (S)
5	691.2	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
6	14601.3	1	SEPARADOR EXT MAIOR RODA MACICA SCOOTER 2002-DIANT
7	11629.7	1	PA SEXT MA 8.8 12X140MM RP ZB (S)
8	393.0	4	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
9	258.5	2	MOLA AR.1,0X9,5X30 (FV 7349)ENCOSTO RECLIN (S)
18	PG. 18	1	VER PÁGINA 18

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA:

FOLHA 9 DE 19

ESCALA: 1:8



DESCRIÇÃO:

GARFO DIANTEIRO

REV.:

A.01

ITEM			CÓDIGO	DESCRÇÃO
10			4	BANCO SCOOTER

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRÇÃO
1	108962	2	ALMOFADA BRACO INJETADO COMFORT 7,5(S)
2	2675.1	1	TUBO BRACO 2001/2002 LD
3	11134.1	2	PO SEXT MA 8 MM CH 13 ZB - 1,25 MM (S/L)
4	12534.2	2	PA SEXT MA 8.8 8X25MM RT ZB (S/L)
5	12635.7	1	ENCOSTO SCOOTER 2001/2002
6	189604	1	SANFONA P/CAD.SECRET PRETA SEM REGULAGEM (S)
7	10720.4	1	KIT FIXACAO DO ENCOSTO SCOOTER
8	3157.7	1	TUBO BRACO 2001/2002 LE
9	561.4	4	ARRUELA PRESSAO 1/4" ZB (S/L) (6,5X11,5X2)
10	2844.4	2	TAMPAO SUPORTE BANCO BRACO 2001/2002
11	11038.8	1	L DO SUPORTE DO ENCOSTO 1004/1003 (S)
12	617.3	3	PA AAT CP PH 3,9X13MM ZP
13	12406.0	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X2 RT ZB
14	491.0	4	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
15	10337.3	2	ARRUELA PRESSAO 8MM 2MM ZB
16	5573.5	1	PA SEXT MA 8.8 8X30MM RT ZB (S/L)
17	775.7	1	SANFONA MAIOR
18	9931.7	1	ABRACADEIRA BANCO 2001/2002
19	12524.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X3 1/2 RP
20	781.1	1	PA SEXT MA 8.8 8X90MM RP ZB (S/L)
21	4191.2	1	PISTAO A GAS
22	2085.0	3	ARRUELA LISA 1/8" ZB (S/L) (1/8X10X1)
23	10507.4	2	ARRUELA LISA 8MM ZB (S/L) (8,5X16X1,5)
24	1775.2	1	SANFONA MENOR
25	12409.5	4	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
26	6087.9	4	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
27	180719	1	PLATAFORMA ERGO FLEX COM SUP PARA SANFONA MAIOR [1807]
28	791.9	1	PO SEXT NY BX CL8 8CH13 ZB (S/L) 1.03.03.03
29	19459.0	1	ASSENTO SCOOTER 2001/2002 (S)
30	8931.1	1	SUPORTE FIXACAO BANCO/BRACO 2001/2002
31	22935	4	PA AAT SEXT FL FENDA 4,8X19MM ZB (S/L)
32	10083.8	4	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)

APLICAO:

DESCRÇÃO:

CONJUNTO BANCO SCOOTER 2001/2002


DES.: everton

FOLHA 10 DE 19

DATA:

ESCALA: 1:16

REV.: D.01

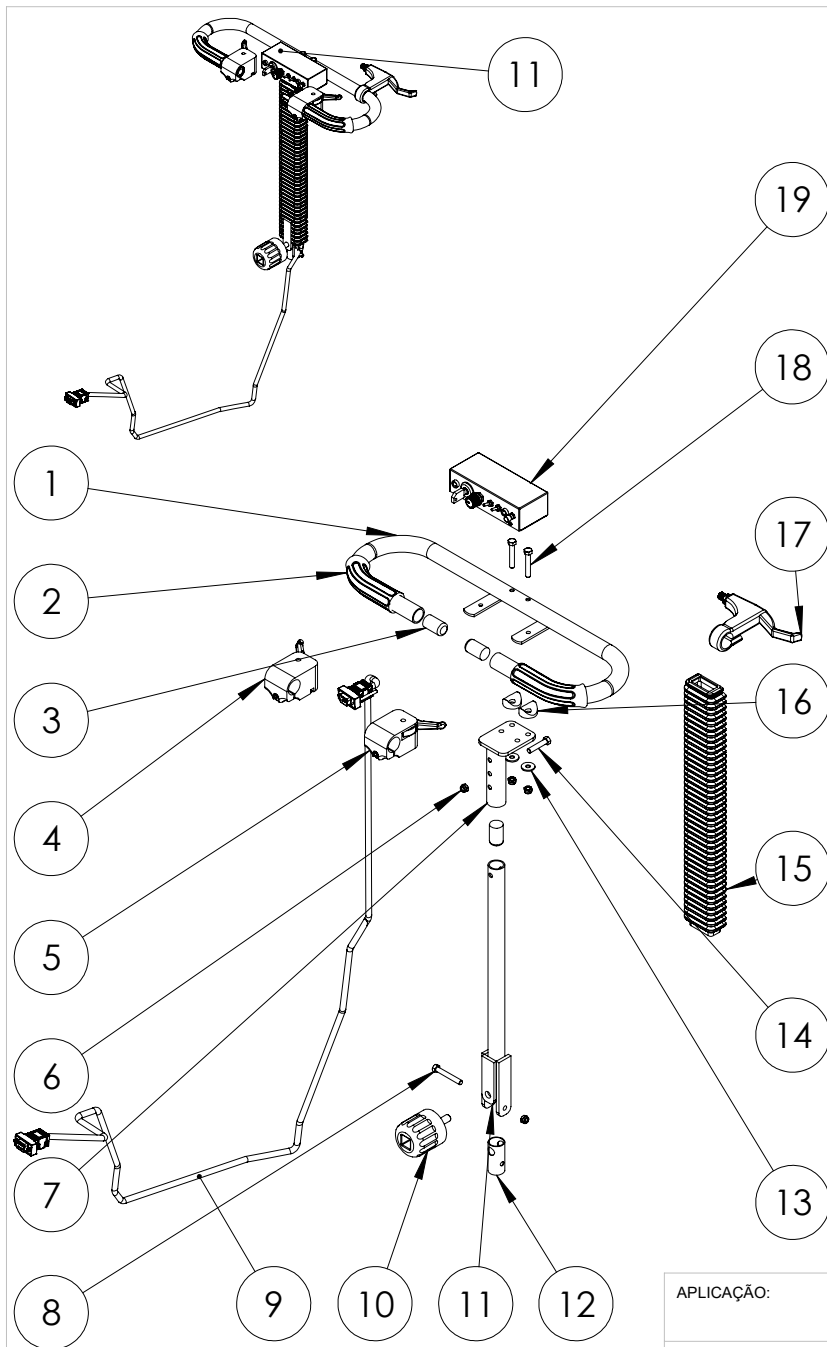

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
11	121091	MONTAGEM GUIDOM SCOOTER 2002

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	3931.4	1	GUIDOM 2001/2002
2	231.3	2	MANOPLA COMBATE PRETA (S)
3	394.8	3	BUCHA SEM CABECA 30MM TECNIL 20MM
4	5387	1	GATILHO SCOOTER 2001/2002/TORQUE LD ESQ-HALL
5	5386	1	GATILHO DE SCOOTER 2001/2002/TORQUE LD DR-HALL
6	491.0	4	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
7	19460.3	1	SUORTE UNIAO DO AVANCO AO GUIDOM 2001/2002
8	12405.2	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB
9	1649	1	CHICOTE 2002 MICROPROCESSADO
10	11322.0	1	MANIPULO 3/8 (SEM PORCA) (S)
11	285.2	1	AVANCO DO GUIDOM 2002
12	12065.0	1	TUBO INTERNO FIXACAO GARFO
13	10083.8	2	ARRUELA LISA 1/4" ZB (398PC=1KG)(S/L) (6,45X18X1,8)
14	12409.5	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB
15	11132.5	1	SANFONA P/CAD.SECRET PRETA SEM REGULAGEM (S)
16	10017.0	2	BOCA DE LOBO 1" (2,34GR) (S)
17	131.7	1	MANETE FREIO JKS (ADVENCE-VB) (S)RECLIN E BIGGA
18	12426.5	2	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/2 ZB RT
19	4597	1	CAIXA CONTROLE SCOOTER 2002 MICROPROCESSADO

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

GUIDOM SCOOTER 2002

DES.: vinicius

FOLHA 11 DE 19


DATA:

ESCALA: 1:10




REV.:

A.01

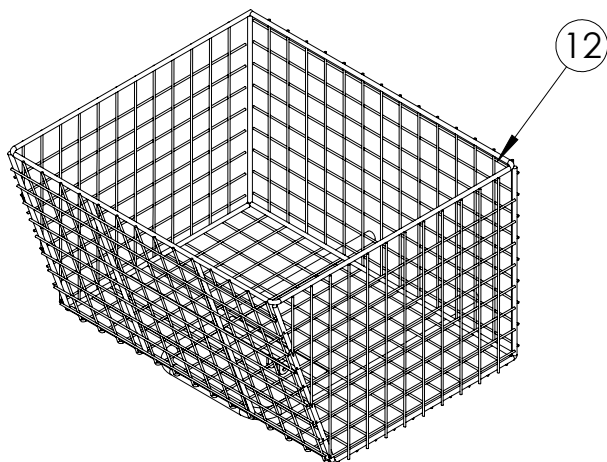

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
12	1827	CESTO DIANTEIRO 2001/2002
	2909	CESTO 2002 HIPER

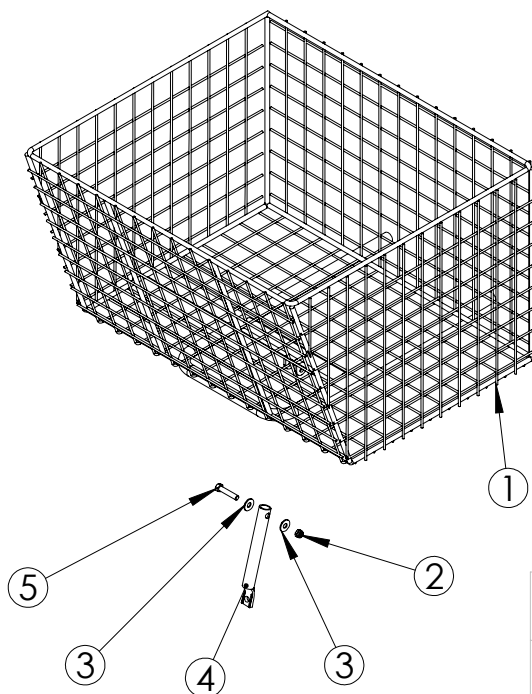

ITEM	QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	1	2909	CESTO 2002 HIPER
2	1	291	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	2	6087	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
4	1	147983	TUBO FIX CESTO DIANT 2002
5	1	12409	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.1/4 RT ZB

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CESTO

DES.: garcia


DATA:

FOLHA 12 DE 19


ESCALA: 1:10



REV.:

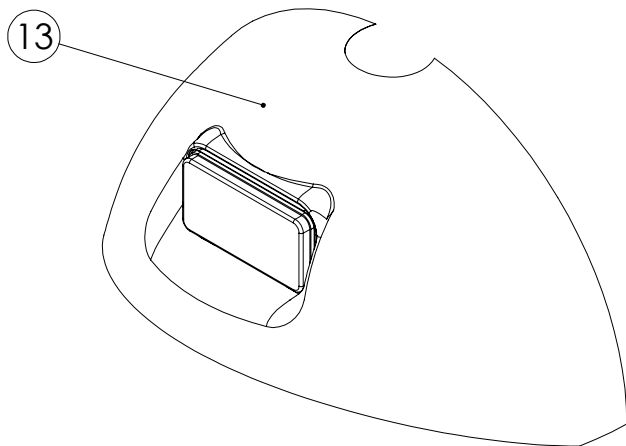

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
13	188027	CONJUNTO CARENAGEM DIANT. 2002 AMARELA
	188030	CONJUNTO CARENAGEM DIANT. 2002 PRETA
	188031	CONJUNTO CARENAGEM DIANT. 2002 AZUL
	188032	CONJUNTO CARENAGEM DIANT. 2002 VERMELHA
	188033	CONJUNTO CARENAGEM DIANT. 2002 VERDE

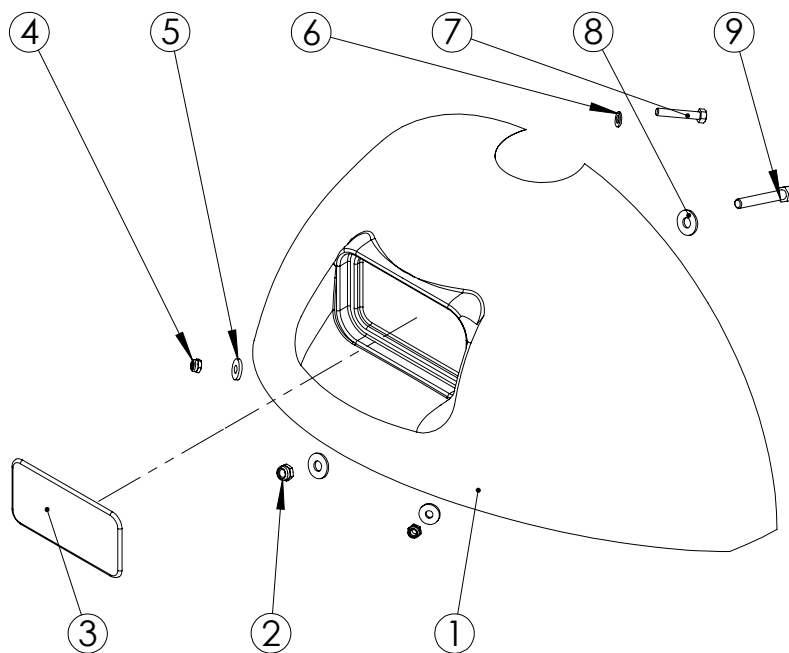

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	10424	1	CARENAGEM 2002 VERDE DIANTEIRA (S)
	11273	1	CARENAGEM 2002 PRETA DIANTEIRA (S)
	10423	1	CARENAGEM 2002 AMARELA DIANTEIRA (S)
	10422	1	CARENAGEM 2002 AZUL DIANTEIRA (S)
	10421	1	CARENAGEM 2002 VERMELHA DIANTEIRA (S)
2	491	1	PO SEXT NY UNC G2 1/4" CH 7/16 ZB - 20 F.P.P (S/L)
3	188723	1	REFLETOR 52X102mm BRANCO GRAU DIAMANTE
4	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03
5	393	2	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
6	261	2	ARRUELA LISA 5MM ZB (S) (5,3X10X1)
7	481	2	PA SEXT MA 8.8 5X30MM RT ZB (S)
8	6087	1	ARRUELA LISA 1/4X18X1,2 ZB LUMINA (S) (7X17X1,7)
9	12405	1	PA SEXT UNC G.5 1/4X1.3/4 RT ZB

APLICAÇÃO:



DESCRIÇÃO:

CARENAGEM DIANTEIRA 2002

DES.: garcia


DATA:

FOLHA 13 DE 19

ESCALA: 1:4



REV.:

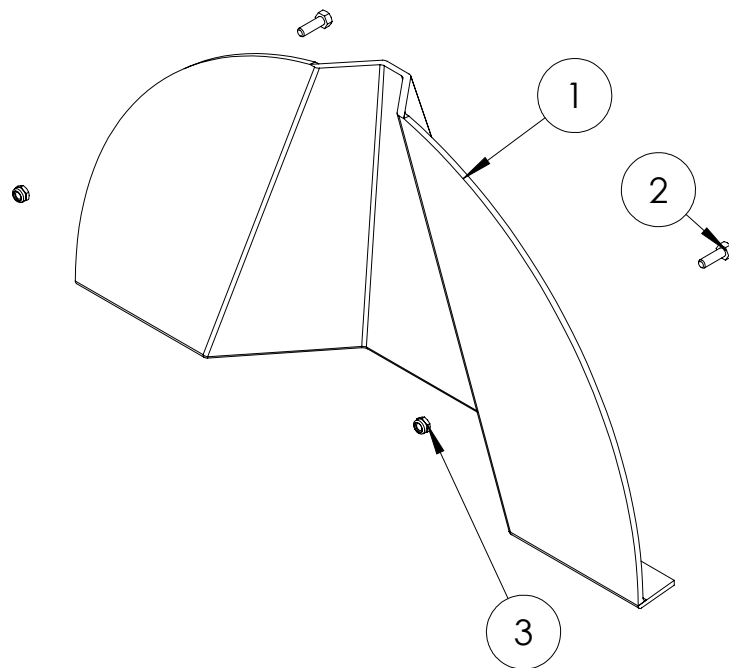

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	1136	1	DESCANSO DOS PES SCOOTER 2002 (S)
2	881	2	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
3	691	2	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 14 DE 19

ESCALA: 1:4




REV.:



DESCRIÇÃO:

DESCANSO DOS PÉS 2002

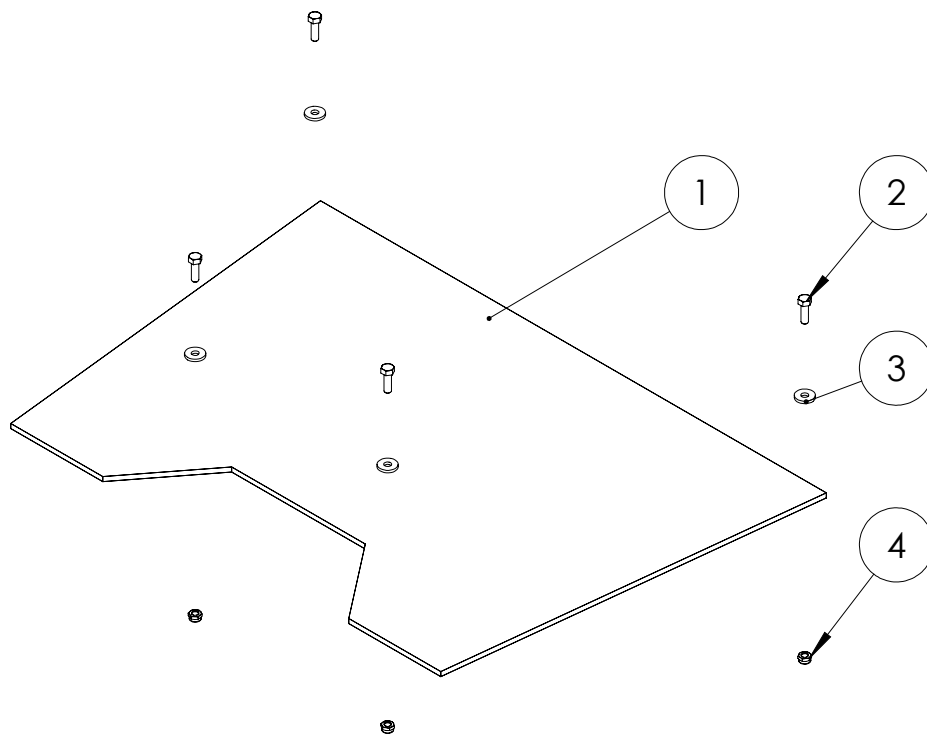

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	10419	1	ASSOALHO 2002 (S)
2	881	4	PA SEXT MA 8.8 5X16MM RT ZB (S)
3	393	4	ARRUELA LISA 3/16" ZB (570PC-KG)(S) (5,3X14X2)
4	691	4	PO SEXT NY BX CL8 5CH8 ZB (S/L) 1.03.03.03

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 15 DE 19

ESCALA: 1:5




REV.:



DESCRIÇÃO:

ASSOALHO 2002

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
16	187223	BORRACHA ASSOALHO 2002

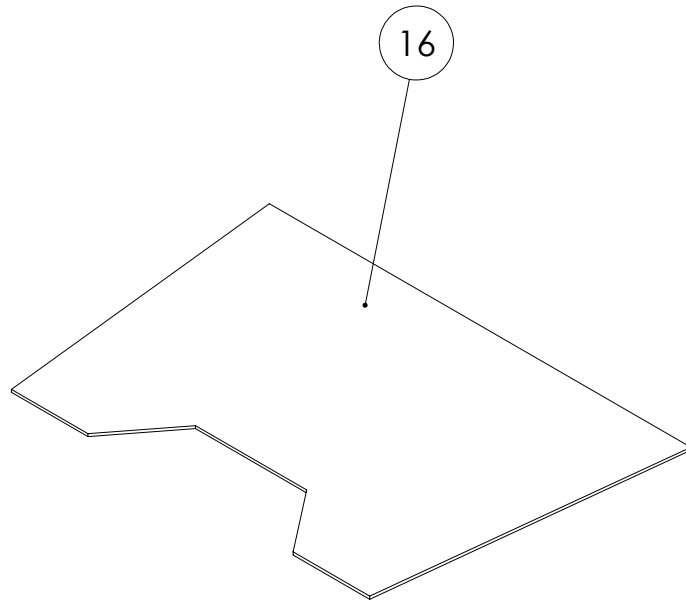

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 16 DE 19


ESCALA: 1:6



DESCRIÇÃO:

BORRACHA ASSOALHO 2002

REV.:

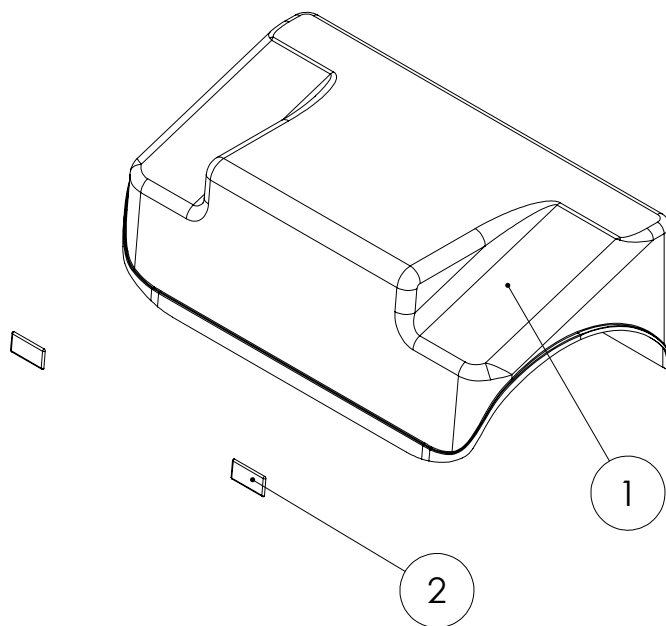

ITEM	CÓDIGO	QTD	DESCRIÇÃO
1	10430	1	CARENAGEM 2002 VERDE TRASEIRA (S)
	10962	1	CARENAGEM 2002 PRETA TRASEIRA (S)
	10431	1	CARENAGEM 2002 AMARELA TRASEIRA (S)
	10429	1	CARENAGEM 2002 AZUL TRASEIRA (S)
	10428	1	CARENAGEM 2002 VERMELHA TRASEIRA (S)
2	139977	2	REFLETOR 25X49 MM AMARELO GRAU DIAMANTE

APLICAÇÃO:

DES.: garcia

DATA:

FOLHA 17 DE 19

ESCALA: 1:8





DESCRIÇÃO:

CARENAGEM TRASEIRA 2002

REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	14608	RODA ARO COMPLETA DIANTEIRA MACICA 10"X2" 2002

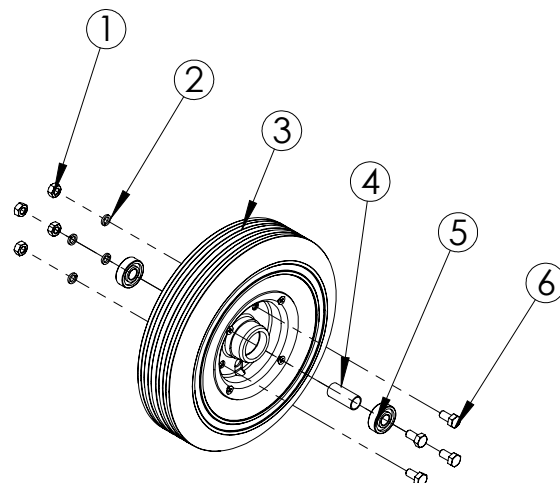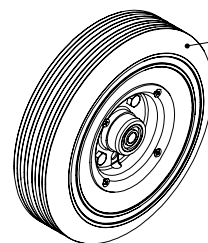

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO
1	11134.1	4	PO SEXT MA 8 MM CH 13 ZB - 1,25 MM (S/L)
2	10337.3	4	ARRUELA PRESSAO 8MM 2MM ZB
3	187234	1	MONT. RODA ARO COMPLETA DIANTEIRA MACICA 10"X2" 2002
4	11113.9	1	TUBETE SCOOTER 2002
5	351.4	2	ROLAMENTO 6201 ZZ C3 2LINHA (S/L)
6	981.4	4	PA SEXT MA 8.8 8X16MM RT ZB (S/L)

APLICAÇÃO:

DES.: JONATHAN M.

DATA: 26/07/2019

FOLHA 18 DE 19

ESCALA: 1:8




DESCRIÇÃO:

RODA DIANTEIRA

REV.:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
18	19972	CARREGADOR CADEIRA 24V/5.0A

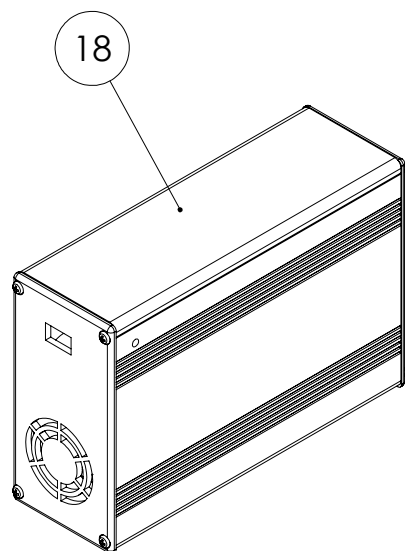

APLICAÇÃO:

DES.: Jacondino

DATA:

FOLHA 19 DE 19

ESCALA: 1:8



DESCRIÇÃO:

CARREGADOR

REV.:

-.01