


# COMO FAZER A MONTAGEM DAS BATERIAS DE 18 Ah

## SEPARE OS ITENS PARA A MONTAGEM



**DUAS BATERIAS  
DE 18Ah**

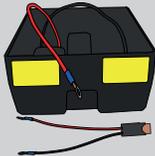

**TAMPA DAS BATERIAS  
E CHICOTE PORTA-FUSÍVEL**




**BOLSA DAS BATERIAS**

## COLOQUE AS DUAS BATERIAS DENTRO DA BOLSA



OS POLOS **VERMELHOS  
E PRETOS** DAS BATERIAS  
DEVEM ESTAR VOLTADOS  
PARA O LADO DE FORA

## CONECTE OS 4 TERMINAIS CONFORME A ILUSTRAÇÃO

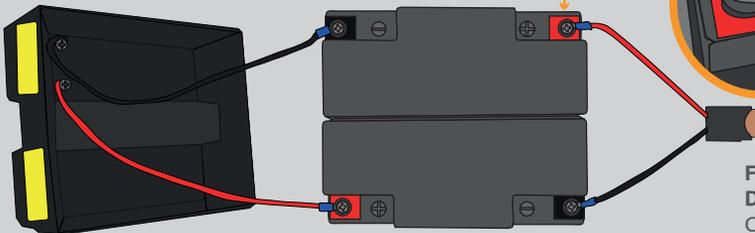

USE UMA CHAVE  
PHILIPS PARA  
APERTAR OS  
PARAFUSOS

**FIQUE ATENTO PARA A COR  
DOS FIOS. A COR DO FIO  
CORRESPONDE AO BORNER  
DAS BATERIAS.**

## ENCAIXE A TAMPA NAS BATERIAS



ENCAIXE A TAMPA NAS DUAS  
BATERIAS E AJUSTE A ALÇA DA  
BOLSA.

ENCAIXE AS BATERIAS NO  
SUPORTE DA CADEIRA,  
CONECTE AO DRIVE E FIXE  
USANDO O CINTO.  
**PRONTO! SUA CADEIRA ESTÁ  
PRONTA PARA USO!**

